



<分解・再組立手順 * 分解手順は ↓ で、再組立手順は ↑ で示しています>

1. 酸素リザーババッグを外します。

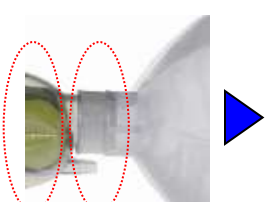


部を両手で持ち軽くひねります。

2. 患者バルブを外します。

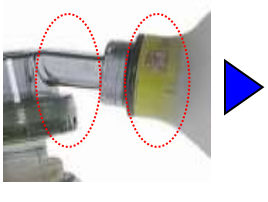


部を両手で持ち軽くひねります。

3. 患者バルブからマスクを外します。




患者バルブとマスクをそれぞれ持ち軽く引っ張ります。

4. 患者バルブを分解します。




部分を時計と逆方向に回して外し、リップバルブとディスクメンブレンを外します。

5. マスクを分解します。




カバー部とマスク部をそれぞれ持ち、軽く引っ張ります。


10. 酸素リザーババッグを取り受けます。完成。




9. 患者バルブを取り付けます。




8. 患者バルブとマスクを取り付けます。




7. 患者バルブを組立ます。

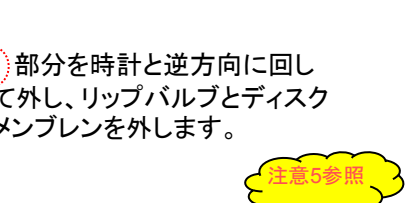


6. マスクを取り付けます。



1. パーツを確認します。




6. リザーババルブを外します。




部を時計と反対方向へ回します。

7. リザーババルブを分解します。

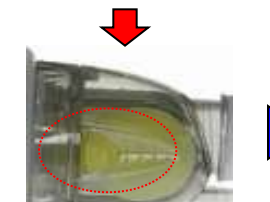


両側の部を親指と他の指で押し、圧力をかけて外します。

8. フラップバルブを外します。

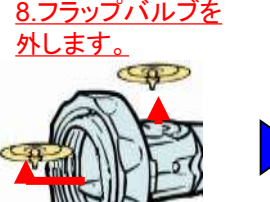


指先でフラップバルブをめくり、引き抜きます。

9. インテークバルブを外します。




換気バッグを軽くつぶし、インテークバルブを横にしてつまみ出します。
インテークメンブレンを指でめくり外します。


10. 完了




5. リザーババルブを取り付けます。




4. リザーババルブを取り付けます。




3. フラップバルブを取り付けます。



2. インテークバルブを取り付けます。

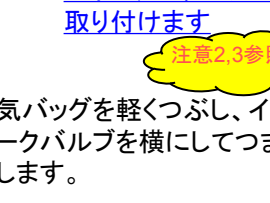

1. パーツを確認します。



<分解・再組立時の注意事項>

【注意】各パーツが必ず写真のようにしっかりとハマるようにしてください。

<注意1. リザーババルブ>



酸素ニップルが水平になるように持ち、フラップバルブを図のように差し込みます。キャップをはめます。

Point フラップバルブがしっかりとハマるよう指で軽く引っ張ります。



ポッチが穴の下に来るようにはめて下さい。

○ 適切な状態 × 不適切な状態



<注意2. インテークバルブ>



図のようにインテークメンブレンを取付けます。

⚠ インテークメンブレンとディスクメンブレンは大きさが違います。ご注意ください。

ディスクメンブレン インテークメンブレン

○ 適切な状態 × 不適切な状態



<注意3. インテークバルブの取り付け>



図のように換気バッグの中に入れ突起を縁に這わせてはめます。

Point



換気バッグの上から押し上げるようにするとうまくはまります。

<注意4. リザーババルブの取り付け>



インテークバルブの溝にあわせてリザーババルブを取付けます。

<注意5. 患者バルブ>



図のようにディスクメンブレンを取付けます。

Point



指でディスクメンブレンを軽く引っ張りながら装着します。

図のようにリップバルブを取付けます。キャップを装着します。

○ 適切な状態 × 不適切な状態



○ 適切な状態 × 不適切な状態



⚠ リップバルブは必ず1枚だけ装着してください。

<注意6. マスク>



マスクにカバーを取付けます。

Point



両手で押し込むようにはめます。

<7. 全てのパーツを組み立てます。>

