



# レサシアンwithQCPR Bluetoothの登録 方法について

## ご登録いただく前に

- 本資料はWindows7をベースに作成しております。
- Windows標準のBluetoothドライバをお使いください。  
サードパーティ製のドライバをお使いの場合は、SimPadの接続がうまくいかない場合もございます。その際はアンインストールの後、Windows標準ドライバをインストールしてお試してください。


参考URL エレコム製USB Bluetoothアダプタの場合

[http://qa.elecom.co.jp/faq\\_detail.html?id=4336&category=&page=1](http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4336&category=&page=1)


1. Bluetoothのアイコンを右クリックしデバイスの追加をクリック




2. マネキンのBluetoothを認識すると下記のように表示されるので右クリックして「デバイスの追加」を選択

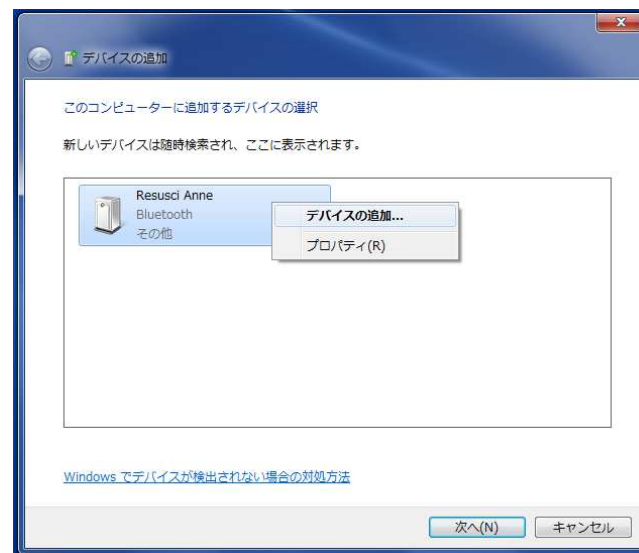

### 3. デバイスのペアリングコードの入力をクリック

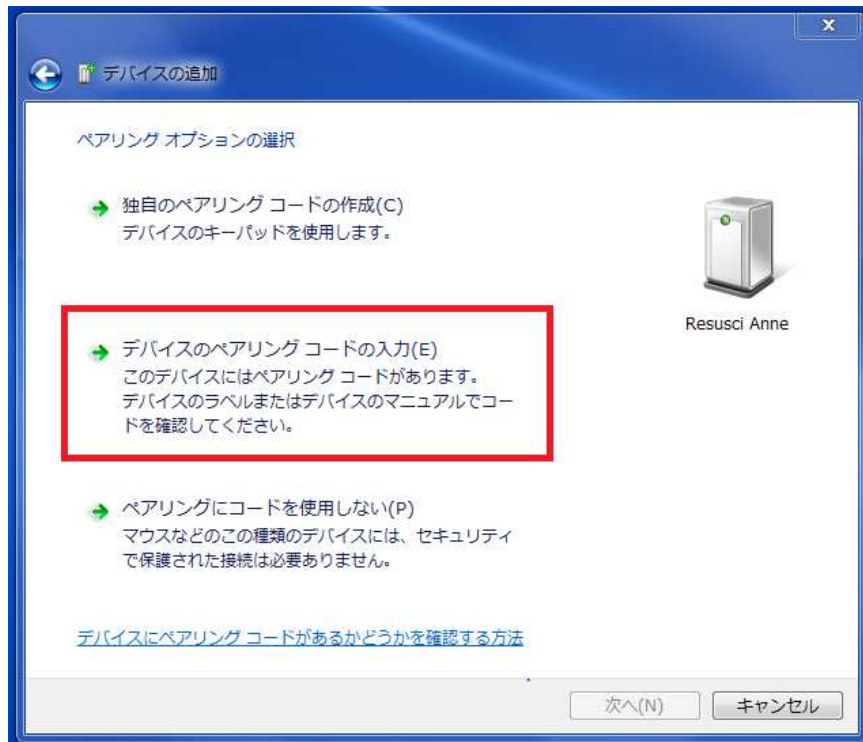

### 4. ペアリングコードに「1234」と入力

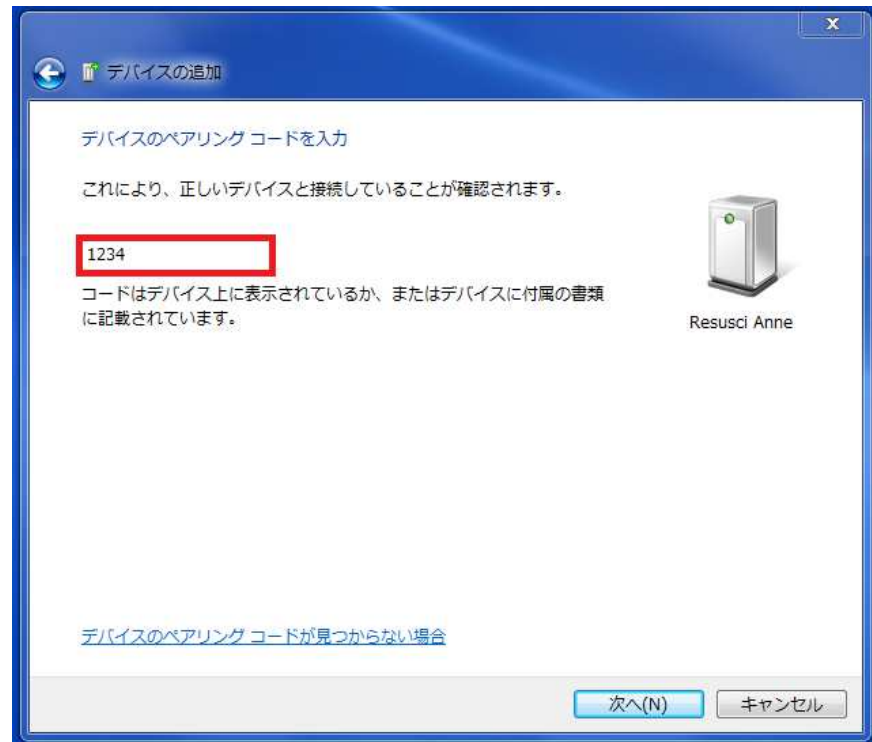

5. 登録が完了すると下記コメントが表示されます。

