

新ソフトウェア ELO (Ver3.0.2) キャリブレーション方法

お使い頂いている OS が Windows 7 の場合、今までご使用頂いていた ELO のキャリブレーションソフトウェアが正しく動作しない、USB ポート 3.0 (SS-USB) ポートに接続すると PC がブルーバックになるという現象が発生する可能性があることから ELO のソフトウェアを Ver3.0.2 へアップグレードする事になりました。

それに伴い、キャリブレーション方法が従来の手順から変更となりますので以下の手順に従いタッチモニターのキャリブレーションを実施して下さい。


手順① ディスクトップ上の




アイコンをダブルクリックします。




手順② 「Elo タッチパネルの設定」 ウィンドウが開きますので、「Elo タッチモニターの位置補正」をクリックします。

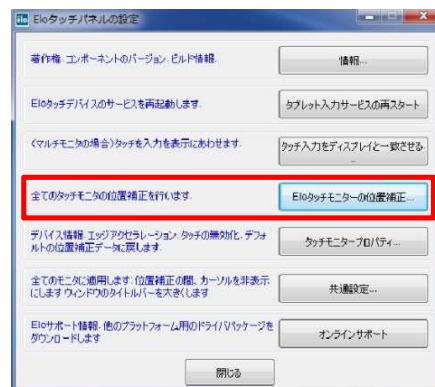


手順③「EloConfig-Calibration」ウィンドウが立ち上がりますので
「Map touchscreen to display monitor」をクリックします。

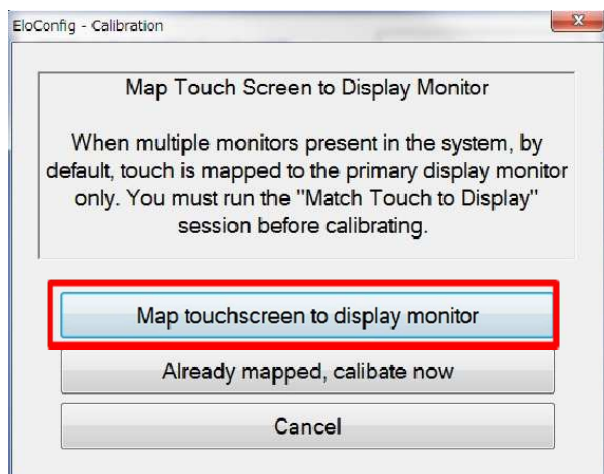


手順④PCのディスプレイが以下のようにになりますので
キーボードの「Enter ボタン」を一度押します。

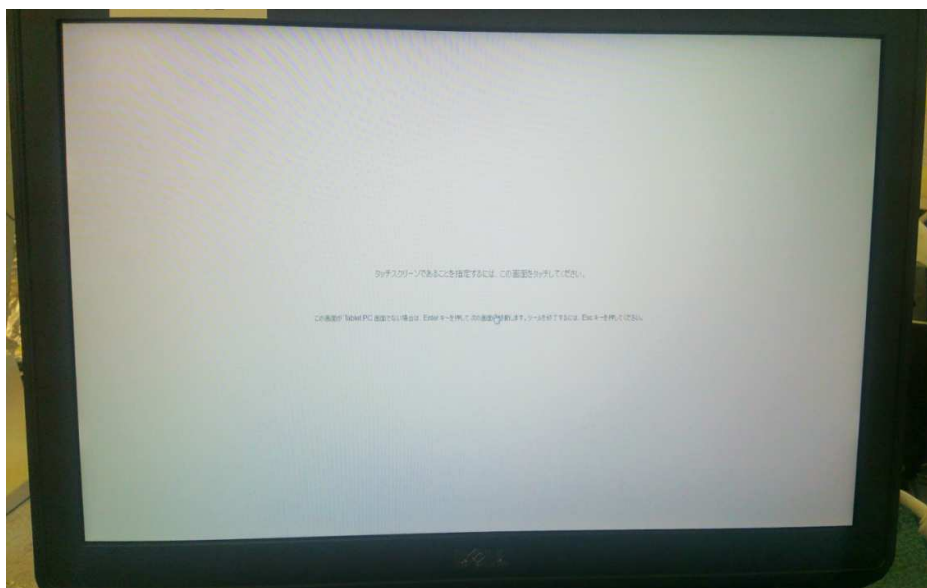

手順⑤タッチモニター上に以下の画面が移動しますので、
移動が確認できたら、タッチモニターを2回指でタッチします。
(タッチモニターをPCに認識させる作業となります。)

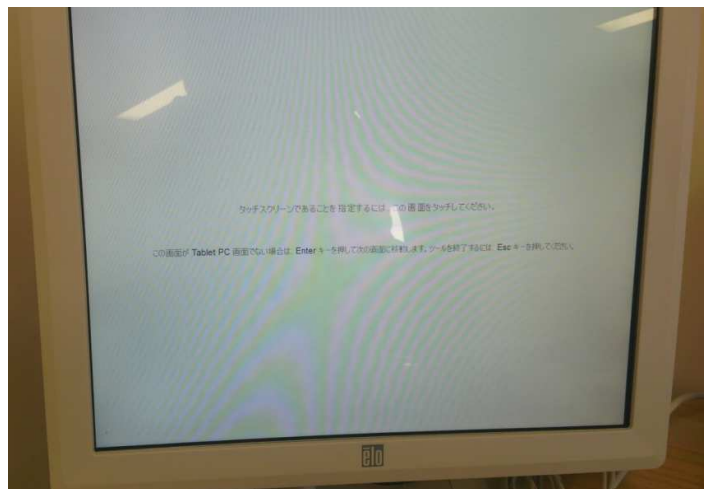


手順⑥次に PC 上に以下の画面が表示されますので
キーボードの「Esc ボタン」を一度押します。

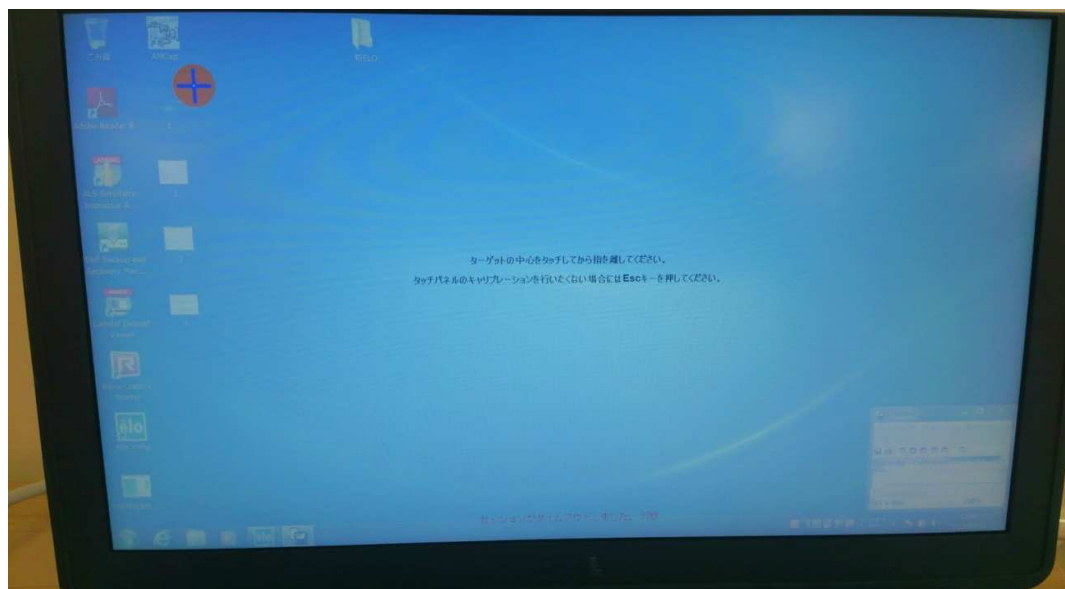

手順⑦タッチモニター上に以下の画面が移動しますので、
移動が確認できたら、カーソルを3点指でタッチします。
(タッチモニターの校正作業となります。)



手順⑧以下のメッセージがタッチモニター上に表示されますので
「受け入れる」を指でタッチして校正作業を終了します。

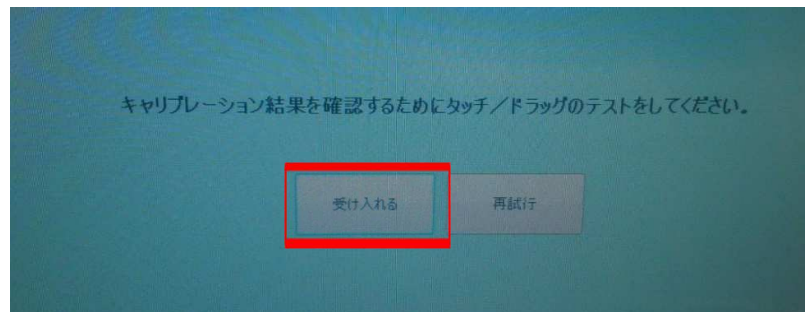

以上

レールダルメディカルジャパン株式会社
テクニカルセンター
Tel : 047-329-6561