

SimPad 専用患者モニタの使用方法

SimPad と患者モニタ(PC)は、リンクボックスを中継して情報をやり取りしています。リンクボックスとモニタの接続は、有線と無線の2種類があります。セットアップの方法は下記をご確認ください。

1. SimPad と患者モニタを接続する

※事前に SimPad とリンクボックスが接続された状態にしておいてください。




(方法 1) 有線での接続



有線での接続は、セットアップが簡単であると同時に通信も安定しているため、通常はこちらを推奨しています。

製品に同梱されている LAN ケーブルをご用意のうえ、リンクボックスとモニタの端子にそれぞれ差し込んで頂くと準備完了です。LAN ケーブルは市販のものも使用できます。

(方法 2) 無線での接続

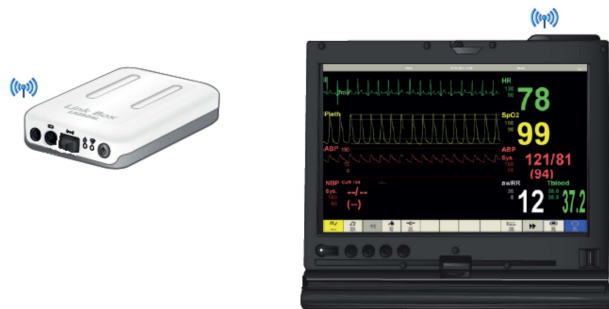


SimPad と患者モニタは、「SimLink」という名前のアドホックネットワーク経由で接続されます。

無線で使用する場合は、事前にこのネットワーク接続を行っておく必要があります。

手順は下記の通りです。

<無線通信でモニタを使用する:SimLink への接続方法>

1. PC 画面右下のネットワーク接続表示のアイコンをクリックします。
2. 出て来た画面で「SimLink」を選択し、「接続」をクリックします。
3. しばらく待った後、画面が右のように変われば OK です。

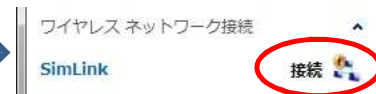

2. 患者モニタソフトウェアを実行する

ソフトウェアは PC を立ち上げると自動的に起動します。初めてお使いになるときは下記の画面が出ます。お手持ちの SimPad とリンクボックスの名前が表示されていることを確認し、OK をクリックしてください。



ソフトウェアは過去に接続したリンクボックスの情報を記憶しており、次回以降の起動時に同じリンクボックスを見つけると、この画面が出た直後に接続が完了し、モニタ画面が起動します。新しく別のリンクボックスと組み合わせてお使い頂くときは、再び上記の画面が出てきます。

モニタソフトウェアを一旦終了した後、手動で起動するには、デスクトップアイコンをダブルクリックしてください。また、スタートメニューから「Laerdal Medical」→「Patient Monitor」→「Laerdal Patient Monitor」の順にクリックしても起動できます。



<リンクボックスが見つからない場合>



有線接続の場合

PC 画面の右下にあるネットワーク接続表示のアイコンをクリックし、出て来た画面で下記の通りになっているか確認してください。PC の再起動で解決することがあります。



因みにこの状態ですと、まだ接続が完了していません。

無線接続の場合

前頁に書かれている SimLink との接続が完了しているかご確認ください。

※SimLink へ接続済なのにエラー画面が出る場合は、PC の IP アドレス設定が原因となっている可能性があります。後述の「無線通信に使う IP アドレスを変更する方法」に書かれている手順をご参照ください。




3. 患者モニタソフトウェアを終了する

1. モニタ画面の右下にある「メイン設定」と書かれたボタンをタッチします。



2. 表示されたメニューで「モニタシャットダウン」→「本当に終了しますか？」の順にタッチするとソフトウェアが終了します。

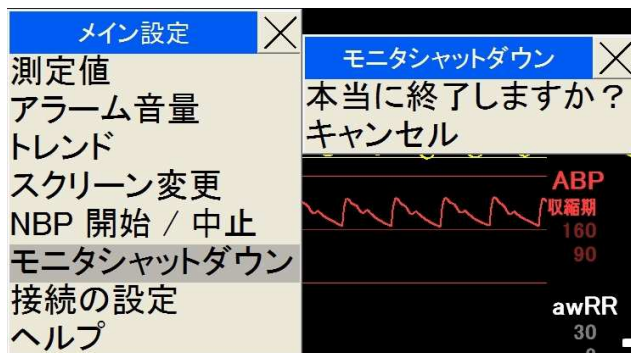

参考：無線通信に使う IP アドレスを変更する方法

SimLink 接続は固定 IP アドレスが必要となっており、ご購入いただいたモニタ PC はこの設定が事前にされています。ネットワーク上の問題などで IP アドレスを変更する必要がある際には下記の手順で行ってください。


- ① PC 画面右下にある、ネットワーク接続表示のアイコンをクリックします。




- ② 出てきた画面の下に書かれている「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。




- ③ 出てきた画面の左にある「ワイヤレスネットワークの管理」をクリックします。

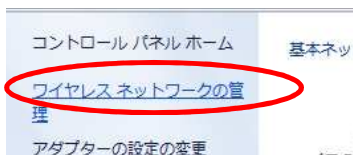


- ④ 「アダプターのプロパティ」をクリックします。

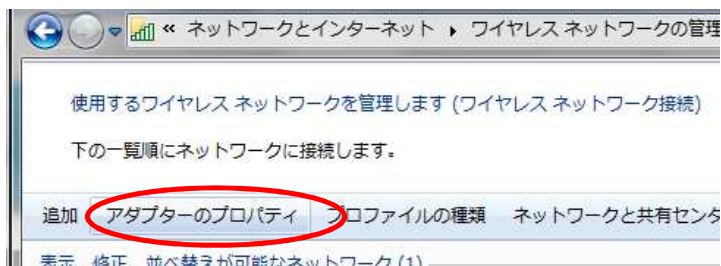

⑤ 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

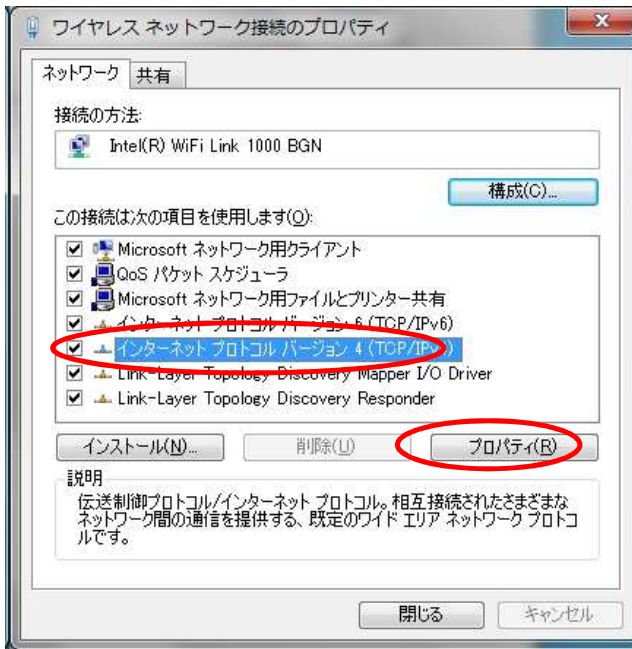

⑥ 下記の画面が出るので、IP アドレスの一番右にある数字を変更します。

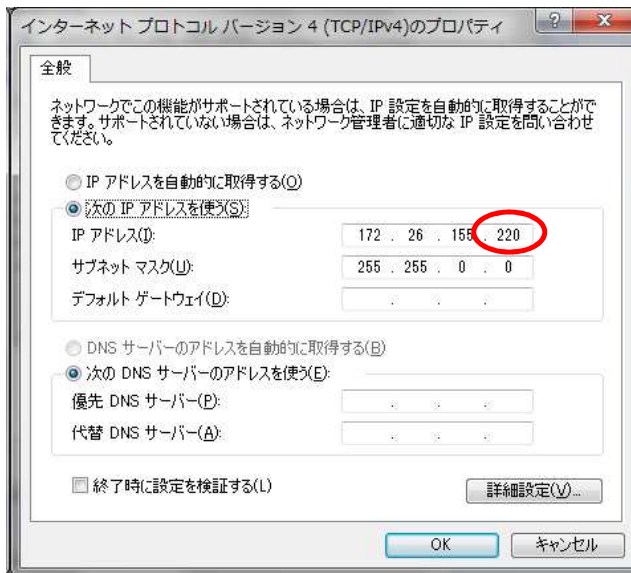

⑦ OK をクリックして設定完了です。これまでの画面も閉じてください。