


SimMom

빠른 설치 안내서

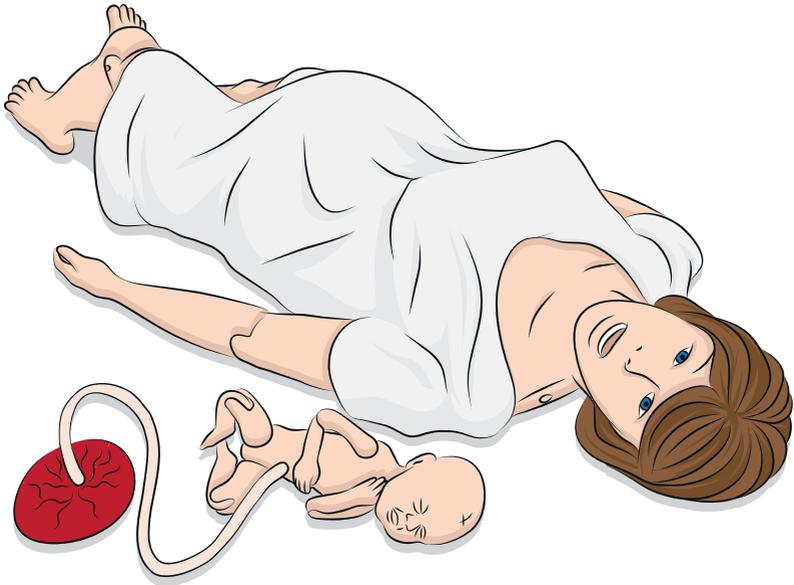


이 빠른 설치 안내서에는 **SimMom** 환자 시뮬레이터 조립 방법 및 설치 방법이 설명되어 있습니다. **SimMom** 사용 방법에 대한 내용은 **LLEAP** 도움말 파일 및 **SimMom** 사용 설명서를 참조하십시오.

www.laerdal.com/downloads을 방문하여 최신 사용 설명서 및 소프트웨어를 다운로드하십시오.




시뮬레이터 다리

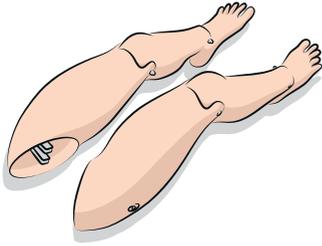


자궁 경부




자궁 내번

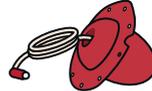


시뮬레이터 상반신

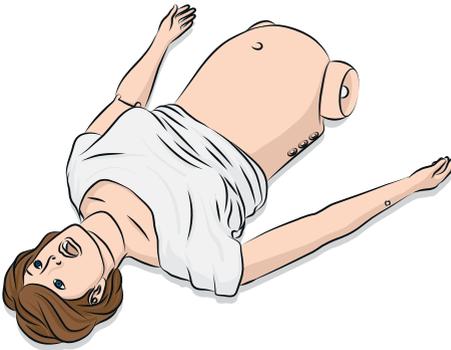

산후 출혈 자궁

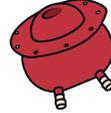


잔류 조각이 있는 태반

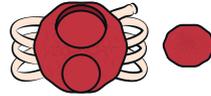

태반이 있는 태아



물렁한 자궁

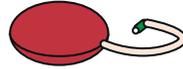

지지용 스폰지



BP 커프



윤활제



양막 백



필수

강사 PC



Link Box



컴프레서



전원 어댑터



이더넷 케이블



권장 사항

환자 모니터



SpO2 케이블



USB 케이블



헤드셋




이더넷 전원




1


환자 모니터

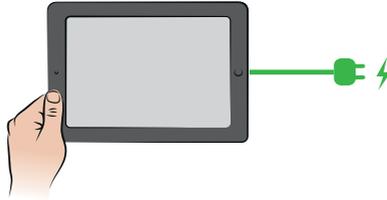



강사 PC

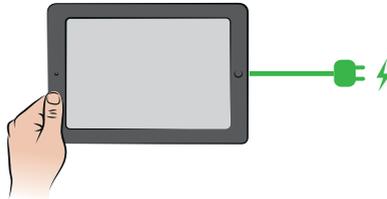


Link Box

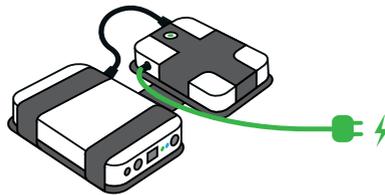


2

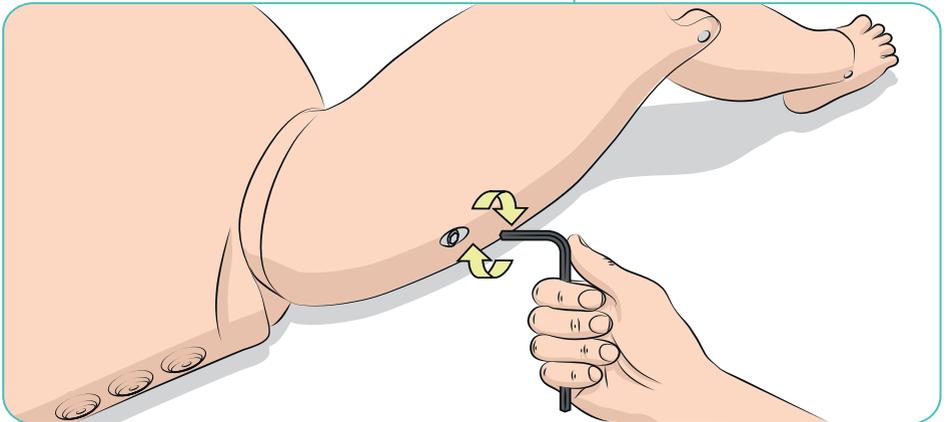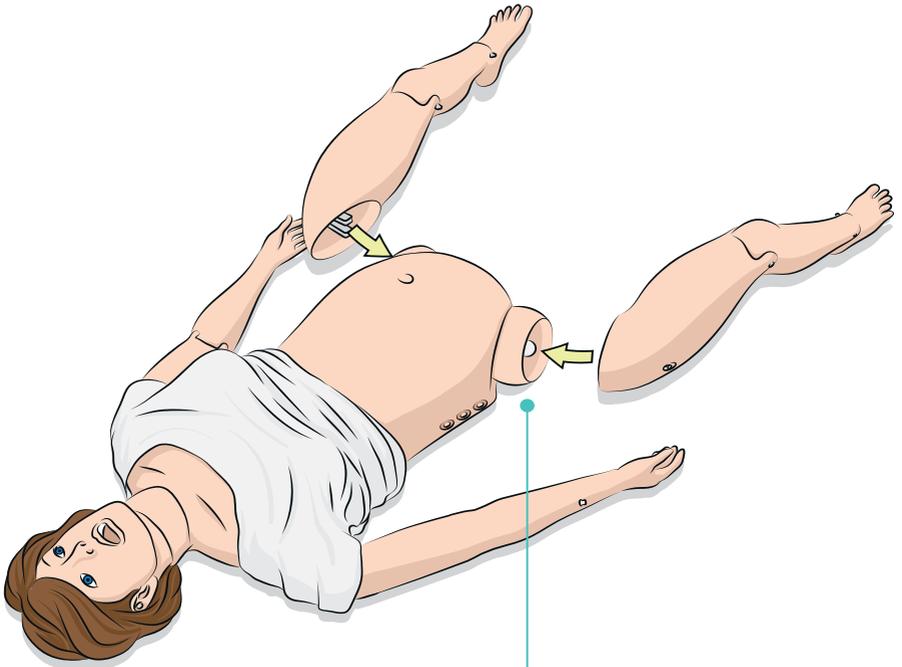


3A

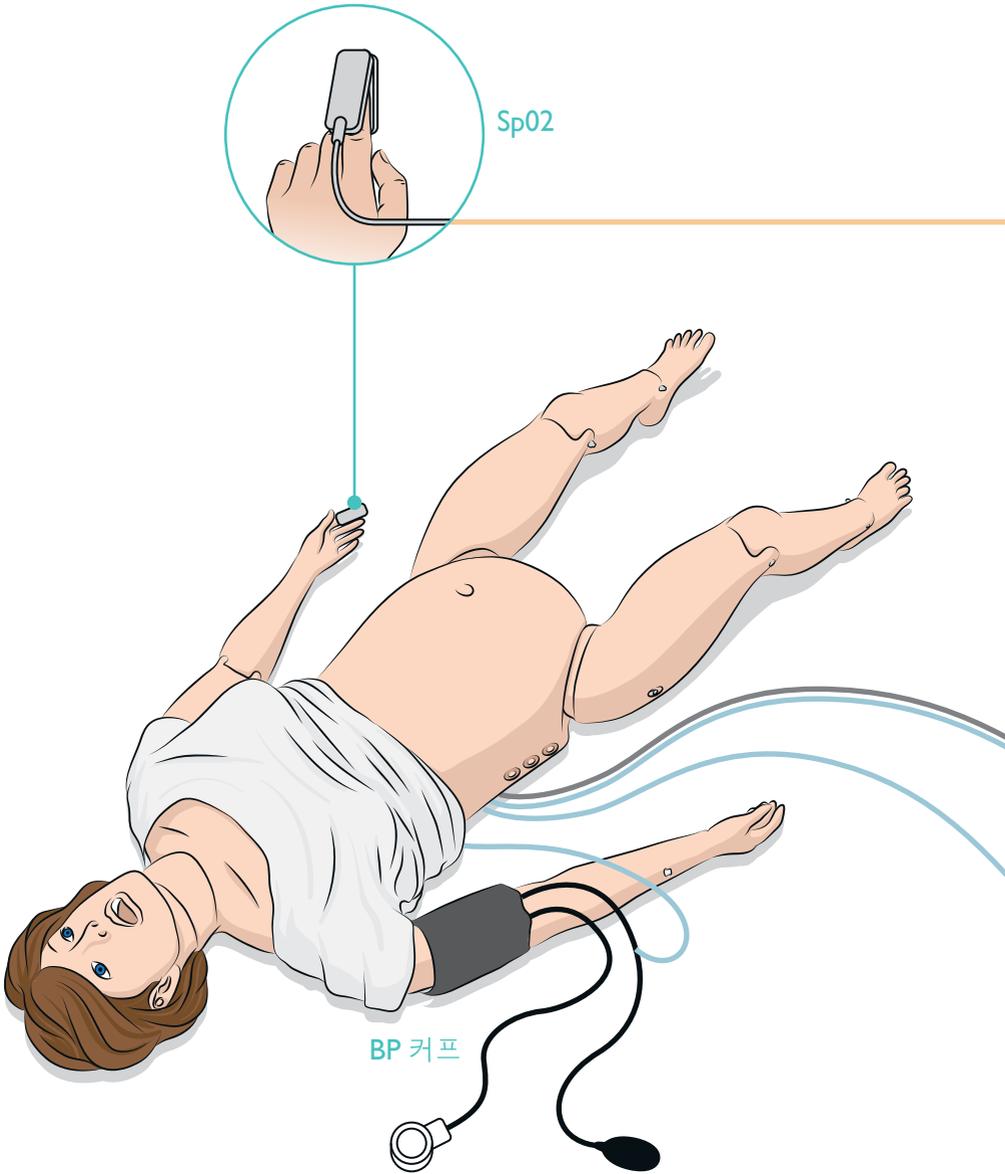

환자 모니터

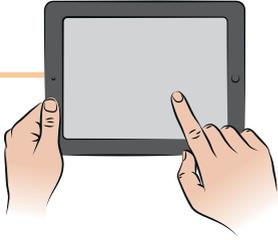


강사 PC

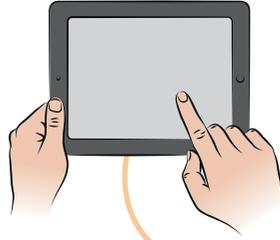


헤드셋



Link Box

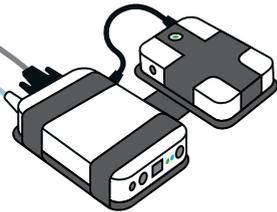


컴프레서

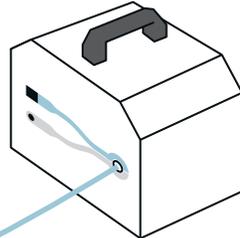


- 공기 튜브 —————
- USB 케이블 —————
- 시뮬레이터 케이블 —————



3_B

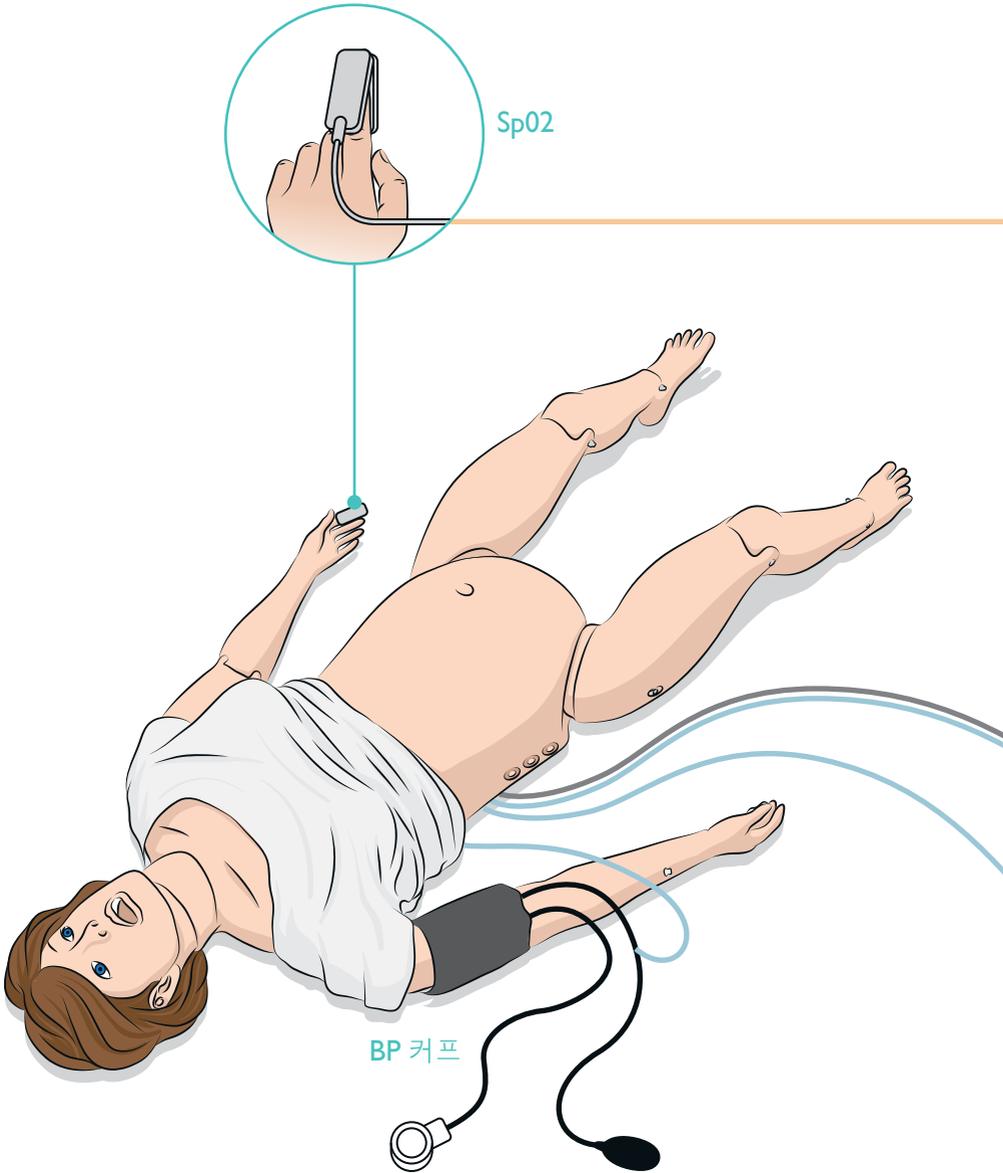

환자 모니터

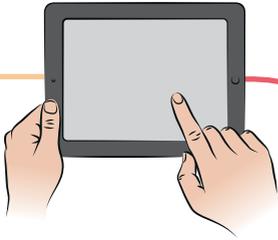

강사 PC

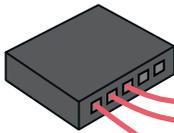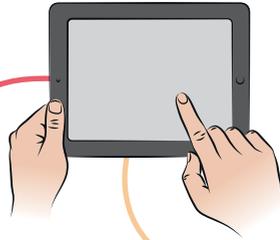


전원




헤드셋

Link Box

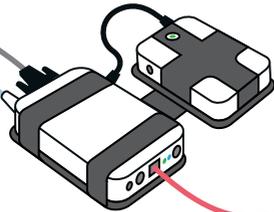

컴프레서

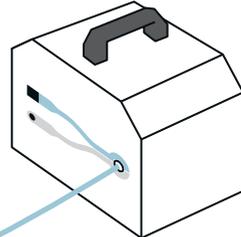

- 공기 튜브 —————
- USB 케이블 —————
- 시뮬레이터 케이블 —————
- 이더넷 케이블 —————

© 2014 Laerdal Medical AS. All rights reserved.
장비 제조업체: Laerdal Medical AS, P.O. Box 377,
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
전화번호: (+47) 5151 1700

Rev A



www.laerdal.com/kr/



Laerdal
helping save lives