

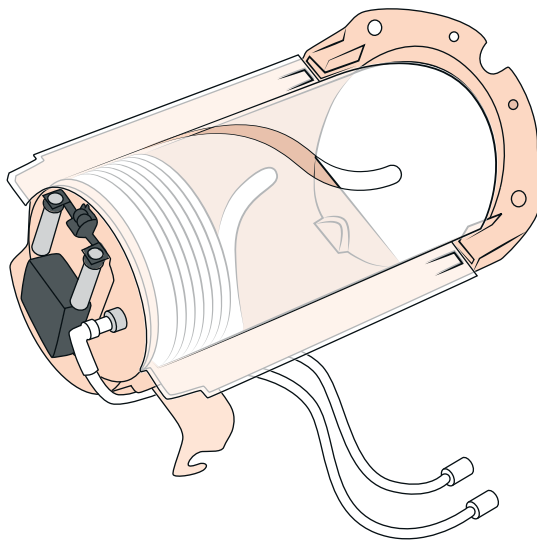
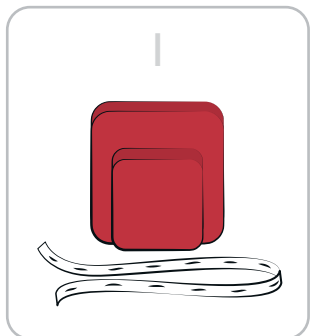
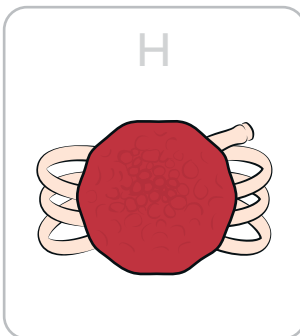
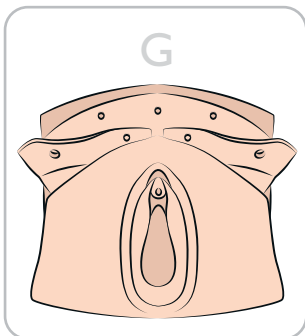
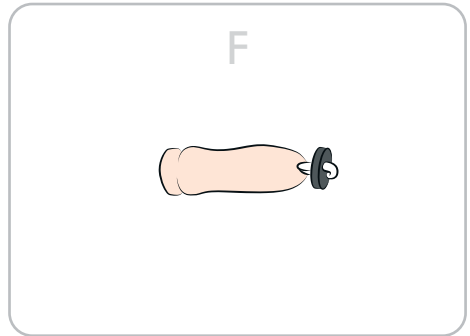
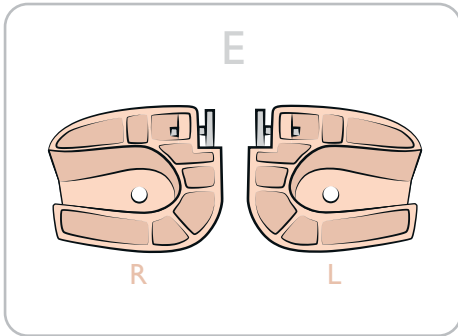
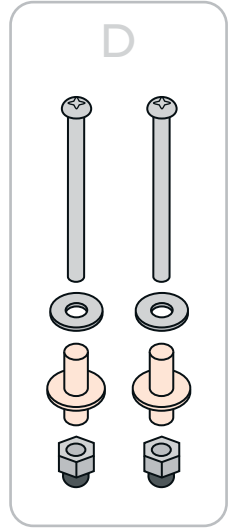


SimMom

オート分娩モジュールアップグレードキット
セットアップガイド

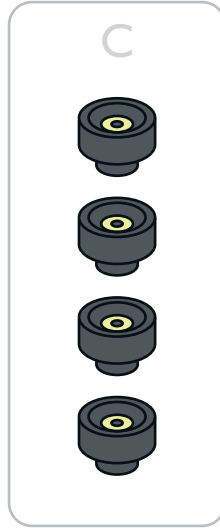

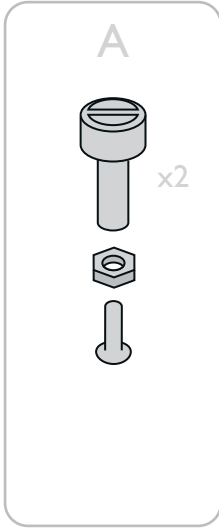


すべての手順に従い慎重にアップグレードしてください。シミュレータの性能に問題が
起こり、保証が無効になる恐れがあります。


上半身から脚を取り外してからアップグレードを開始してください。本アップグレード
キットと SimMom に付属のツールを使用してアップグレードを行ってください。

オート分娩モジュールの操作は、LLEAP ソフトウェアを使用する必要があります。






1

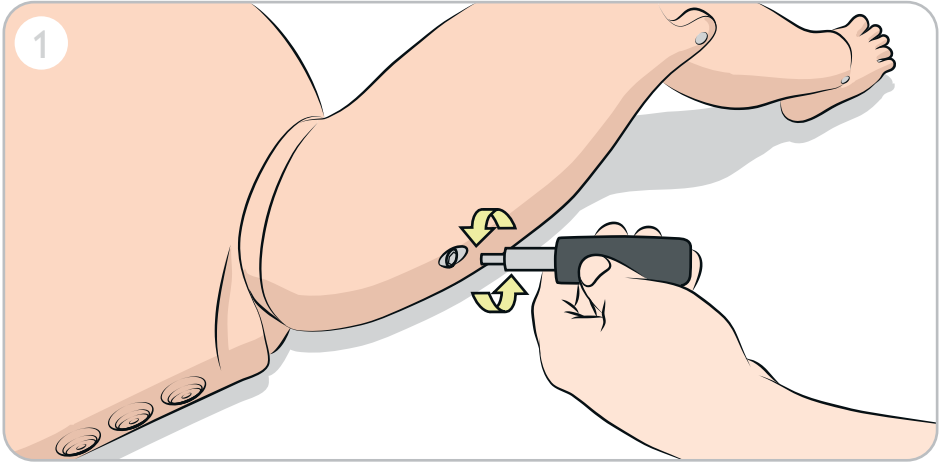

2






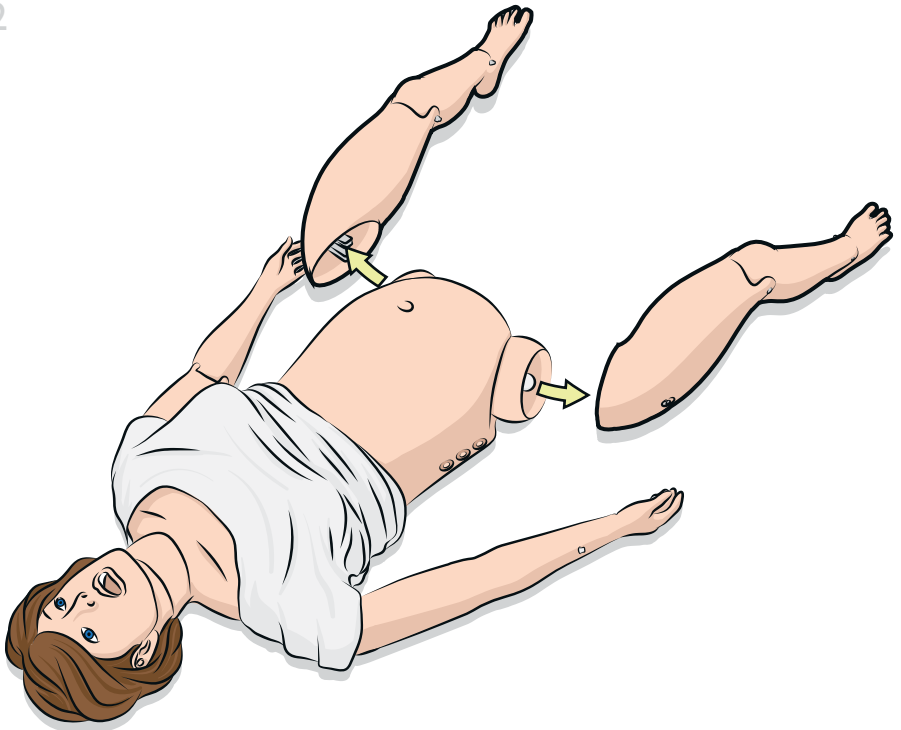








2

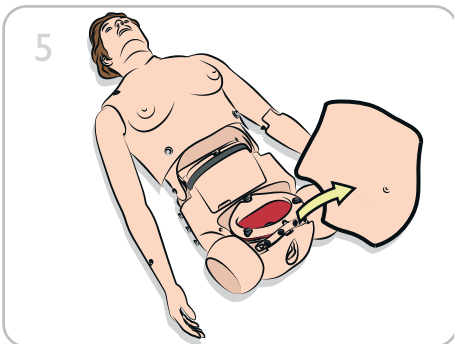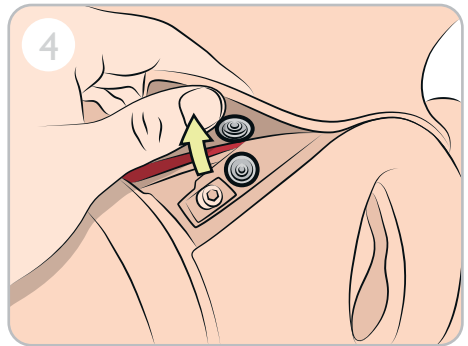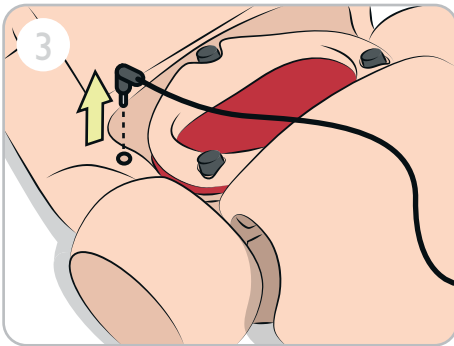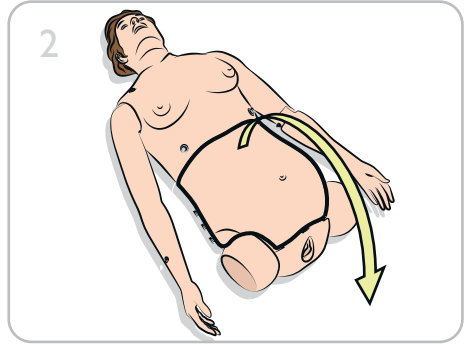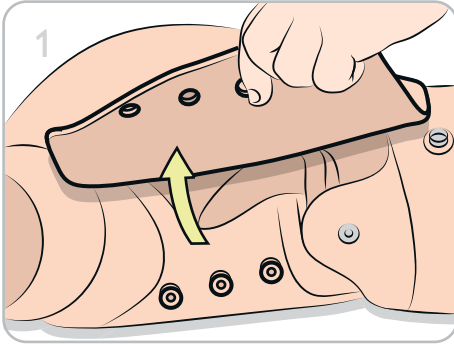

3







既存の会陰の取り外し

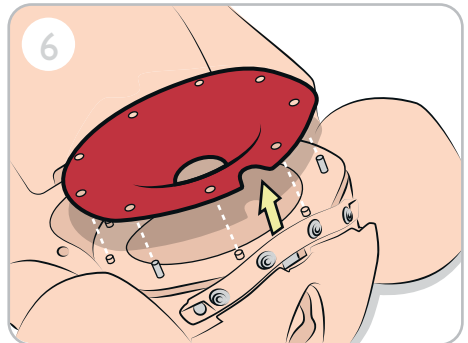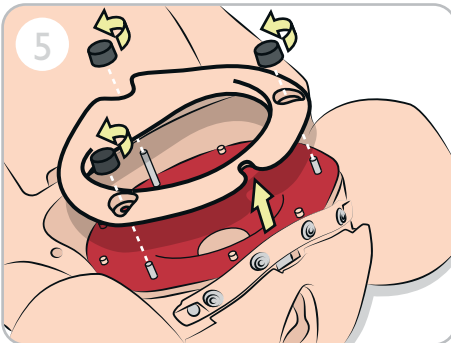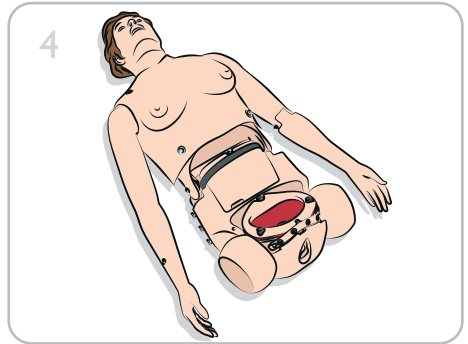
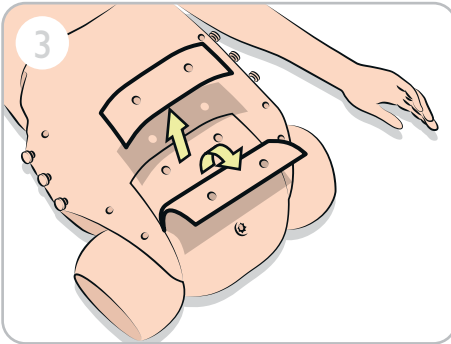
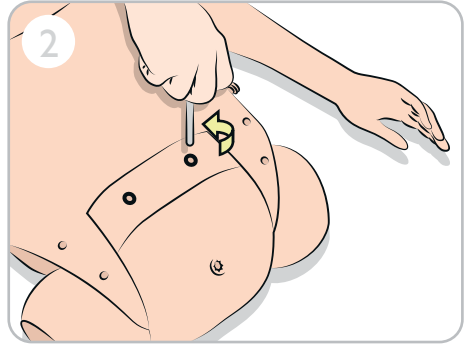
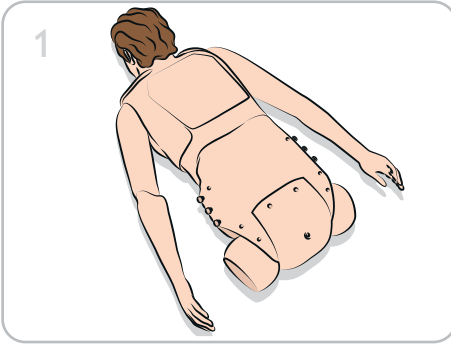


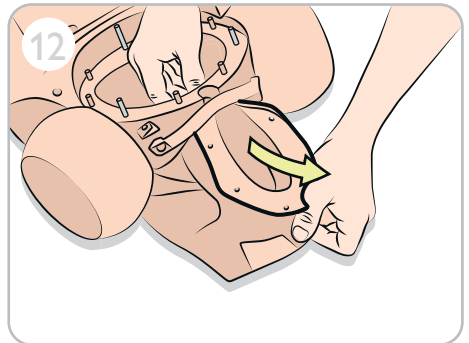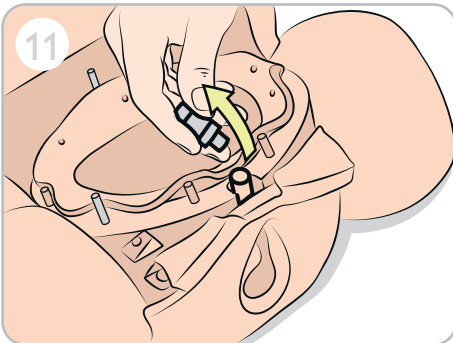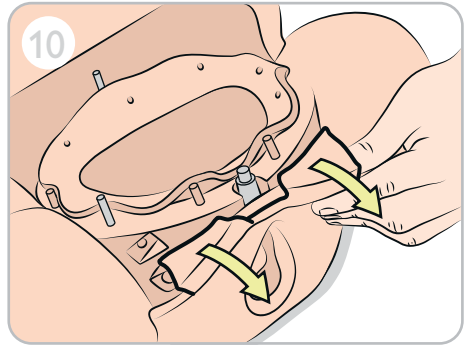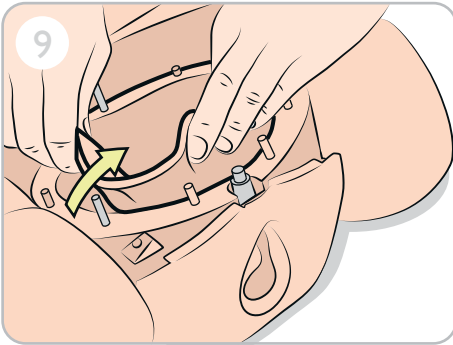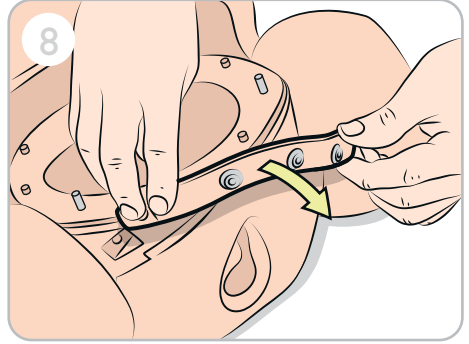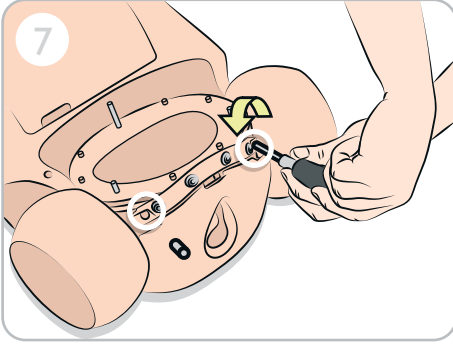







4






下部長ネジの付け替え

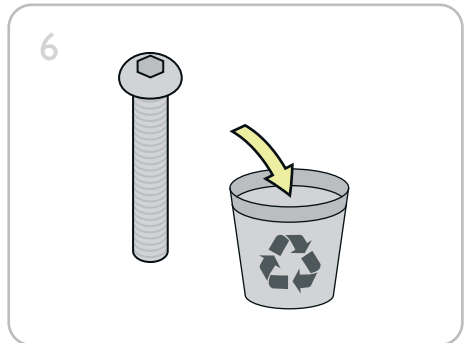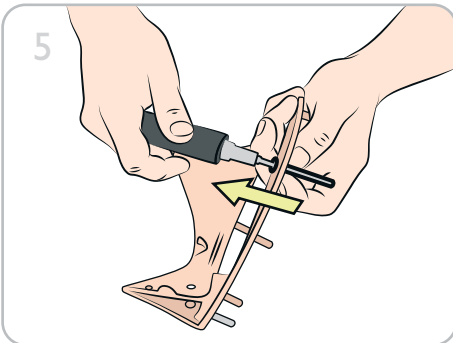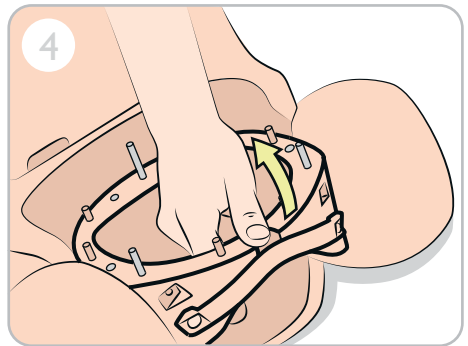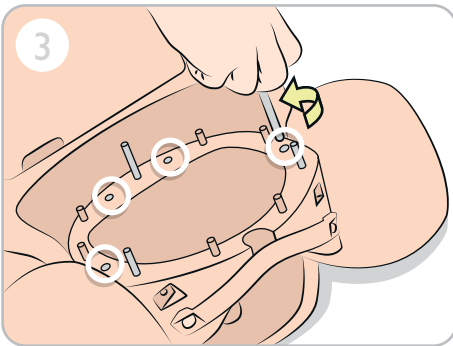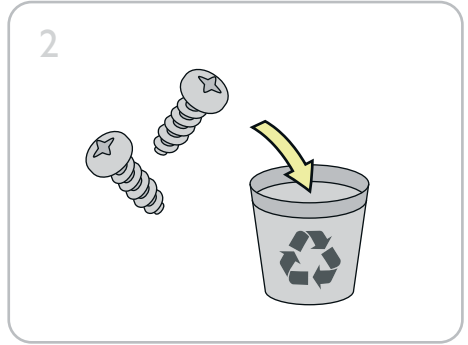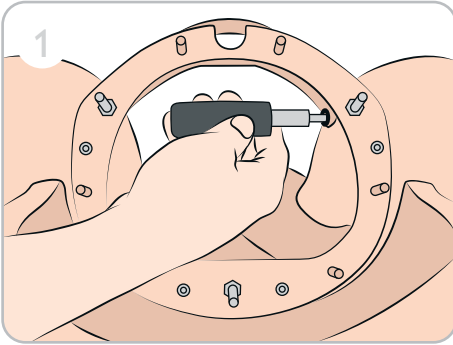

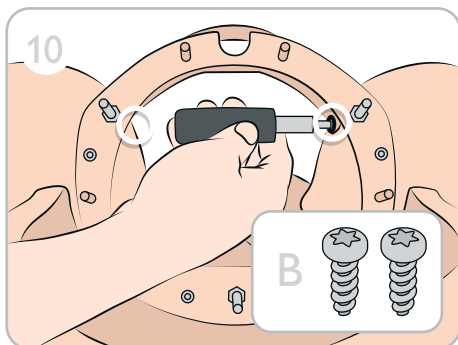
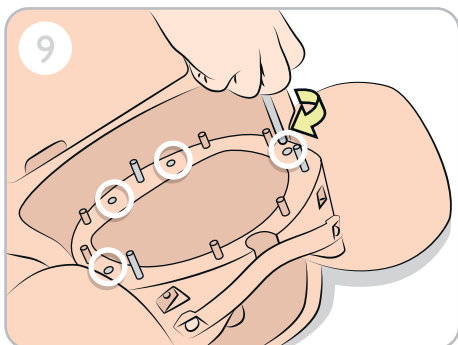
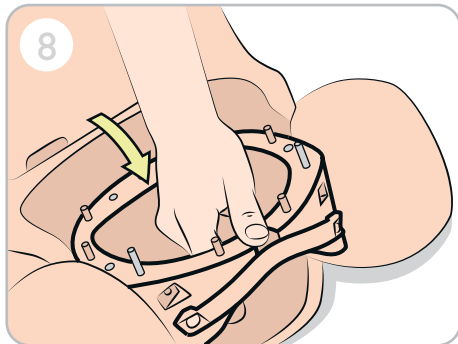
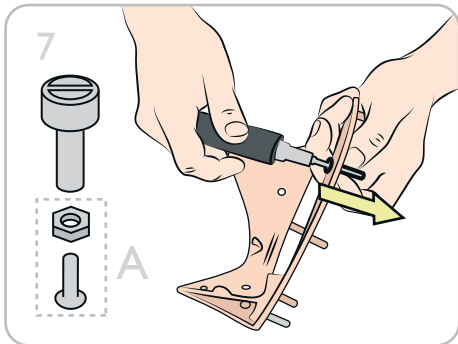


5

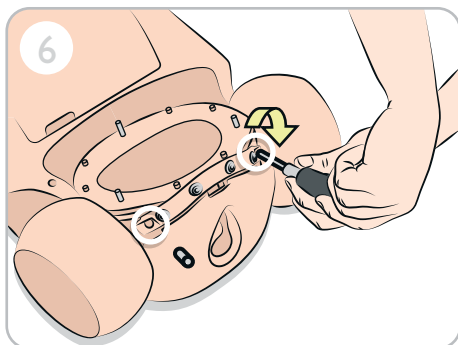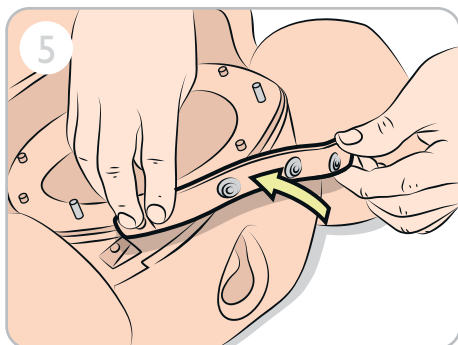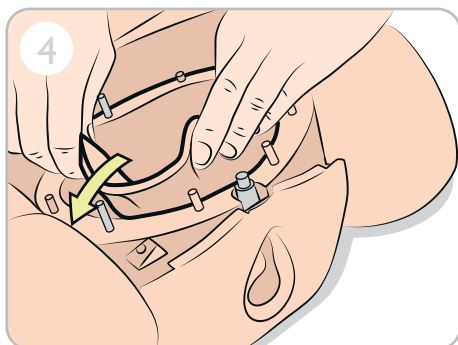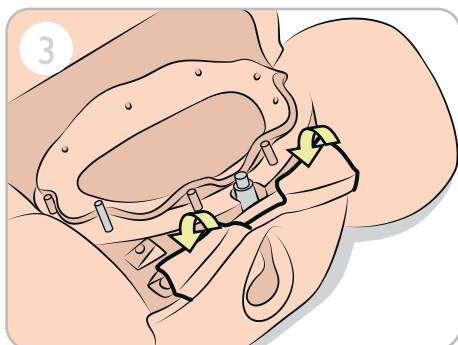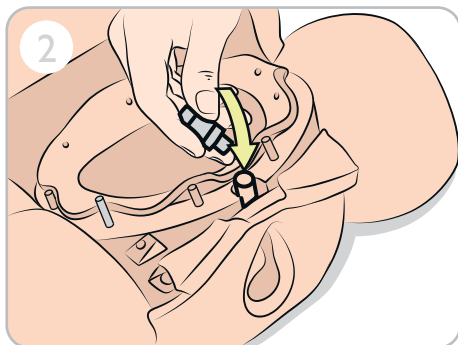
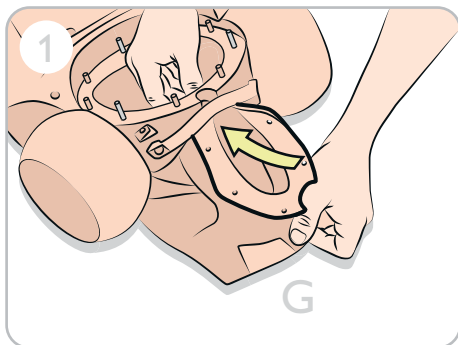


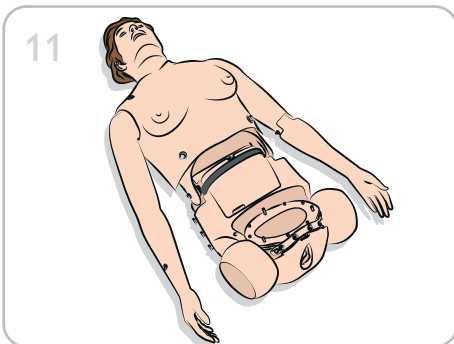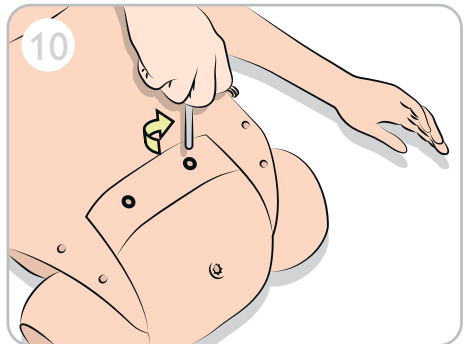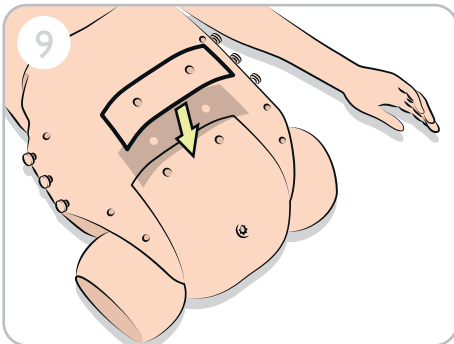
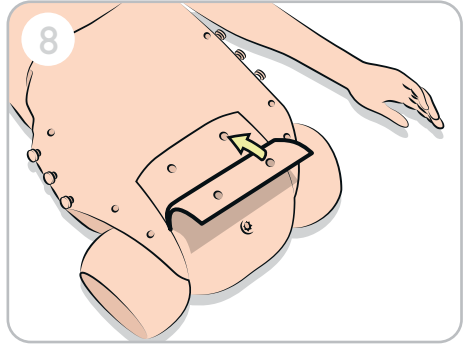
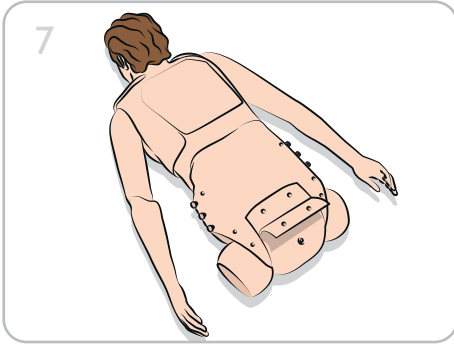


6



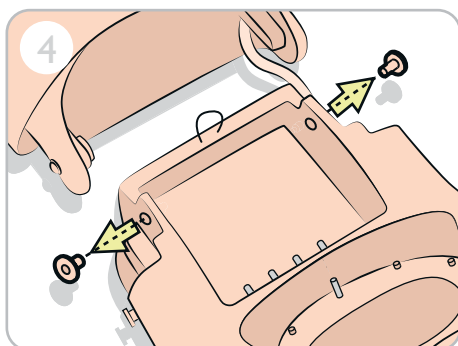
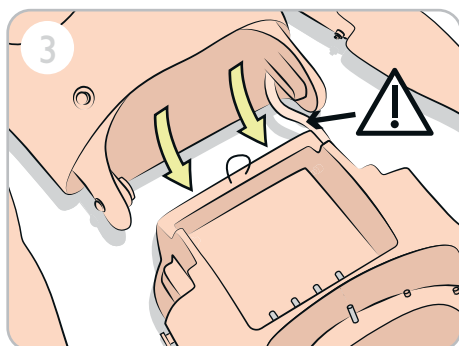
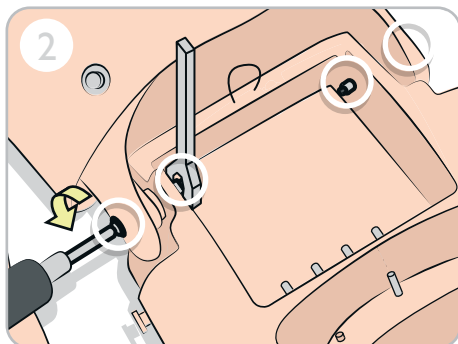
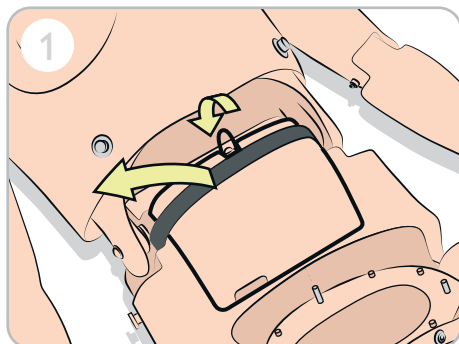


⚠ ケーブルを損傷しないように注意してください。




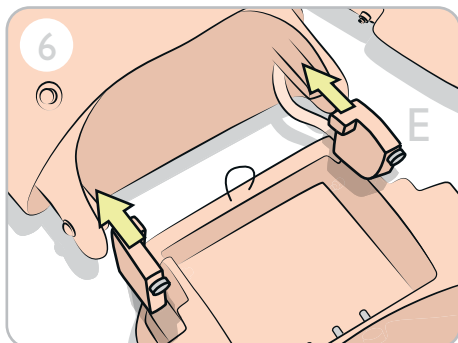
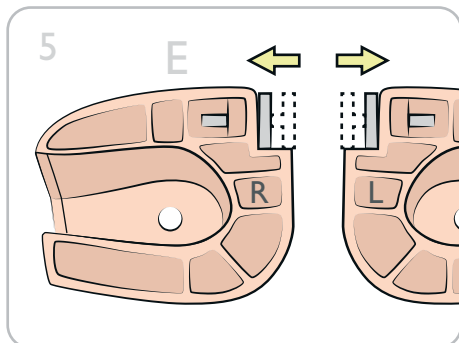


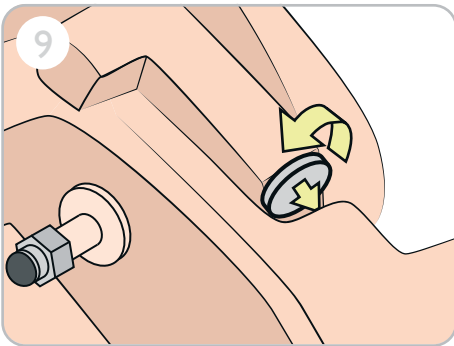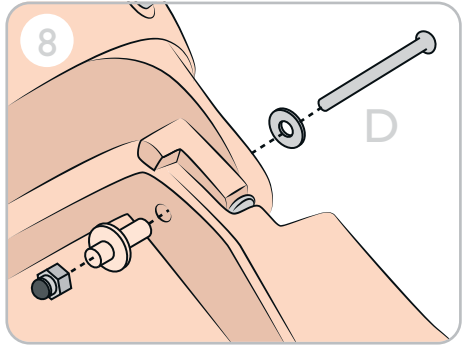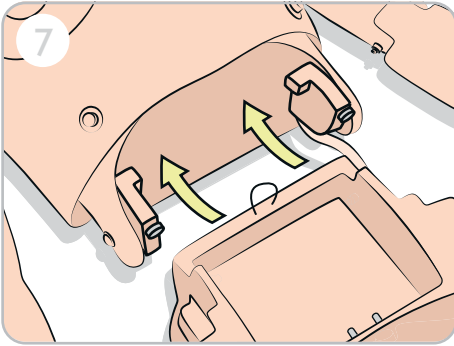







7A

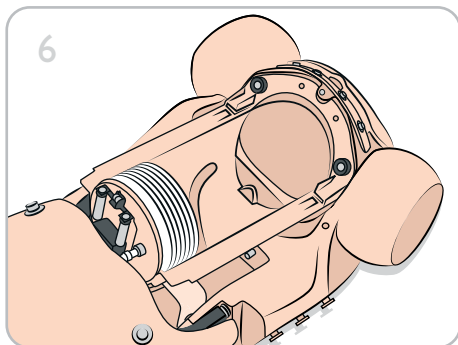
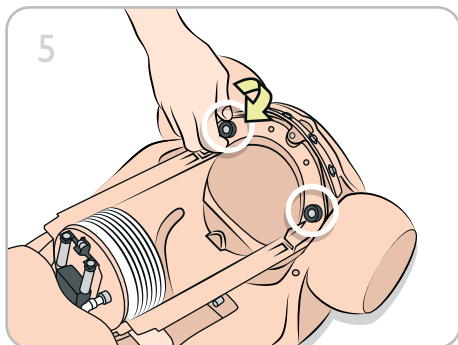
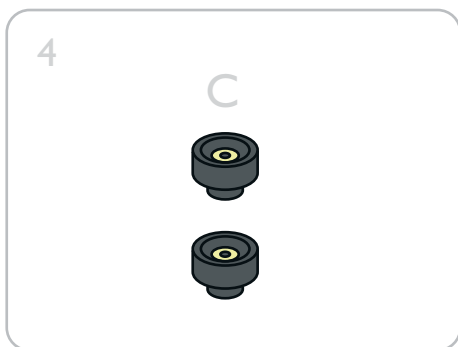
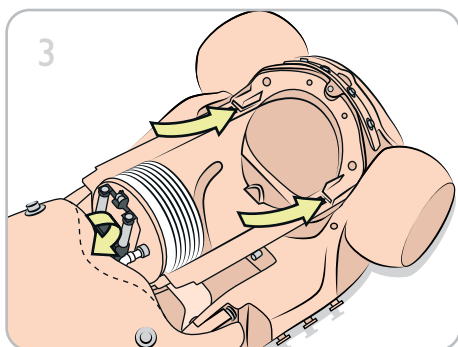
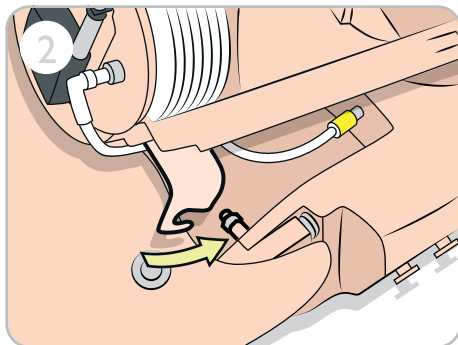
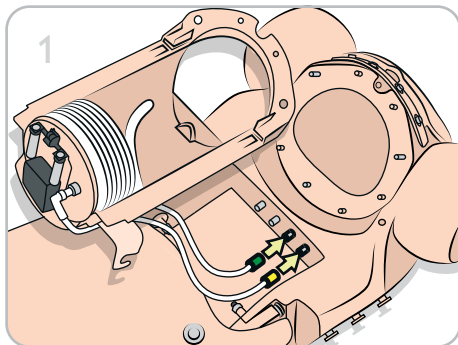


7B

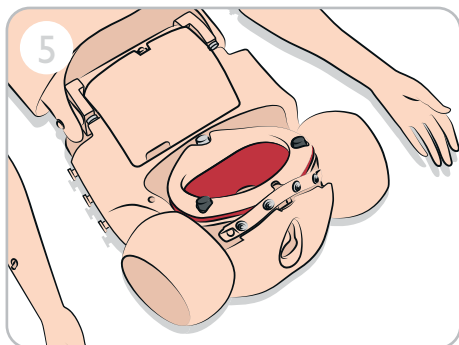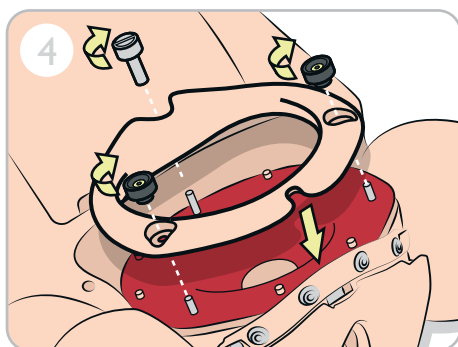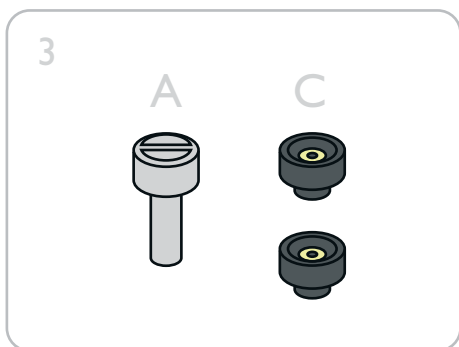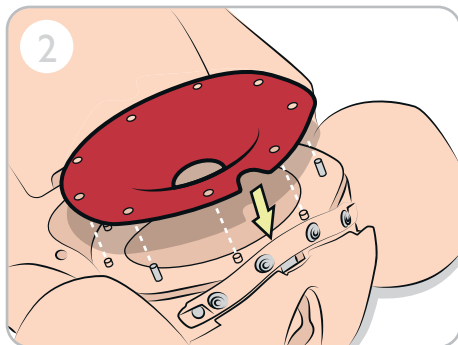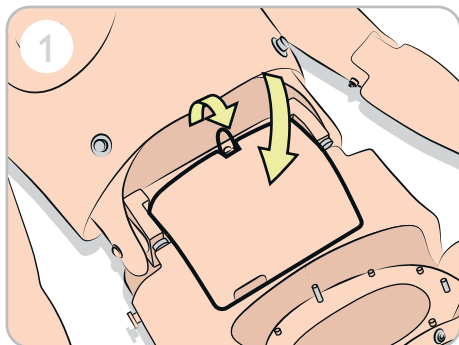

8

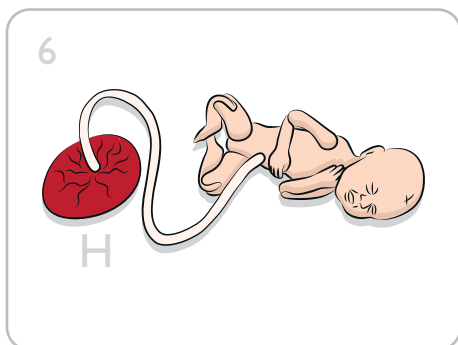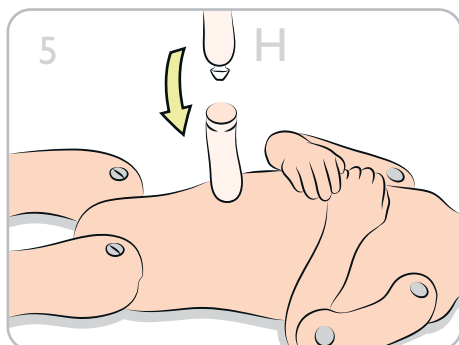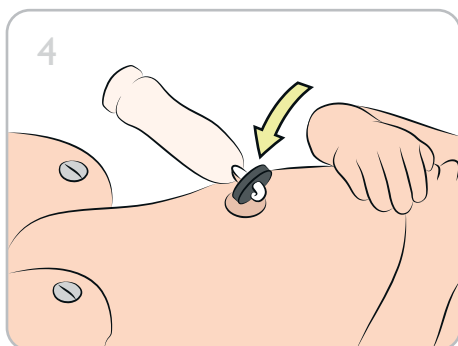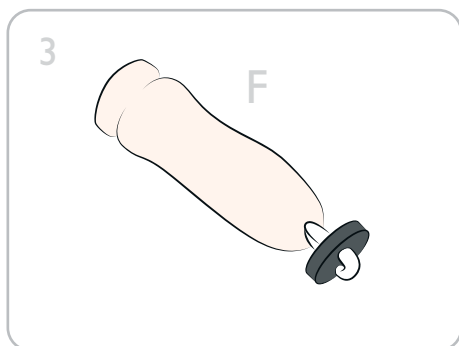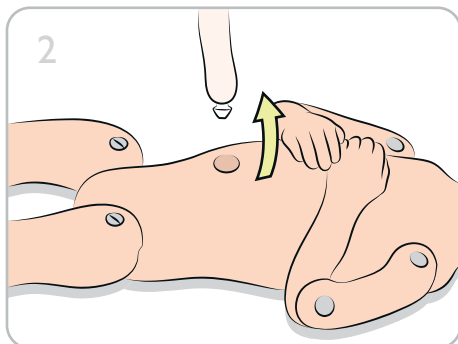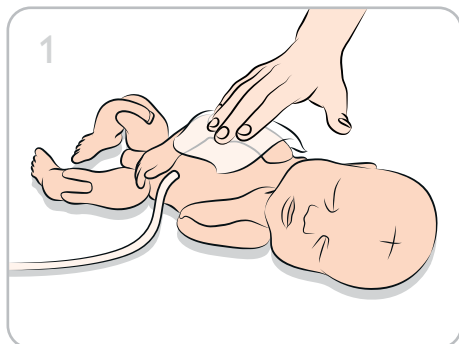

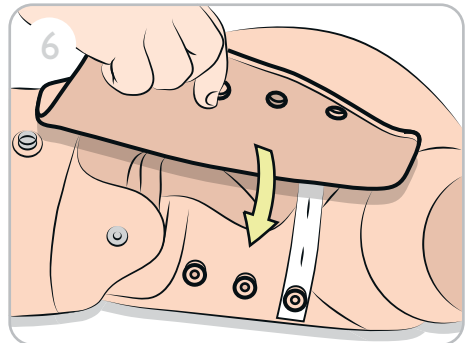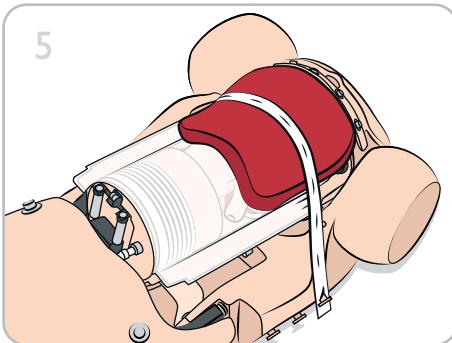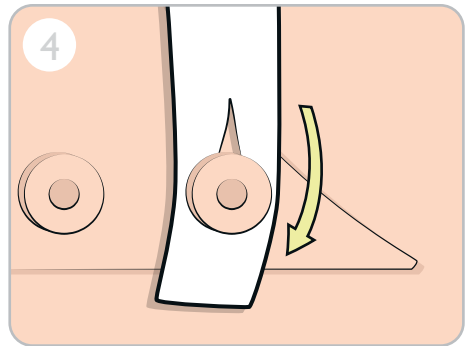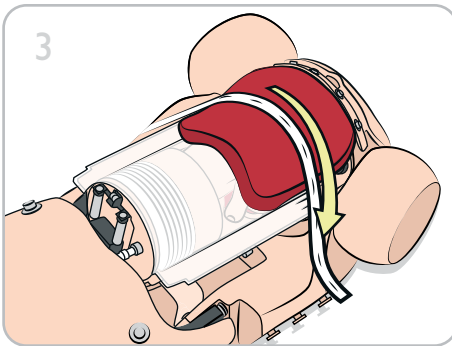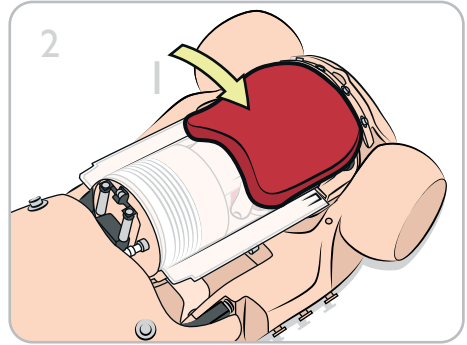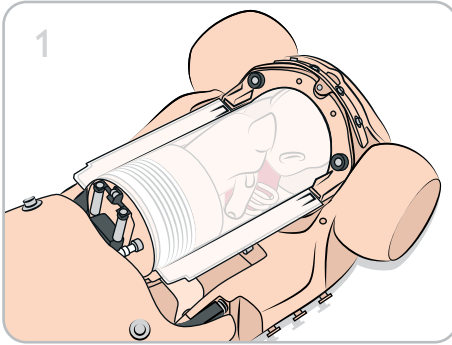





© 2014 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

製造販売元：レールダル メディカル ジャパン株式会社

東京都千代田区一番町 8 一番町 FS ビル 5F

電話：0120-309-060

Rev A



www.laerdal.com/jp/



Laerdal
helping save lives