



SimPadにてLinkBoxが見当たらない場合の対処方法 SimPad Ver1.7.5以降

Step 1~2

1 「システム設定」> 「LinkBoxとの接続」
画面にてLinkBoxが見つからない



2 「システム設定」> 「WiFi」より下記画面
「SimPadのみ設定する(Configure SimPad only)」をタップ



Step3~4

3 「初期設定のSimLinkに戻す
(Default SimLink network)」をタップ



4 SimLinkに接続します



Step5

5「システム設定」>「LinkBox」との接続
下記のようにLinkBoxが見つかりました

