


# SimPad スキルレポートを使用したレサシアン QCPR マネキンの名前変更方法

(Ver.1.6.2)

1. SimPad を起動する。
2. BLS インストラクターを選択。
3. 『セッション開始』画面をタップ。

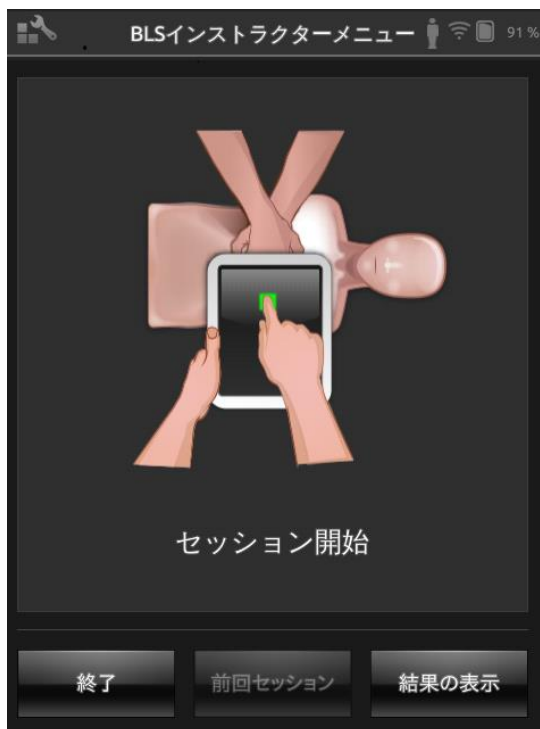

4. 『マネキン/シミュレータの選択』画面に表示された名前を変更したいマネキンの WiFi をタップ。



5. ペンマークをタップ。



6. ひらがな、漢字、カタカナ等全角文字は使用できません。数字とー(ハイフン)を使用してください。



7. **OK** をタップして文字を反転させる。



8. 名前が変更されます。確認後『続ける』をタップ。



9. マネキンとの接続が始まります。




10. **OK** が表示されたらタップする。



11.『メニューへ』をタップ



12.『終了』をタップ。

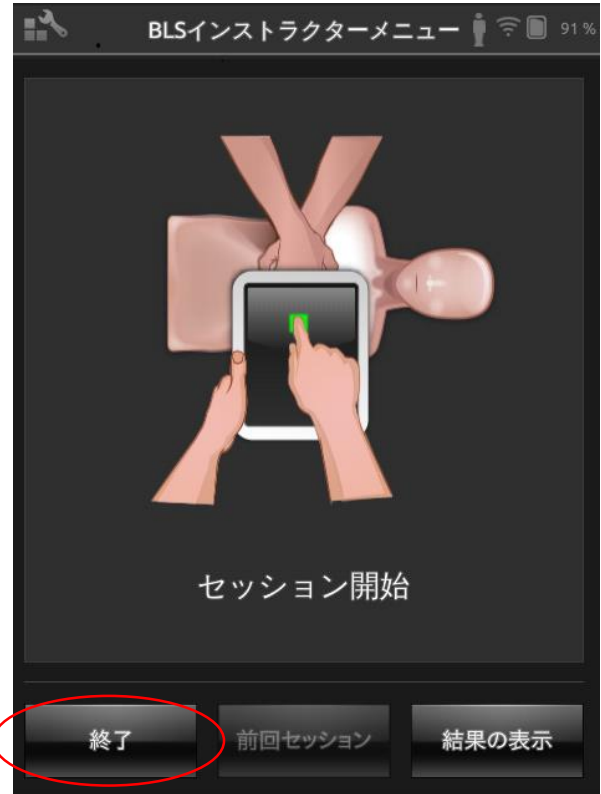

- 必要であれば再度2. からの手順を行い名前の設定が成功しているか確認してください。
- BLS 受講者でも同じ手順で変更が可能です。