




# Emailによるアクティベーション EventReview Ver.2


# 本資料の概要

- Event Reviewはインストール後**試用期間60日**はアクティベートすることなくご利用いただけます。しかし試用期間60日を終了するとご利用いただくことができなくなります。その為インストール後60日以内にお客様自身にてアクティベートしていただく必要があります。
- 本資料ではインターネット環境にないPCでアクティベーションを実施する為、Emailを利用したアクティベーションの手順についてご説明致します。お客様側での作業は概ね5-10分程度で完了致しますので予めご了承ください。
- ご不明点がございましたら下記ヘルプデスク宛にご連絡いただくようお願い致します。  
レールダル ヘルプデスク  
Tel: 0120-993-559  
受付時間: 月～金 9:00～17:30 土・日・祝日、年末年始、及び弊社指定休業日を除く  
Email: [HelpDesk@laerdal.co.jp](mailto:HelpDesk@laerdal.co.jp)

# シリアル番号の入力方法①

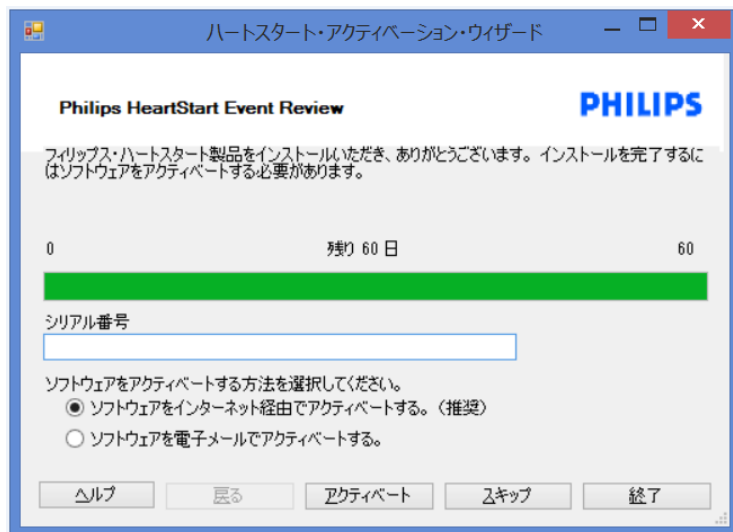


インストール後にEvent Reviewを起動すると「ハートスタート・アクティベーションウィザード」が立ち上がります。

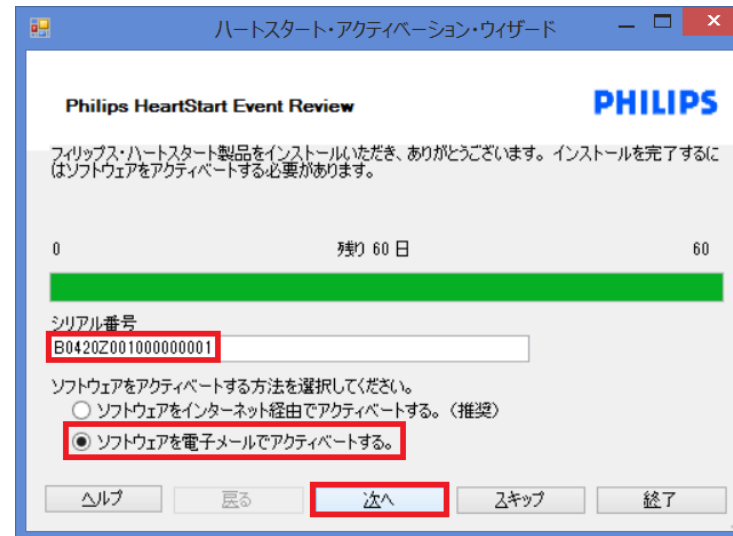


お手元のシリアル番号(半角英数)を入力し、「電子メールでアクティベートする」を選択し、「次へ」をクリック

# シリアル番号の入力方法②

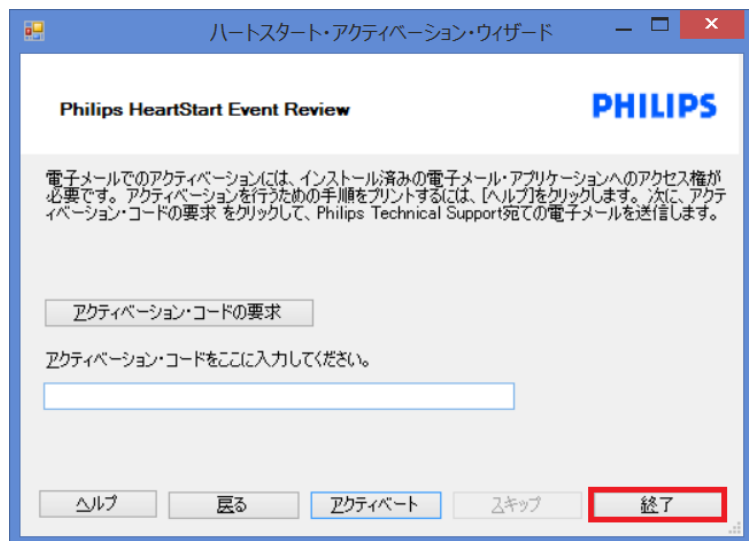

上記画面が表示された事を確認し、一旦「終了」

※アクティベーションコードは後日メールに通知されますので、その際に入力いただきます。

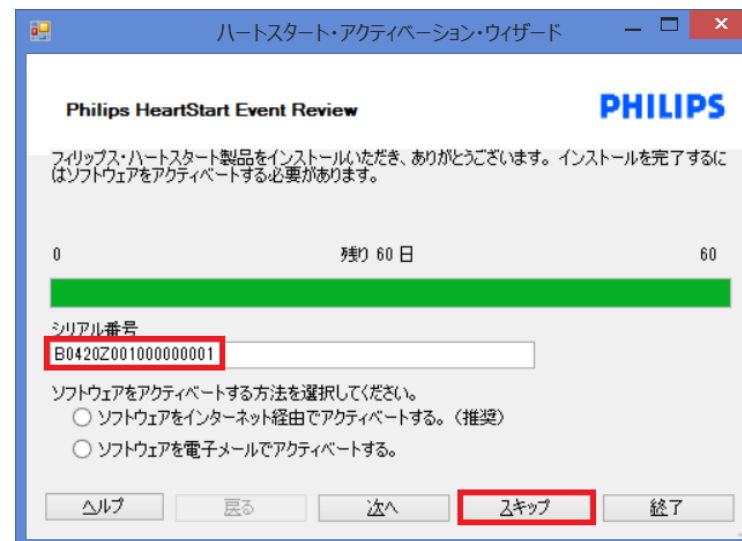


再度Event Reviewを起動し、アクティベーションウィザードを立ち上げます。ここで既にシリアル番号が入力済であることを確認し「スキップ」をクリック。

※もしシリアル番号が入力されていなかったら前ページよりやり直してください。

# シリアル番号の入力方法③





正しくインストールが完了していると上記画面が表示されます。この時点ではアクティベーションは完了しておりません。次のページ以降のお手続きに進みます。  
※アクティベーションが完了していなくても60日間のご利用いただくことができます。

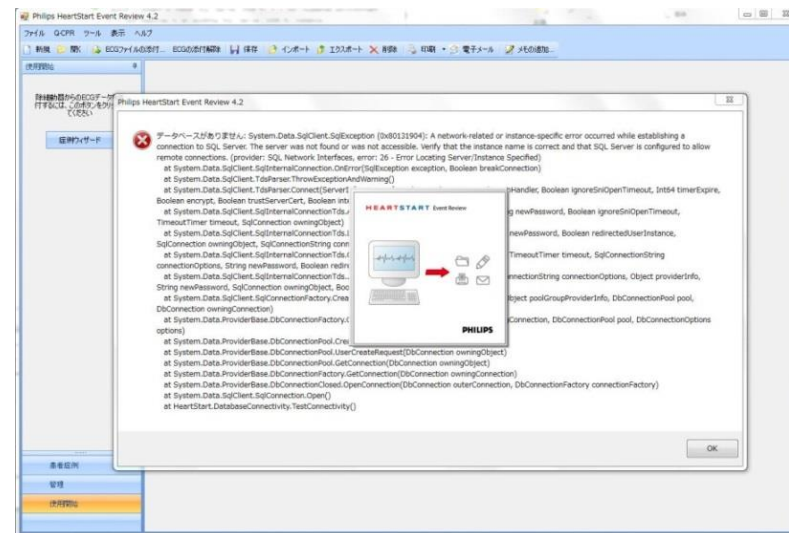

上記のように「データベースがありません」というエラーが表示された場合は別資料「Event Review再インストール方法」に基づいて、Event Reviewの再インストールを行ってください。



# Activation.bin ファイルの送付手順①

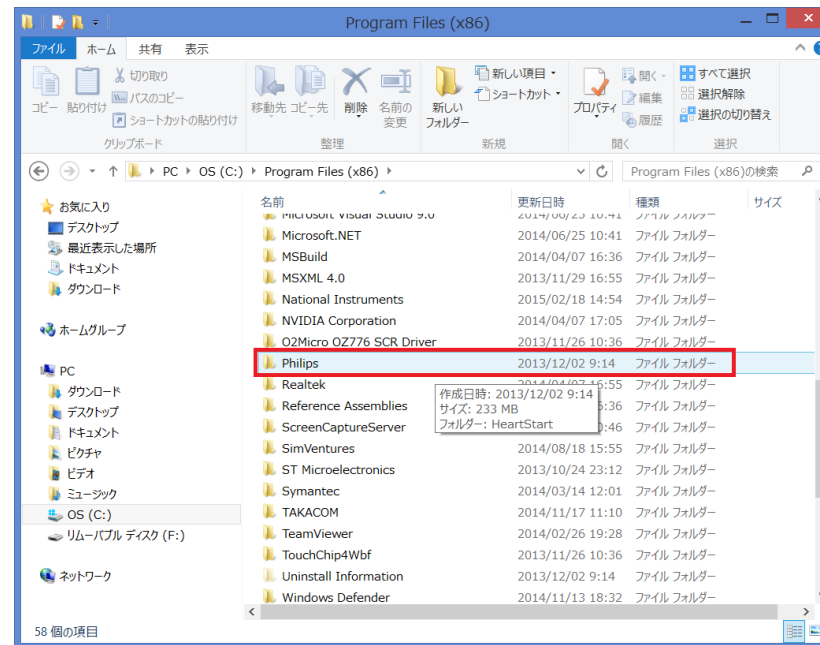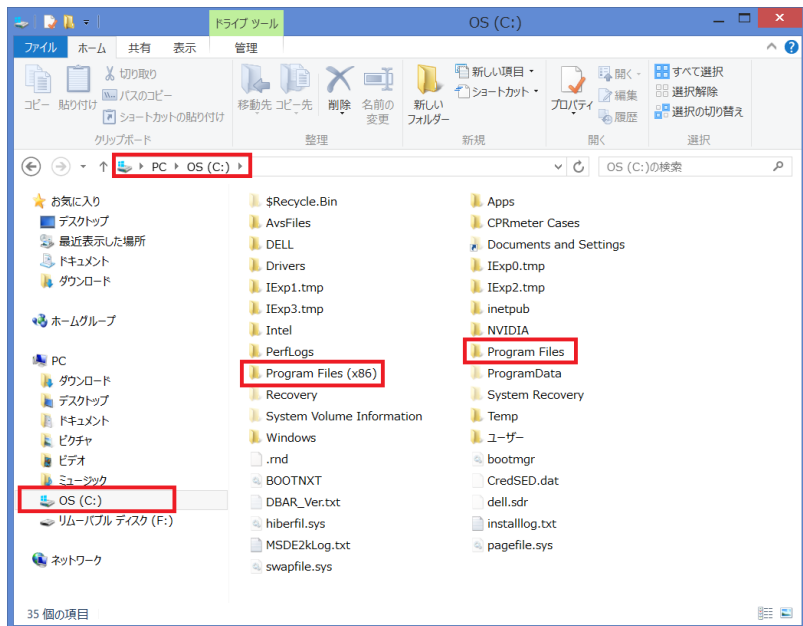

ドライブ(もしくはローカルディスク)より  
Program Filesを開きます。  
※64bitのPCをお使いの場合はProgram  
Files (x86)を開いてください。

「Philips」のフォルダを開きます


# Activation.bin ファイルの送付手順②

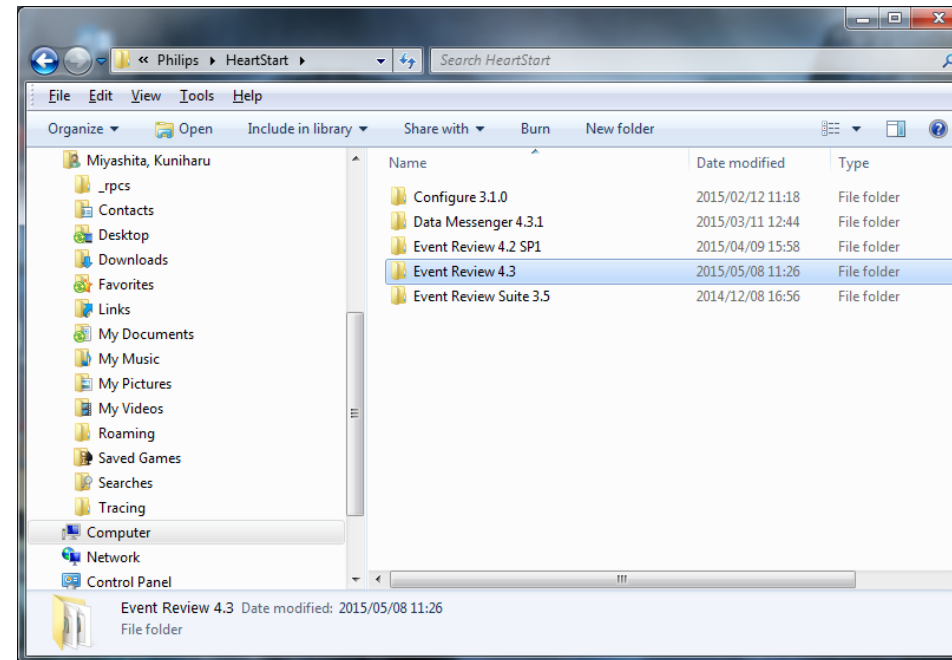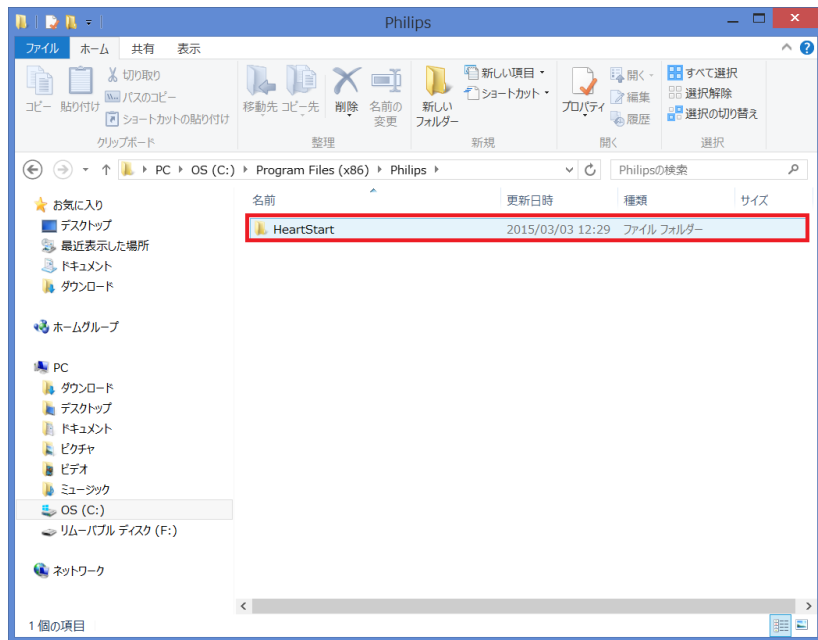

「Heart Start」を開きます

- Event Review 4.2の場合は「Event Review 4.2 SP1」を開きます。
- Event Review 4.3へアップデートしている場合は「Event Review 4.3」を開きます。

# Activatin.binファイルの送付手順③

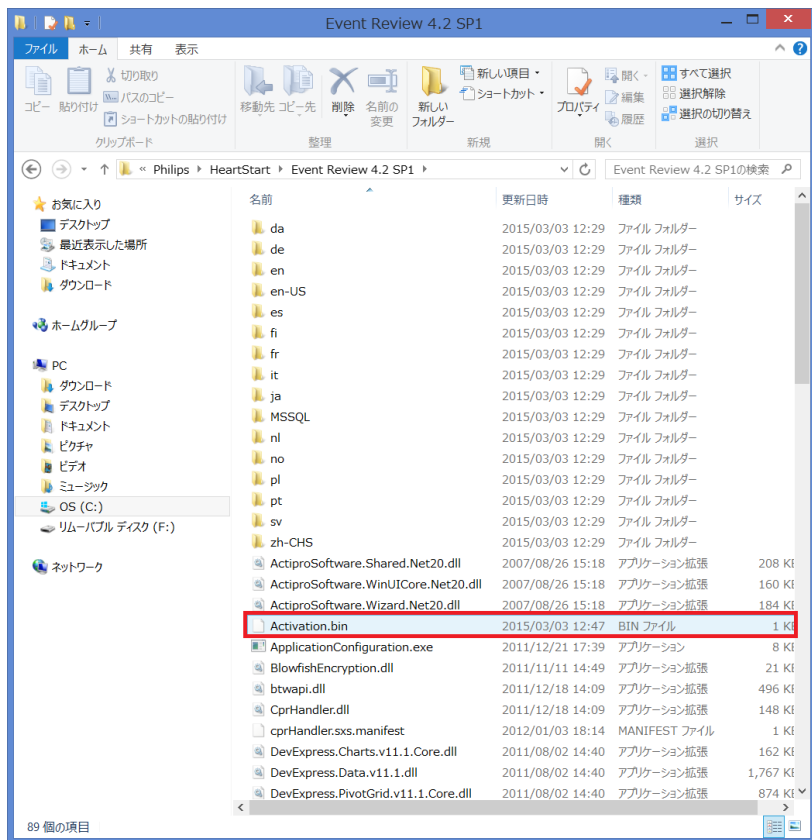

「Activation.bin」というBINファイルをコピーし任意の場所（デスクトップ等）に保存してください。

※拡張子が隠れている場合は「Activation」という名称です。

※切り取り(カット)はしないでください。このフォルダ内に「Activation.bin」があることが重要です。




# メール送付時の注意事項


- 宛先: [HelpDesk@laerdal.co.jp](mailto:HelpDesk@laerdal.co.jp)  
件名: イベントレビュー アクティベーション依頼 ○○消防署  
本文に所属、ご担当者名、連絡先、入力したシリアル番号を記載してください。
- 添付する「Activation.bin」のファイル名は絶対に変更しないでください。
- Zip fileなどに入れず、直接添付してください
- 1件の依頼につき、1つのファイルをご送付ください。複数ある場合は複数に分けてご依頼ください。
- ファイルの暗号化はご遠慮いただくようお願い致します。

# アクティベーションコードの入力①

お客様よりActivation.binファイルを受領致しましたら、アクティベーションコードの発行手続きに入ります。発行完了次第、いただきましたメールの返信にてアクティベーションコードを通知致します。※アクティベーションコードの返送までに数日いただく場合がございます。予めご了承ください。

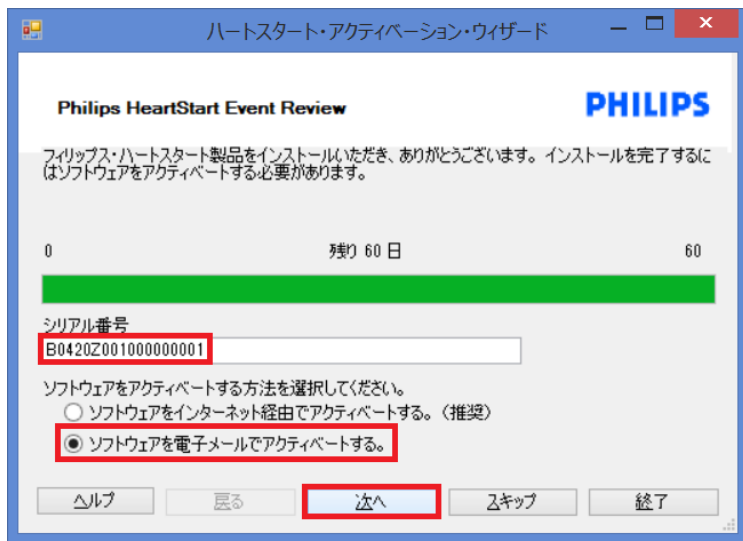

Event Reviewを起動し、上記画面にて「ソフトウェアを電子メールでアクティベートする」にチェックを入れ、「次へ」をクリック

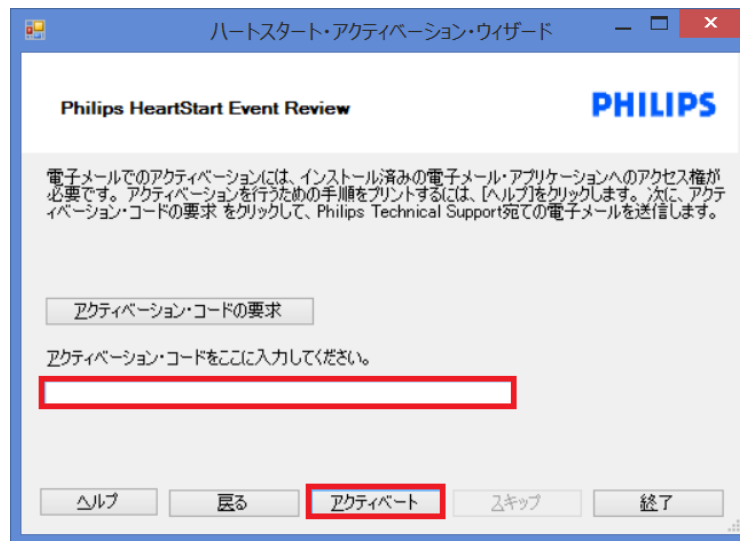


返信メールに記載されたアクティベーションコードを入力し、「アクティベート」をクリックしてください。

# アクティベーションコードの入力②



アクティベーションに成功すると上記画面が表示され、試用期間60日の制限が解除されます。

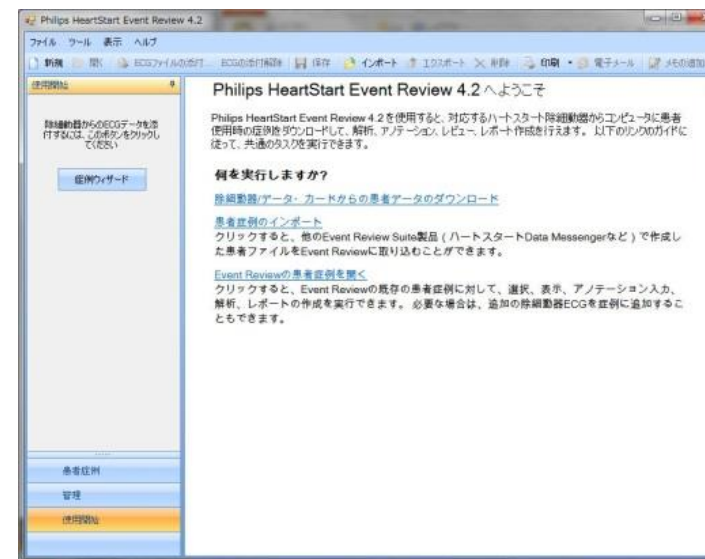

「OK」をクリックし、再度Event Reviewを起動してください。  
アクティベーションウィザードは表示されず。Event Reviewが直接起動します。

以上、終了