


Brugervejledning

Laerdal

Upright Resuscitator

GENANVENDELIG – KAN AUTOKLAVERES

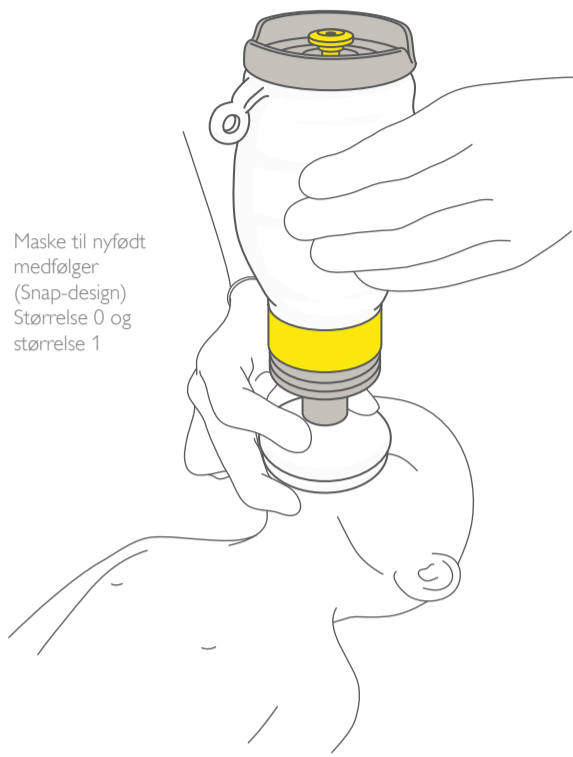


Maske til nyfødt medfølger (Snap-design) Størrelse 0 og størrelse 1

REF kat. nr. 8560511 ANTAL 1 hver



Tilbehør og reservedele

Kat. nr.	Beskrivelse
856156	Maske til nyfødt - Snapdesign – str. 0*
856157	Maske til nyfødt - Snapdesign – str. 1* *10 stk.
8561733	Oxygensæt (komplet) indeholder iltadaptor, ventil, opbevaringspose og slange
846131	Oxygen-opbevaringspose og slange
856155	Upright-ventiler og membransæt* (læbeventil, indgangsventilskivemembran) *10 stk.

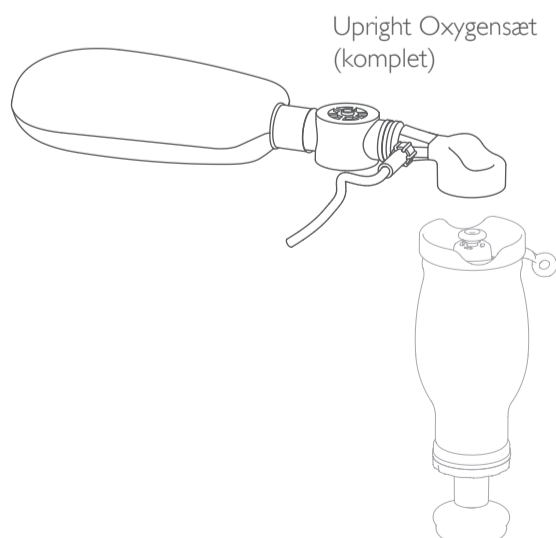

Brugervejledning

Anvendelsesformål

Laerdal Upright Resuscitator ("Upright") er et selvoppusteligt, manuelt betjent og genanvendeligt genoplivelsesapparat til nyfødte og babyer op til 10 kg kropsvægt, som kræver kunstigt åndedræt.


Upright kan kun levere ekstra ilt ved brug sammen med det medfølgende tilbehør "Oxygensæt".

Upright kan genanvendes, forudsat at proceduren på side 2 følges for hver patient. Den skal rengøres og desinficeres før første patient.

Brug af Upright

Orientering: Upright betjenes som almindeligt genoplivelsesapparat med posen lodret over masken.

Nyfødte - masken passer til almindelige koniske koblinger med en indvendig diameter på 15 mm, som defineret i ISO 5356-1. Kontroller, at den passer inden brug med andet udstyr. Når den bruges sammen med Upright, låses masken fast med et hurtigt klik, når den trykkes helt på plads.

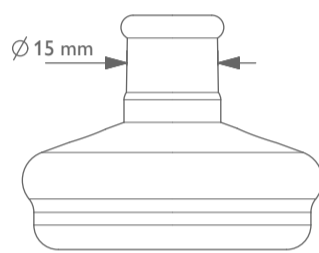

Trykventil: Upright har en trykventil ("pop-off") med begrænsning af luftvejstrykket til 30-45 cmH₂O. Der høres en hvæsende lyd, når ventilen åbnes. Hvis der kræves et større luftvejstryk, trykkes der ned på ventilen med pegefingeren samtidig med, at der klemmes på posen.

Opkast: Hvis patientventilen kontamineres med opkast, rengøres ventilen ved at ryste Upright og klemme kraftigt på posen for at fjerne opkastet. Hvis det ikke hjælper, adskilles patientventilen (se side 2), den skylles med vand og samles igen.

Er der en løs komponent et sted, skal den strammes, eller enheden adskilles og testes ifølge side 2.

Advarsler

Upright må kun anvendes af personer, som er tilstrækkeligt undervist i brugen. Forkert betjening af Upright kan være farlig.

Anvend ikke Upright, hvis der er grund til at tvivle på apparatets funktionsevne.

Med henblik på korrekt funktion skal det sikres, at komponenter i Upright ikke blandes eller forveksles med lignende, uoriginale Laerdal-komponenter. Alle Upright-komponenter er mærket LAERDAL, jf. side 2.

Vigtig produktinformation

Regulatorisk

CE 0434

Dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav i Rådets direktiv 93/42/EØF som ændret ved Rådets direktiv 2007/47/EF.

Tekniske oplysninger

Opfylder ISO 10651-4:2002/EN ISO 10651-4:2009, lungeventilatorer – navnlig krav til operatørdrevne genoplivelsesapparater.

Patientport på Newborn Mask Snap passer til normal 15/22 mm kobling

Driftstemperatur	-18 °C til 50 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C til 60 °C
Ekspiratorisk modstand	< 2,5 cmH ₂ O ved 5 LPM
Inspiratorisk modstand	< 0,5 cmH ₂ O ved 5 LPM
Tidalvolumen	> 150 ml
Dødrum	4 ml (vandvolumen)
Udvendige mål (med maske til nyfødt str. 1)	Ca. 72 mm x 85 mm x 217 mm
Vægt (med maske til nyfødt str. 1)	Ca. 190 gram

Materialer

Hårde plastikdele: Polysulfon (PSU)
Bløde plastikdele: siliciumkarbid
Fjeder: rustfrit stål
Ikke fremstillet med naturgummilatex.

Producentinformation

Global garanti: Se www.laerdal.com

Fremstillet i Kina for:
Laerdal Medical AS, Tanke Svilandsgate 30
P.O. Box 377, 4002 Stavanger, Norway
Tlf.: +47 51 51 17 00
Fax: +47 51 52 35 57
E-mail: laerdal.norway@laerdal.no

Afventer amerikansk og international designregistrering.
Laerdal® er et registreret varemærke tilhørende Laerdal Medical AS.

© 2015 Laerdal Medical AS,
Alle rettigheder forbeholdt.

Vejledning angående fremgangsmåde

1. Produktoversigt

Adskilles ifølge trin 1-6. Montering sker i omvendt rækkefølge.



Adskil ikke andre dele end vist nedenfor. Med henblik på korrekt funktion må der kun anvendes dele mærket LAERDAL (placering som vist ovenfor).

2. Rengøring og desinfektion

1. Afmonter	2. Rengør	3. Desinficer med en af metoderne	4. Tør og inspicer	5. Saml og test
<p>Adskil altid Upright inden rengøring.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Vask alle dele i en ren balje med rent vand og mild sæbe. Brug en svamp eller børste til at fjerne enhver form for snavs. Skyl dele i rent vand for at fjerne al snavs og sæbe. Gentag ovennævnte trin, til delene er rene. 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>100 °C 10 minutter</p> <p>Koges*</p> <p>Kog alle dele i rent vand i 10 min.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ELLER</p> <p>Dampes ved 136 °C 10-20 minutter</p> <p>Autoklavering</p> <p>Steriliseres med damp og autoklavering ved 136 °C og 2,0 kg/cm² i 10-20 min.</p> </div> </div> <p><small>*Valideret cirka ved havoverfladetryk.</small></p>	<ol style="list-style-type: none"> Tør alle dele. Inspicer visuelt for skader og renhed/mineralforekomster. Fjern beskadigede eller urene dele, og brug dem ikke igen. 	<p>Saml Upright igen.</p> <p>Test som vist nedenfor.</p>

3. Test inden brug

1. Læbeventilfunktion	2. Trykventil	3. Indgangsventilåbning	4. Produktforsegling
<p>Klem posen. Kontroller, at den gule ventil åbner og lukker med hvert klem.</p>	<p>Luk masken mod hånden. Klem posen kraftigt. Kontroller, at luften slipper ud af overtryksventilen.</p>	<p>Hold masken lukket mod hånden. Slip den klemte pose. Kontroller, at posen udvider sig igen uden modstand.</p>	<p>Hold masken lukket mod hånden. Tryk overtryksventilen ned. Klem posen og kontroller, at der ikke er lækager.</p> <p>Kontroller, at silikoneposens kant ikke vrides eller klemmes.</p>

Hvis en af disse tests ikke opfyldes: Adskil Upright, efterse delene, saml Upright og gentag alle trin i "Test inden brug" (afsnit 3).