


SimMan 3G Trauma

Guía de configuración rápida

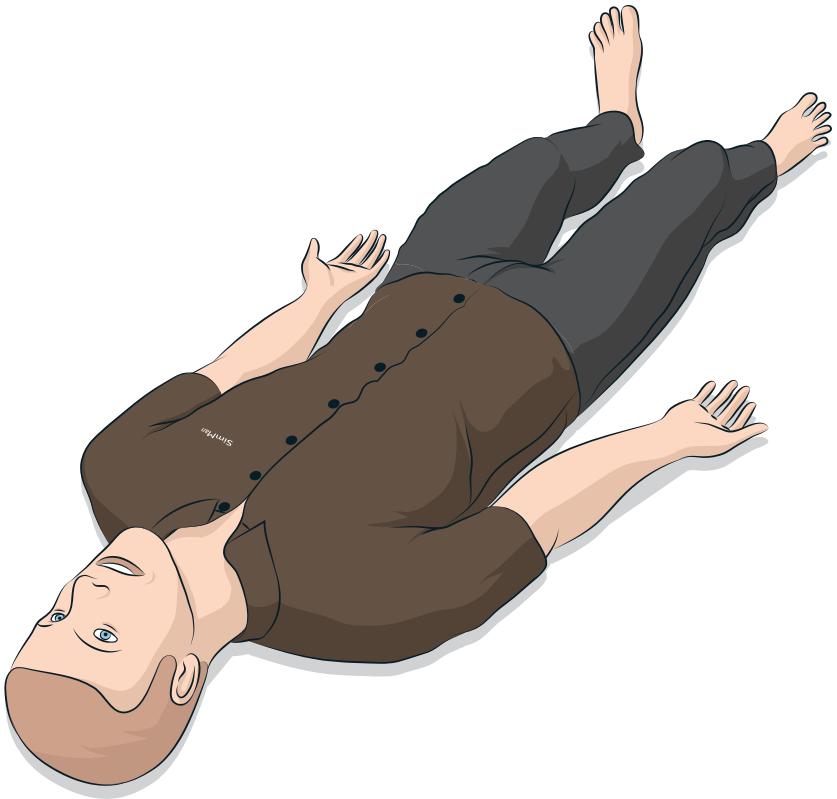


Este manual de configuración rápida describe cómo ensamblar y configurar su simulador del paciente SimMan. Para obtener información sobre cómo utilizar SimMan, consulte los archivos de ayuda de LLEAP y el manual de usuario de SimMan.

Visite www.laerdal.com/download para descargar el último manual del usuario y software.



COMPONENTES


Torso

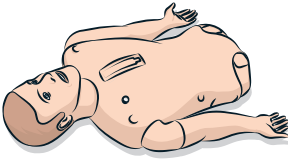

Manual del usuario e información importante del producto




Piernas

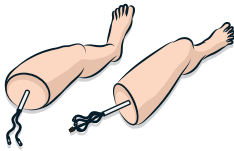

Dientes de la parte superior




Brazos amputados

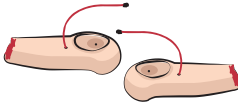

Tensor ECG y Desfibrilador



Piel de pierna derecha amputada

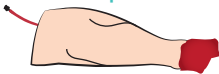

Adaptador electrodos ECG



Pierna izquierda amputada



Junta tórica de distensibilidad pulmonar x 10




Ropa



Botellas de llenado de fluido y sangre



Kit de heridas

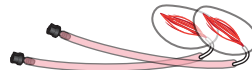

Genitales masculinos y femeninos



Pleura de drenaje del tórax x 6



Concentrado de sangre



Lubricante de vía aérea




Manguito del
esfigmomanómetro



Bolsa IV



Piel de cuello
x6

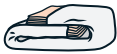

Almohadillas y hueso
para tibia
x3



Almohadillas IM



Almohadillas y hueso
para esternón
x 4




Polvos de talco



Pinza




Filtro sangre
x 2

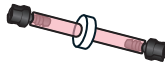

Almohadillas de espuma
pierna IM




Neumotórax

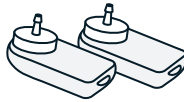

Cinta cricotiroides



Tornillos

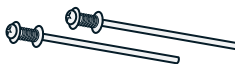

Adaptador de
brazo SimMan



Pulsera de identificación



Auriculares



Teclado y ratón



Sonda de SpO₂



Cable Ethernet



Herramientas




Fuente de alimentación
externa




Cargador de baterías
x 2








Monitor paciente



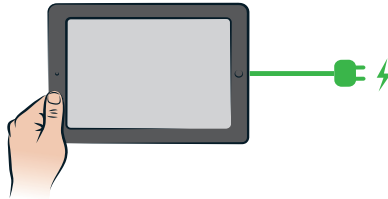


PC del instructor

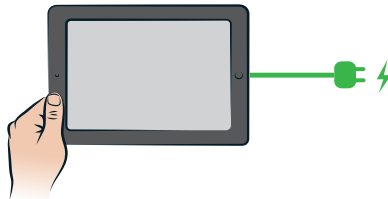

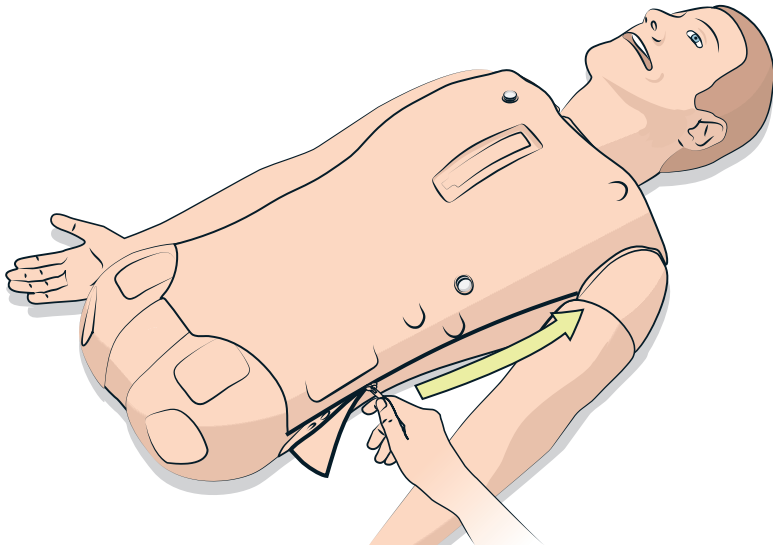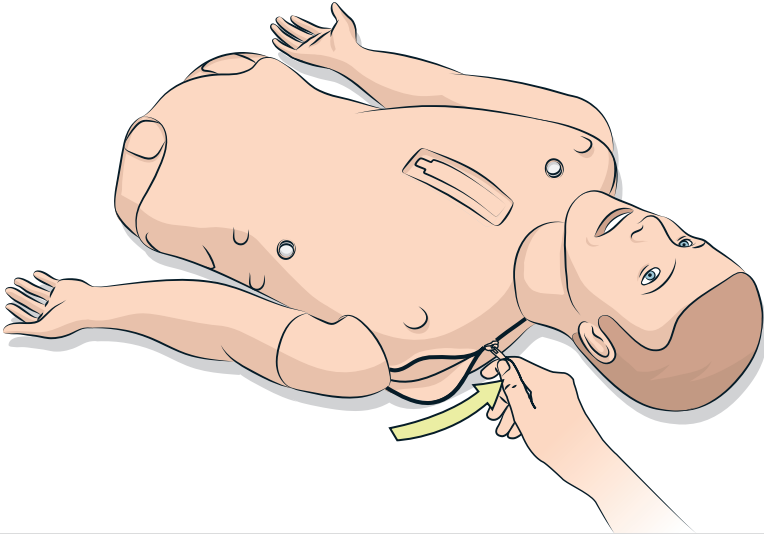


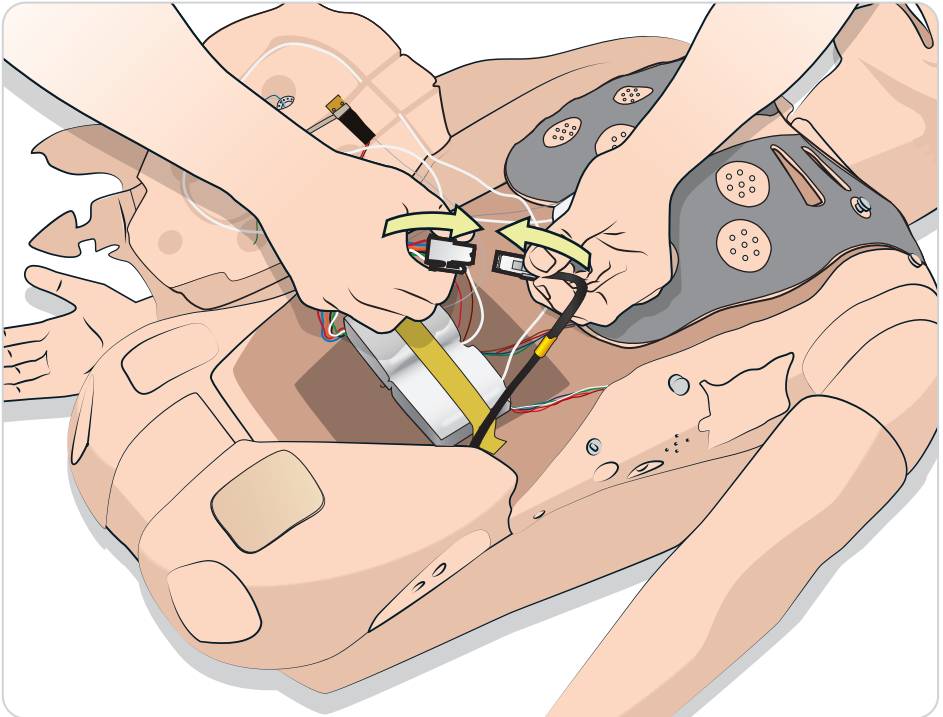
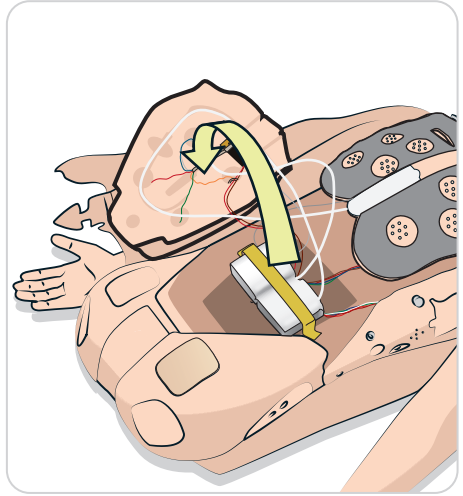
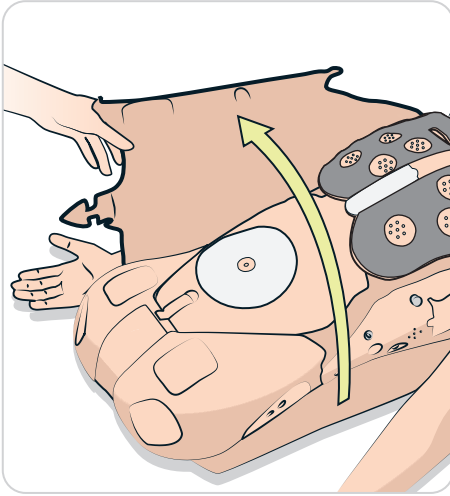


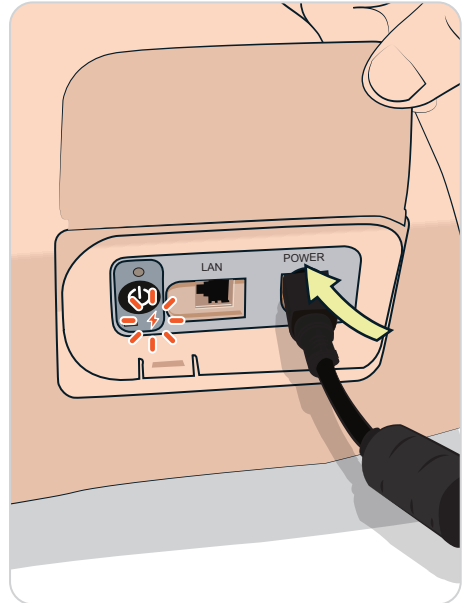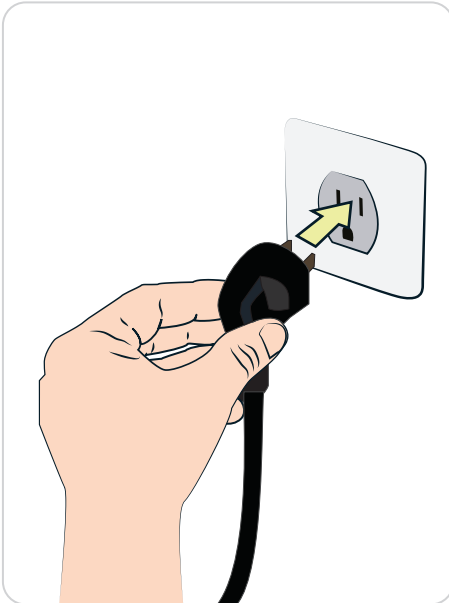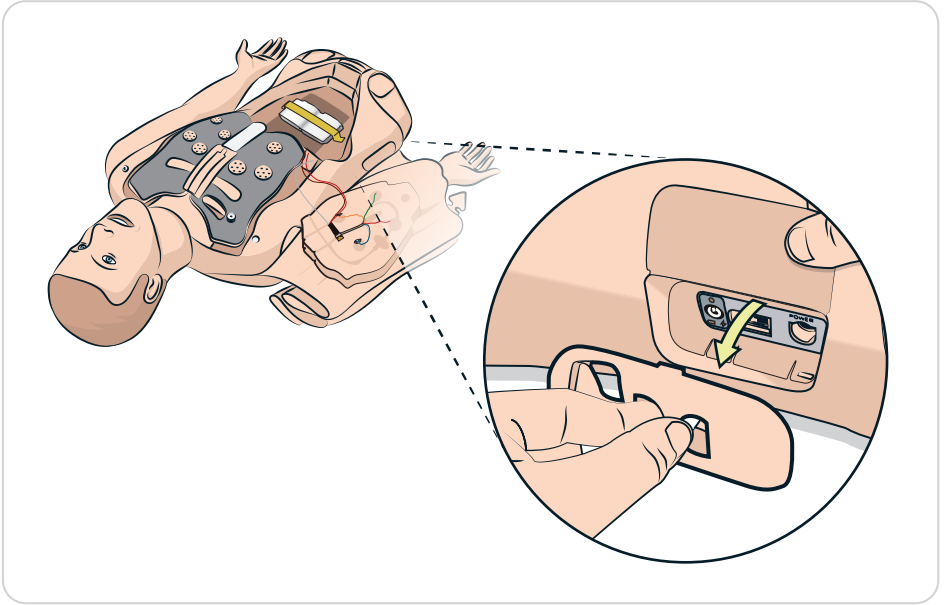





5

CONECTAR PIERNA IZQUIERDA

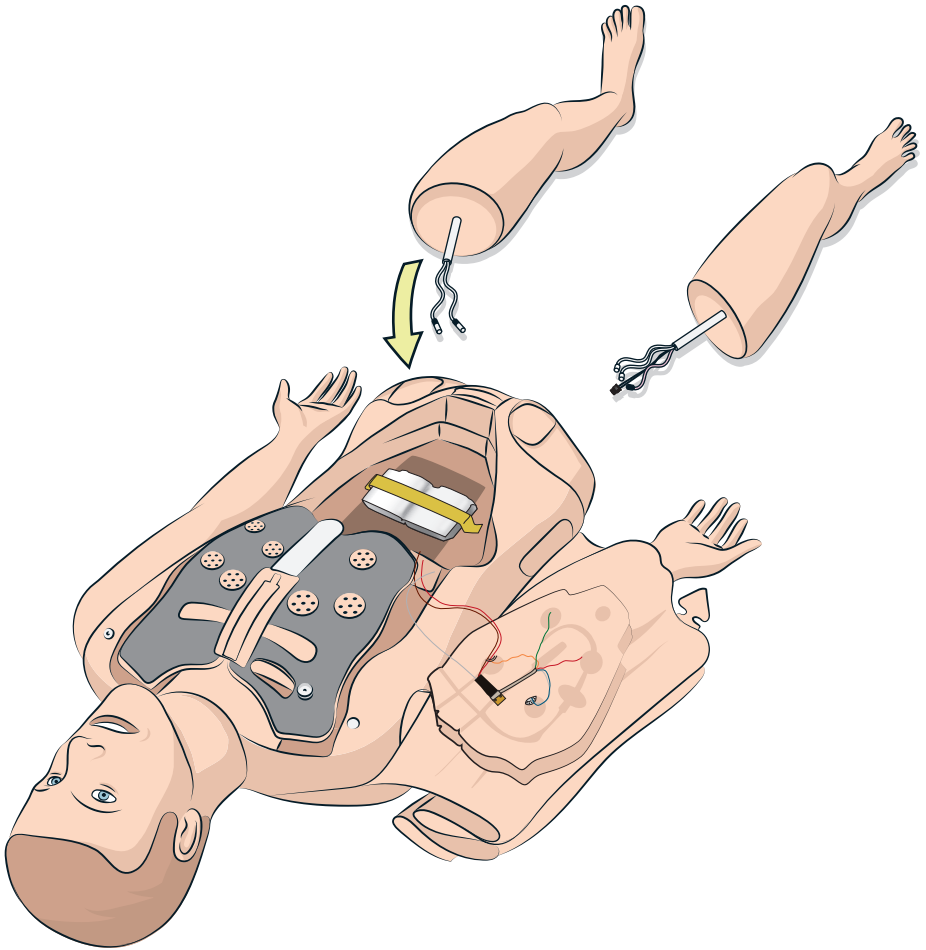

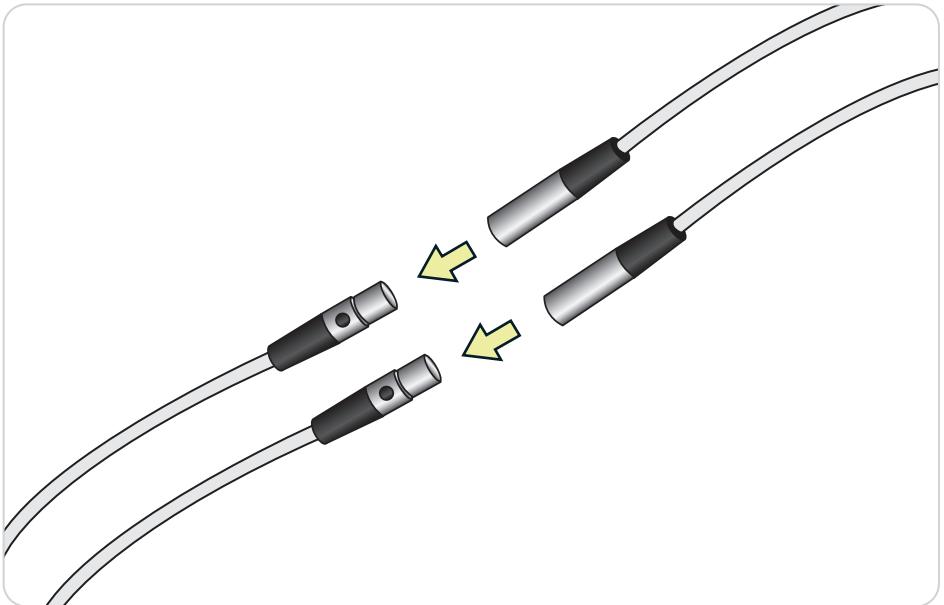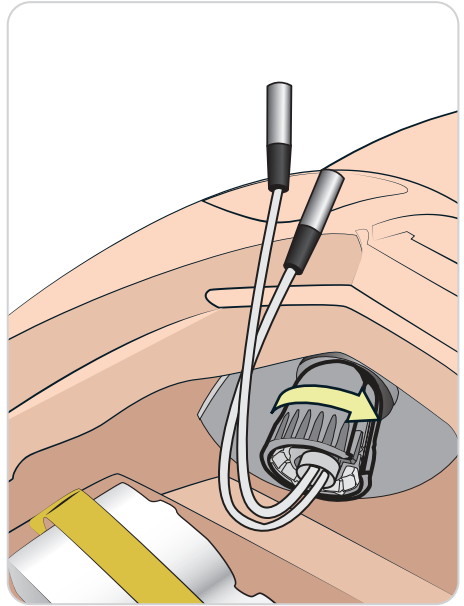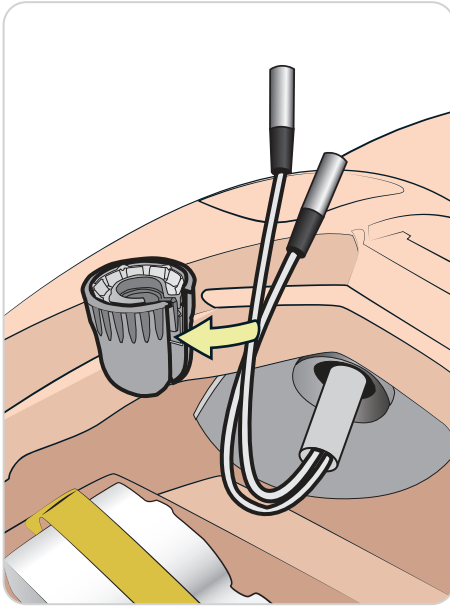

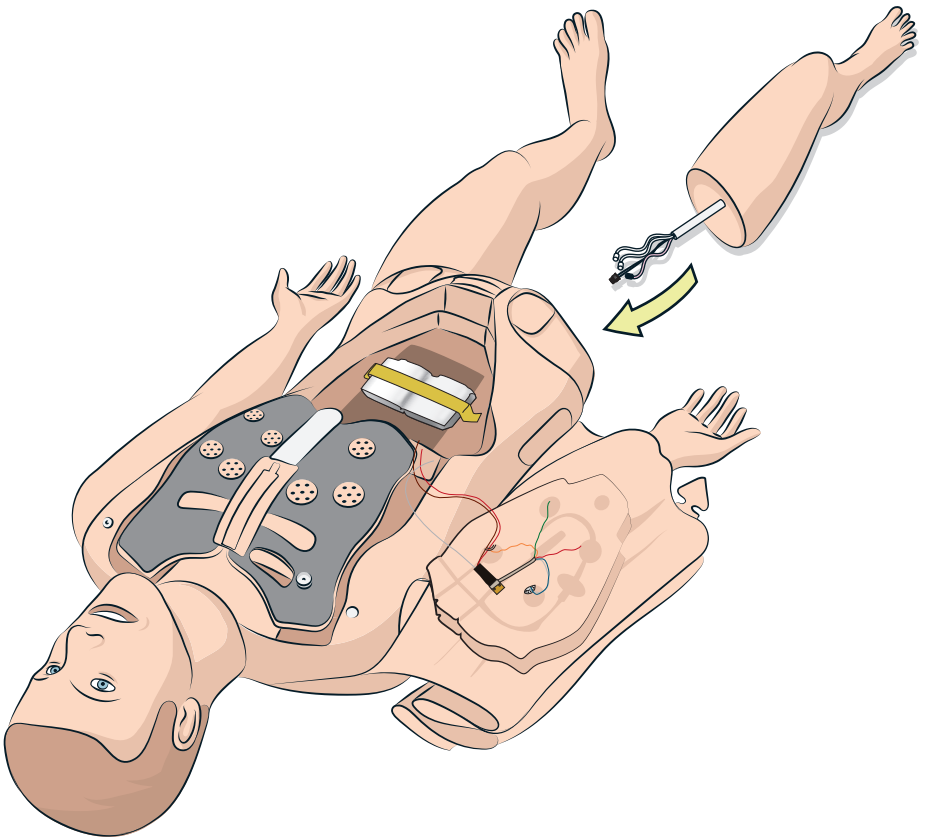

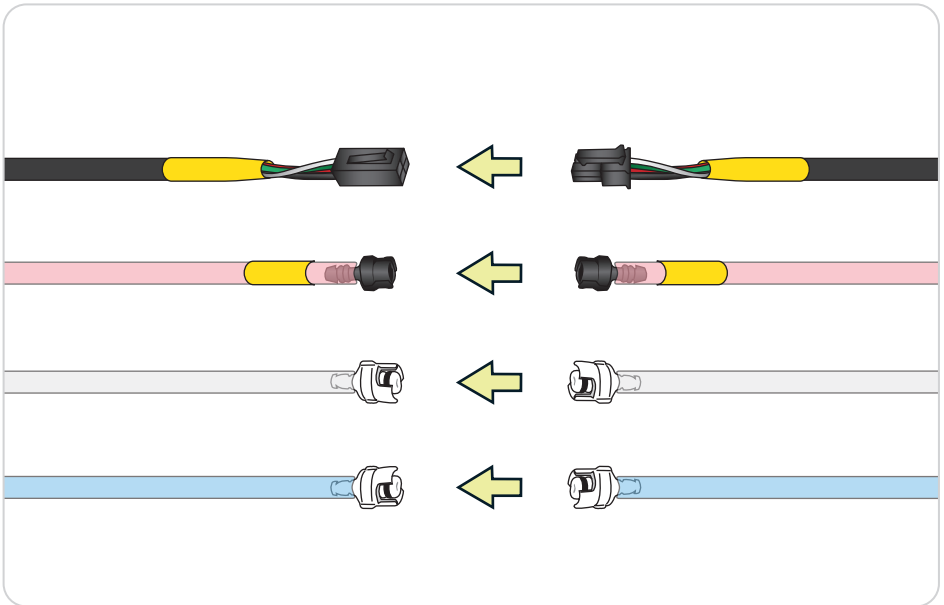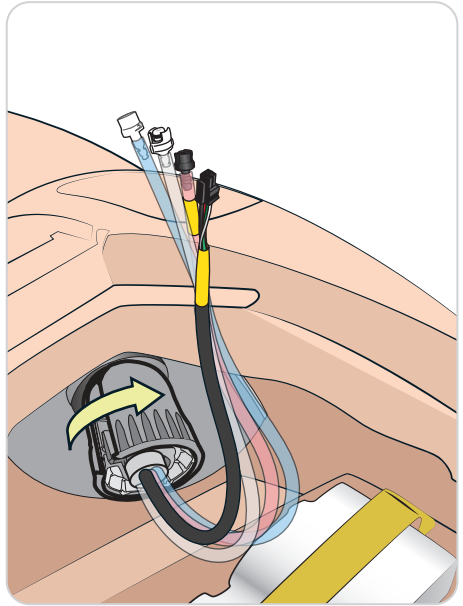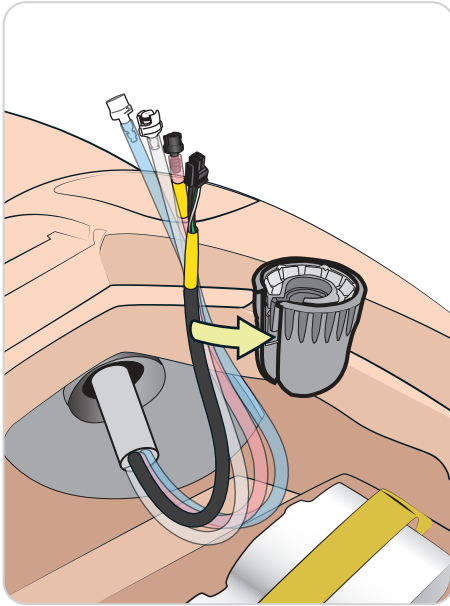


7_A

CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA

Auriculares




PC del instructor

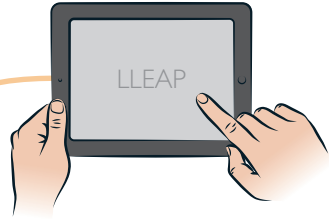

SpO₂



Monitor paciente

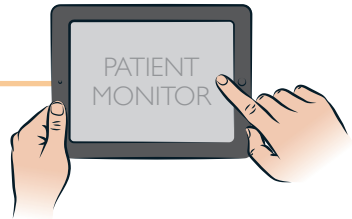

Cable USB —


7_B

CONFIGURACIÓN CON CABLE


Auriculares



PC del instructor

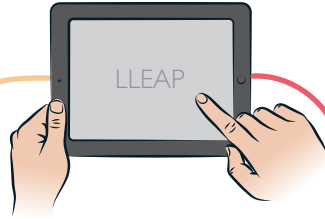



Switch

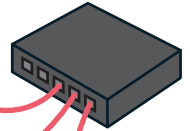

SpO₂



Monitor paciente

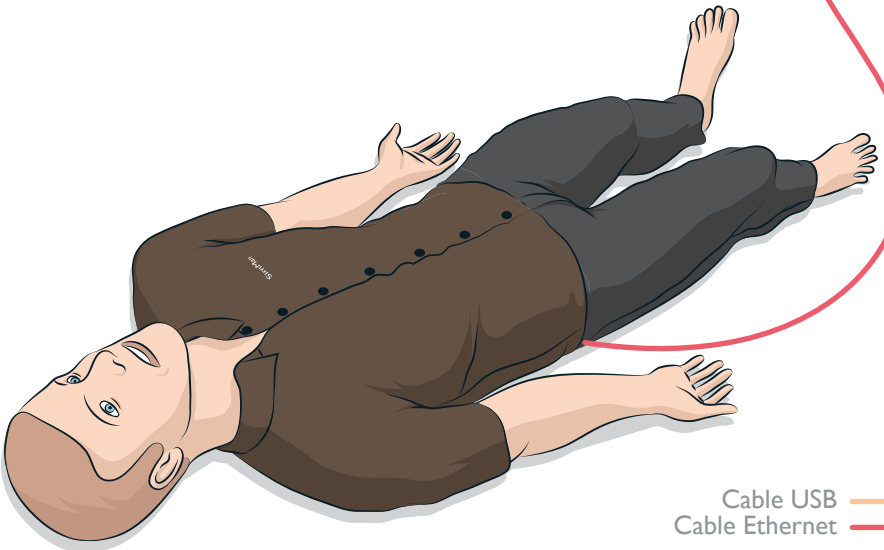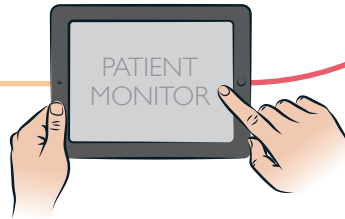

Cable USB —
Cable Ethernet —

© 2016 Laerdal Medical AS. Reservados todos los derechos.
Printed in Norway

20-08140 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives