


SimMan 3G Trauma

Guia de configuração rápida

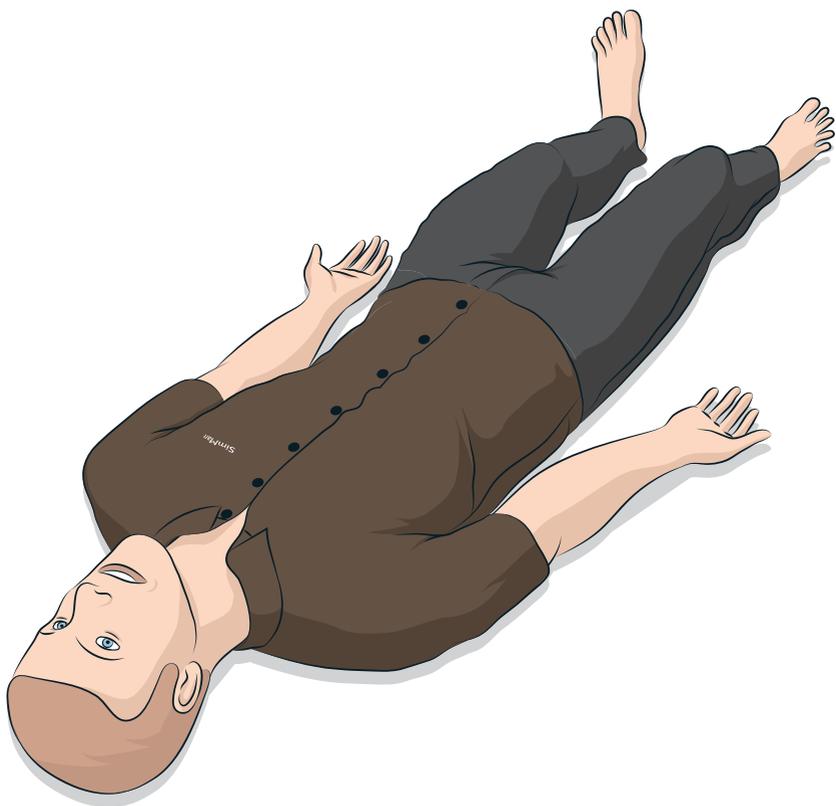


Este Guia de configuração rápida descreve como montar e configurar o simulador de paciente SimMan. Para obter informações sobre como usar o SimMan, consulte os arquivos de ajuda do LLEAP e o guia do usuário do SimMan.

Visite www.laerdal.com/download para fazer o download das versões mais recentes do software e do guia do usuário.



COMPONENTES


Torso

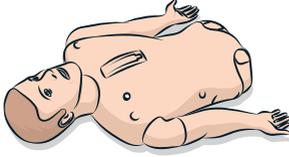


Pernas



Braços amputados

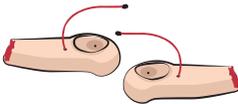

Pele da perna direita amputada

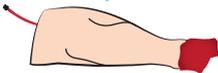

Perna esquerda amputada



Roupas



Genitália masculina e feminina



Guia do usuário & Informações importantes sobre o produto



Arcada dentária superior rígida



Chave para plug do desf. de ECG



Eletrodo do adaptador de ECG



Anel de complacência pulmonar x 10



Frascos de reabastecimento de fluido e sangue



Kit de feridas



Pleura de drenagem torácica x 6



Hemoconcentrado



Talco



Pulseira de identificação



Lubrificante de vias aéreas



Grampo



Fone de ouvido




Manguito de pressão arterial



Linha de sangue com filtro x 2



Teclado e mouse

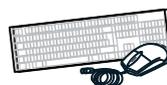

Bolsa IV



Blocos de espuma da perna para IM



Cabo de SpO₂



Pele do pescoço x 6



Pneumotórax



Cabo Ethernet



Osso e placas tibiais x 3



Fita para Cricotireóideo



Ferramentas



Placas IM



Instrumentos de montagem



Fonte de alimentação externa



Osso e placas esternais IO x 4




Adaptador de braço do SimMan




Carregador de bateria x 2



Monitor do paciente


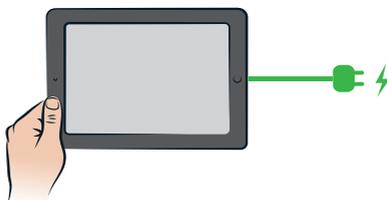





PC do instrutor



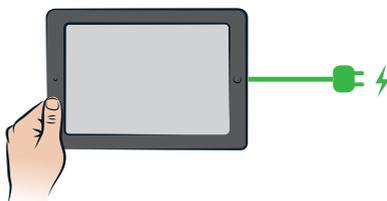


2

ABRIR O ZÍPER DA PELE DO TORSO

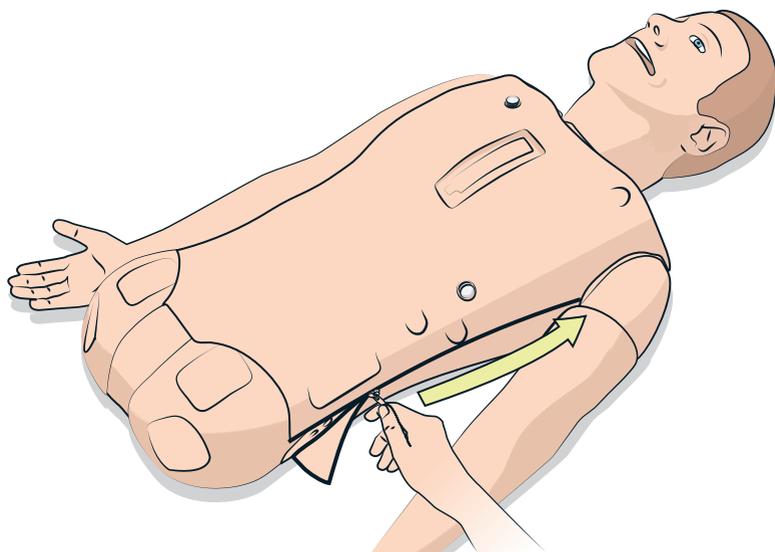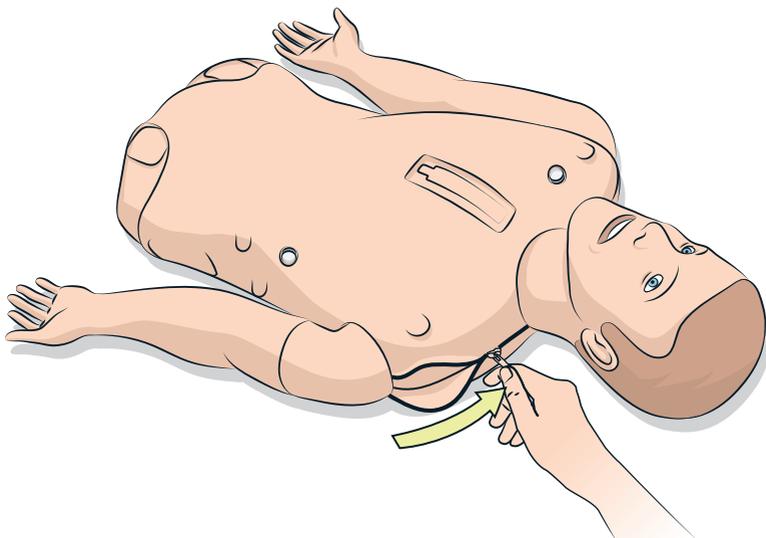


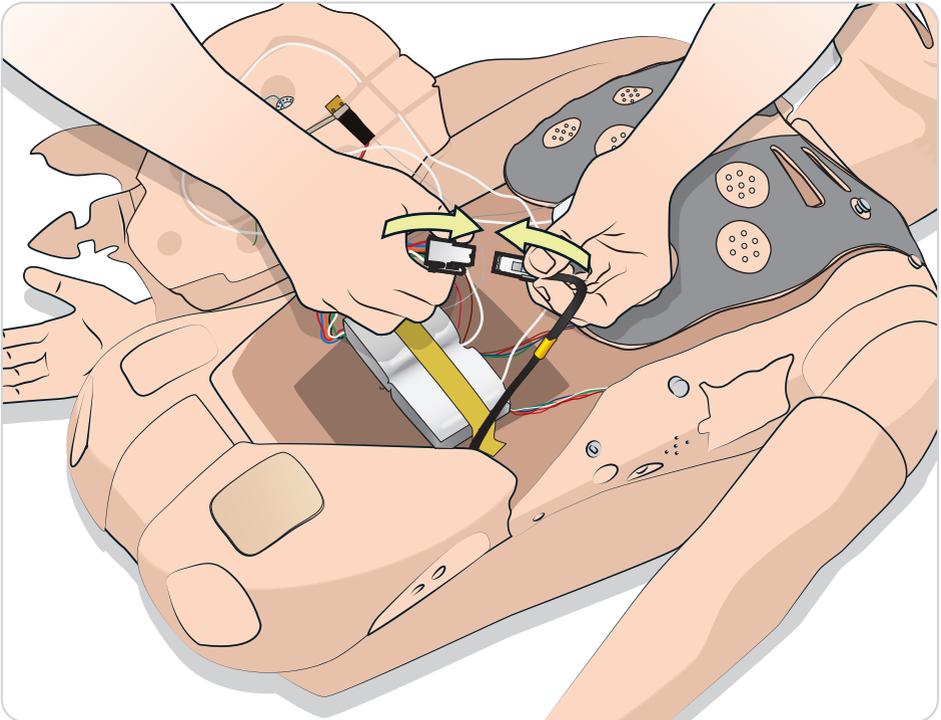
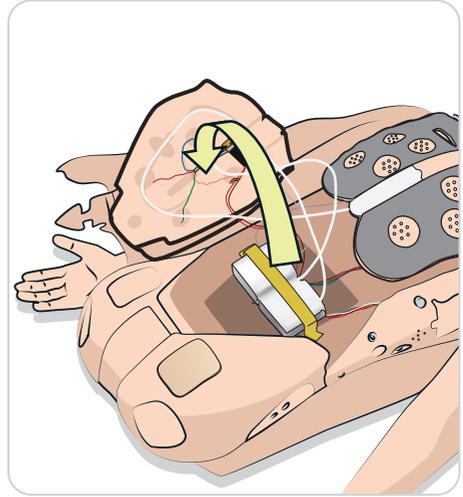
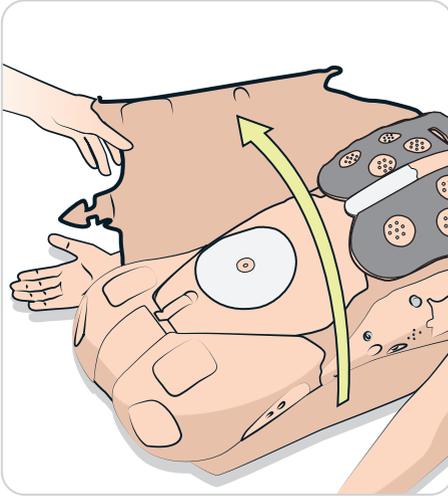


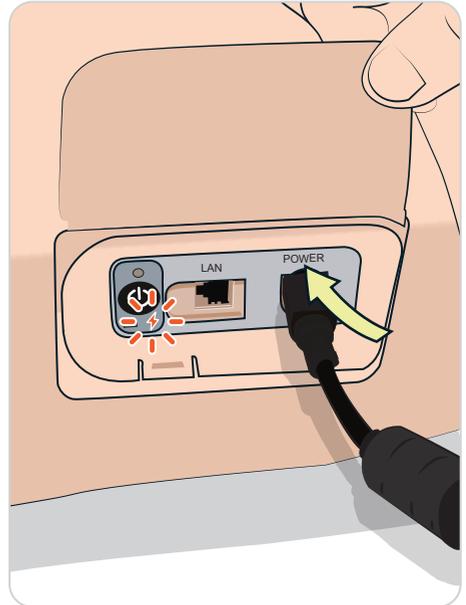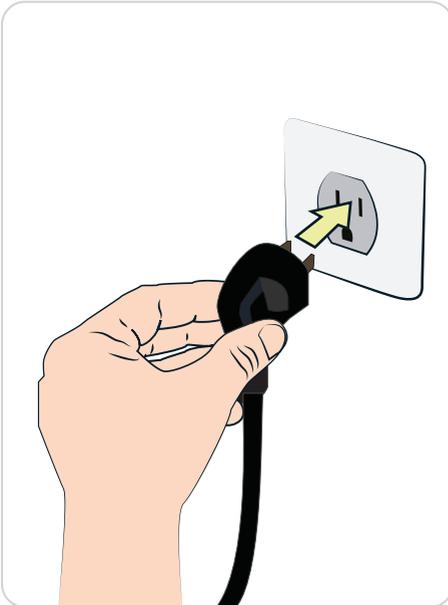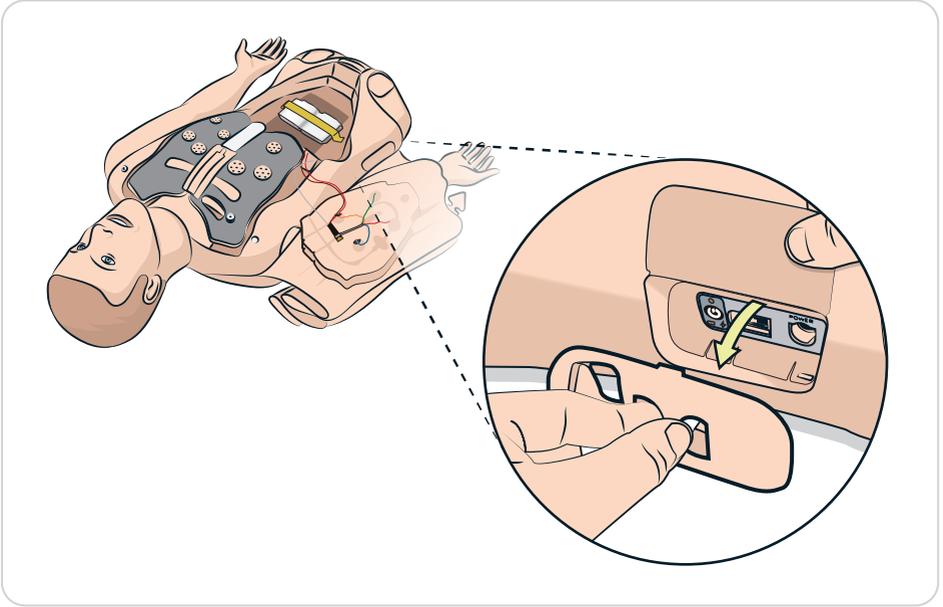





5

ACOPLAR A PERNA ESQUERDA

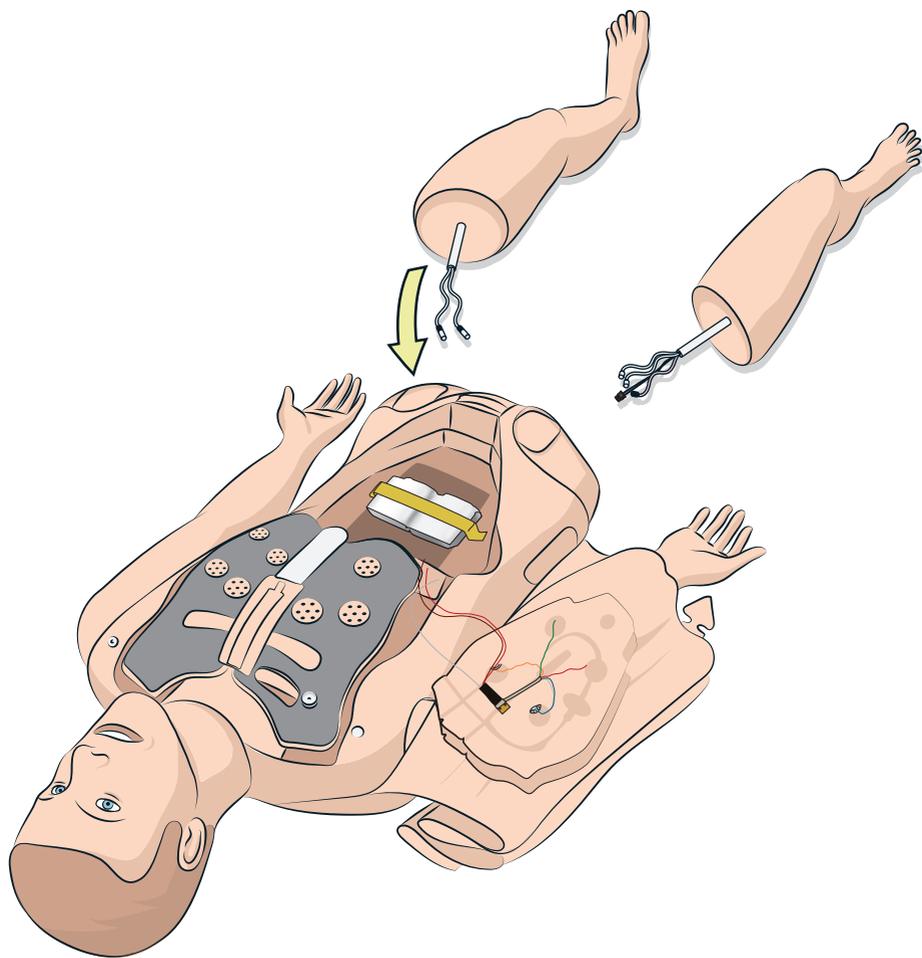

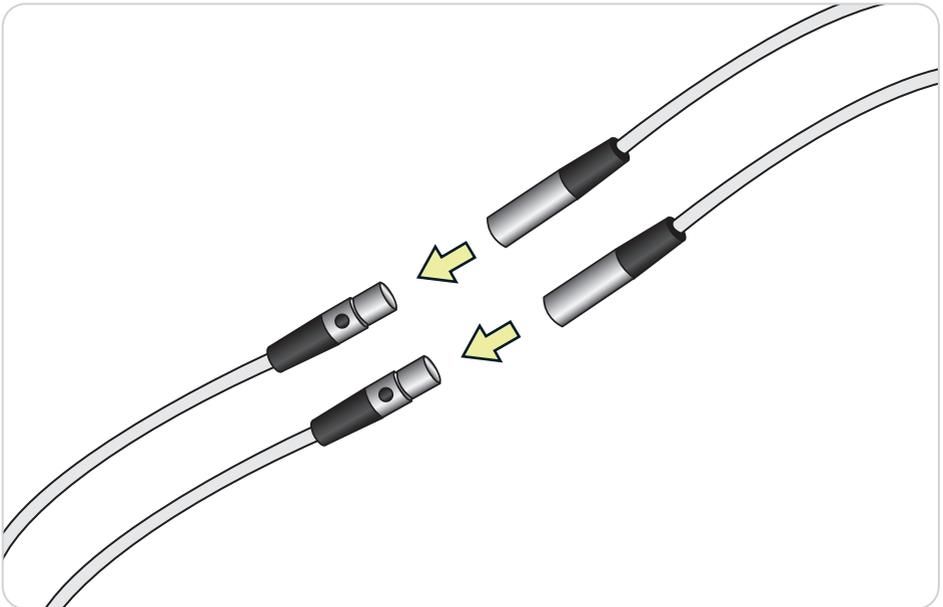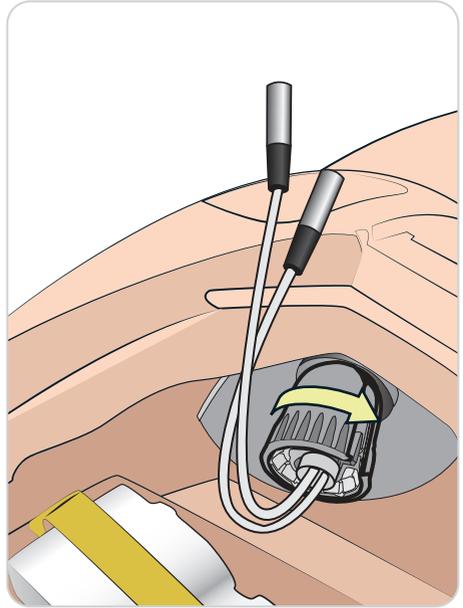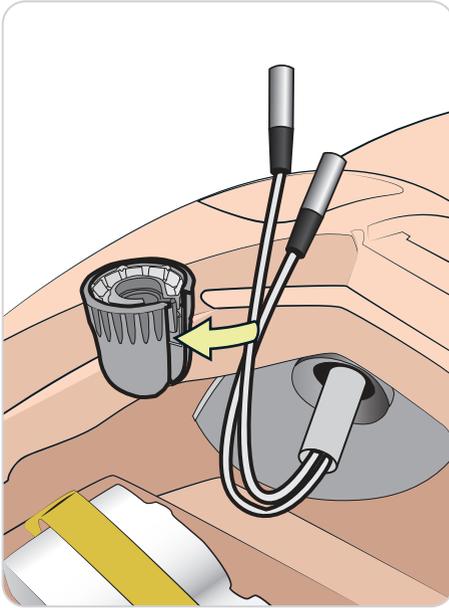

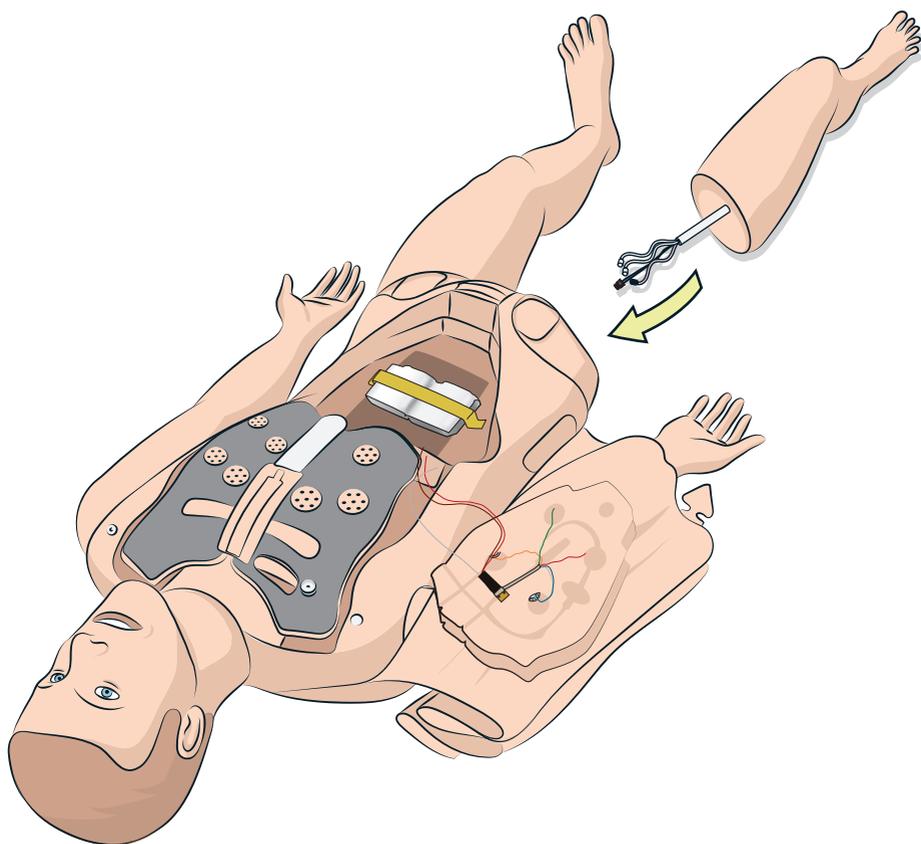

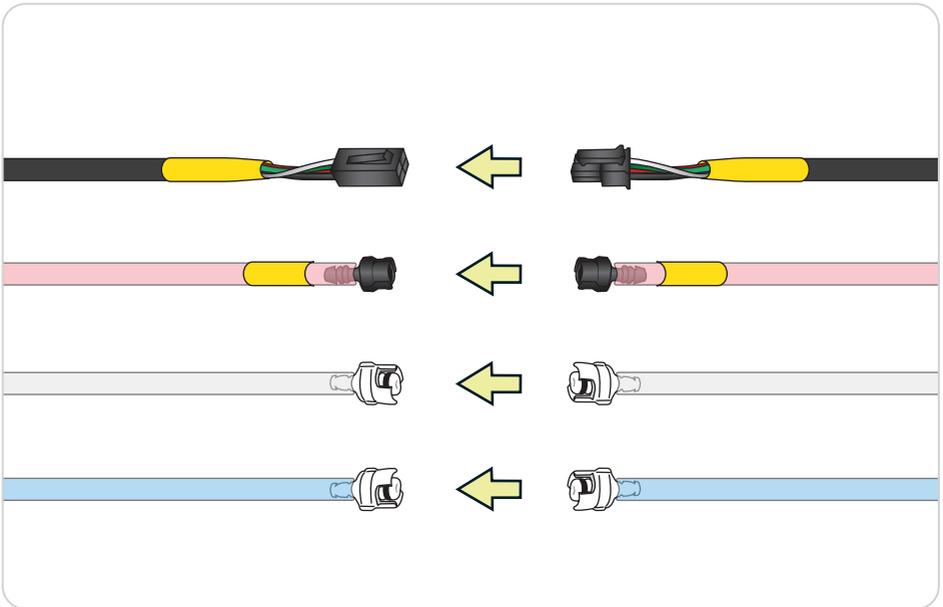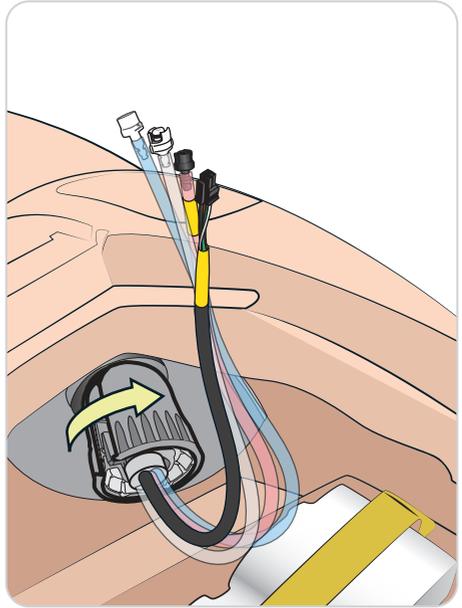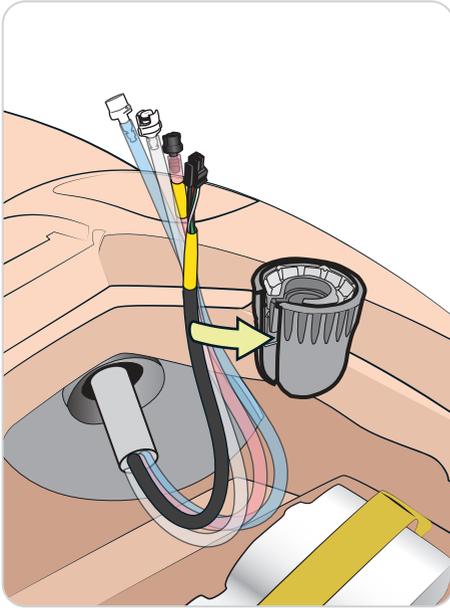

7_A

CONFIGURAÇÃO SEM FIO

Fone de ouvido




PC do instrutor



SpO₂



Monitor do paciente

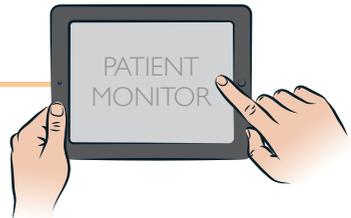


Cabo USB —


Fone de ouvido





PC do instrutor

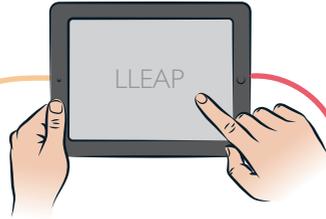

Switch

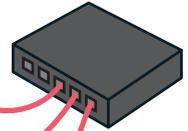SpO₂

Monitor do paciente

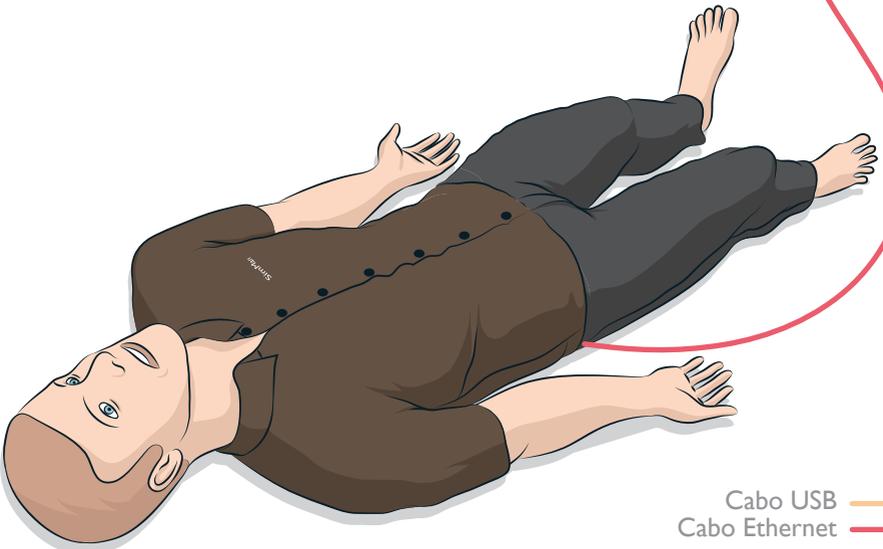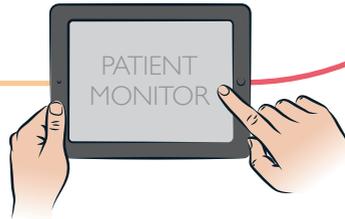

Cabo USB —
Cabo Ethernet —

© 2016 Laerdal Medical AS. Todos os direitos reservados.
Printed in Norway

20-08141 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives