


# SimMan 3G Trauma

Guide de configuration rapide

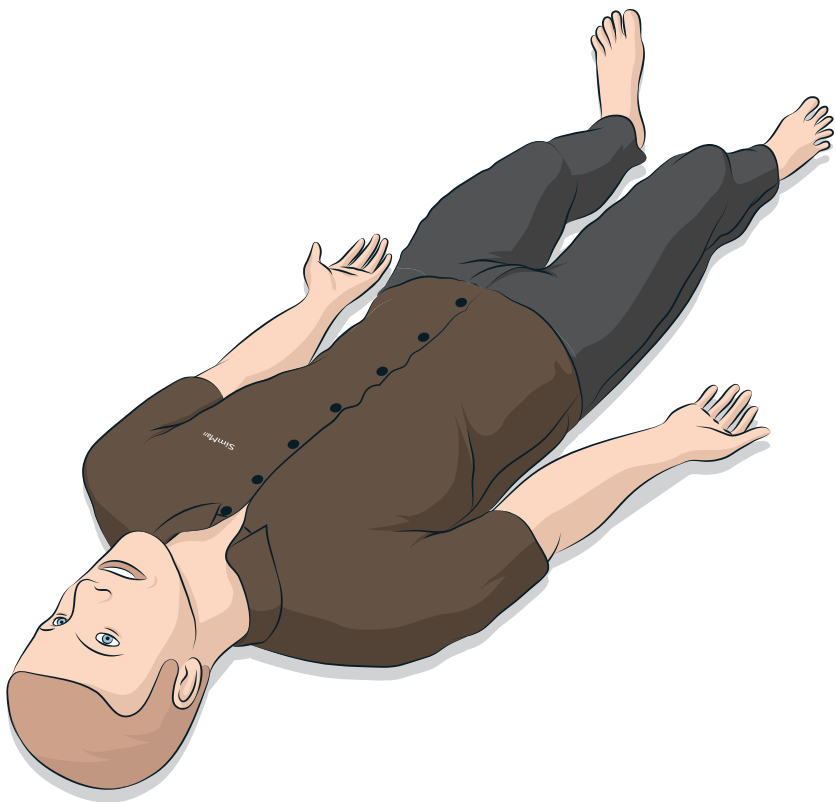




Ce guide de configuration rapide décrit l'assemblage et la configuration de votre simulateur patient SimMan. Pour plus d'informations sur le mode d'utilisation de SimMan, consultez les fichiers d'aide LLEAP et le mode d'emploi SimMan.

Consultez [www.laerdal.com/download](http://www.laerdal.com/download) pour télécharger les dernières versions du mode d'emploi et du logiciel.




# COMPOSANTS


## Tronc

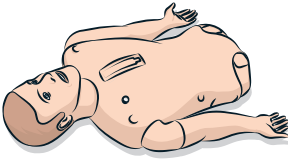


## Jambes

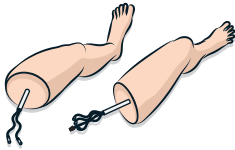


## Bras amputés

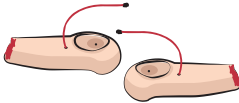

## Peau de jambe droite amputée

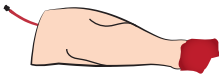

## Jambe gauche amputée

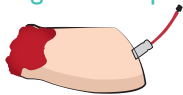

## Vêtements



## Organes génitaux masculins et féminins



## Mode d'emploi et informations importantes sur le produit



## Prothèse dentaire supérieure rigide



## Tendeur pour ECG défib.



## Adaptateurs pour électrode d'ECG



## Joint torique pour compliance pulmonaire x 10



## Unités de recharge en liquides et sang



## Module de plaies



## Plèvre pour module de drain thoracique x 6



Faux-sang concentré



Lubrifiant pour voies respiratoires



Brassard de prise de tension artérielle



Poche IV



Peau du cou  
x 6



Coussinets et os  
du tibia  
x 3



Coussinets IM



Coussinets intra-osseux  
et os du sternum  
x 4




Talc



Pince



Filtre d'intraveineuse,  
sang x 2

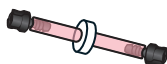

Coussinets en mousse IM  
pour jambe




Pneumothorax



Membrane  
thyrocricoïdienne



Matériel de montage

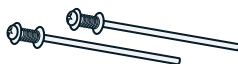

Adaptateur de  
bras SimMan



Bracelet d'identification



Casque



Clavier et souris



Sonde de SpO<sub>2</sub>



Câble Ethernet



Outils



Alimentation externe



Chargeur de batteries  
x 2




# 1


## CHARGEMENT DES BATTERIES DU PC

---

Moniteur patient


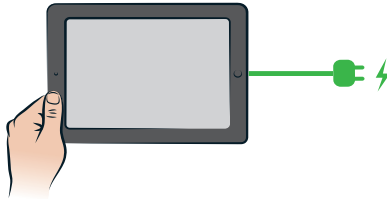





PC du formateur

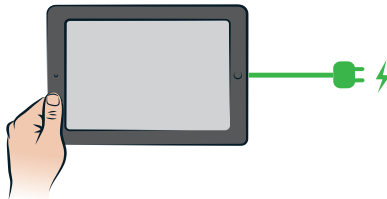




2


## OUVERTURE DE LA FERMETURE À GLISSIÈRE DE LA PEAU DU TORS


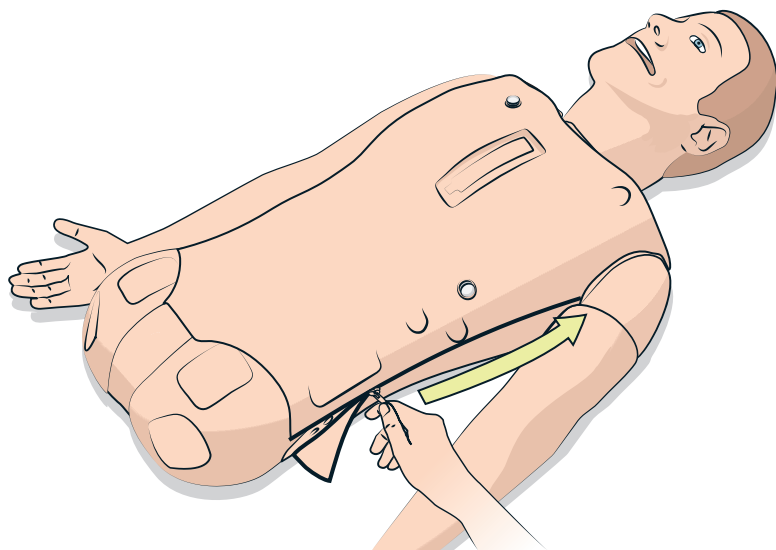
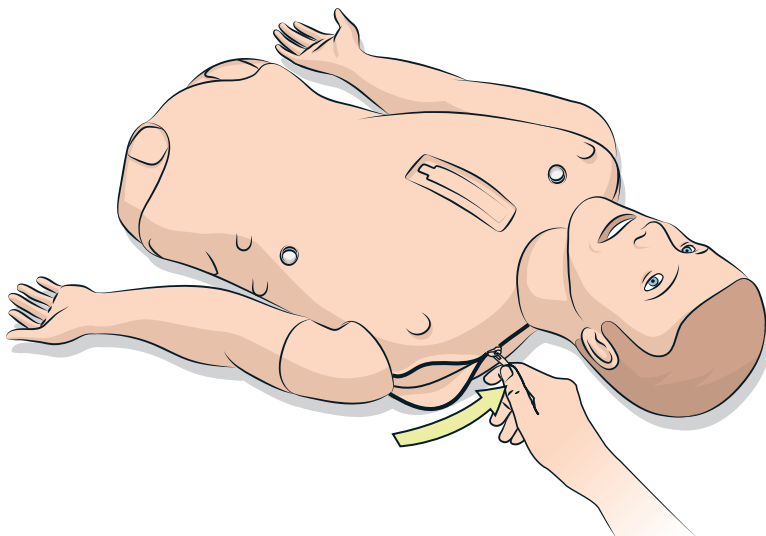


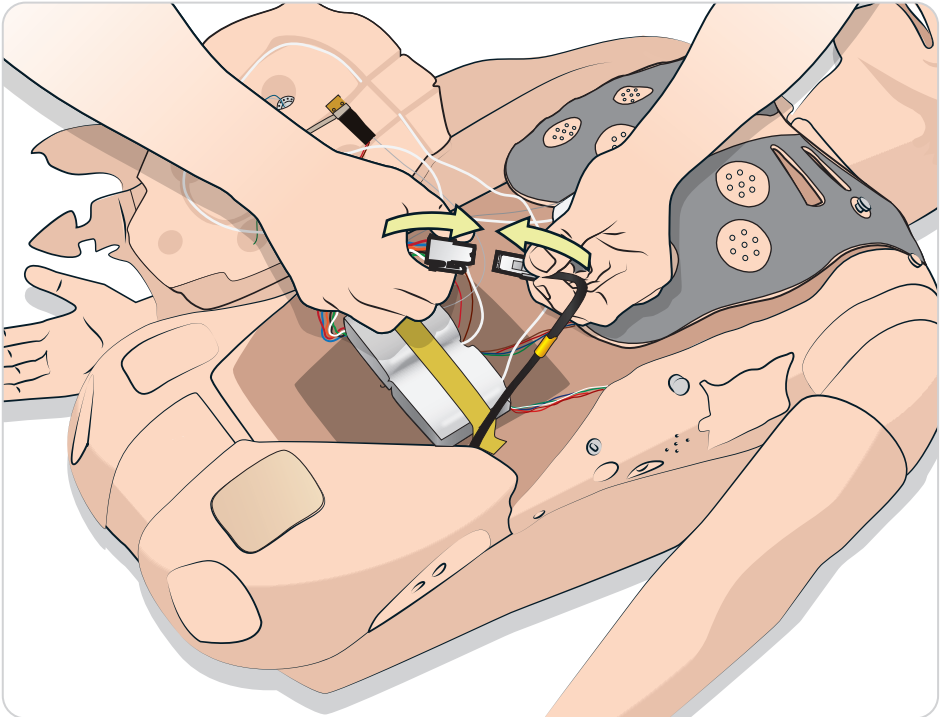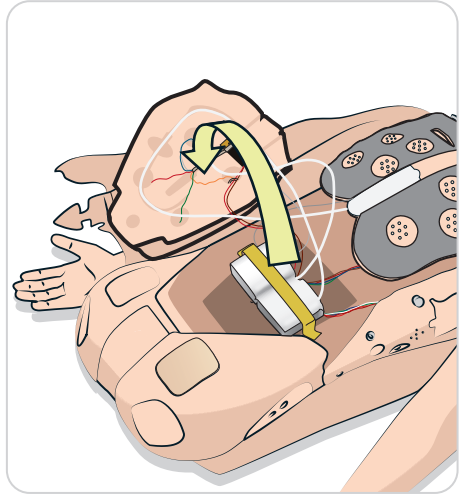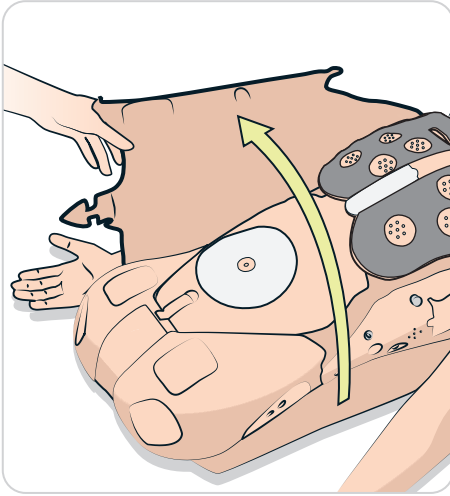







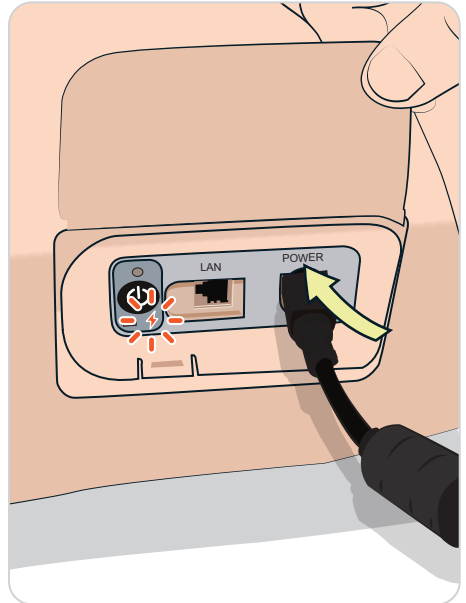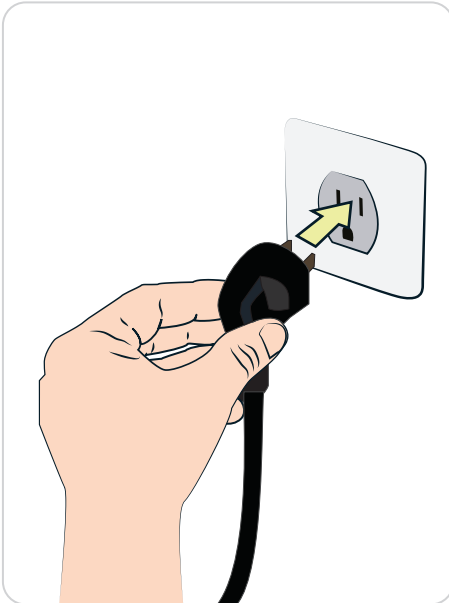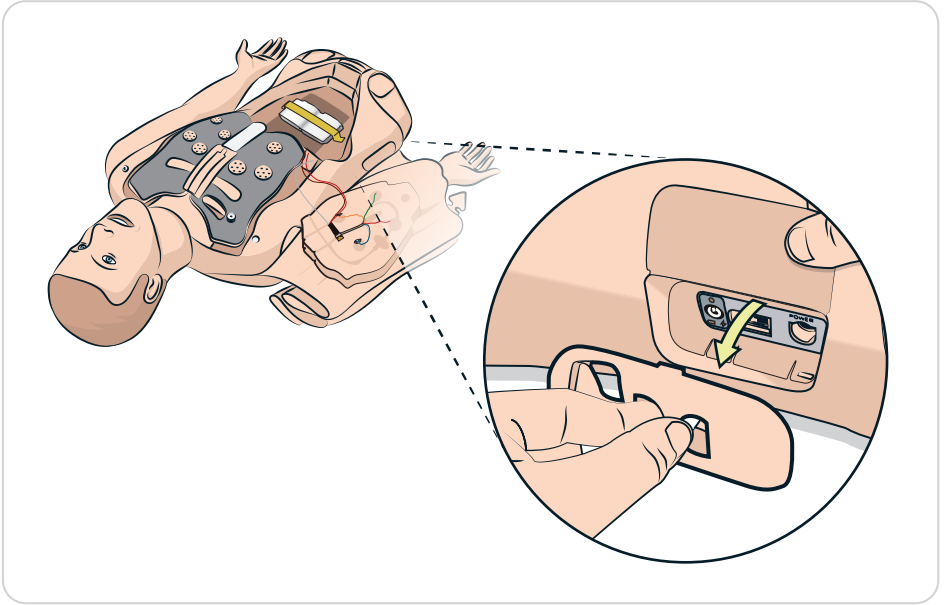

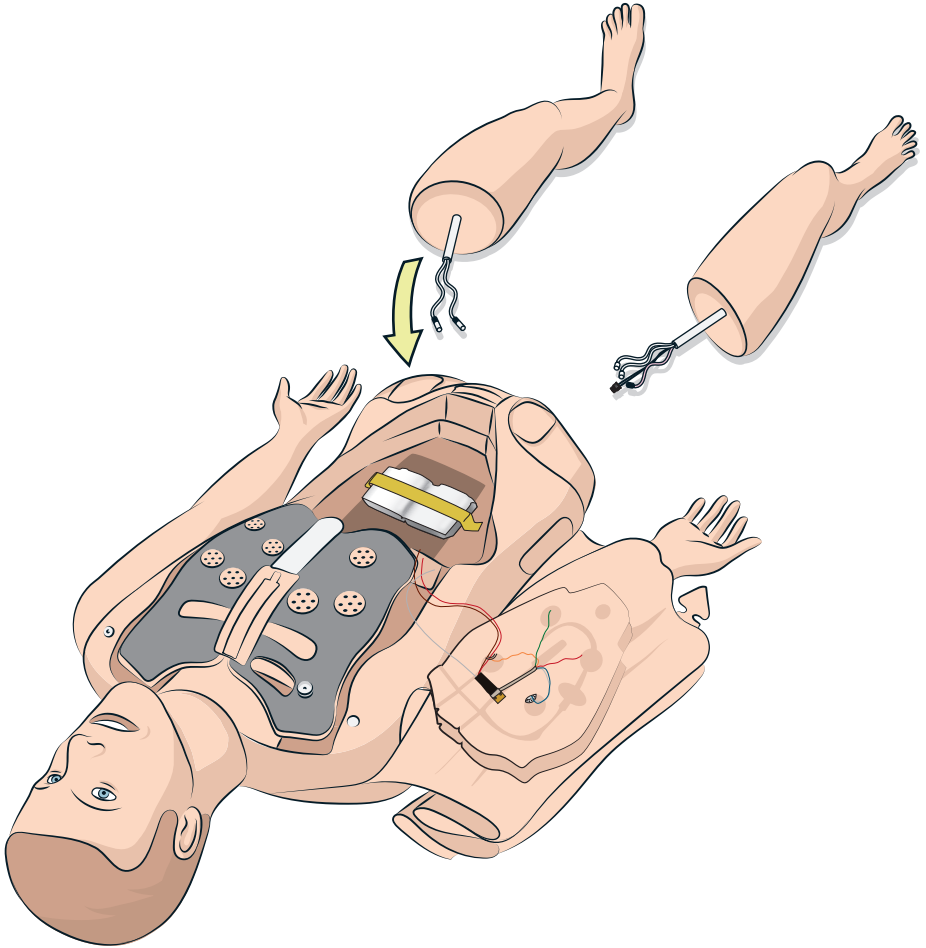

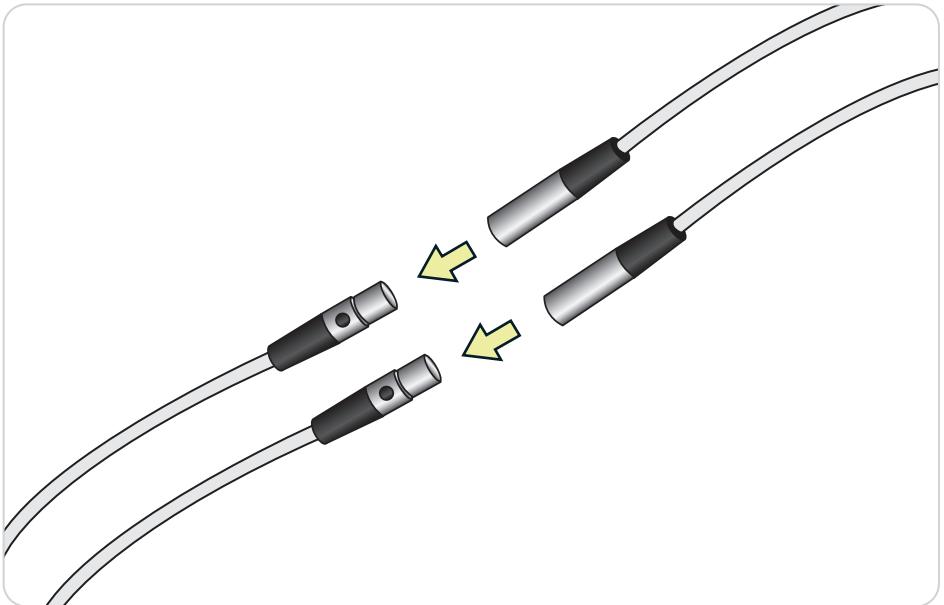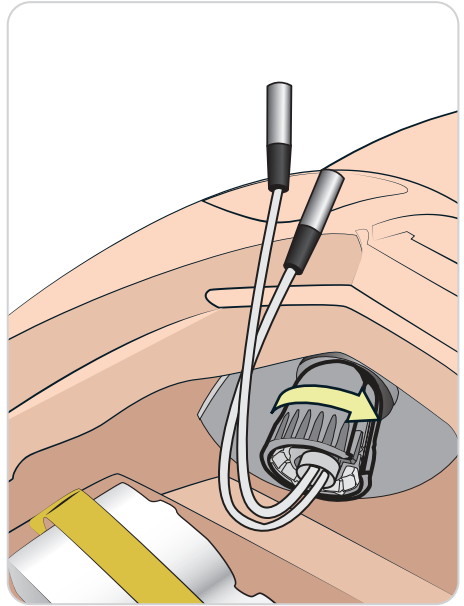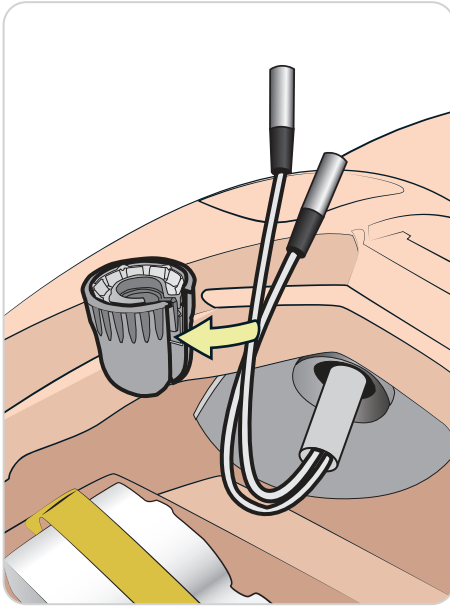

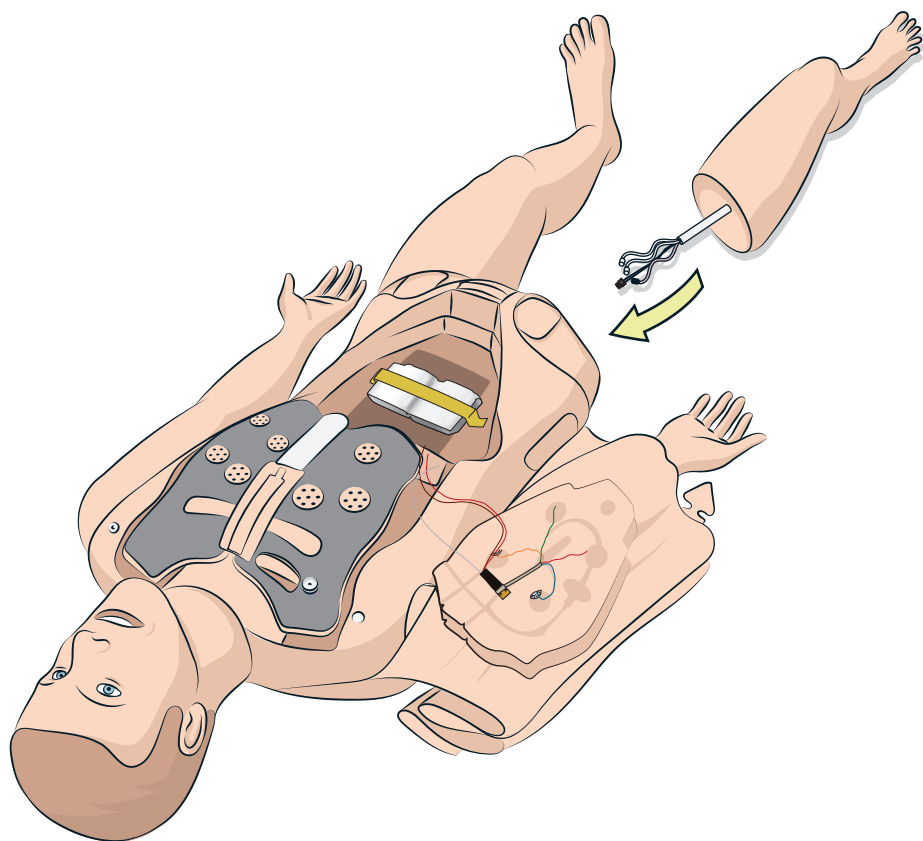

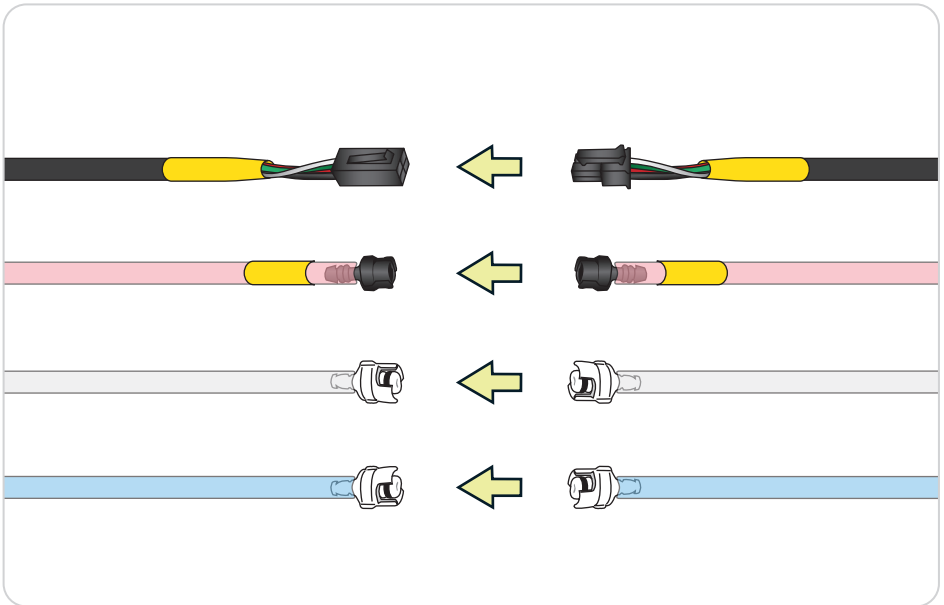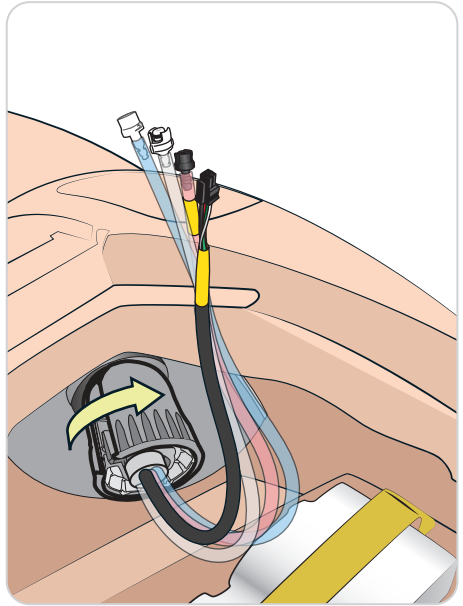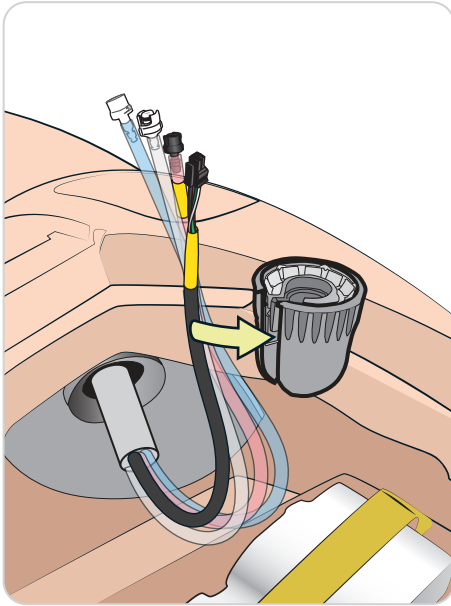


# 7<sub>A</sub>

## CONFIGURATION SANS FIL

Casque




PC du formateur

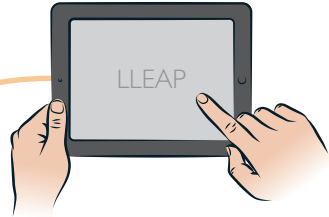

SpO<sub>2</sub>



Moniteur patient

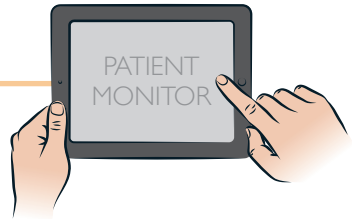

Câble USB —


# 7<sub>B</sub>

## CONFIGURATION AVEC CÂBLE


Casque



PC du formateur

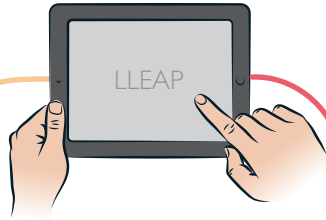



Commutateur

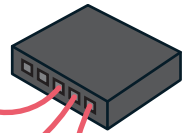

SpO<sub>2</sub>



Moniteur patient

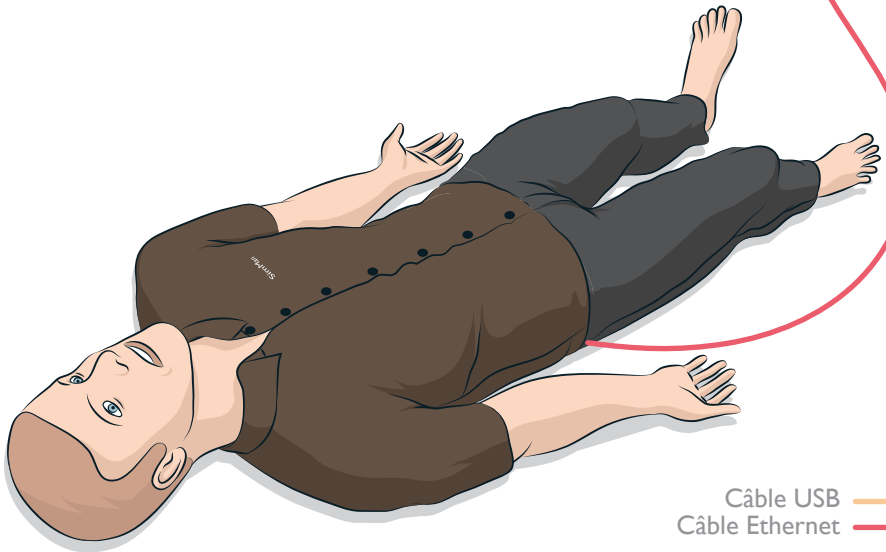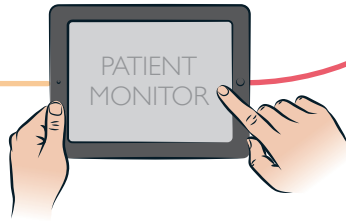

Câble USB — (orange)  
Câble Ethernet — (red)

© 2016 Laerdal Medical AS. Tous droits réservés.  
Printed in Norway

20-08138 Rev B

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives