

SimMan 3G Trauma

Beknopte installatiegids




Deze beknopte installatiegids beschrijft hoe uw SimMan patiëntsimulator gemonteerd en ingesteld wordt. Voor meer informatie over het gebruik van SimMan kunt u de LLEAP-hulpbestanden en de gebruikershandleiding van SimMan raadplegen.

Ga naar www.laerdal.com/download om de nieuwste gebruikershandleiding en software te downloaden.




Torso

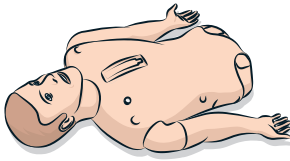

Gebruikershandleiding en
Belangrijke productinformatie




Benen

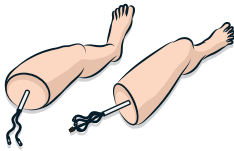

Harde boventanden




Geamputeerde armen

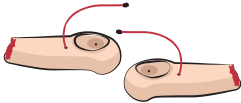

Defibrillator ECG verstelsleutel



Huid geamputeerd rechterbeen

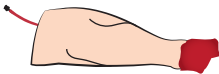

ECG-adapterelektrode



Geamputeerd linkerbeen



O-ring longexpansie
x 10



Kleding



Navulflessen voor vloeistoffen
en bloed



Kit voor wonden



Mannelijke en vrouwelijke
geslachtsdelen



Thoraxdrainagepleura
x 6



Bloedconcentraat



Talkpoeder



ID-band



Airway Lubricant



Buisklem




Headset



Bloedrukmanchet



Bloedfilter in leiding
x 2

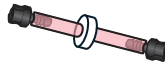

Toetsbord en muis



IV-zak



IM beenschuimkussens




SpO₂ kabel



Nekhuid
x6



Pneumothorax

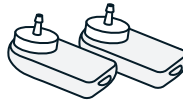

Ethernetkabel



Scheenbeenkussens
en been
x3



Crico-tape




Instrumenten



IM-kussens



Montageapparatuur

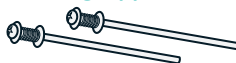

Externe voeding



Borstbeen io, kussens
en been
x 4




SimMan armadapter




Acculader
x 2








Patiëntenmonitor



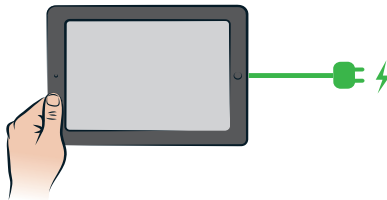



PC van instructeur



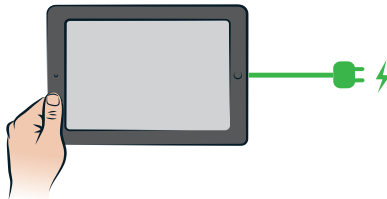


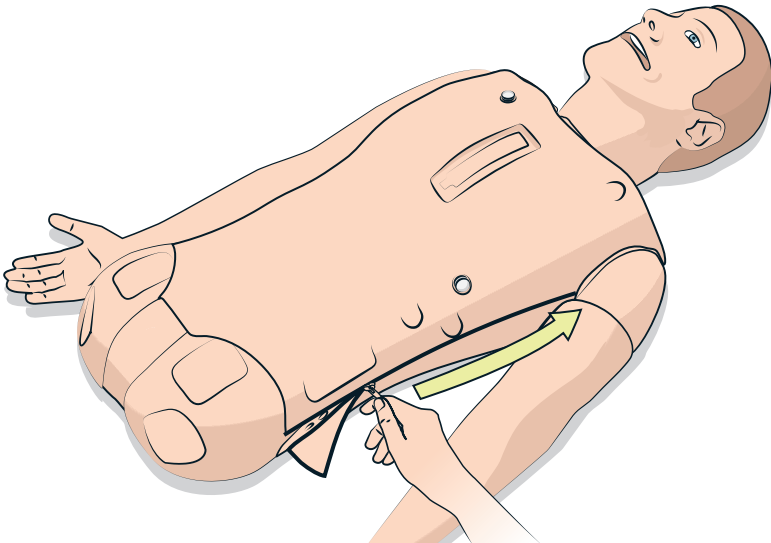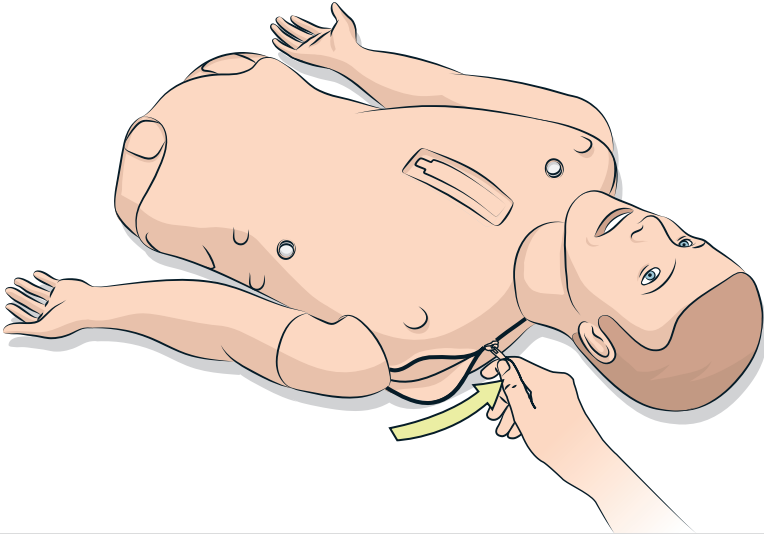


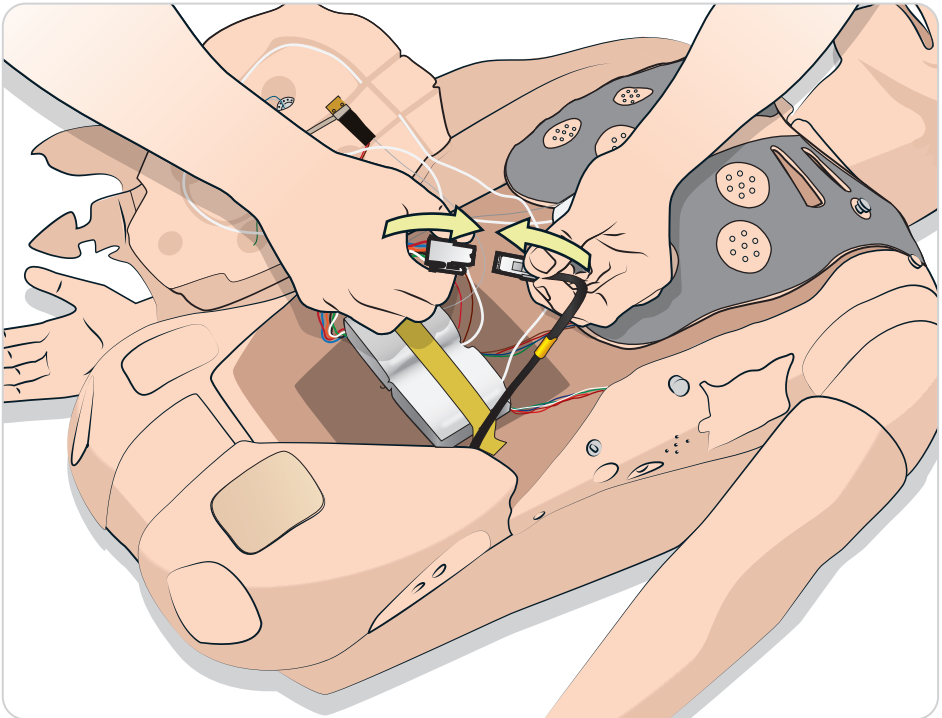
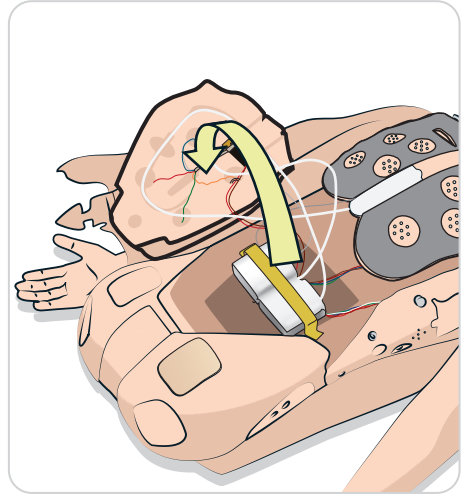
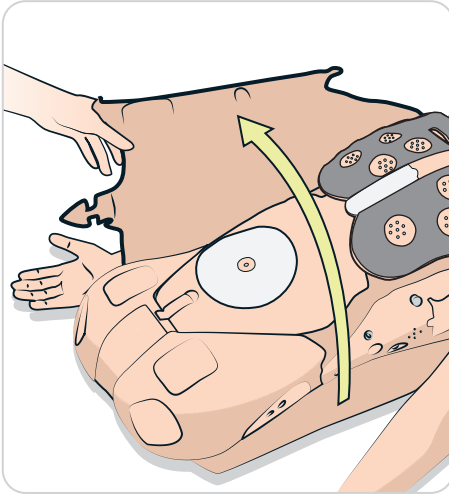


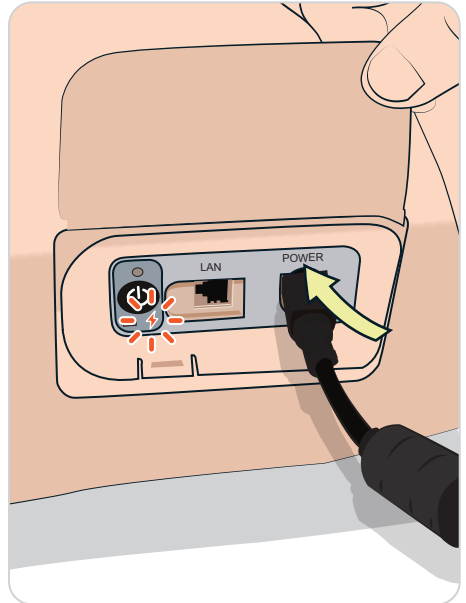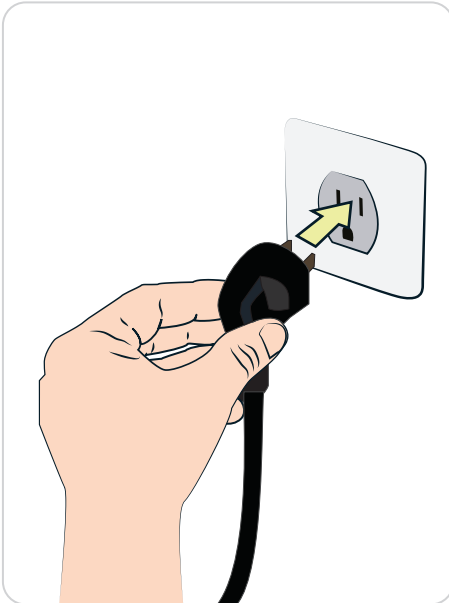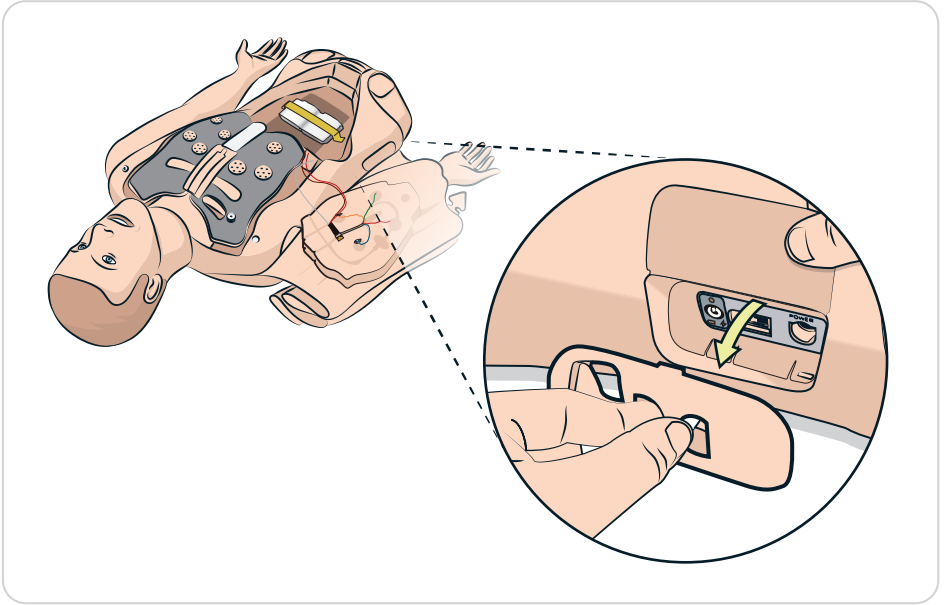

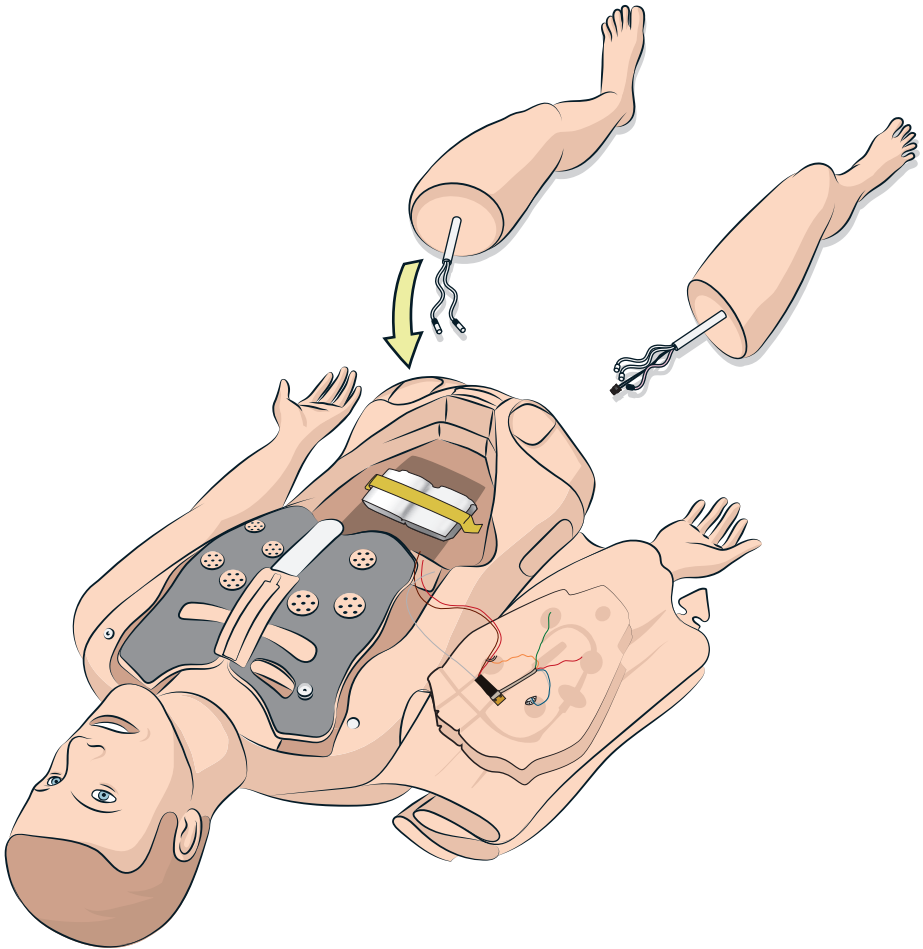

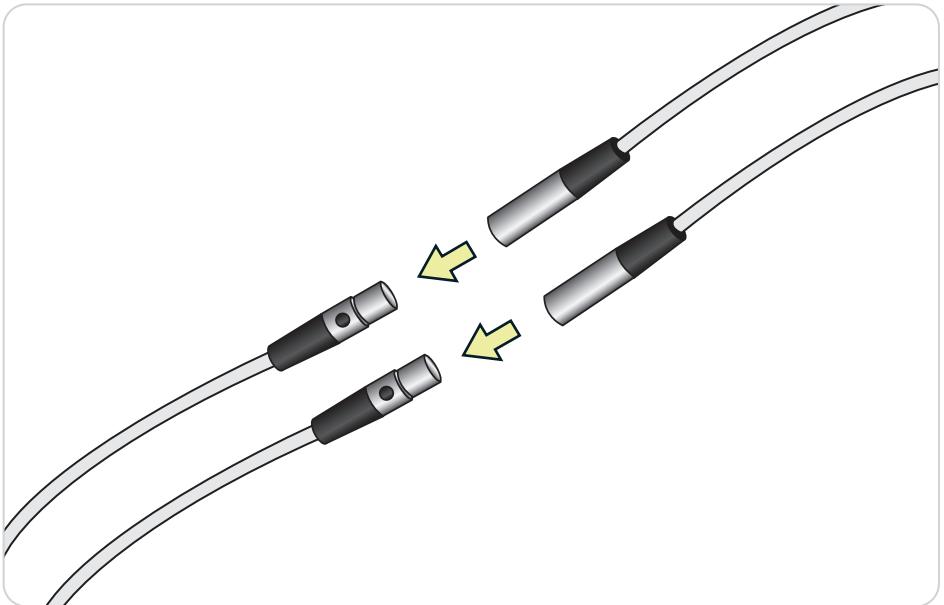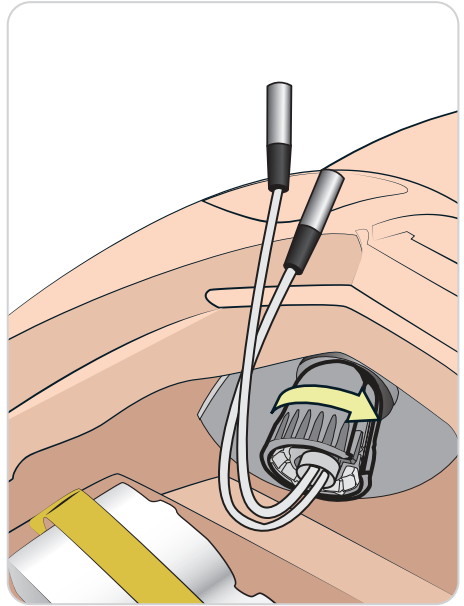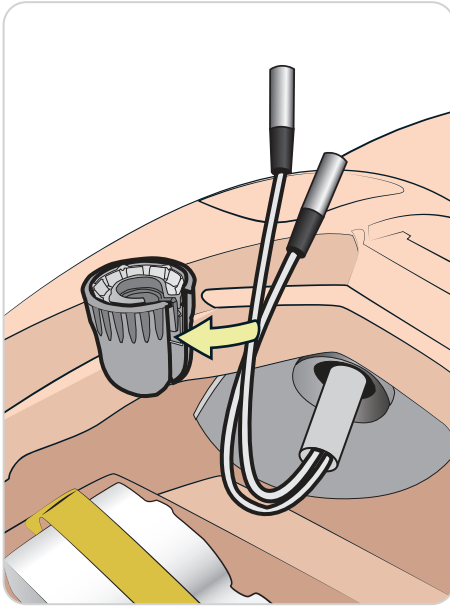

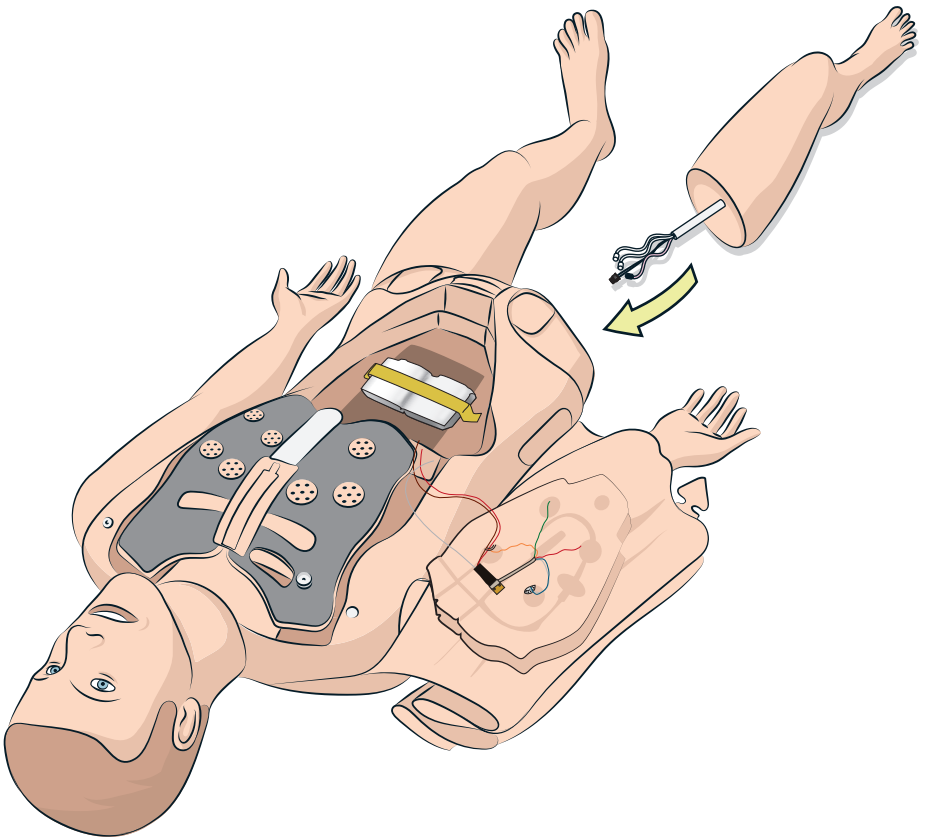

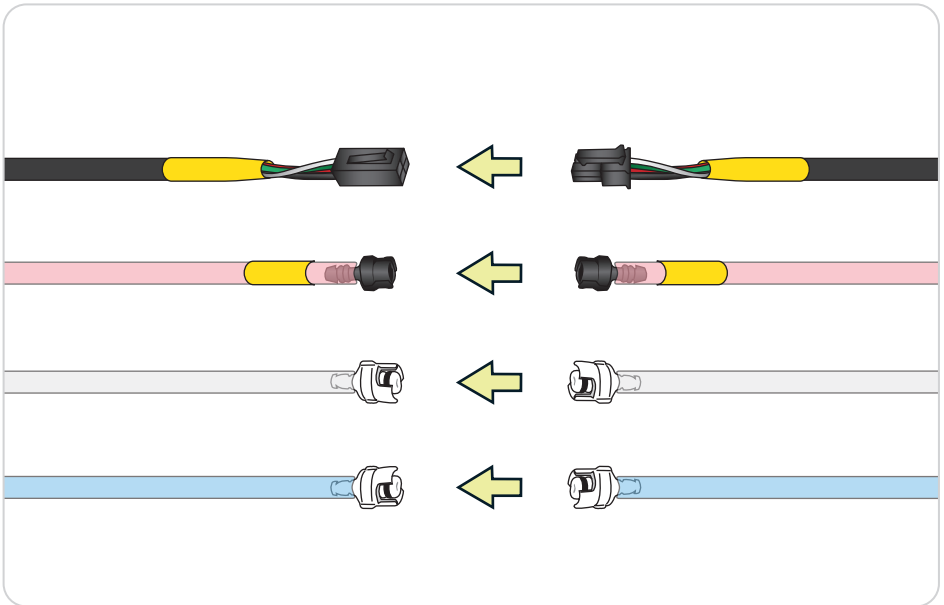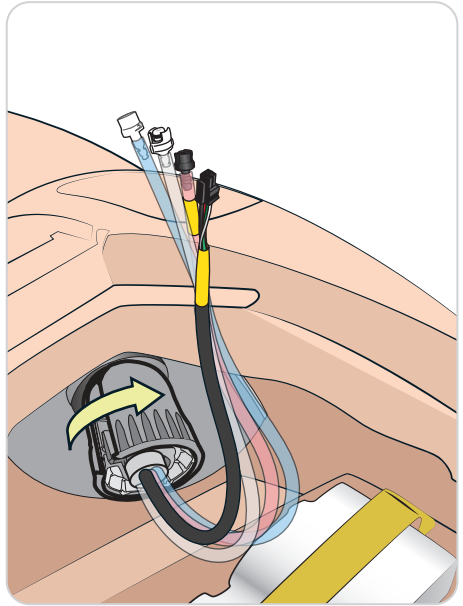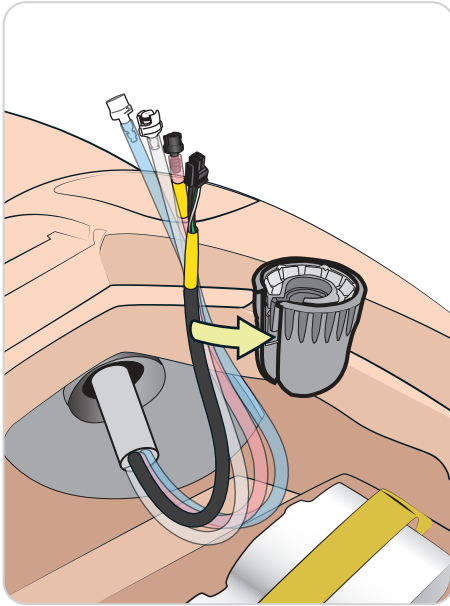


7_A

DRAADLOZE INSTALLATIE

Headset




PC van instructeur

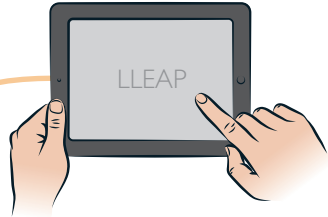


SpO₂



Patiëntenmonitor

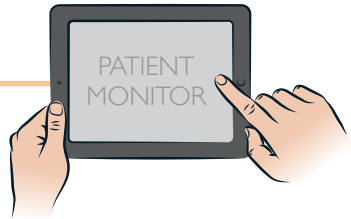

USB-kabel —

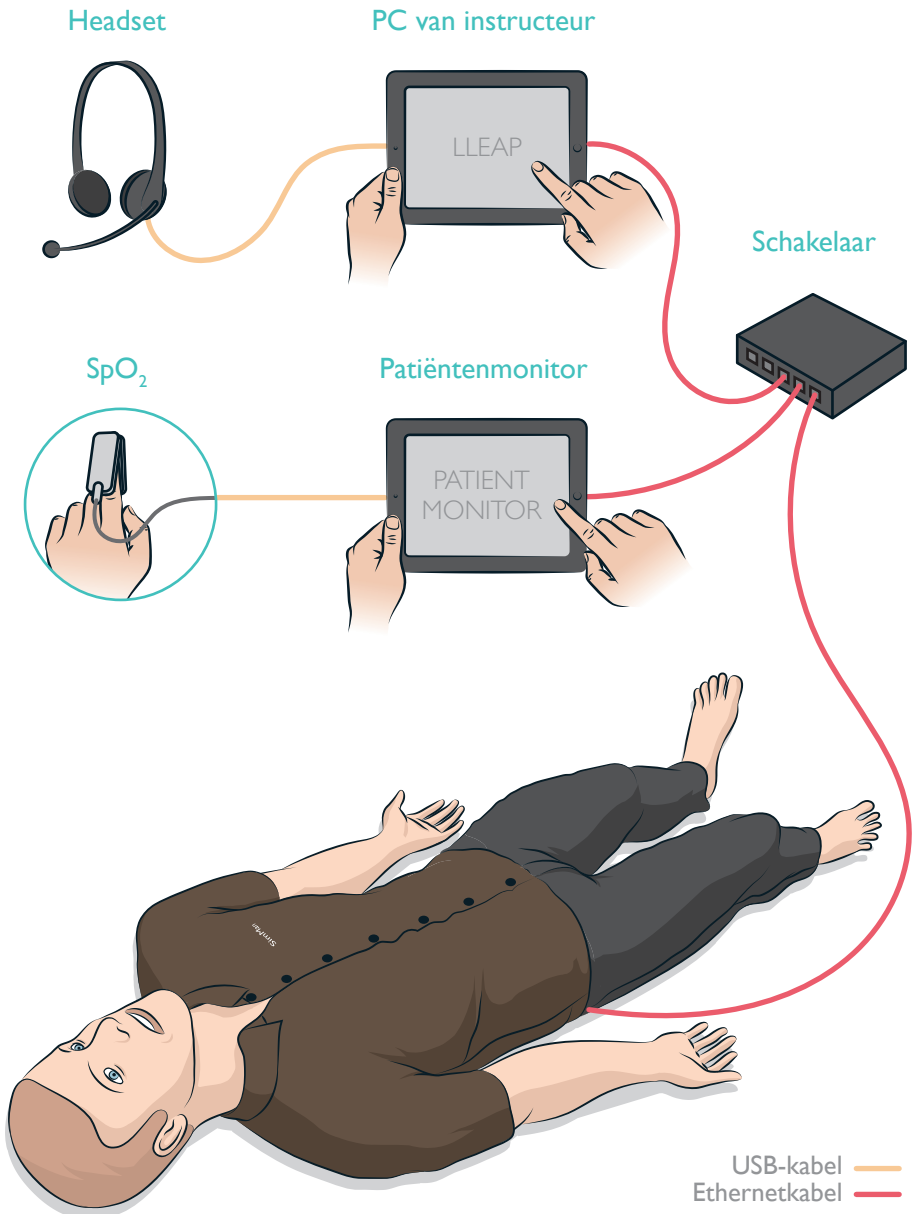

© 2016 Laerdal Medical AS. Alle rechten voorbehouden.
Printed in Norway

20-08142 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives