


SimMan 3G

Guida di configurazione rapida

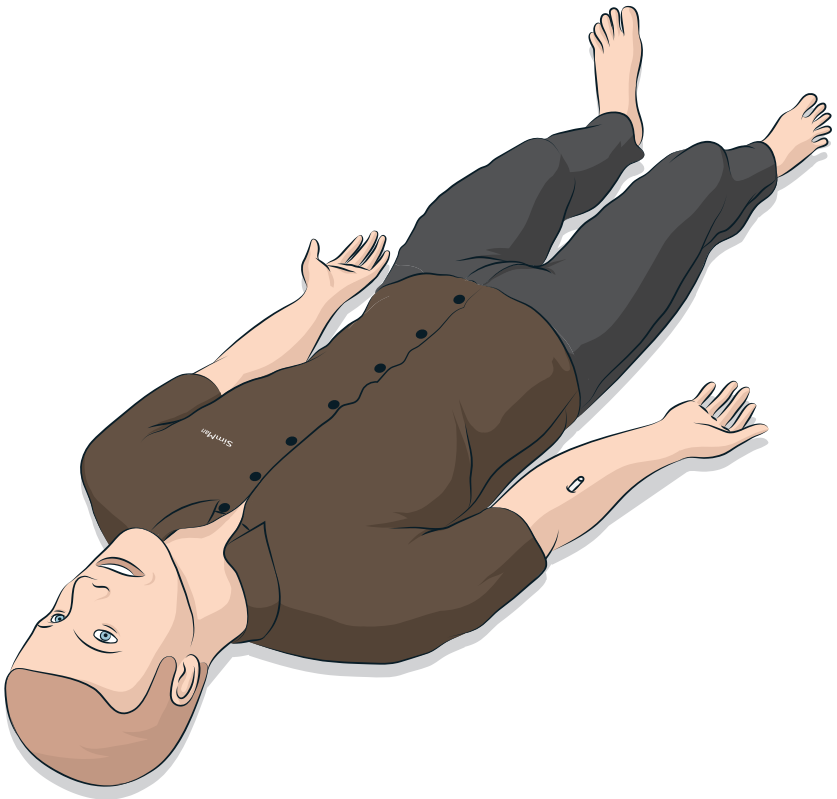


La Guida di configurazione rapida descrive come assemblare e impostare il simulatore paziente SimMan. Per informazioni sull'utilizzo del simulatore SimMan, fare riferimento ai file della guida di LLEAP e alla Guida per l'utente di SimMan.

Per scaricare la Guida per l'utente e il software più recenti, visitare il sito Web www.laerdal.com/download.




COMPONENTI

Tronco

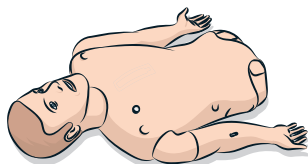

Gambe

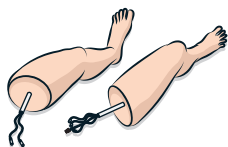


Indumenti



Arcata dentale superiore rigida



Genitali maschili e femminili

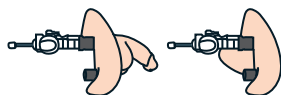


Fascetta ID



Adattatore braccio di SimMan



Filtro in linea per sangue x 2

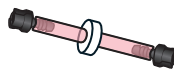


Farfalla per ECG defibrillatore



Dischi per defibrillazione




Pelle del collo x 6

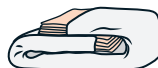

O-ring di conformità dei polmoni x 10



Bottiglie di riempimento dei fluidi e del sangue

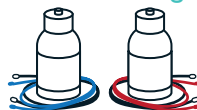

Kit per ferite



Pleura del drenaggio toracico x 6



Sangue concentrato



Lubrificante vie aeree



Bracciale per la misurazione della pressione sanguigna



Sacca EV



Prolunga catetere EV



Nastro cricotiroideo




Osso e cuscinetti tibia
x 3



Cuscinetti IM



Pneumotorace

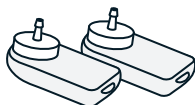

Guida per l'utente e
Informazioni importanti sul prodotto



Cuffia con microfono



Tastiera e mouse



Sonda SpO₂



Kit RFID



Strumenti




Alimentatore esterno




Caricabatterie
x 2








Monitor paziente



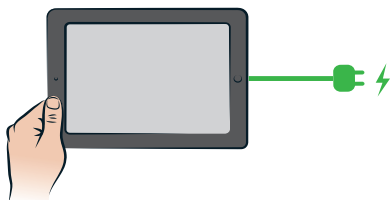



PC dell'istruttore



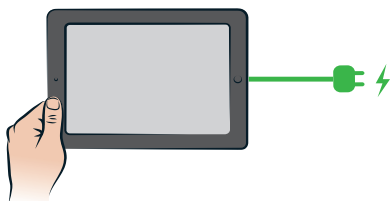


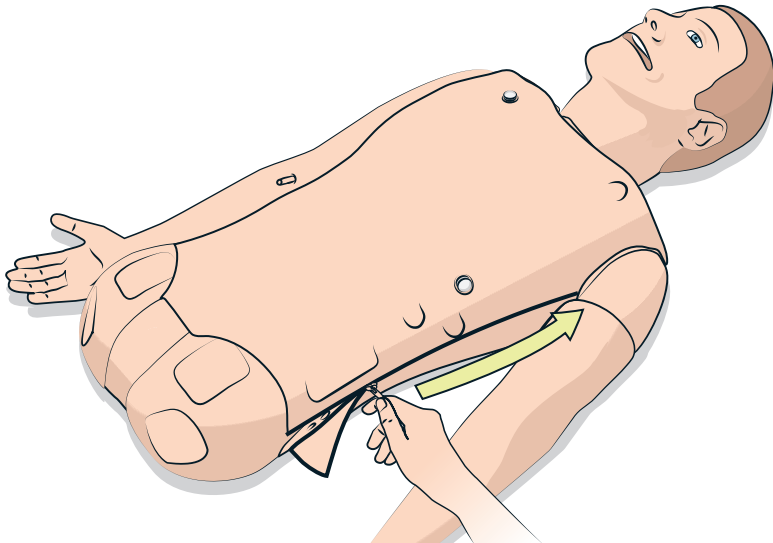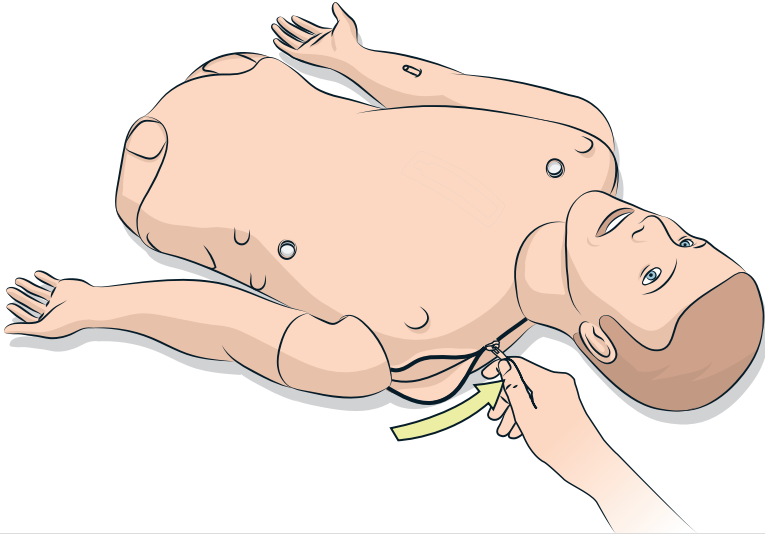


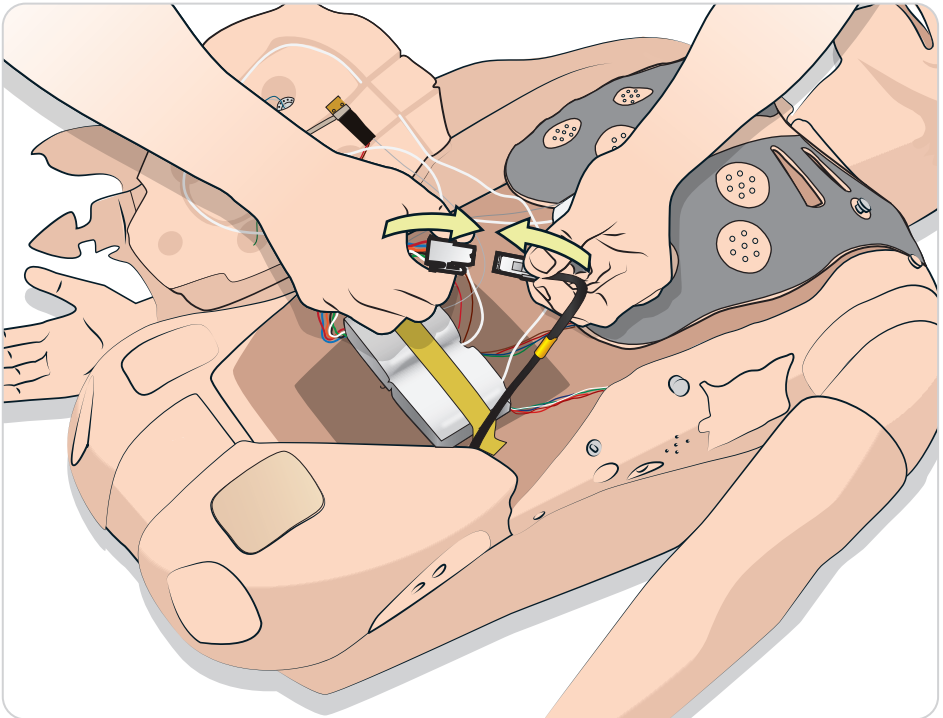
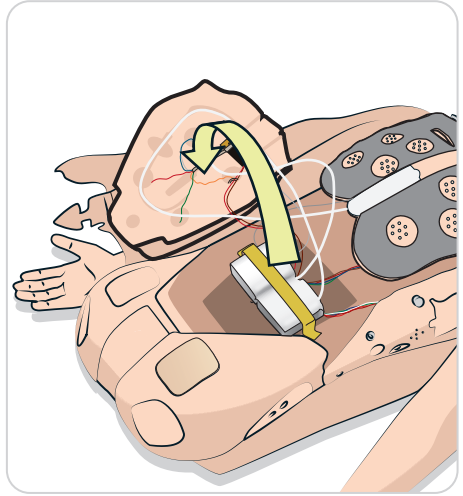
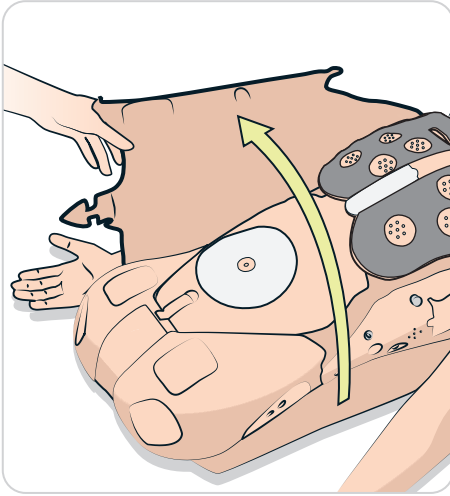


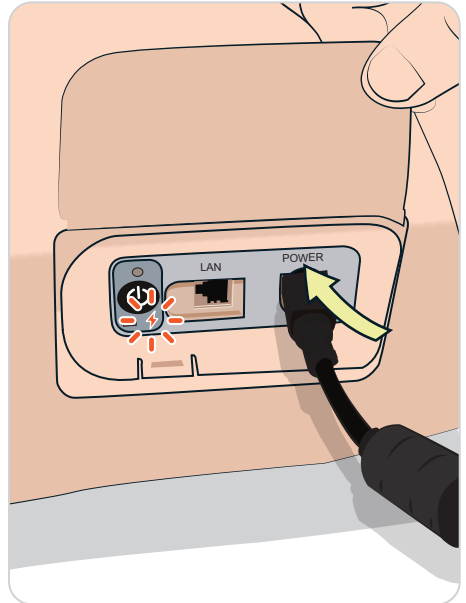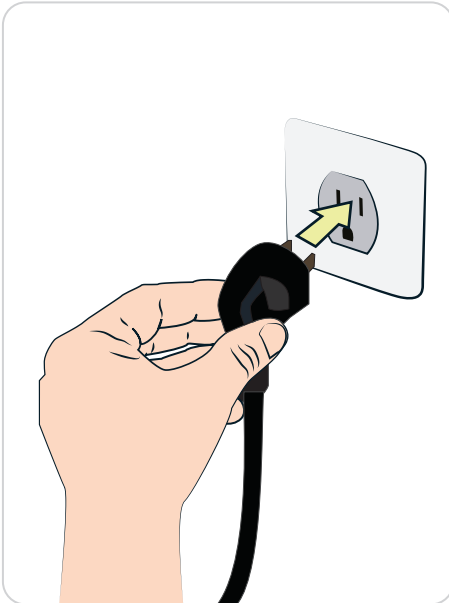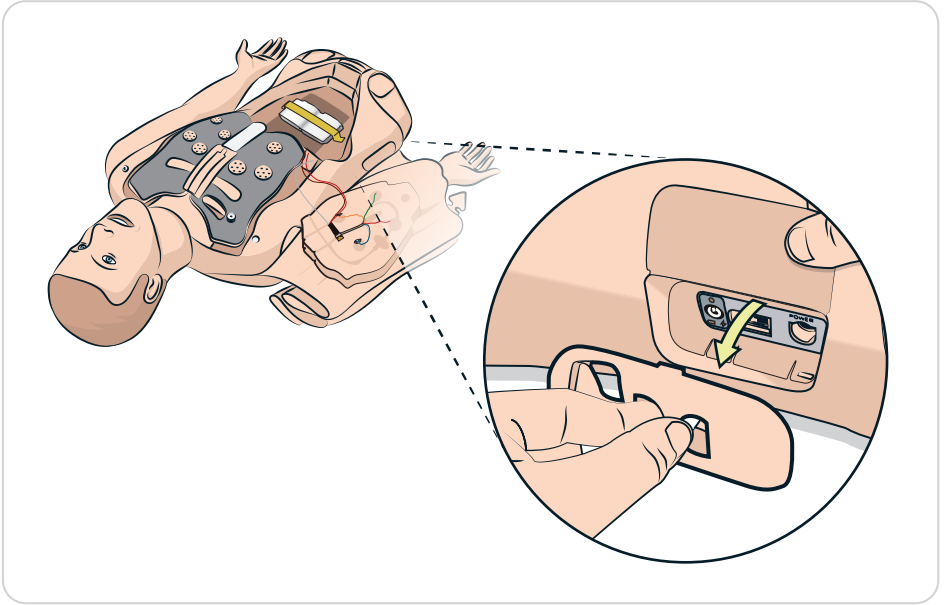

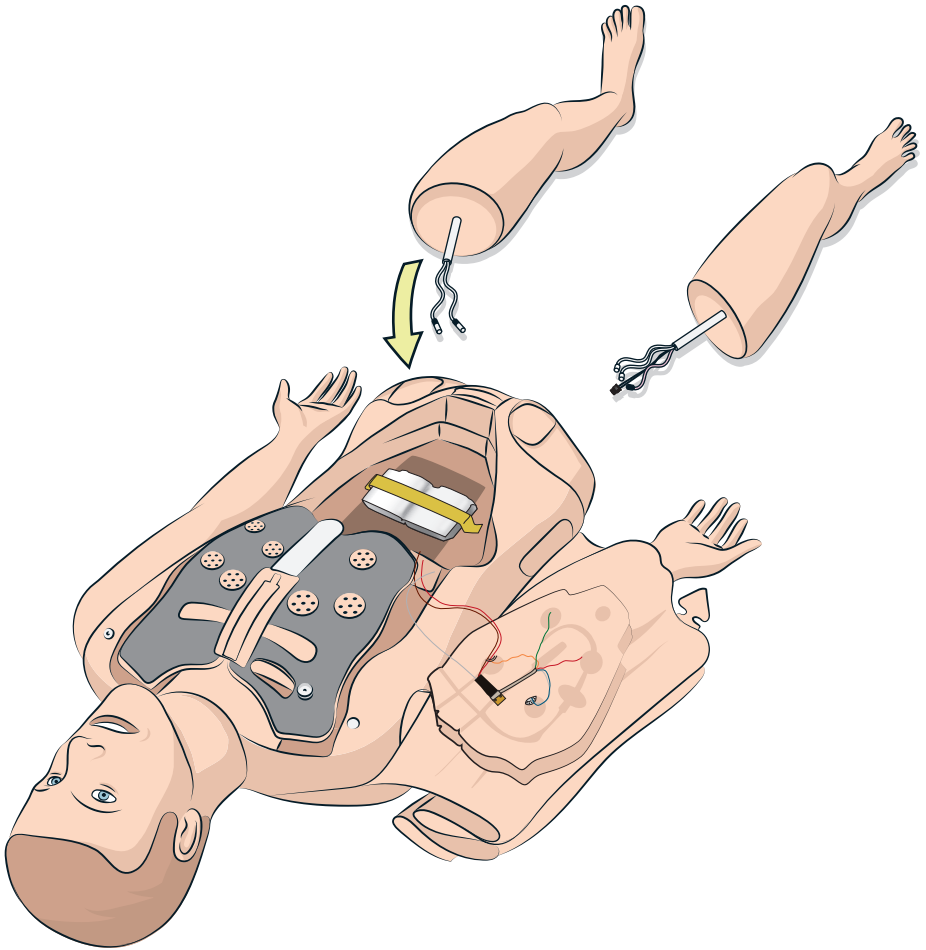

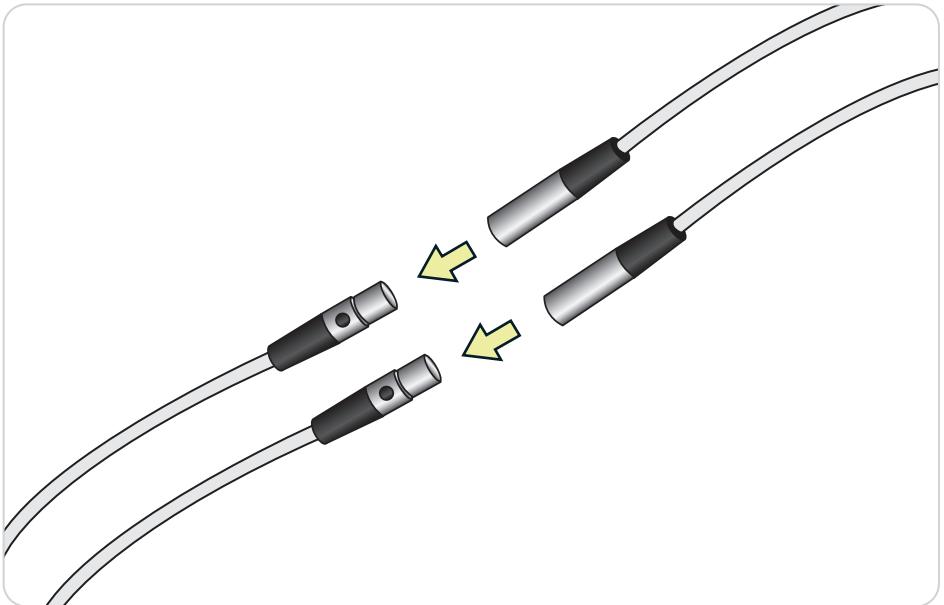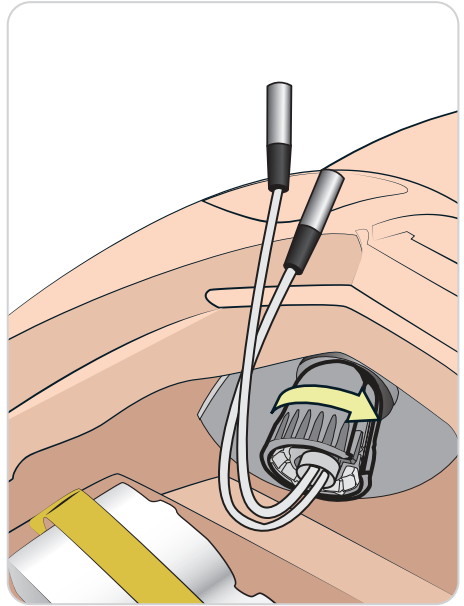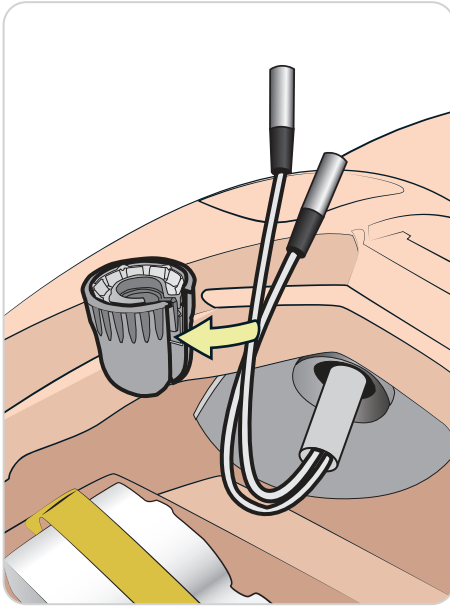

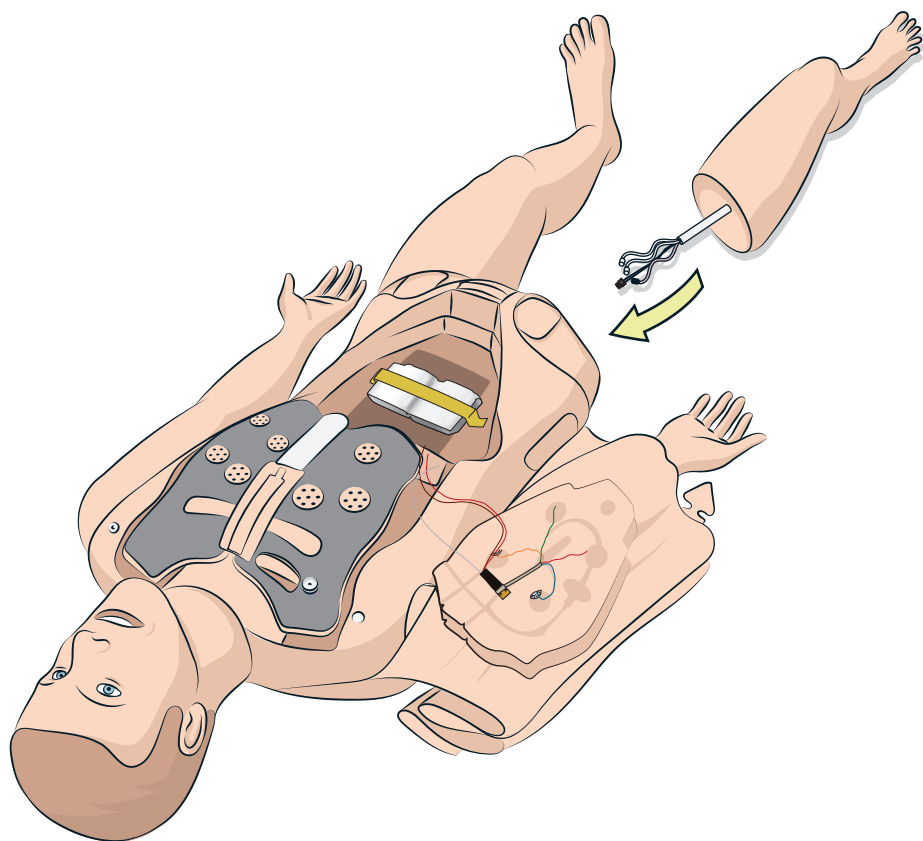

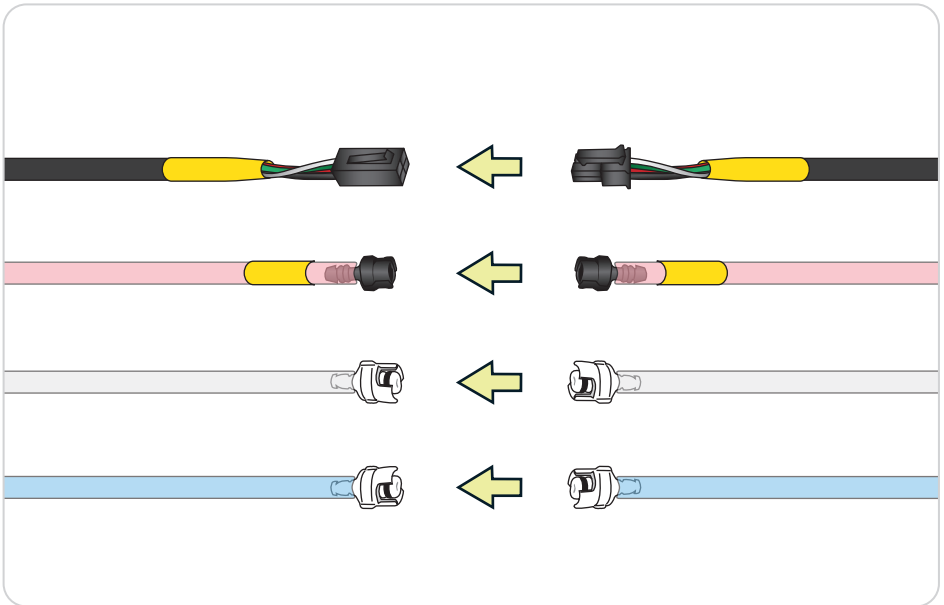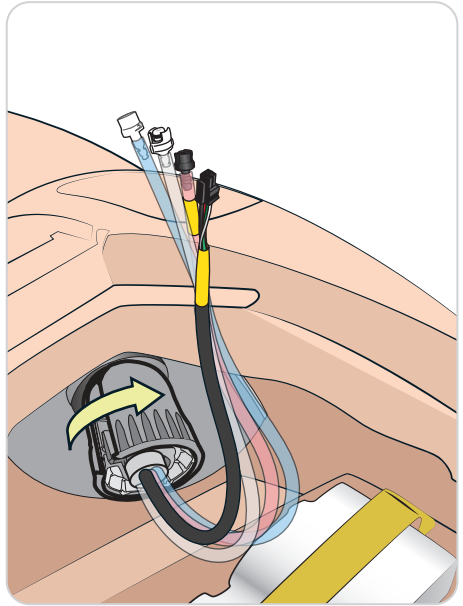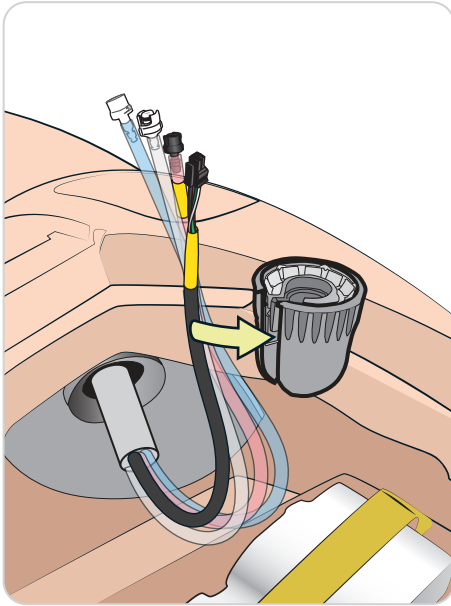


7_A

CONFIGURAZIONE WIRELESS

Cuffie




PC dell'istruttore

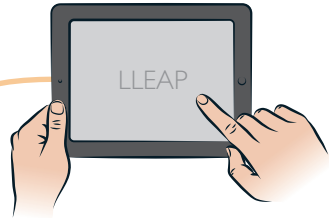


SpO₂



Monitor paziente

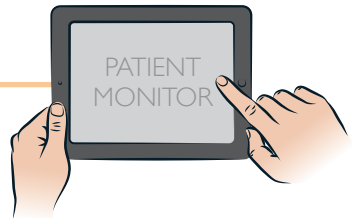

Cavo USB —

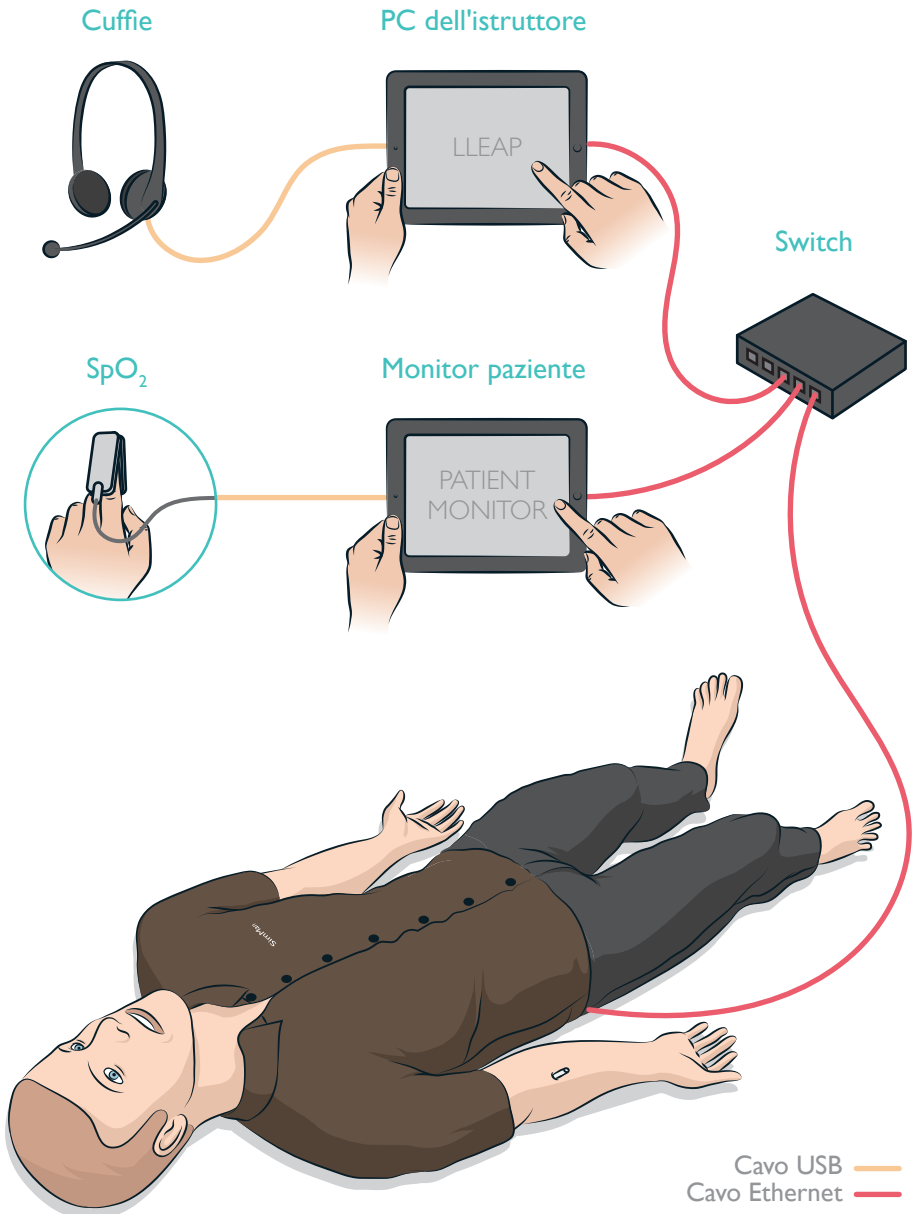

© 2016 Laerdal Medical AS. Tutti i diritti riservati.
Printed in Norway

20-08130 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives