



Sim Pad Plus(Ver6.2.0-31以降)を 使用したLink Box Plus Update方法

Help Desk

説明

- Sim Pad Plus（Ver.6.2.0.31以降）ではSim Pad Plus本体のUpdateを行うとネットワーク上でLink Box PlusをUpdateすることが可能です。
その為、以前のようにUSBメモリを用いてLink Box Plusを個別にUpdateする必要がなくなり、簡単にUpdateが可能となりました。

本資料ではSim Pad Plus本体をUpdate完了した後のLink Box PlusのUpdate方法について紹介しております。

Link Box Plusとの接続

- システム設定をタップ。



- UpdateするLink Box Plus (シミュレータ) をタップし接続する。



Link Box Plusとの接続

- Sim Pad PlusとLink Box Plusのバージョンが異なる場合下記画面が表示されます。（初回接続時のみ）

「OK」をタップ。



- 異なるバージョンのLink Box Plus（シミュレータ）と接続後、更新マークが表示されます。




Link Box PlusのUpdate

- トップ画面に戻り「更新」をタップ。




- 接続したLink Box Plus (シミュレータ) のバージョンと最新バージョンが表示されます。

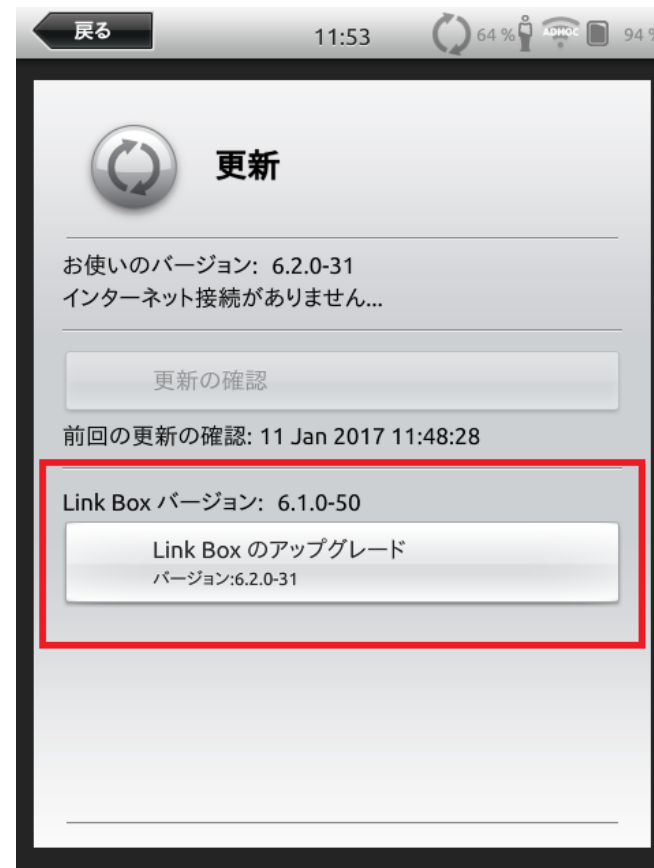


Link Box PlusのUpdate

- 「Link Boxのアップグレード」をタップするとアップロードが始まります。

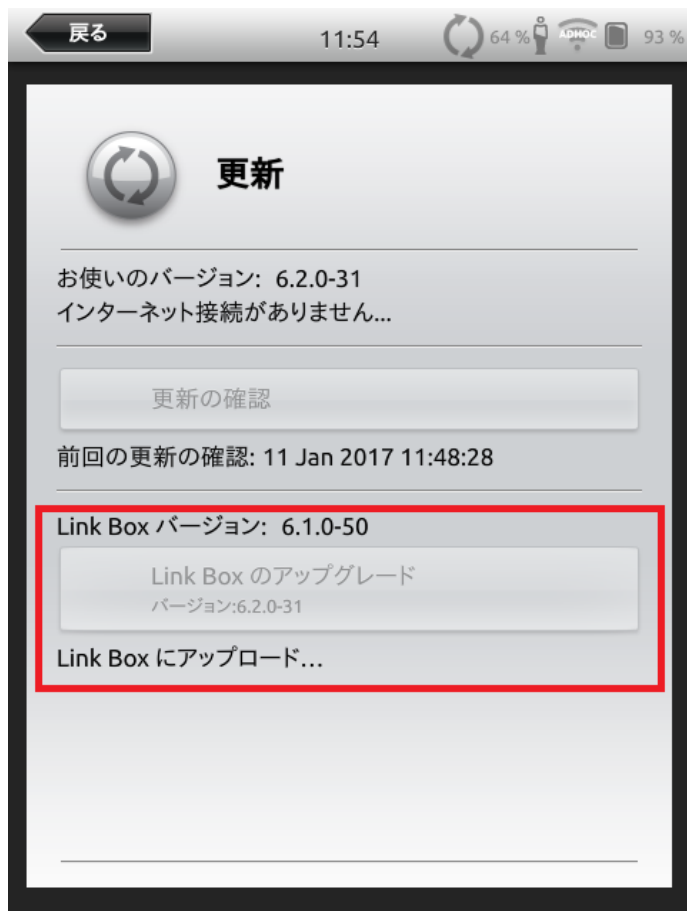

- 引き続きLink Box Plus (シミュレータ) へのインストールが行われます。

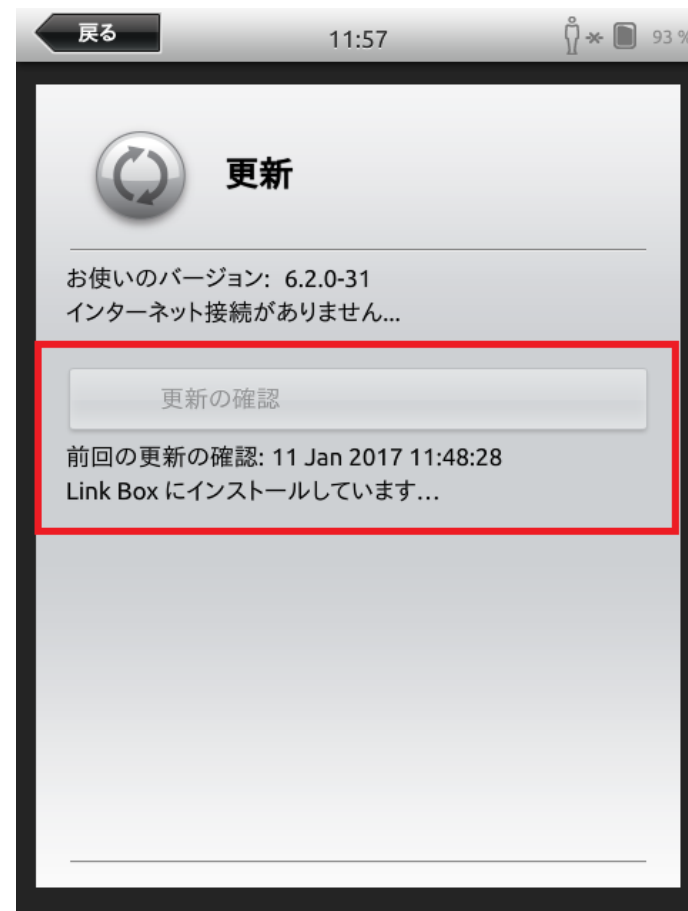

Link Box PlusのUpdate

- Update中は電源ランプが細かく点滅します。
Updateが完了すると電源ランプは点灯に変わります。



Link Box Plusバージョンの確認

- Link Box PlusのUpdateが完了したらトップ画面に戻りLink Box（シミュレータ）と接続した状態のまま「システム設定」をタップ。



- 「シミュレータについて」をタップ。



Link Box Plusバージョンの確認

- ソフトウェアバージョンがUpdateされていることを確認してください。

