

● SimPad Plus 接続手順

- SimPad Plus に前回接続したシミュレータが記録されている場合、電源を入れた際に自動的にシミュレータと接続を行い接続済みアイコンが表示されます。



- シミュレータとの接続が取れていない場合は接続済みアイコンは表示されません。




・シミュレータと接続が確立されていない場合は手動で接続を行います。

1.「システム設定」をタップ。



2.「シミュレータ」をタップ。

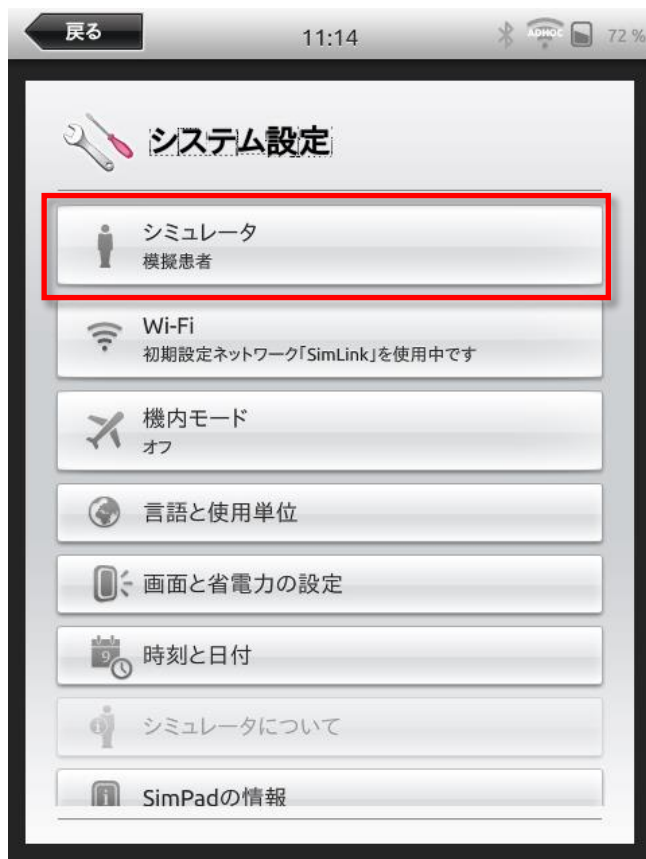

3.表示された中から接続するシミュレータを選択。



4.接続が確立すると接続済みアイコンが表示されます。




- ・シミュレータに接続する画面にシミュレータが表示されなかった場合は下記の手順で Wi-Fi を探す。



1. 「システム設定」をタップ。



2. 「Wi-Fi」をタップ。

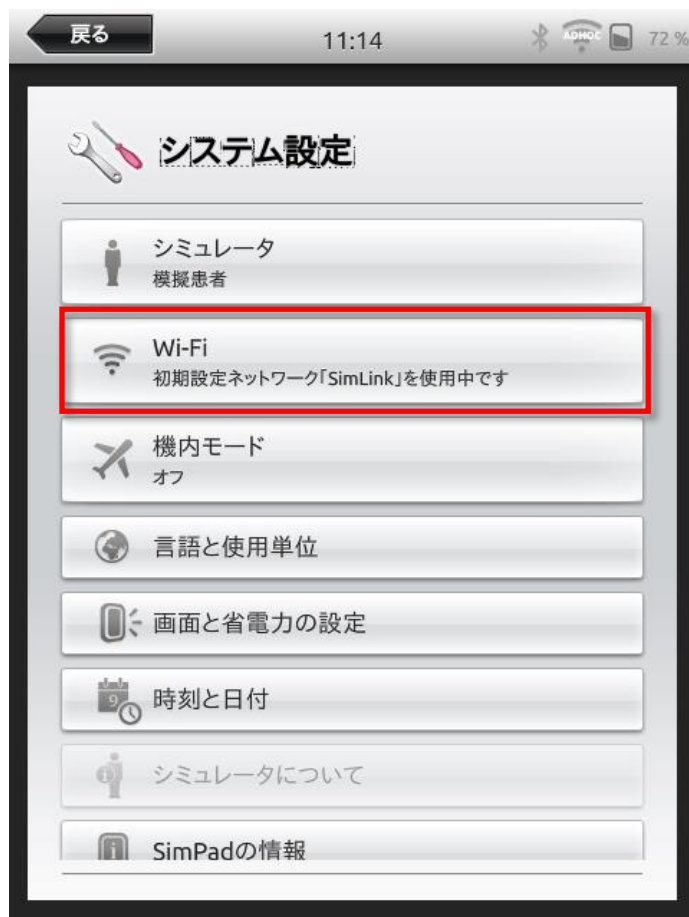

3. 「SimPad のみ設定する」をタップ。



4.「デフォルト SimLink ネットワーク」をタップ。




5. SimLink に接続します。



6. 上画面が消えたら「戻る」をタップ。



7. 「シミュレータ」をタップ。

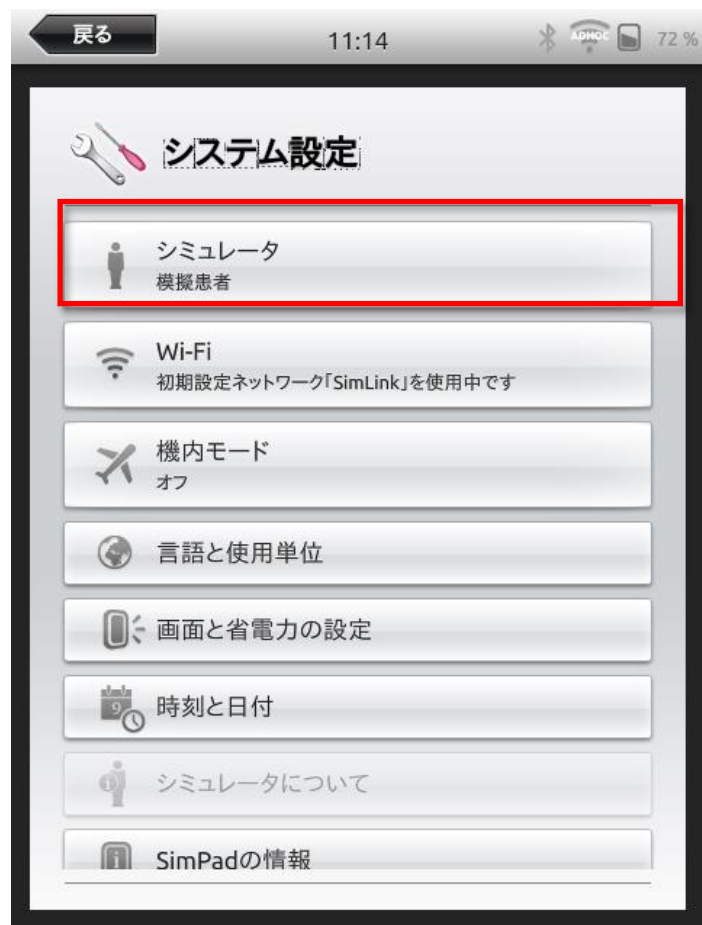

8. シミュレータが表示されますので選択して使用開始。

