



# SimPad Skillreporterにて GuideLine2015を設定する方法

2017/04/25 Ver.02

# 概要

- SimPad SkillreporterにてGuideLine2015を適用させるには接続するBLSマネキン(レサシアン with QCPR、レサシベビー with QCPR)のQCPRファームウェアをUpdateする必要があります。
- GuideLineの設定についてはSimPad Skillreporterではなく、接続するマネキンに依存しています。
- 以前はQCPRのファームウェアのUpdateはSoftwareをインストールしたPCよりおこなっていましたが、今回のUpdateはPCからではなくSimPadを利用しておこないます。
- Updateは有線接続のみ対応しております。WiFi、 Bluetoothでの接続には対応していません。


# 必要な製品

- Software 6.2.5以上をインストールしたSimPad Classic SkillreporterもしくはSimPad Plus Skillreporter  
※Updateの方法については下記URLを参照  
[http://cdn.laerdal.com/downloads/f4715/SimPadPlusSimPadPlusandPlus\\_.pdf](http://cdn.laerdal.com/downloads/f4715/SimPadPlusSimPadPlusandPlus_.pdf)  
<http://cdn.laerdal.com/downloads/f4597/SimPadPlusLinkBoxPlusRev.2.pdf>
- レサシアンwith QCPR、レサシベビーQCPRなどのQCPRマネキン  
※2017/4/25時点でレサシベビーQCPRのUpdateはございません。
- 上記SimPadとマネキンを接続するUSBケーブル

# Update方法①

下記のように専用ケーブルにてSimPadとQCPRマネキンを接続してください。

**※Updateについて有線接続のみ対応しております。  
WiFi,Bluetooth接続ではUpdateは出来ません。**

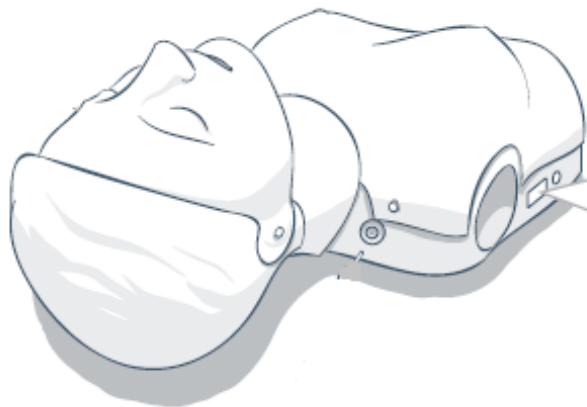

# Update方法②



SimPadを起動後に「BLS受講者」もしくは「BLSインストラクター」をタップする。




マネキンのファームウェアが未適応の場合は左のようなコメントが表示されるので「OK」をタップする。

# Update方法③




左上のアイコンをタップし「BLS設定」画面を開く。

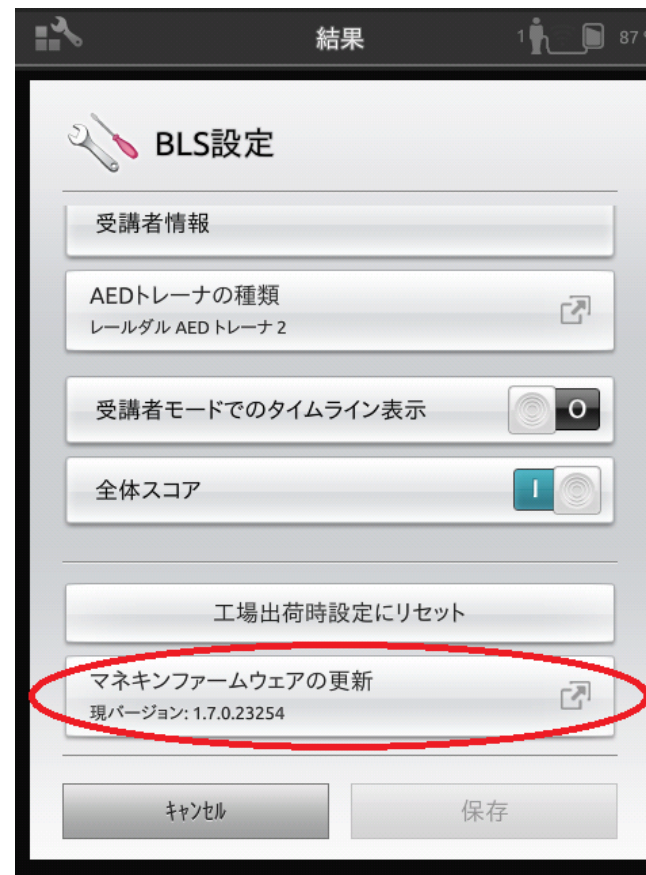


BLS設定の画面を一番下までスクロールすると「マネキンファームウェアの更新」という項目がありますのでこちらをタップ。

# Update方法④

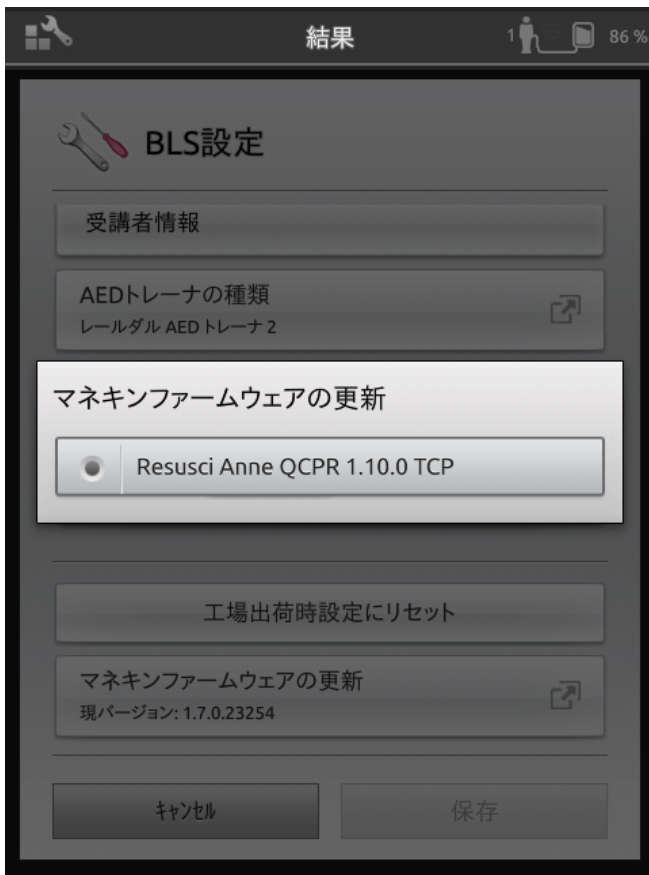

表示されたファームウェアを  
タップする。今回のケースで  
複数表示された場合は  
「Resusci Anne QCPR  
1.10.0 TCP」を選択する。

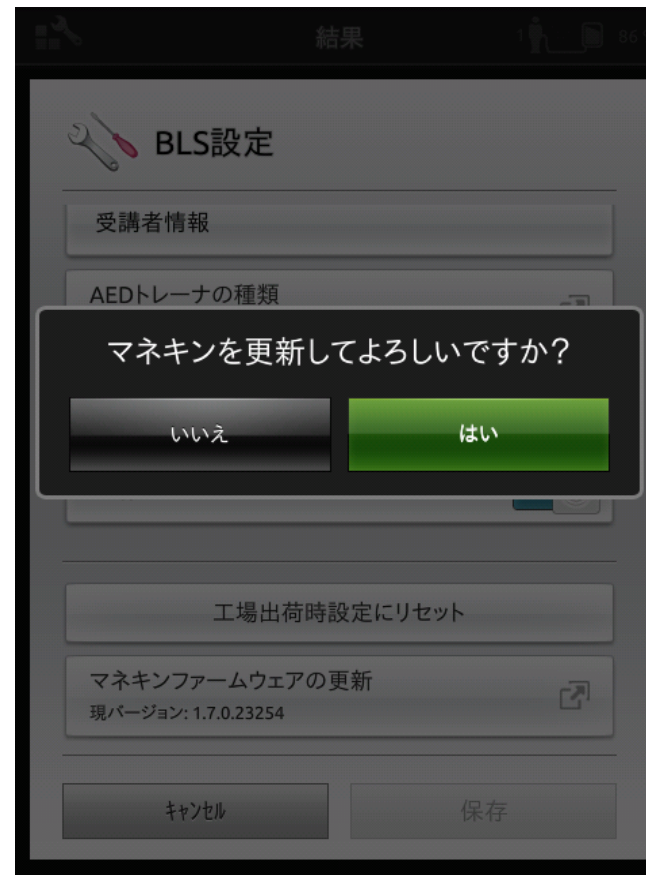


「はい」を選択すると  
更新が始まります。

# Update方法⑤



左のコメントが表示されたらUpdate完了です。USBを外し、SimPad、マネキン共に再起動してください。

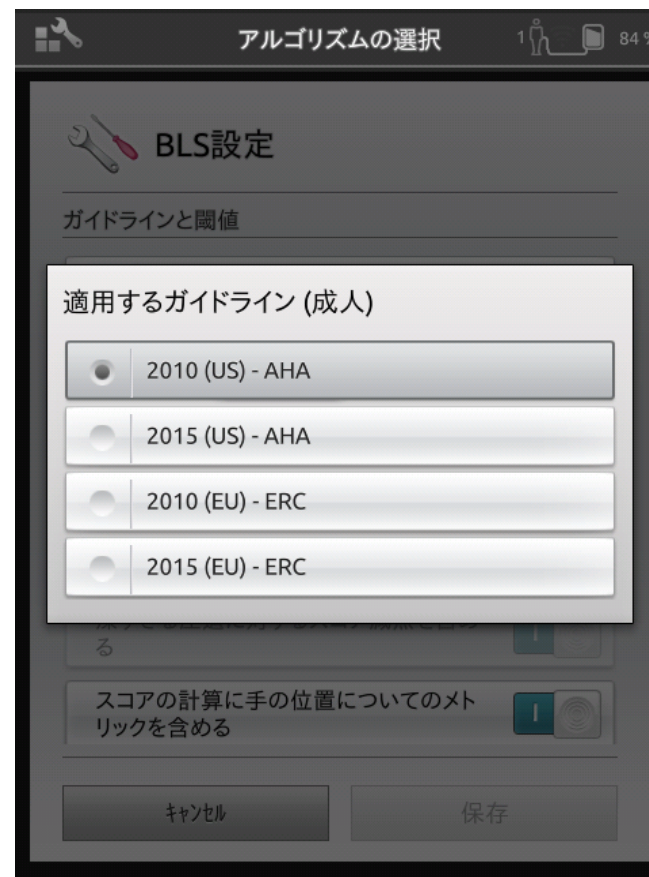

BLS設定画面にてGuideLine2015が表示されている事をご確認ください。