


スキルガイド抜き差し時の注意点

・スキルガイドをマネキンから抜き差しする際は、ジャックの太い部分(囲み部分)を持って真っ直ぐ抜き差ししてください。

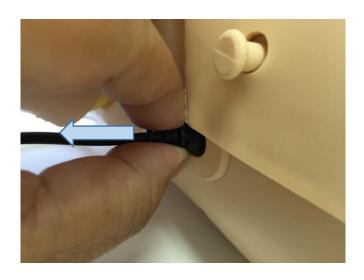



※繰り返すと内部のケーブルが断線し、故障の原因となります。

・細いコード部分を持って引っ張る



・コードを折り曲げる、ひねりながら抜き差しする





収納時の注意点

ケーブルタイなどでケーブルをまとめてから 収納してください



スキルガイドの周りにケーブルをぐるぐると巻いて収納しないでください。

ケーブルを痛め、故障の原因となります。

