



SimPad Skillreporterにて GuideLine2015を設定する方法

2017/07/07 Ver.03

概要

- SimPad SkillreporterにてGuideLine2015を適用させるには接続するBLSマネキン(レサシアン with QCPR、レサシベビー with QCPR)のQCPRファームウェアをUpdateする必要があります。
- GuideLineの設定についてはSimPad Skillreporterではなく、接続するマネキンに依存しています。
- 以前はQCPRのファームウェアのUpdateはSoftwareをインストールしたPCよりおこなっていましたが、今回のUpdateはPCからではなくSimPadを利用しておこないます。
- Updateは有線接続のみ対応しております。WiFi、 Bluetoothでの接続には対応していません。

必要な製品

- Software 6.2.5以上をインストールしたSimPad Classic SkillreporterもしくはSimPad Plus Skillreporter

※Updateの方法については下記URLを参照

◆SimPad Plus システムアップデート方法はこちら

http://cdn.laerdal.com/downloads/f4715/SimPadPlusSimPadPlusandPlus_.pdf

◆SimPad Classicアップデート方法はこちら

http://cdn.laerdal.com/downloads/f3191/SimPad_LinkBox_update_procedure.pdf

- レサシアンwith QCPR、レサシベビーQCPRなどのQCPRマネキン
 - ※2017/4/25時点でレサシベビーQCPRのUpdateはございません。
- 上記SimPadとマネキンを接続するUSBケーブル

Update方法①

下記のように専用ケーブルにてSimPadとQCPRマネキンを接続してください。

**※Updateについて有線接続のみ対応しております。
WiFi,Bluetooth接続ではUpdateは出来ません。**



Update方法②



SimPadを起動後に「BLS受講者」もしくは「BLSインストラクター」をタップする。




マネキンのファームウェアが未適応の場合は左のようなコメントが表示されるので「OK」をタップする。

Update方法③



左上のアイコンをタップし「BLS設定」画面を開く。

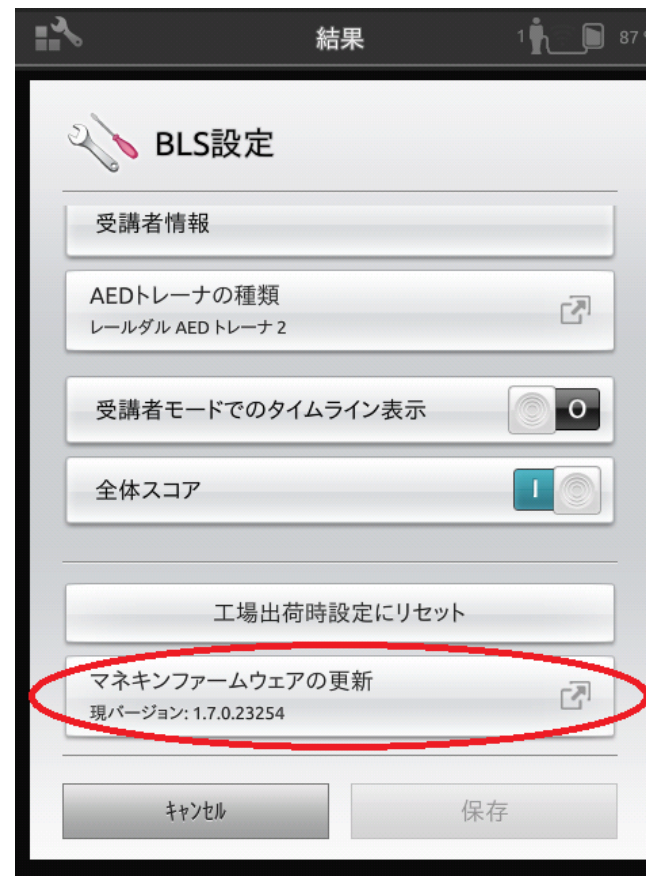


BLS設定の画面を一番下までスクロールすると「マネキンファームウェアの更新」という項目がありますのでこちらをタップ。

Update方法④



表示されたファームウェアをタップする。今回のケースで複数表示された場合は「Resusci Anne QCPR 1.10.0 TCP」を選択する。

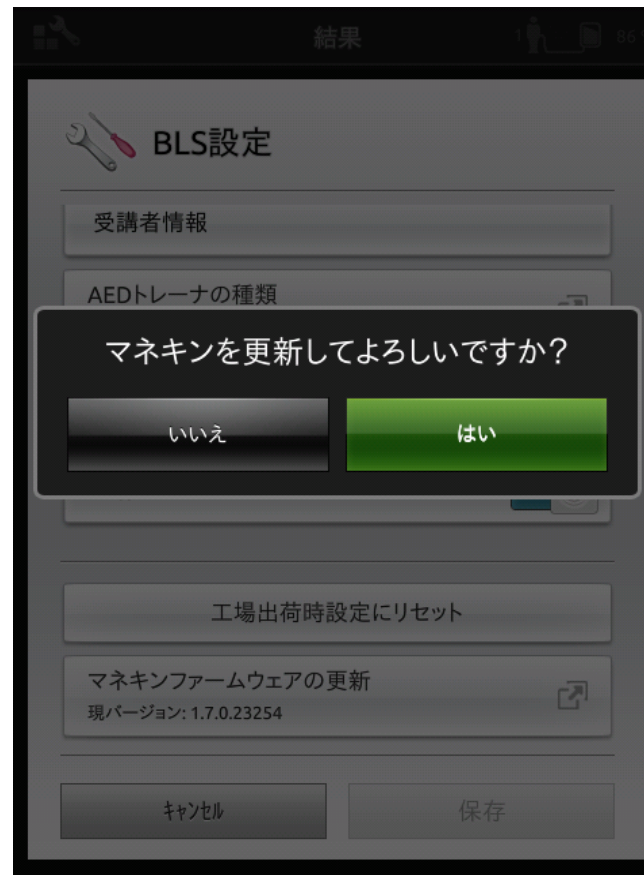


「はい」を選択すると更新が始まります。

Update方法⑤



左のコメントが表示されたらUpdate完了です。USBを外し、SimPad、マネキン共に再起動してください。

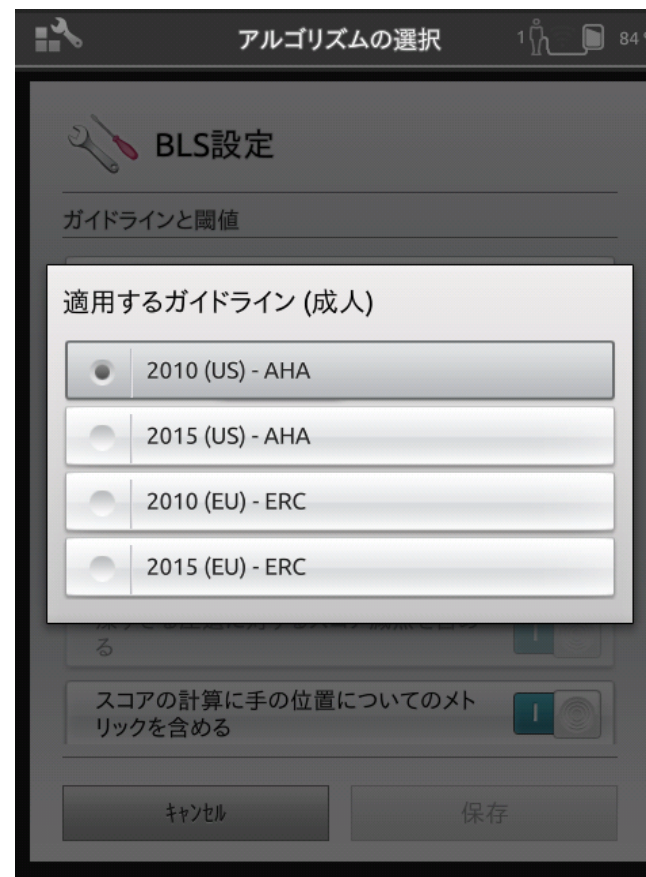

BLS設定画面にてGuideLine2015が表示されている事をご確認ください。