



Laerdal
helping save lives

Little Anne QCPR アプリケーション 評価項目解説

Help Desk Dec,5,2017 Rev2


保存データ画面

圏外 10:27 85%

Saved Results

Score	Type	Name	Date
98	30:2	テスト1	05.12.2017 10:18
DELETE ALL			

総合評価

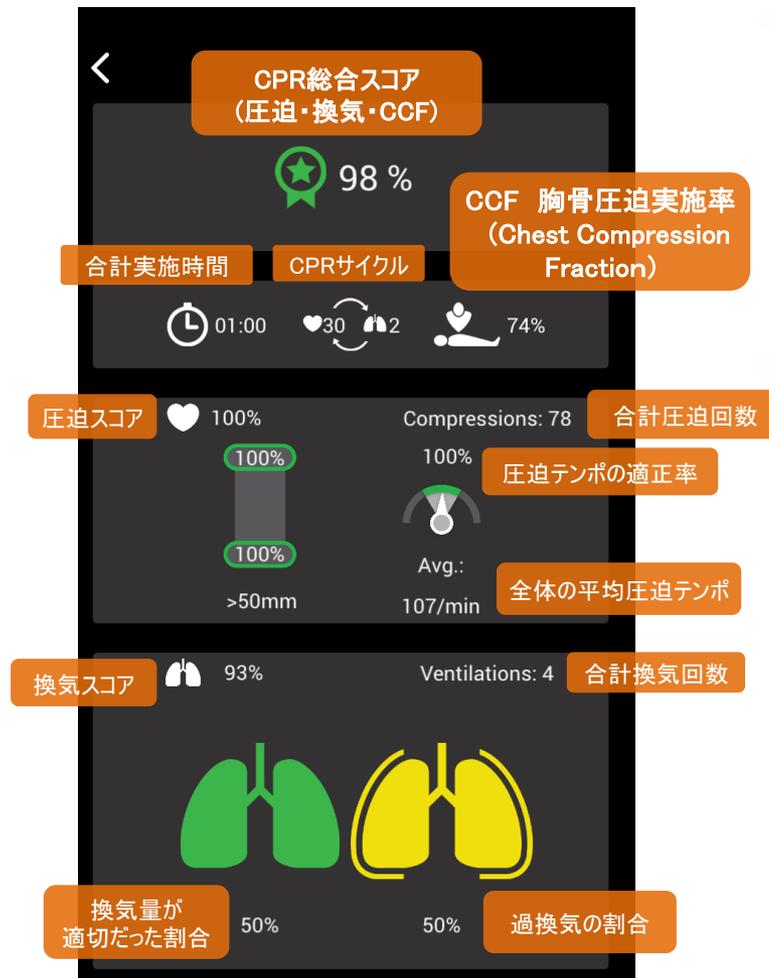

スコアと改善点のヒントを まとめた手技の要約

Overall Score 🟢

← Back

**CPR総合スコア
(圧迫・換気・CCF)**


 **98 %**

Based on compressions, ventilations and flow

The goal is to reach 75% or higher

改善点

Hint for Improvement

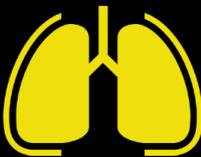

Ventilate until chest rise is achieved and then stop

胸骨圧迫詳細

← Back

**CCF 胸骨圧迫実施率
(Chest Compression Fraction)**

合計実施時間 **CPRサイクル**

Total Time Flow Fraction

 01:00  74%




Compressions per cycle Ventilations per cycle

1サイクルの最大圧迫回数	30	Max.	2
1サイクルの平均圧迫回数	30	Average	2
1サイクルの最小圧迫回数	30	Min.	2

1サイクルの最大換気回数
1サイクルの平均換気回数
1サイクルの最小換気回数

GUIDELINES
Flow fraction >75% (30:2 CPR)

胸骨圧迫詳細評価

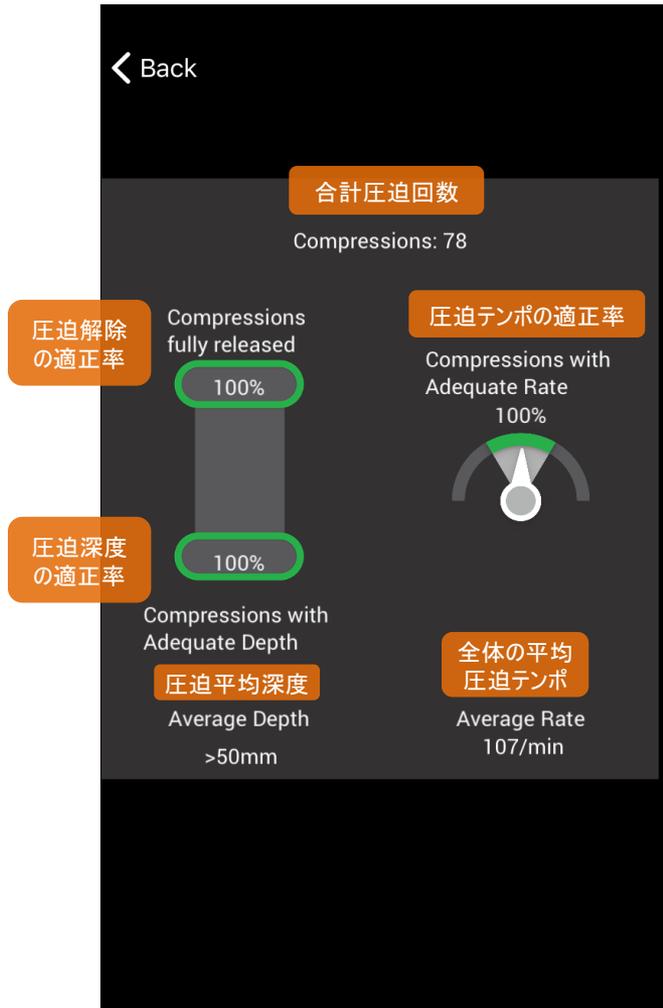

換気詳細評価

