


レサシアン with QCPR

取扱説明書

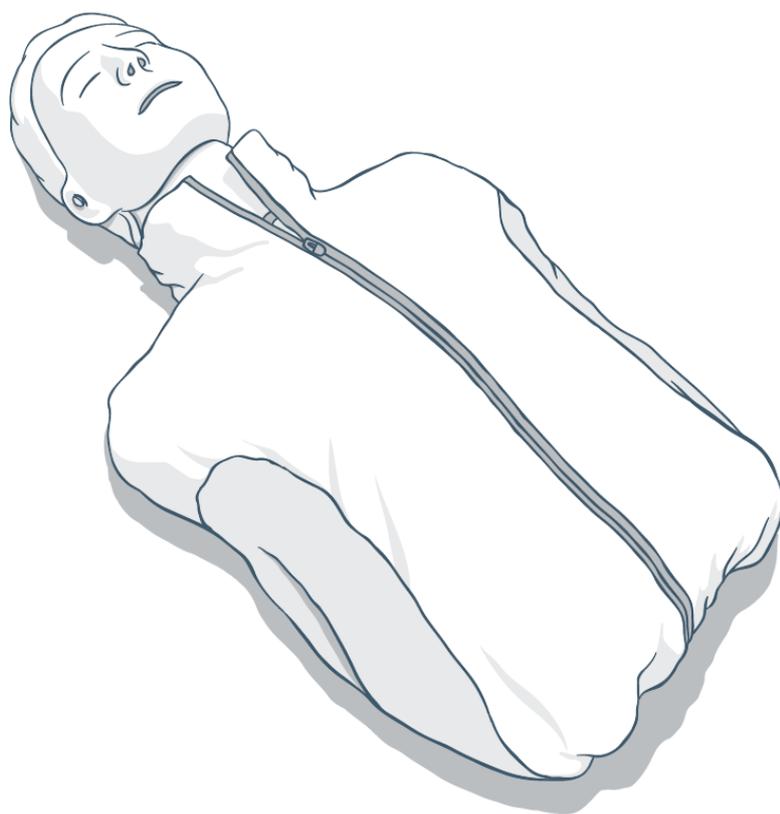


レサシアン with QCPR 目次

インフォメーション	4
バッテリーの取外し	8
バッテリーの取付け	9
マネキンセットアップ方法	10
マネキンフェイスの取外し	11
マネキンフェイスの取付け	11
ディスポーザブルエアウェイの取外し	12
ディスポーザブルエアウェイの取付け	13



インフォメーション

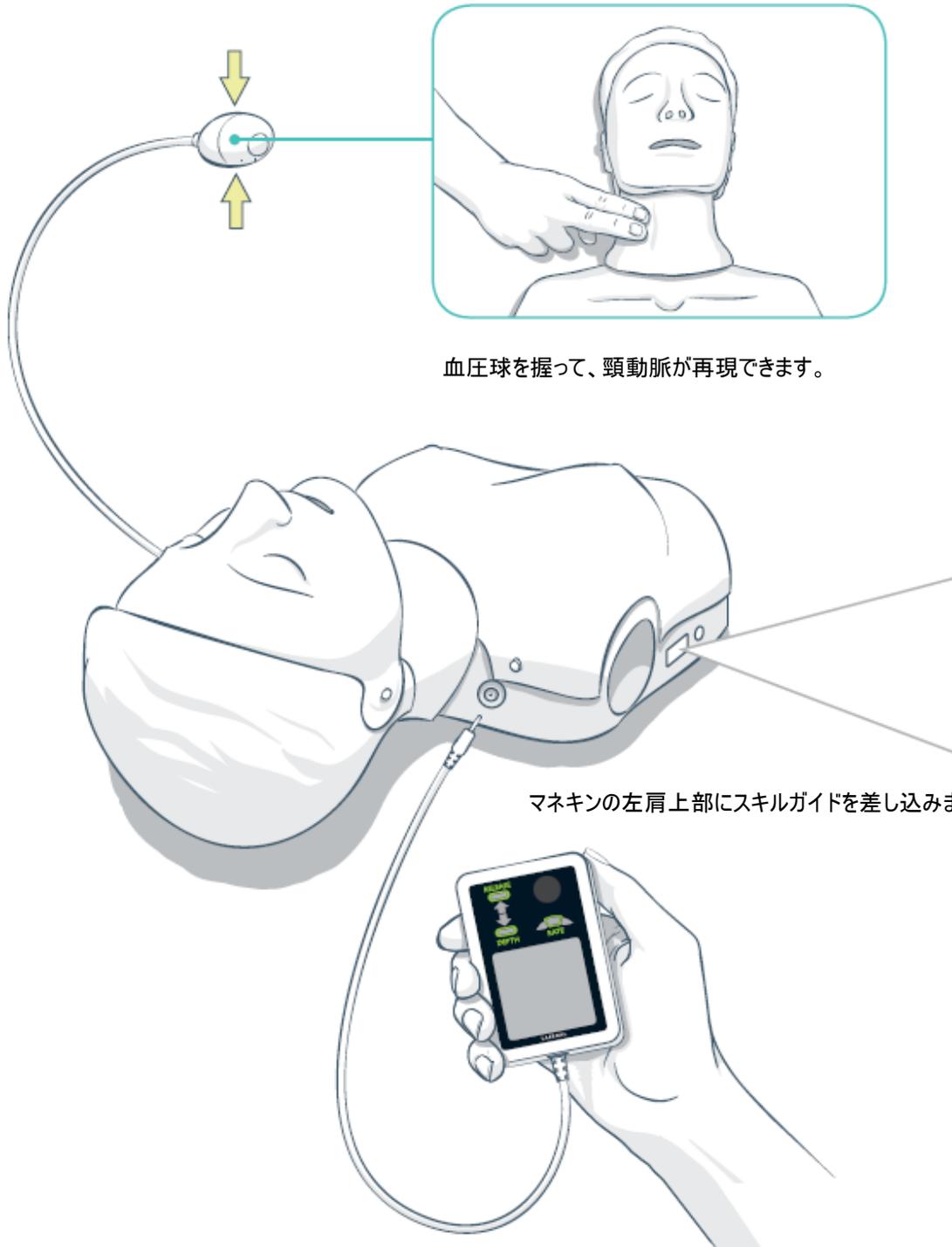




ランプが緑の場合は、使用可能です。ランプが黄色の場合は、バッテリー残量が少ない状態ですので、バッテリーを交換してください。




インフォメーション




パネルの右下にある、トグルボタンを押すことで、接続状態が Bluetooth、Wi-Fi、無線接続なし、と切り替わります。

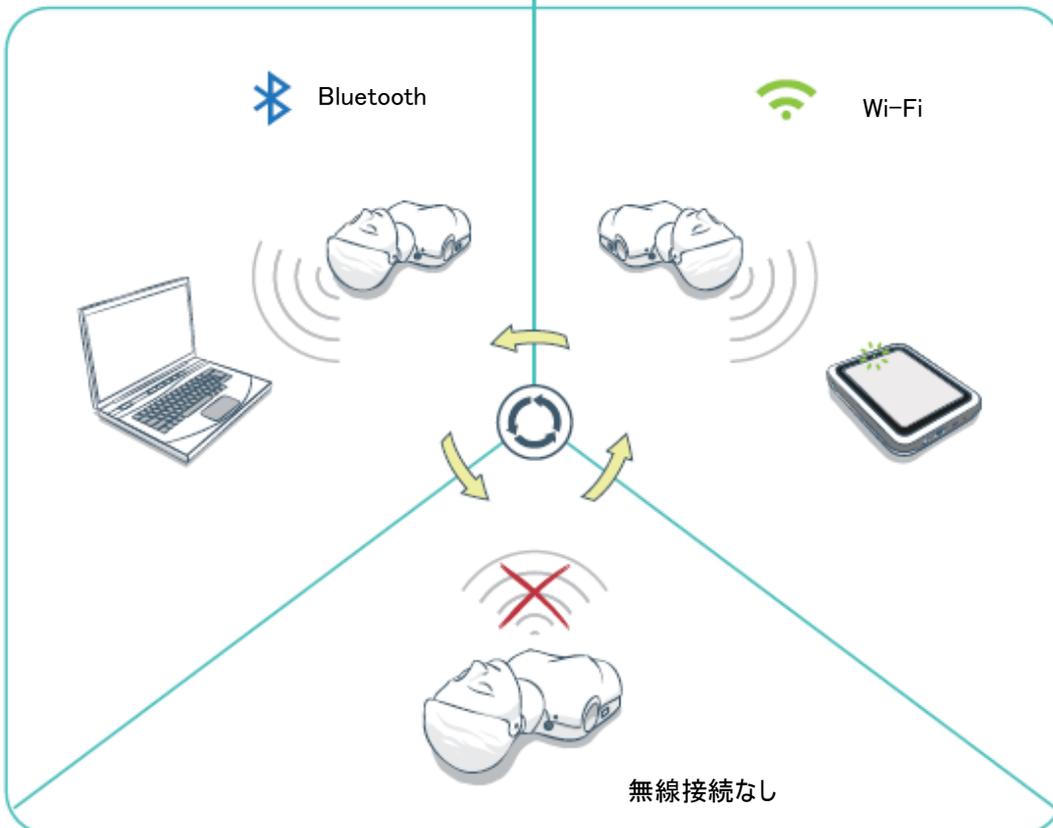

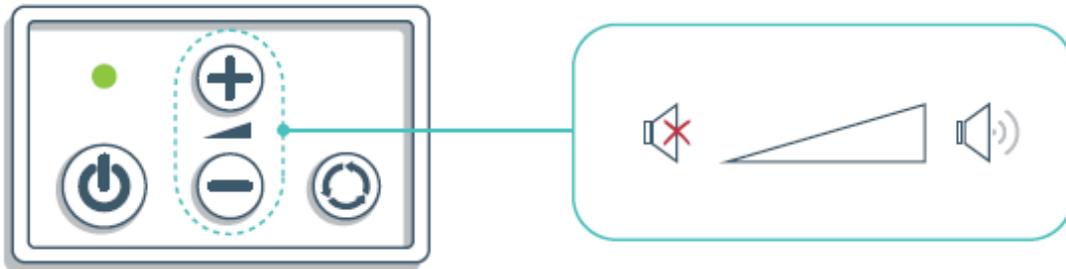





パネルの中央の音量ボタンで、マネキンのスピーカー音を調整します。

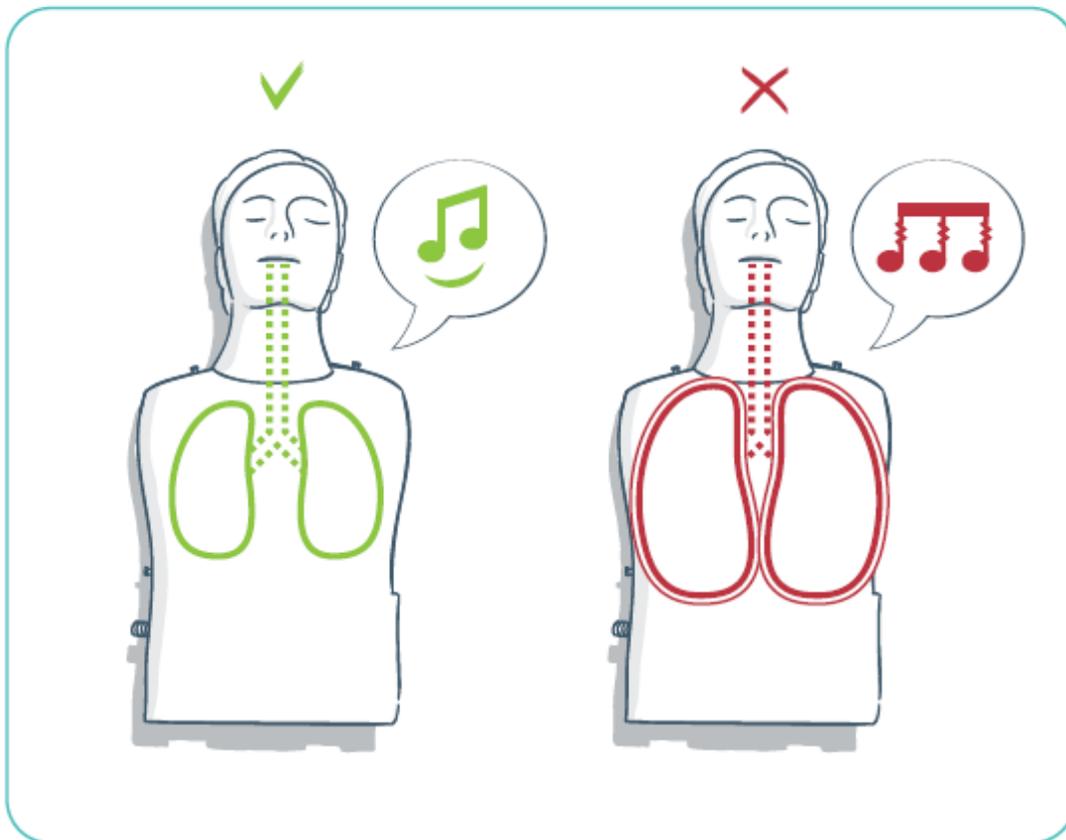

換気量が適量の場合は「ピョツ」、過換気の場合は「ブブブ」という音がします。








バッテリーの取外し

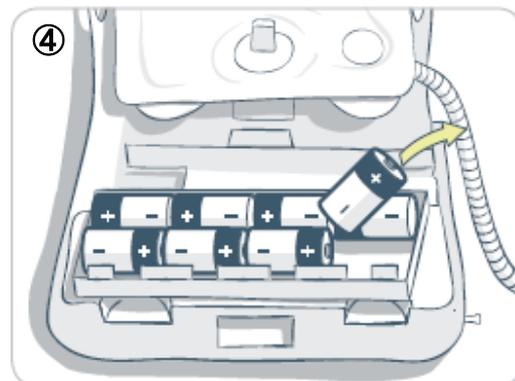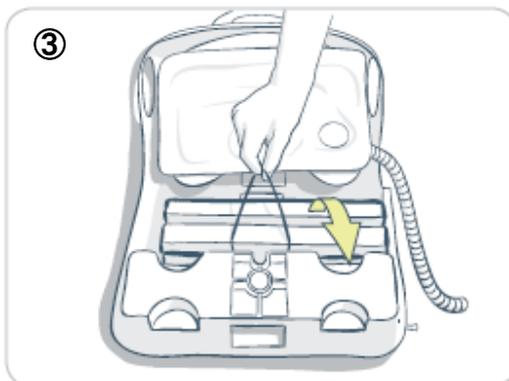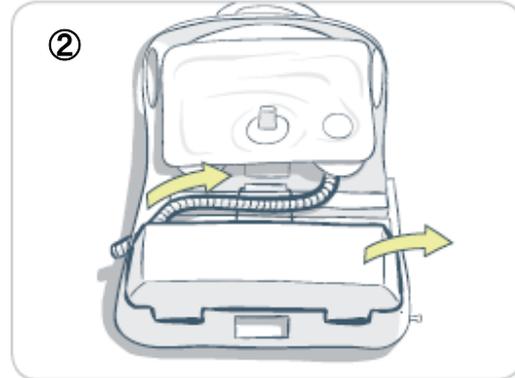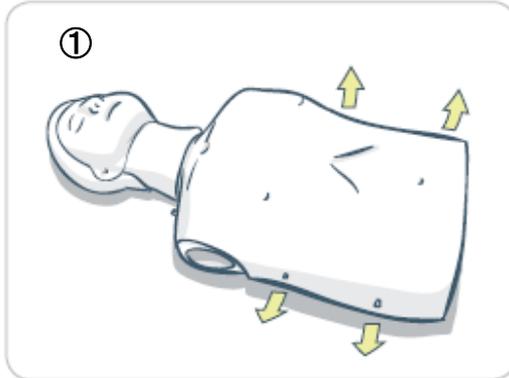

- ① マネキンのスキンを取外します。
- ② マネキン下腹部のカバーを取外します。
- ③ バッテリーボックスの留めゴムを取外します。
- ④ バッテリーボックスからバッテリーを取外します。
* 合計 8 本の単 1 バッテリーが必要です。
* 不要バッテリーは各地域の法令に従って処分してください。




バッテリーの取付け

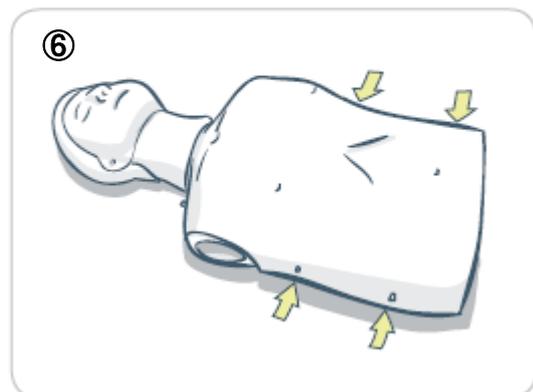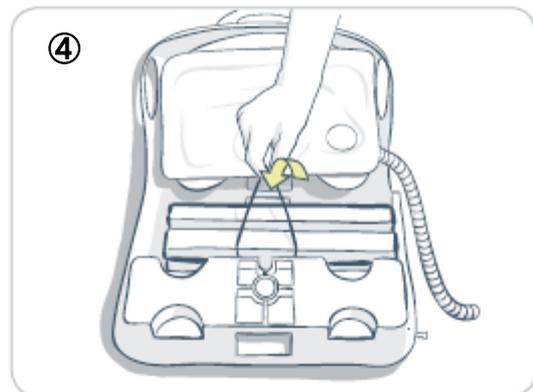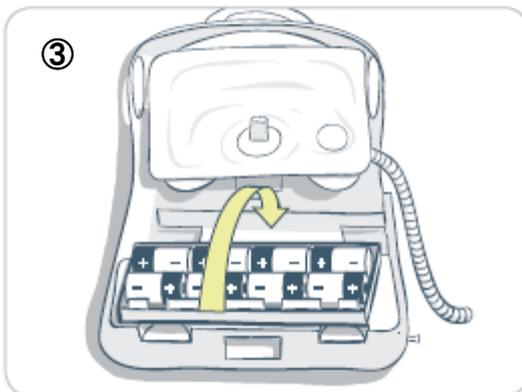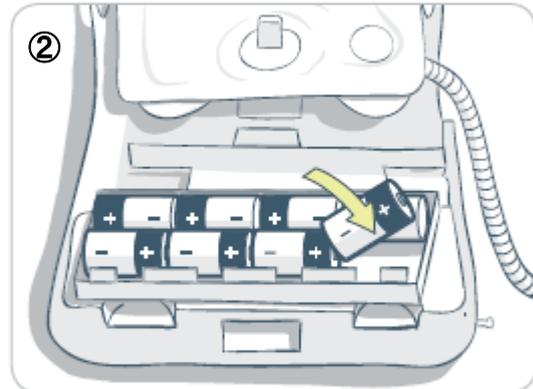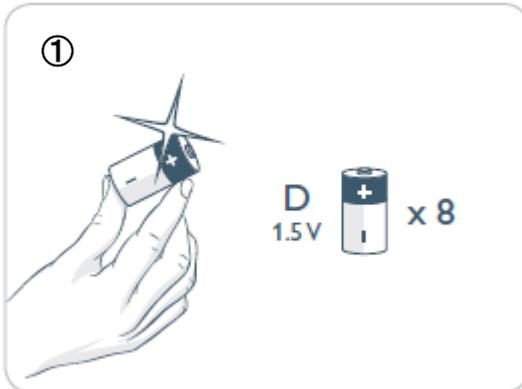

- ① 新しい単1バッテリーを8本用意します。
- ② バッテリーをバッテリーボックスにセットします。
- ③ バッテリーボックスを閉じます。
- ④ 留めゴムをセットします。
- ⑤ 下腹部パーツを取り付けます。
- ⑥ スキンを取り付けます。




マネキンセットアップ方法

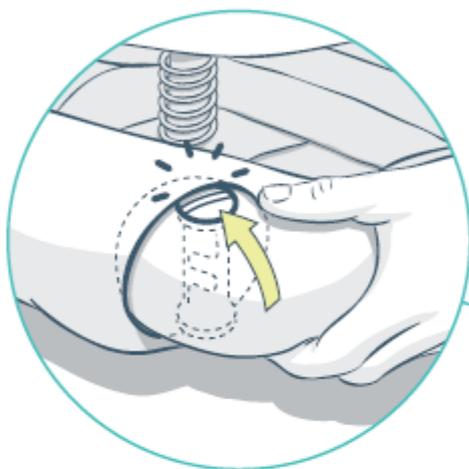

腕を差し込みます。

腕側の取付けボタンの溝が、本体の腕の付け根にはまるように取付けてください。

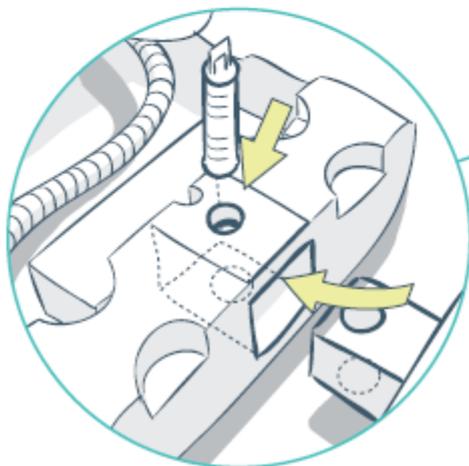


下肢を取り付けます。


下肢の差し込み部分に刺さっている、固定ねじを引き抜き、下肢を本体に差し込んだあと、ねじを腹部に刺し込んで下肢パーツを固定します。



マネキンフェイスの取外し

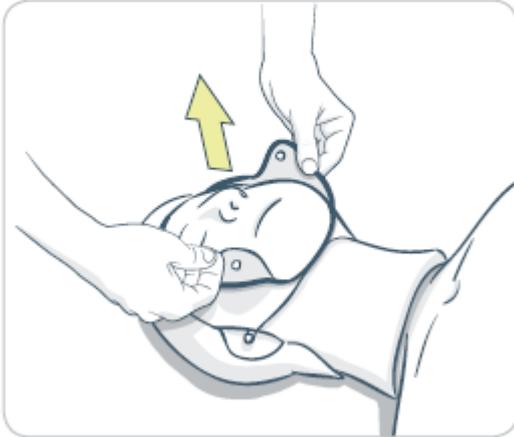


両耳部分で固定されているマネキンフェイスを外します。

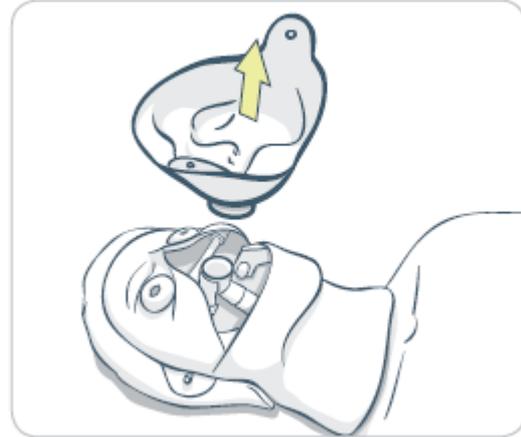

そのまま上部に引っばるかたちで、マネキンフェイスを取外します。



マネキンフェイスの取付け

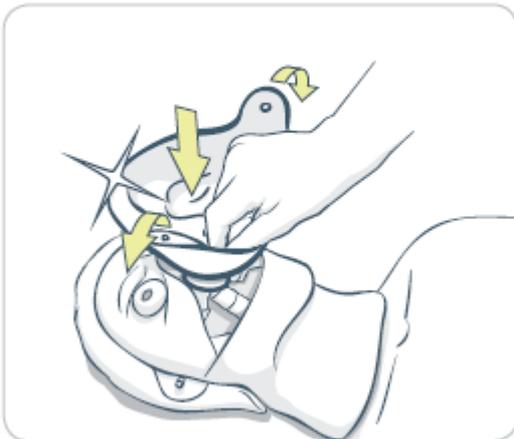


マネキンフェイスを口パーツに押し付けます。



両耳部分でマネキンフェイスを固定します。



ディスポーザブルエアウェイの取外し

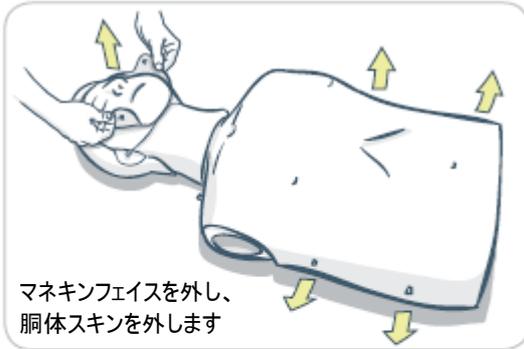


マネキンフェイスを外し、
胴体スキンを外します




下顎を下げます




下顎をそのまま引き抜きます

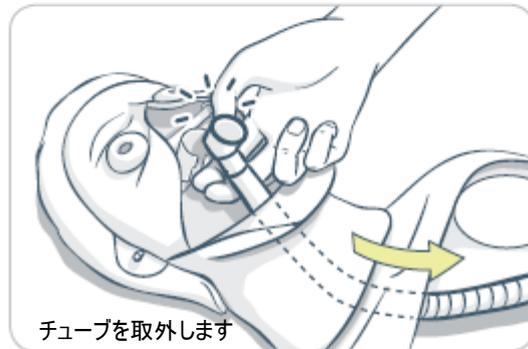


チューブを取外します

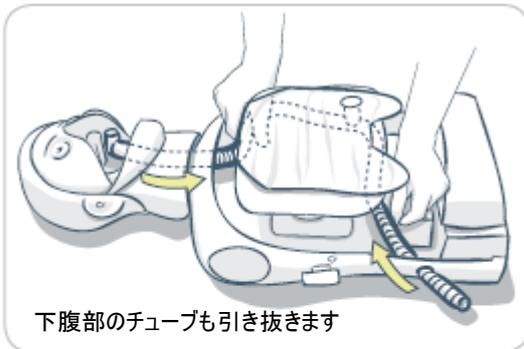

下腹部のチューブも引き抜きます

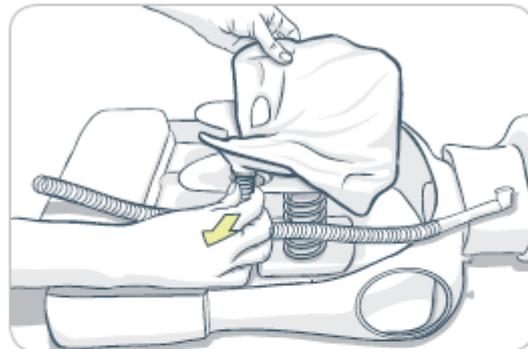


胸骨プレートからチューブを外します

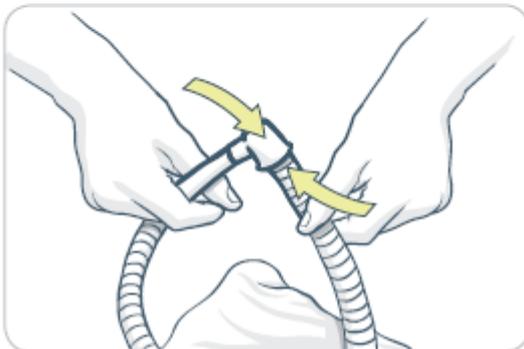

チューブ同士を重ねて差し込みます





12

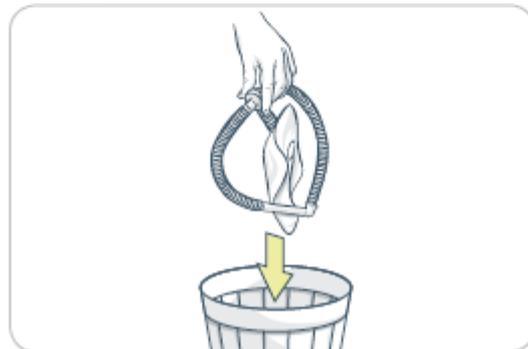

そのまま廃棄します



ディスポーザブルエアウェイの取付け

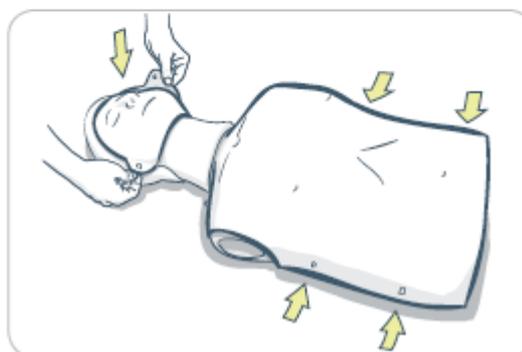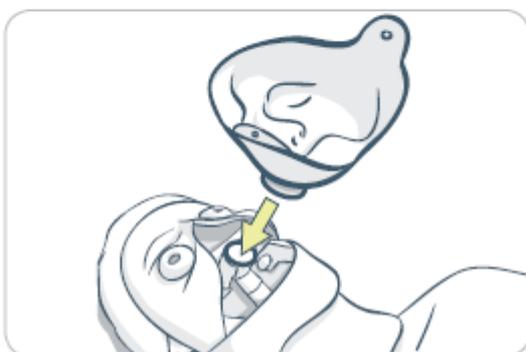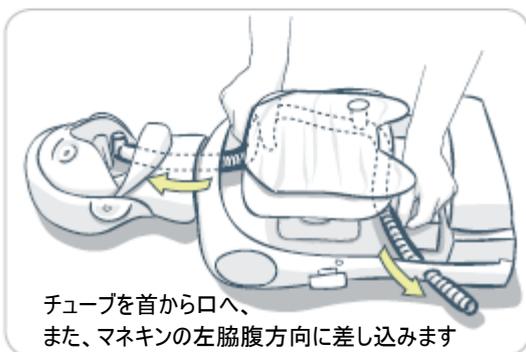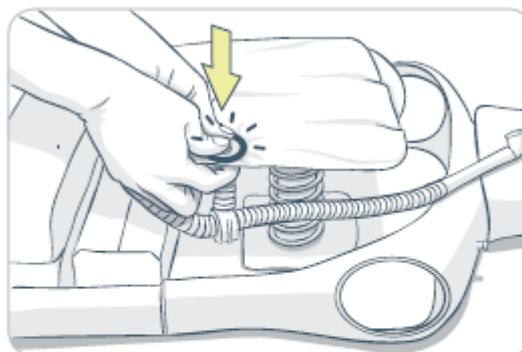

© 2013 Laerdal Medical AS. All rights reserved.
Device Manufacturer: Laerdal Medical AS, P.O. Box 377,
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 5151 1700

20-06883 Rev A

www.laerdal.com

