




Laerdal
helping save lives



リトルアンQCPRセンサー アップデート方法

2018/08 Help Desk Rev.A

- IOS及びAndroid端末でLeraner、Instructorアプリケーションとの初回接続時QCPRセンサーのソフトウェアアップデートを求められる場合は以下の手順にてアップデートをお願いいたします。
- スキルガイドではQCPRセンサーのアップデートは出来ません。
- スキルガイドのみでのご使用の場合でも動作向上のためにQCPRセンサーのアップデートを推奨いたします。



- IOS端末（iPhone,iPad等）とリトルアンQCPRの初回接続時にQCPRセンサーソフトウェアが古いバージョンの場合、QCPRセンサーのアップデートを求められます。

- ・ Learnerアプリケーションをタップ。 右上の  をタップ
- ・ 「Connect to the manikin」画面からIOS端末とリトルアンQCPRを接続する。

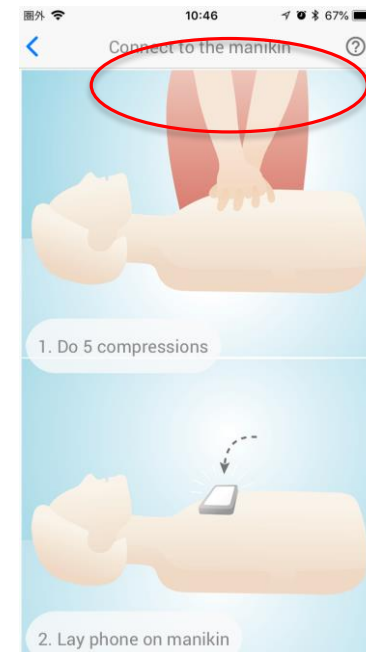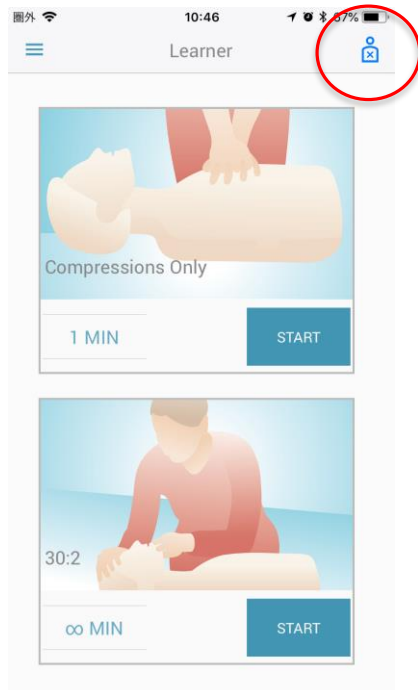





- ・ 接続時にマネキンアップデートを求められますので「UPDATE」をタップしてください。


- ・ アップデートが始まります。

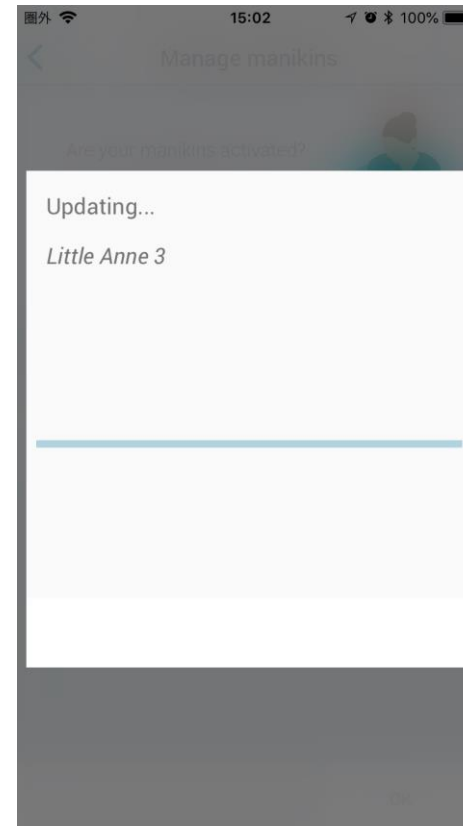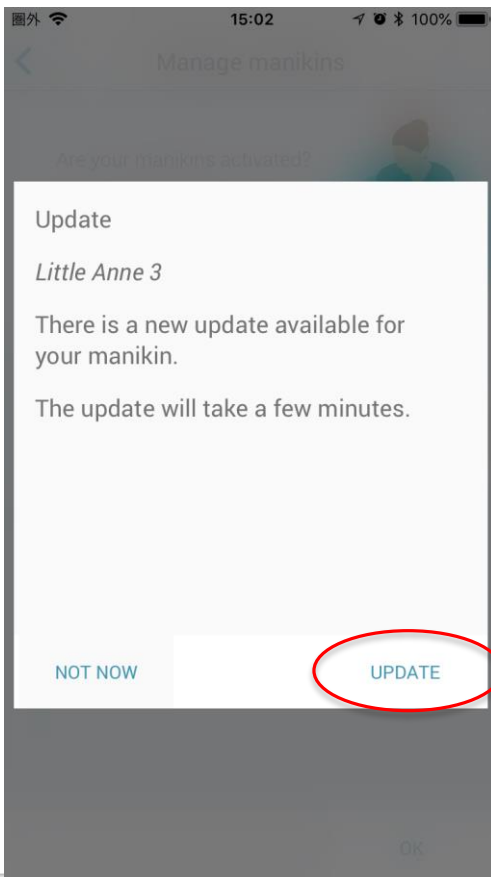

・アップデートが完了しました。

・通常の手順でマネキンと端末を接続してください。

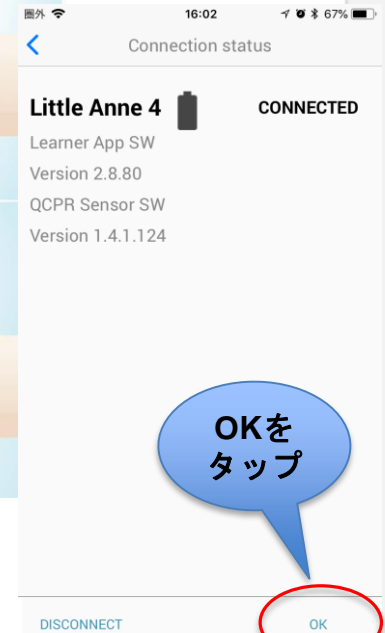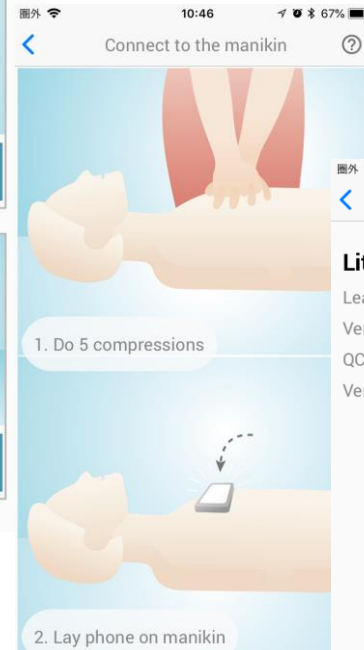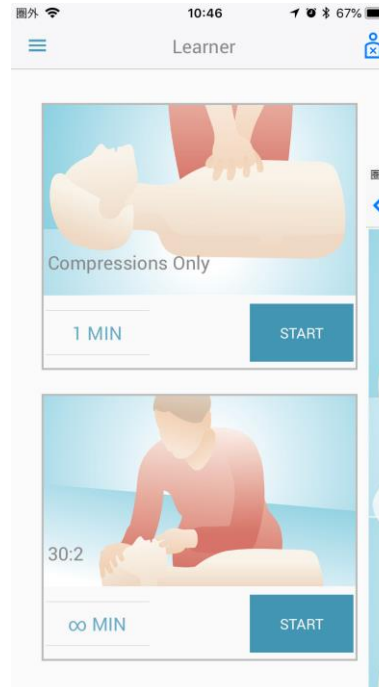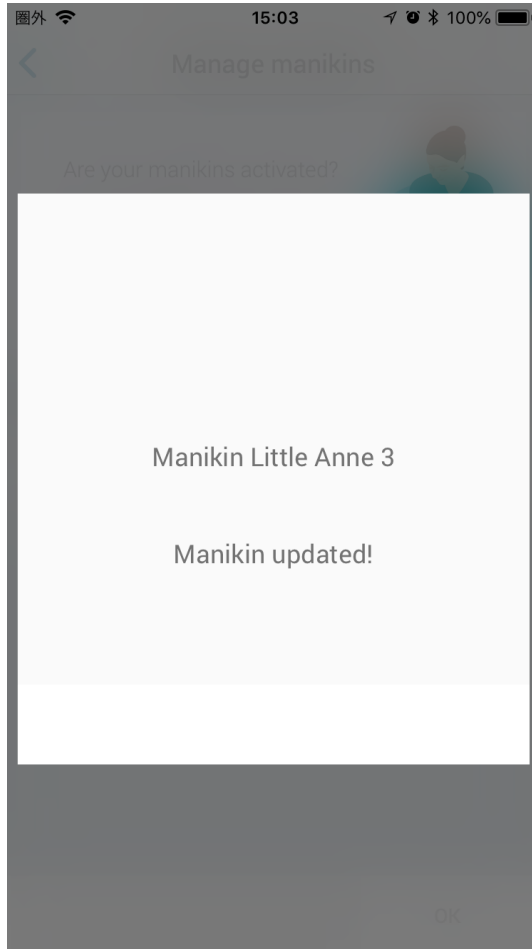

- アプリケーションを起動し
右上のマークが  になって
いればタップする。
- 各ソフトウェアバージョン
が確認できます。

