

Simulateur de sonde nasogastrique et de soins de trachéotomie

Mode d'emploi

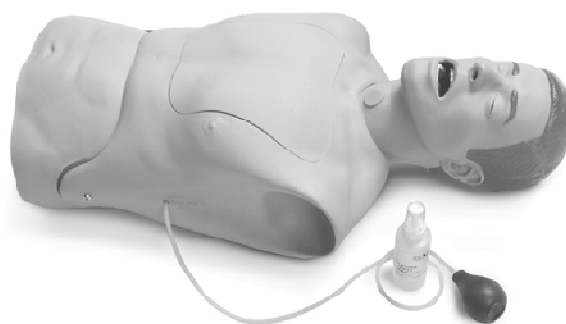


Table des matières

Conseils Laerdal	4
Matériel fourni	4
Compétences acquises	4
Soins de trachéostomie	5
Pouls carotidien	5
Positionnement du tube nasogastrique	5
Gestion des voies respiratoires	5
Entretien	6
Pièces détachées	7

Le Simulateur de sonde nasogastrique et de soins de trachéostomie (375-10001) est un tronc de mannequin grandeur nature, apte à simuler de façon réaliste le patient. Il a été spécialement étudié pour la formation des professionnels de santé à la pratique de la trachéostomie de base, à l'insertion de la sonde nasogastrique et à la gestion des voies respiratoires.

Grâce à sa fabrication de qualité, cet équipement de simulation pourra être utilisé pour de nombreuses séances de formation, si vous l'entretenez avec soin.

Conseil Laerdal :

Sonde de trachéostomie – Taille 6

Sonde d'intubation endotrachéale – Taille 7.5

Matériel fourni :

- (1) Simulateur de sonde nasogastrique et trachéostomie
- (1) Couvercle du réservoir
- (1) Mallette de transport
- (1) Lubrifiant pour le mannequin
- (1) Lampe rouge
- (1) Livret de garantie internationale Laerdal
- (1) Mode d'emploi

Compétences acquises :

- Trachéostomie
- Aspiration de la trachée
- Insertion et extraction de la sonde nasogastrique
- Irrigation, installation et suivi de la sonde nasogastrique
- Insertion et extraction de la sonde d'alimentation
- Lavage et gavage gastrique
- Insertion, gestion et extraction de la sonde nasoentérique et oesophagée
- Insertion et aspiration oropharyngée et nasopharyngée
- Insertion, fixation et gestion des sondes endotrachéales

Trachéostomie :

Conseils de Laerdal

Utiliser une sonde pour trachéostomie de taille 6. Même si l'ouverture peut recevoir des sondes de tailles différentes, la 6 est généralement plus adaptée.

Pour rendre plus réaliste la simulation de la trachéostomie, mélanger :

- 1/2 tasse de détergent doux
- 1/2 tasse d'eau

La consistance de la solution est proche de celle du mucus que l'on trouve, généralement, chez les patients faisant l'objet d'une trachéostomie.

Verser le mélange dans les poumons du mannequin et remplir suffisamment pour que le cathéter d'aspiration puisse aspirer la solution.

Pouls carotidien :

Pour générer le pouls carotidien, utiliser la poire rouge située à côté de l'aisselle droite du mannequin. Serrer fort la lampe tout en palpant la carotide.

Positionnement de la sonde nasogastrique :

Le mannequin comporte un oesophage et un réservoir d'estomac permettant de s'exercer à installer la sonde nasogastrique et à pratiquer le Lavage et le Gavage.

Avant d'installer la sonde, lubrifier le tube avec un spray au silicone ou un détergent liquide.

Gestion des voies respiratoires :

1. Vaporisez abondamment l'intérieur du pharynx, les deux narines et les sondes d'intubation avec le lubrifiant fourni ou avec du détergent liquide.
2. Procéder à l'intubation selon votre protocole de formation local.

NOTE : Enlever la prise située dans la partie avant du cou avant de placer les sondes à l'intérieur des voies respiratoires.

Conseil Laerdal

Bien qu'il soit possible d'introduire une sonde endotrachéale de 8.5, nous conseillons une sonde de 7.5 pour prolonger la durée de vie de votre simulateur.

Entretien :

1. Nettoyer à l'eau et au savon doux ; ne pas immerger complètement le mannequin ou ses parties dans de l'eau ou des produits nettoyants liquides.
2. Utiliser uniquement une surface propre. Eviter les feutres, les stylos, l'acétone, l'iode ou tout autre produit qui tâche et ne pas placer le mannequin sur des feuilles de papier journal ou d'autres pages imprimées.
3. Pour assurer une longue durée de vie de votre mannequin, le nettoyer après chaque séance de formation et l'inspecter régulièrement.
4. Les modules et les autres parties doivent être vidé(e)s et séché(e)s complètement à l'air avant d'être rangé(e)s et désinfectée(e)s si nécessaire.
5. Appliquer un peu de talc sur les parties articulées du mannequin, avant la simulation.
6. Ranger avec soin le mannequin entre deux séances de formation.



Précautions et mises en garde

Ce produit contient du **latex naturel** susceptible de déclencher des réactions allergiques chez l'homme.

Pièces détachées :

Référence:

100-00650

100-00750

300-00650

255-00350

Description :

Couvercle du réservoir

Mallette de transport

Lubrifiant pour mannequin

Lampe rouge