

SkillGuide

Mode d'emploi

Français



Laerdal

helping save lives

SkillGuide

SkillGuide est un dispositif de Feedback conçu pour donner un Feedback global sur les performances de la RCP.



www.laerdal.com



Éléments inclus

SkillGuide et le mode d'emploi.




Connexion

Connectez SkillGuide au mannequin.

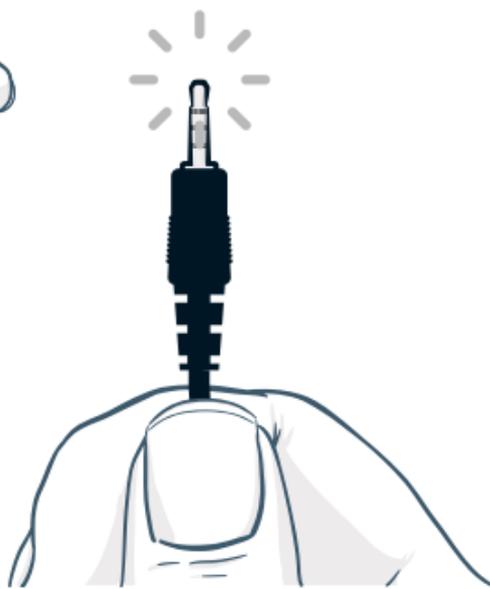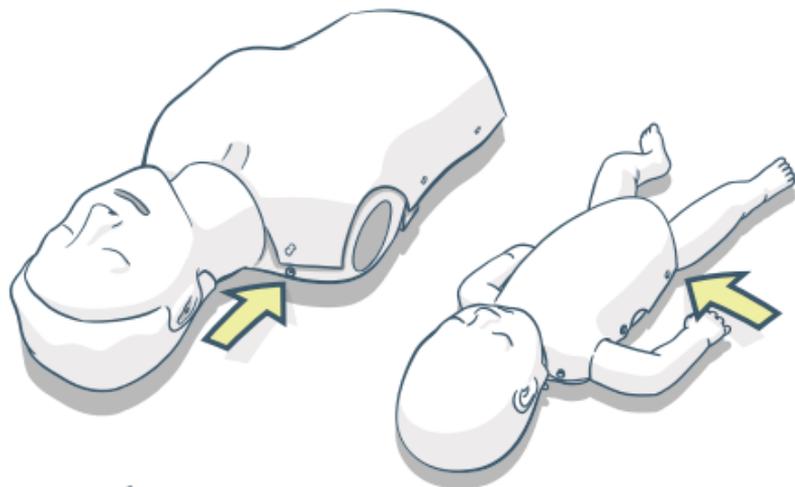

Mise sous tension

Allumez le mannequin pour activer SkillGuide.

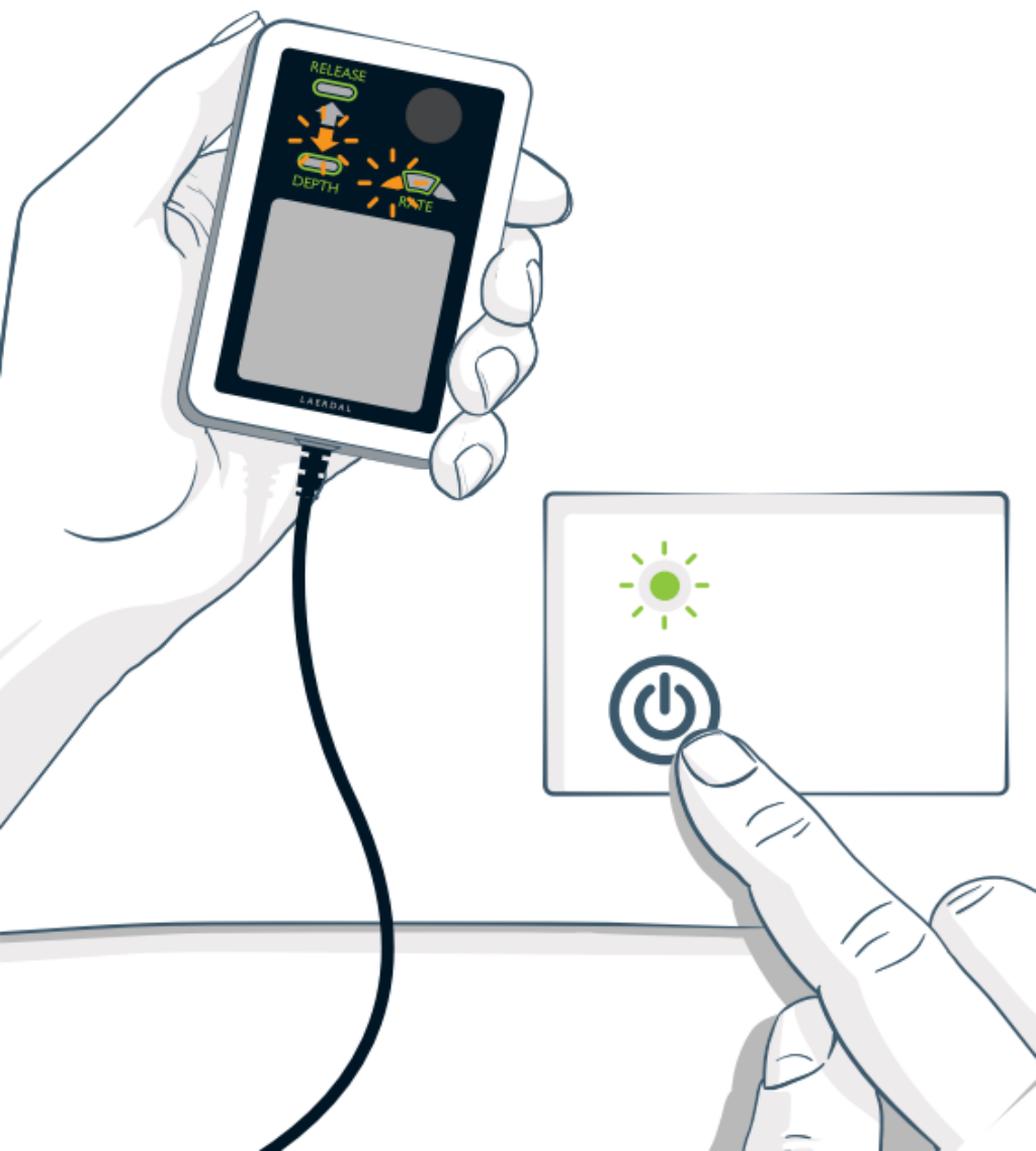


Démarrage

Le chronomètre de la session démarre lorsque vous commencez la RCP et s'arrête lorsque vous activez le mode Debrief. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant une seconde pour réinitialiser le dispositif.




Basculement d'un mode à un autre

Appuyer sur ce bouton pour passer d'un mode à un autre.

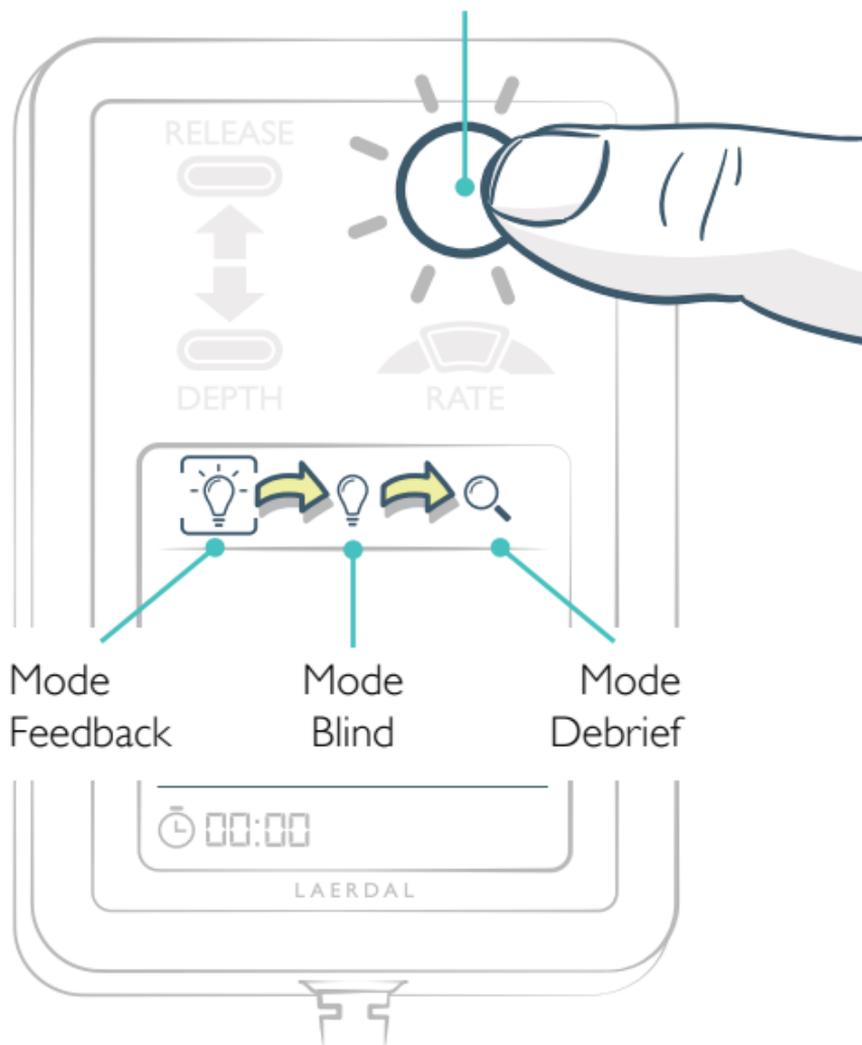


Mode Feedback

En mode Feedback, les voyants DEL offrent un Feedback en temps réel sur les compressions. La durée de la session et un positionnement incorrect des mains (le cas échéant) sont affichés à l'écran.

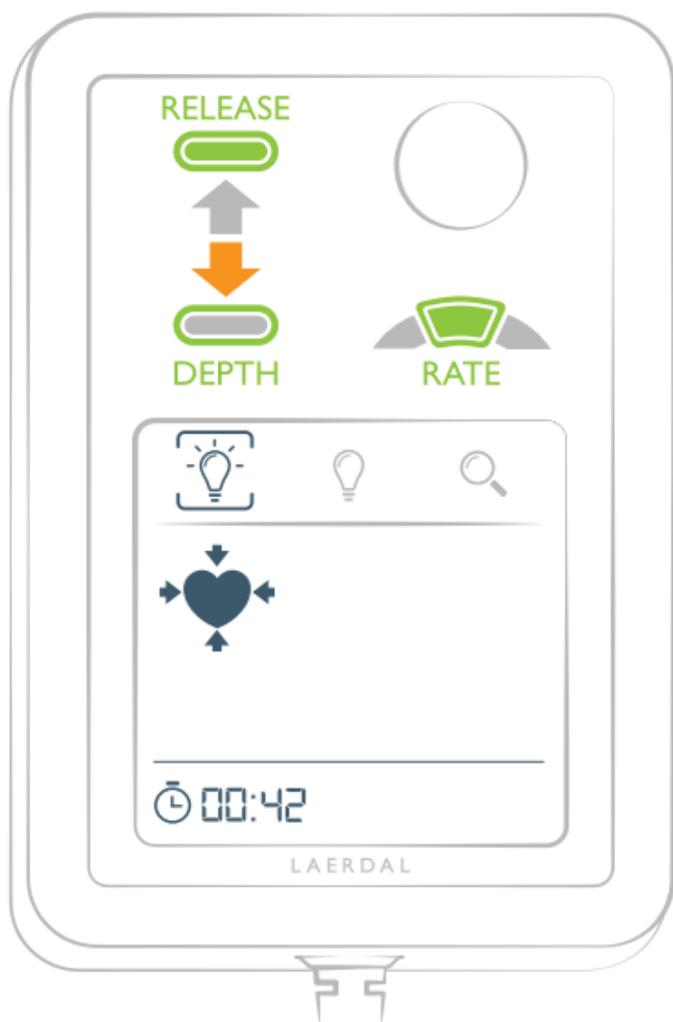


Mode Feedback

Indicateur de profondeur

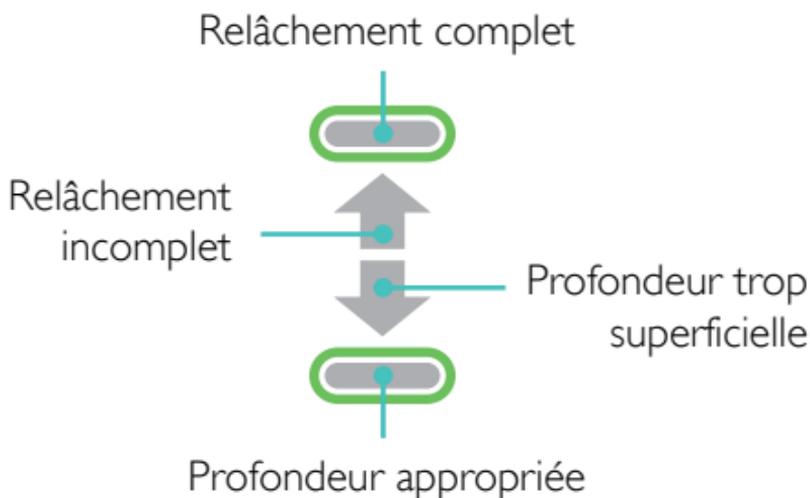


Débitmètre de compression

Fréquence appropriée des compressions

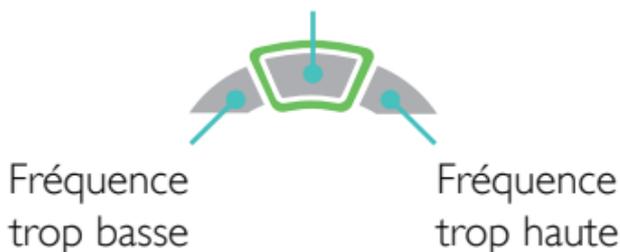


Mode Blind

En mode Blind, aucun Feedback sur les compressions n'est affiché, seul le chronomètre de la session l'est.

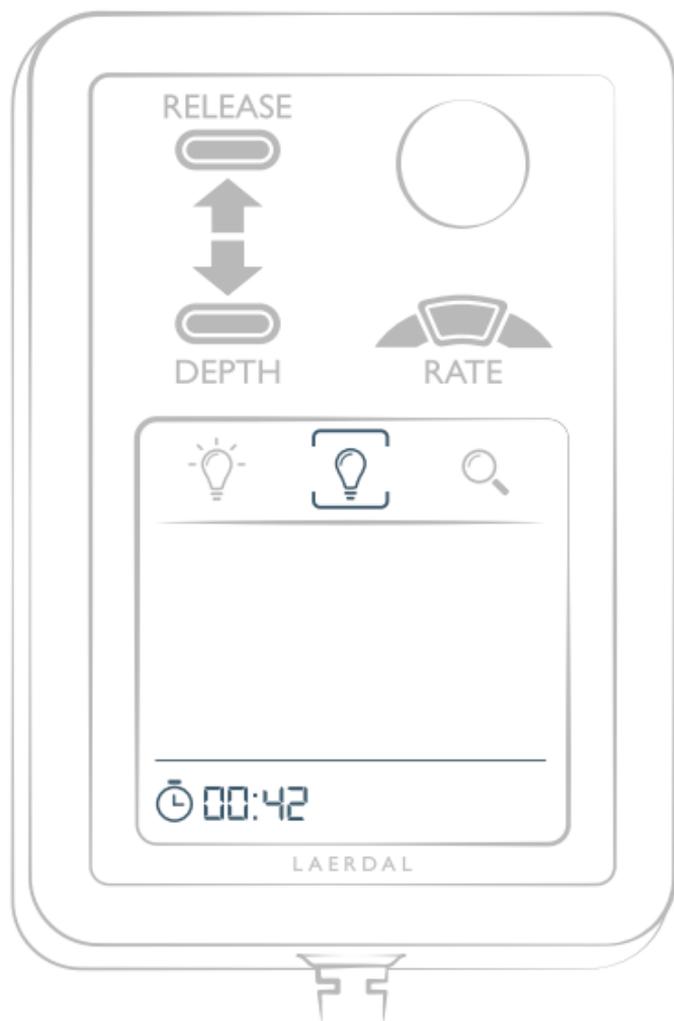

Mode Debrief

En mode Debrief, les DEL et l'affichage indiquent succinctement les performances de la session.

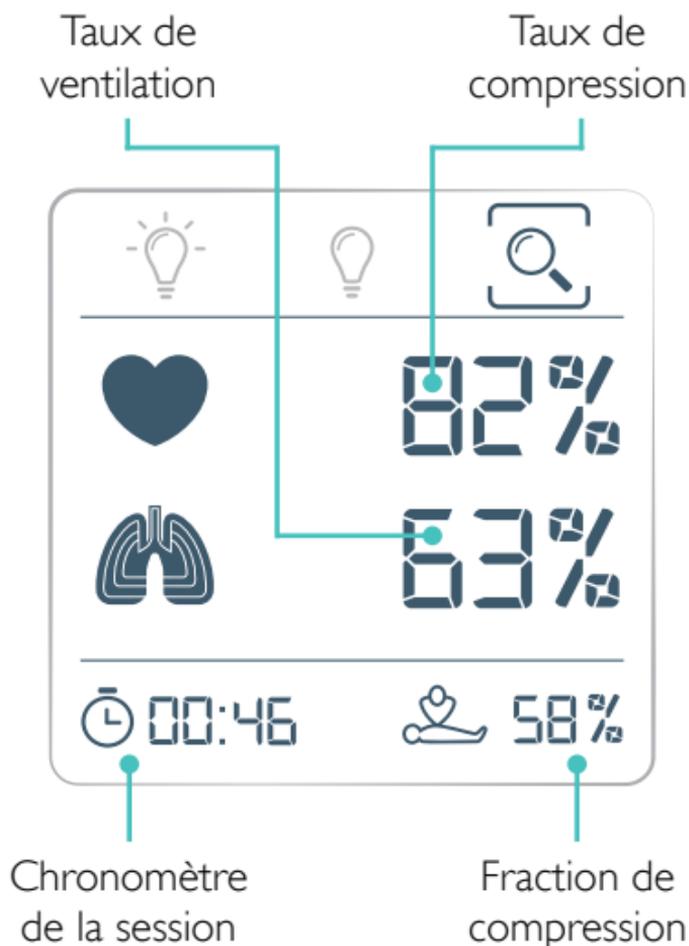

Mode Debrief

Taux de compression

Taux total des compressions de la session.

La profondeur, la fréquence et le relâchement des compressions, ainsi que le positionnement des mains, font partie des facteurs utilisés pour le calcul du taux.

En mode Debrief, les voyants indiquent les erreurs de profondeur, de fréquence et de relâchement détectées tout au long de la session. L'erreur la plus significative clignote.

RELEASE



DEPTH



RATE

Mode Debrief

Positionnement des mains

Le symbole en forme de cœur indique si le positionnement des mains était correct ou incorrect.



Positionnement
correct des mains



Positionnement
incorrect des mains


Mode Debrief

Taux de ventilation

Taux total des ventilations. Le volume et le débit de ventilation font partie des facteurs utilisés pour le calcul du taux.

Volume de ventilation

L'erreur la plus significative (le cas échéant) est représentée par une courte animation.

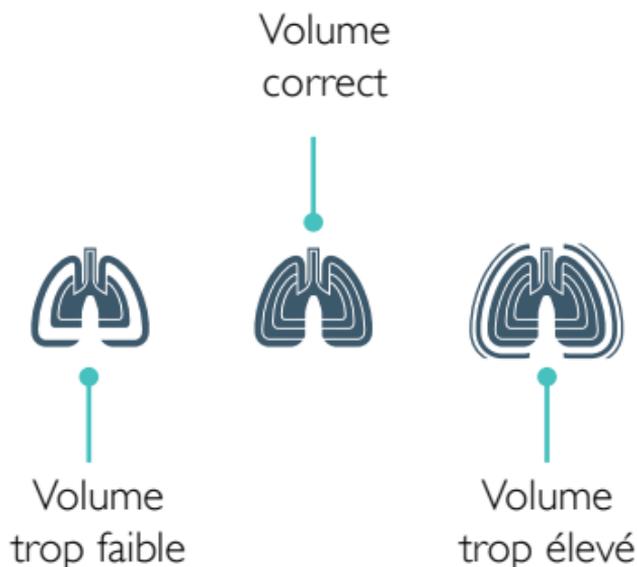

Mode Debrief



Chronomètre de la session

Mesure la durée de la première compression ou ventilation jusqu'à l'arrêt de la session. Vous pouvez interrompre une session en activant le mode Debrief.



Fraction de compression

Pourcentage de la session au cours de laquelle des compressions ont été effectuées.



Pour obtenir des informations plus détaillées sur les calculs de taux, visitez www.laerdal.com.

SkillGuide

Informations importantes sur le produit



Laerdal
helping save lives

SkillGuide Français

Caractéristiques environnementales

Température et humidité

Température de fonctionnement : de 0 °C à +40 °C ; Humidité relative : < 95 %, sans condensation.

Température de stockage et de transport : de -15 °C à +50 °C.

Résistance aux infiltrations d'eau et de poussière

Introduction d'objets étrangers solides : classe IP3X conformément à la norme CEI60529.

Infiltration d'eau : classe IPX2 conformément à la norme CEI60529.

Eau et humidité

Ne pas utiliser ce dispositif sous l'eau ou à proximité d'eau. Ne pas utiliser le produit avec les mains mouillées.

Nettoyage

Déconnecter SkillGuide du mannequin avant nettoyage. Ne pas utiliser d'agents nettoyants liquides ou sous forme d'aérosol. Utiliser un chiffon non pelucheux humidifié d'eau pour le nettoyage des surfaces extérieures.

Maintenance

Ne pas tenter de démonter ou de réparer SkillGuide. Le démontage et les réparations doivent être exclusivement effectués par du personnel de maintenance qualifié.



Déclaration de conformité CE

Laerdal Medical AS déclare par les présentes que lorsque le produit comporte le marquage CE, il est en conformité avec les exigences minimales de la Directive 2004/108/CE du Conseil concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) et de la Directive 2011/65/UE du Conseil concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses.



DEEE

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Cet appareil est marqué conformément à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

En garantissant que ce produit est éliminé convenablement, vous éviterez des conséquences éventuellement dommageables pour la santé humaine et l'environnement, qui pourraient survenir du fait d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Le symbole apposé sur le produit ou sur les documents qui l'accompagnent indique que cet appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte adapté pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Son élimination doit être réalisée conformément à la réglementation environnementale locale relative à l'élimination

des déchets. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le traitement, la collecte et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service de gestion des déchets ménagers local ou votre représentant Laerdal.

FCC Statement (applies only to USA)

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The use of shielded I/O cables is required when connecting this equipment to any and all optional peripheral or host devices. Failure to do so may violate FCC rules.

GARANTIE LIMITÉE

Reportez-vous à la déclaration de garantie mondiale de Laerdal et, pour plus d'informations, visitez le site suivant : www.laerdal.com

Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.

