



Laerdal

helping save lives



Little Anne 4 pack med CPRmeter

Little Anne HLR-treningsdukken er nylig blitt forbedret for å tilrettelegge for mer realistisk voksen HLR-trening med tilbakemeldingsverktøy. Den er slitesterk og designet for at praktisk trening skal være enkel å utføre.

Grunnet høyst realistisk brysthev- og senking samt kompresjonsmotstand, kan tilbakemeldingsverktøy som CPRmeter brukes til å forsikre tilbakemelding i sanntid og tilrettelegge for kvalitetstilbakemelding og gjennomgang av trening i etterkant.



Little Anne 4 pack med CPRmeter

CPRmeter gir tilbakemelding i sanntid på den HLR kvaliteten som utøves. Ved å øve med Little Anne og CPRmeter lærer det å gi høykvalitets-HLR, noe som er nødvendig for å komprimere best mulig når det gjelder.


“Bruken av CPRmeter førte til en vesentlig forbedring av kvaliteten på HLR for uerfarne elever.”

Buléon, C. et al, Improvement in chest compression quality using a feedback device (CPRmeter), American Journal of Emergency Medicine, (2013)


Hvordan fungerer CPRmeter?

CPRmeter har to innebygde sensorer: en som måler akselerasjon og en som måler kraft. En avansert mikroprosessor måler kontinuerlig begge disse parameterene under hver kompresjon og spesielle algoritmer konverterer det innsamlede dataet til meningsfull informasjon.

Akselerometeret måler dybden og hastigheten på bevegelsen av brystveggen under hver kompresjon og konverterer det til avstanden brystveggen har beveget seg. Kraftsensoren måler kraften som brukes under HLR og registrerer også om den som leverer kompresjonene slipper brystet fullstendig opp mellom kompresjonene. Tilbakemelding gis dersom den som utfører HLR lener seg på pasienten under HLR. Dette gjør at den som gir HLR leverer pleie som er i tråd med retningslinjene for korrekte kompresjoner uansett stivhet på brystet til individuelle pasienter.

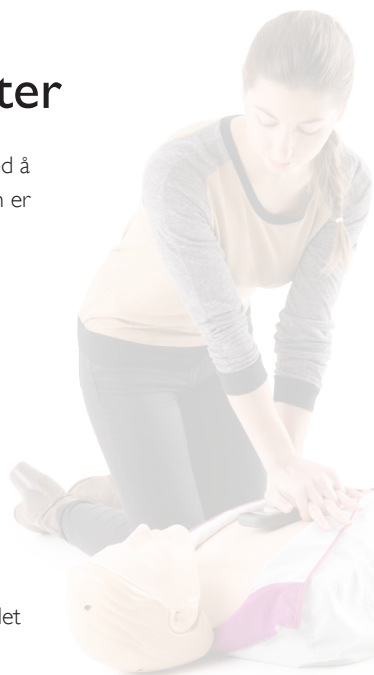


Korrekt dybde og hastighet

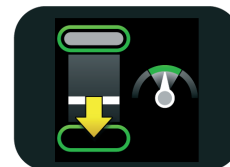


Komprimer dypere



Slipp opp mellom hver kompresjon

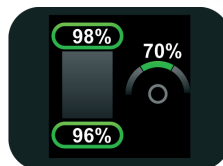


Q-CPR Quick Review hendingsstatistikk

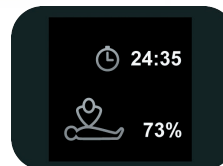

Komprimer saktere



Tid uten aktivitet

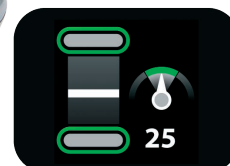

Kompresjonsteller



BESTILLINGSINFORMASJON

KIT-LittleAnneCPR Little Anne 4 pack
CPR meter



FORBRUKSVARER



310210 Ansikt x 6
310215 Face Skin, dark x 6



020300 Luftvei KPL. LA 24 stk.
020301 Luftvei KPL. LA 96 stk.



Laerdal
helping save lives