


SimMan 3G

クイックセッアップガイド

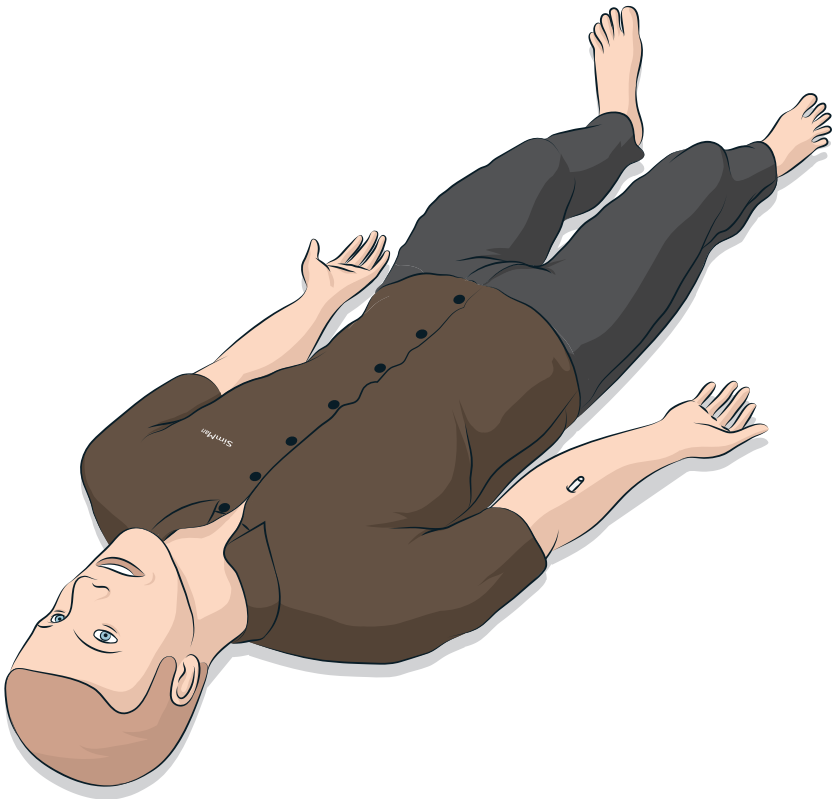


本クイックセットアップガイドでは、SimMan 患者シミュレータの組み立て方法とセットアップ方法を解説しています。SimMan の使用方法については、LLEAP のヘルプファイルと SimMan の取扱説明書をご参照ください。


最新の取扱説明書およびソフトウェアは、www.laerdal.com/downloads でダウンロードできます。




上半身

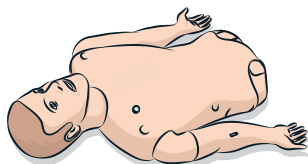

インラインフィルタ, 血液
x 2

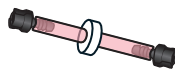

下肢

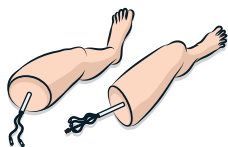

除細動 ECG 固定具




衣服



ECG アダプタ電極



頸部スキン
x 6

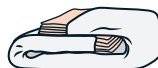


義歯、上顎用(ハードタイプ)




肺コンプライアンス O リング
x 10



外性器 (男性 & 女性)

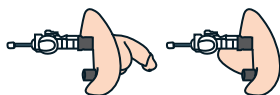


液体 & 血液 注入ユニット

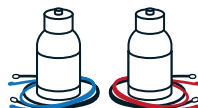

ID バンド



外傷モジュールキット

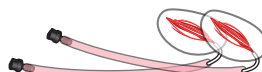

SimMan アームアダプタ



チェストドレーンスリーブ
x 6



疑似血液



潤滑スプレー



血圧計カフ



IV バッグ



IV 延長チューブ



輪状甲状靭帯テープ




脛骨パッド & 脛骨
x 3



IM パッド



気胸

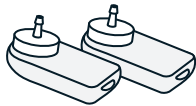

取扱説明書 & 重要な製品情報



ヘッドセット



キーボード & マウス



SpO2 プローブ



RFID キット



ツール




外部電源




バッテリー充電器
x 2



患者モニタ


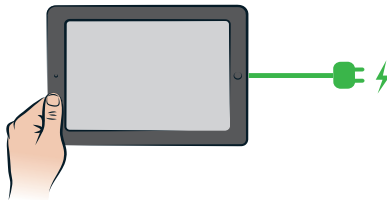





インストラクター PC



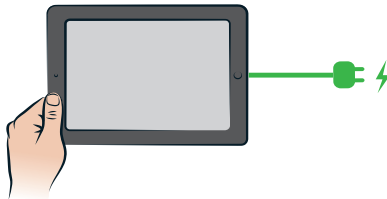



2




上半身スキンのジッパーを開く

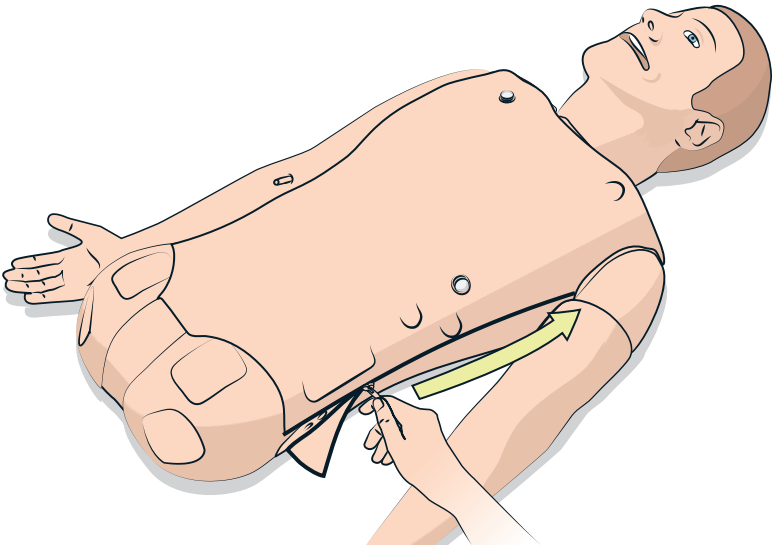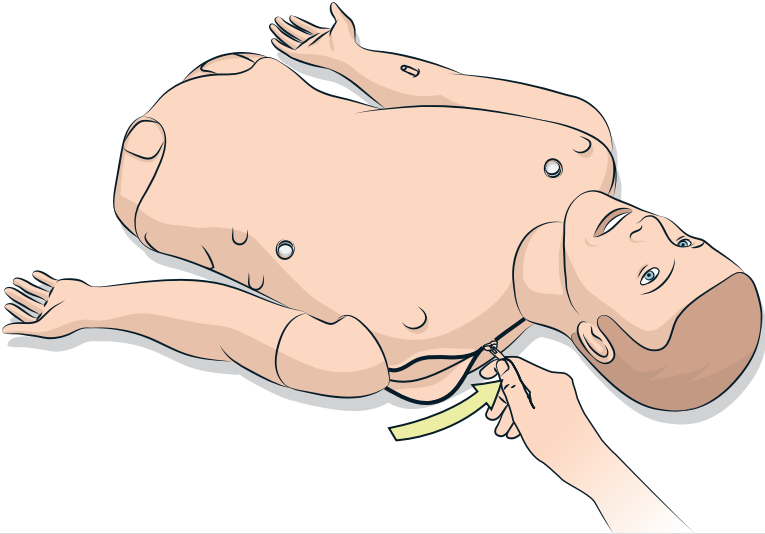


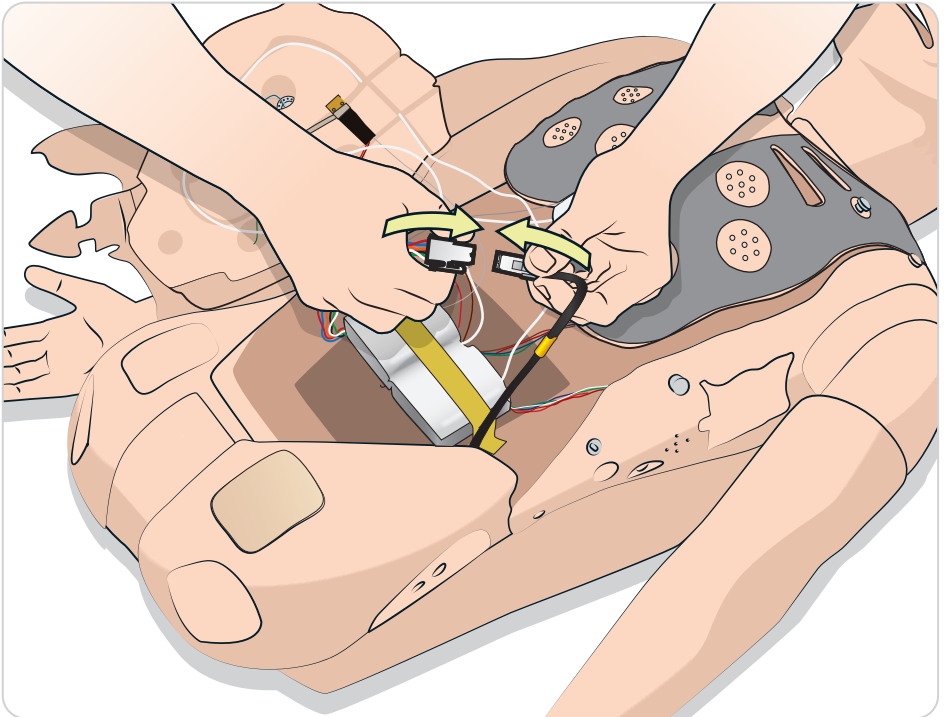
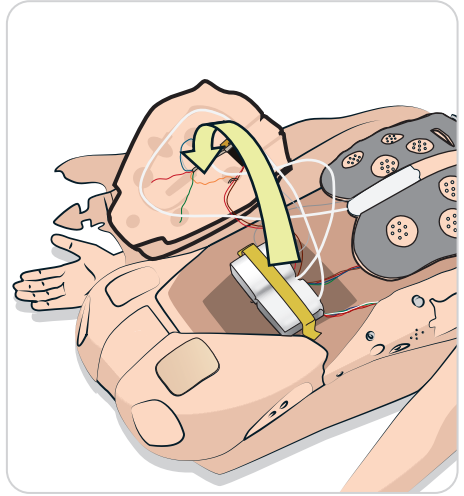
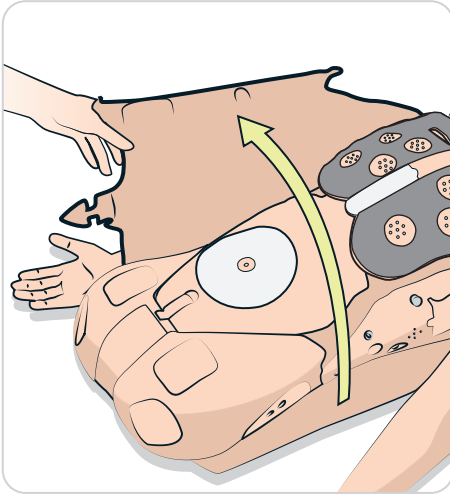


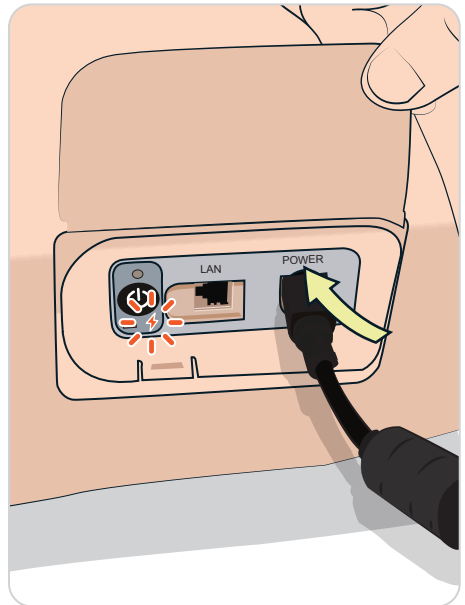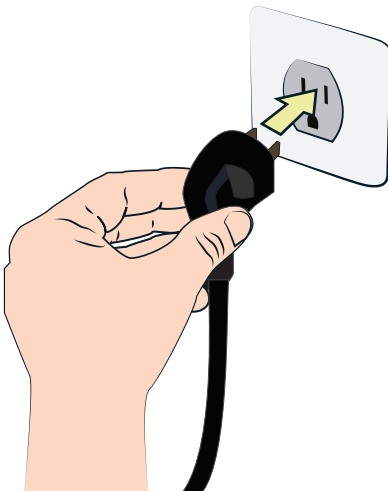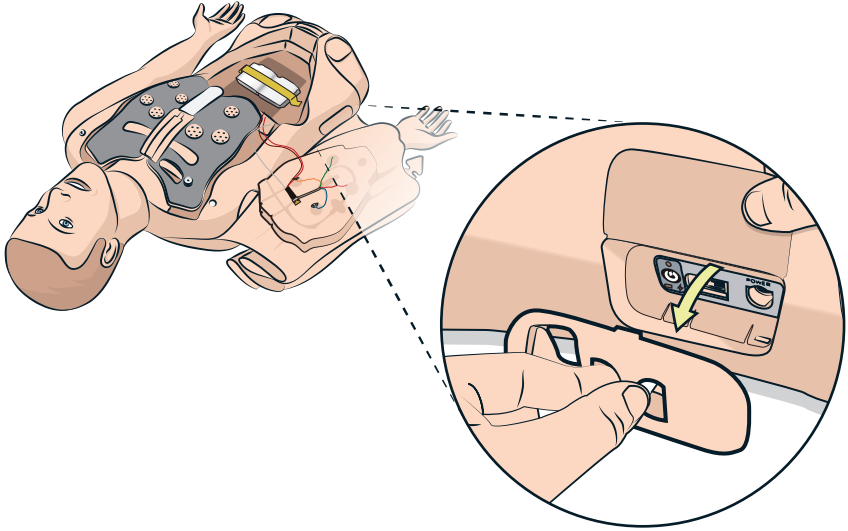

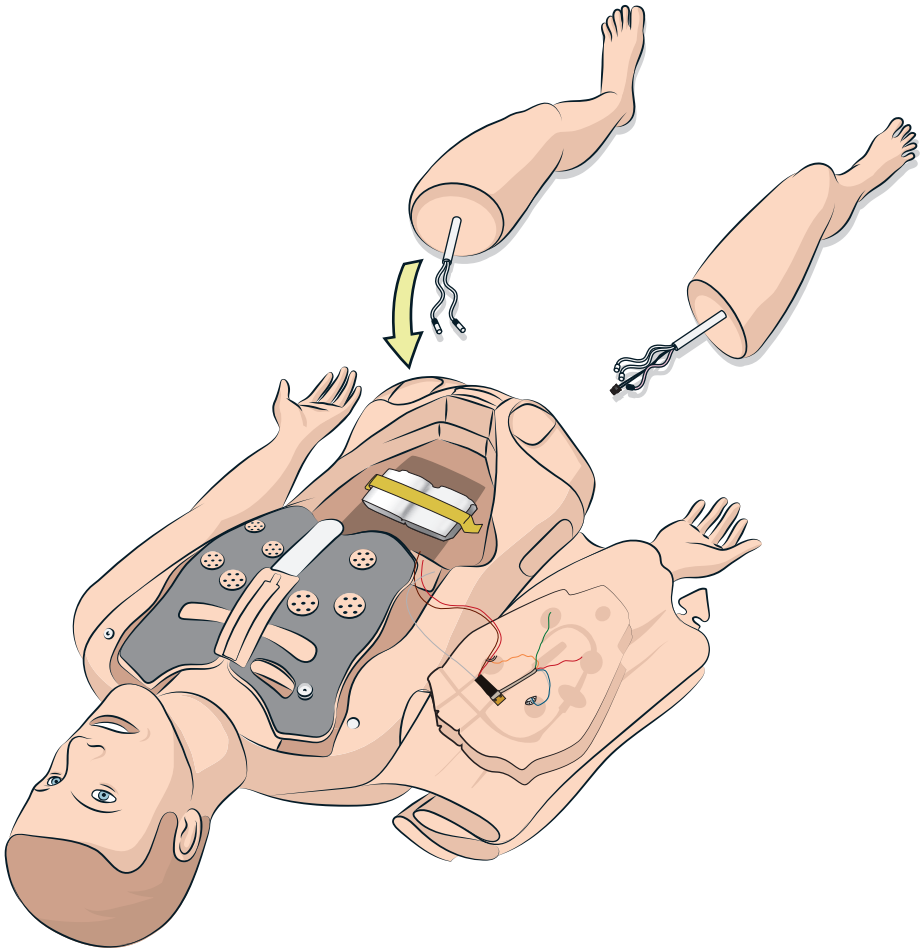

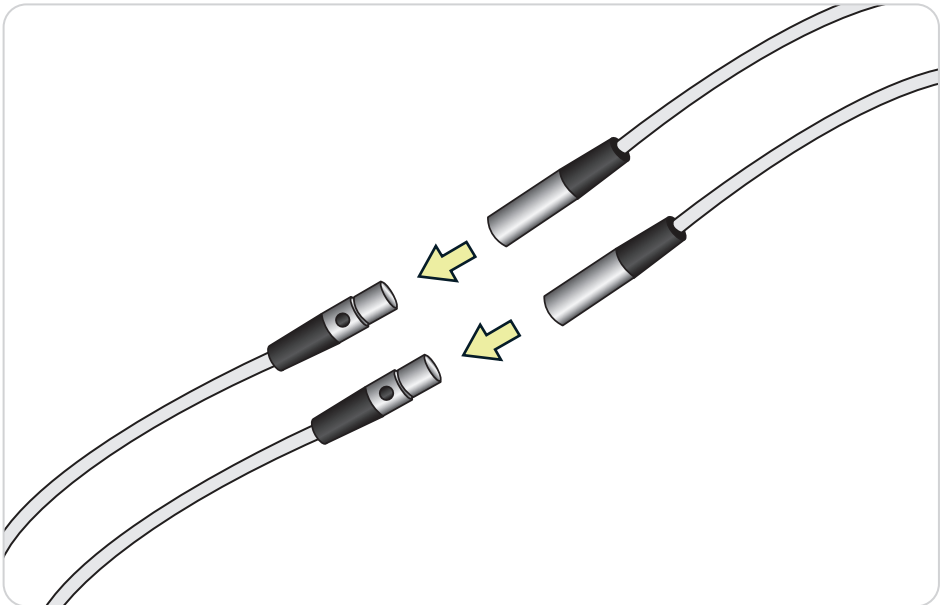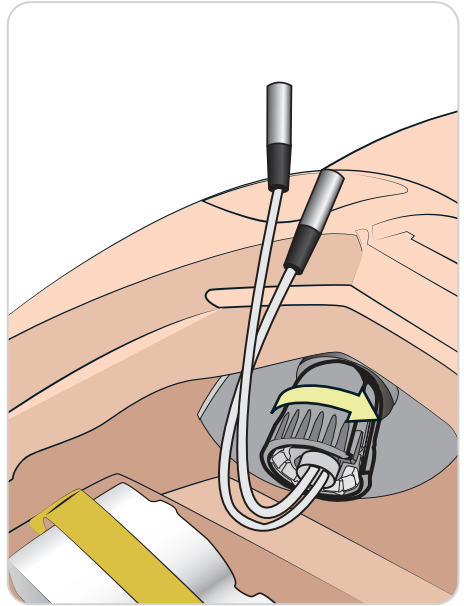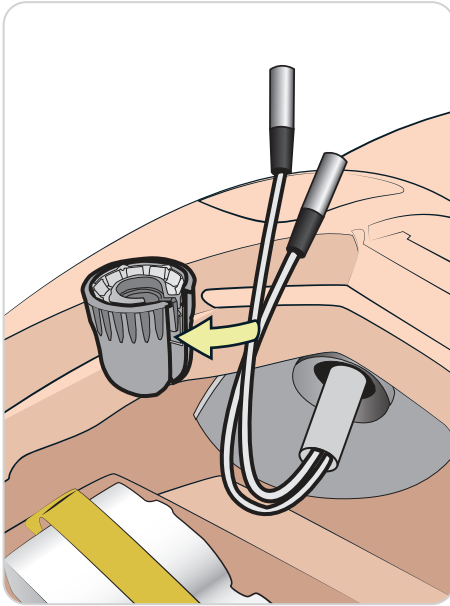

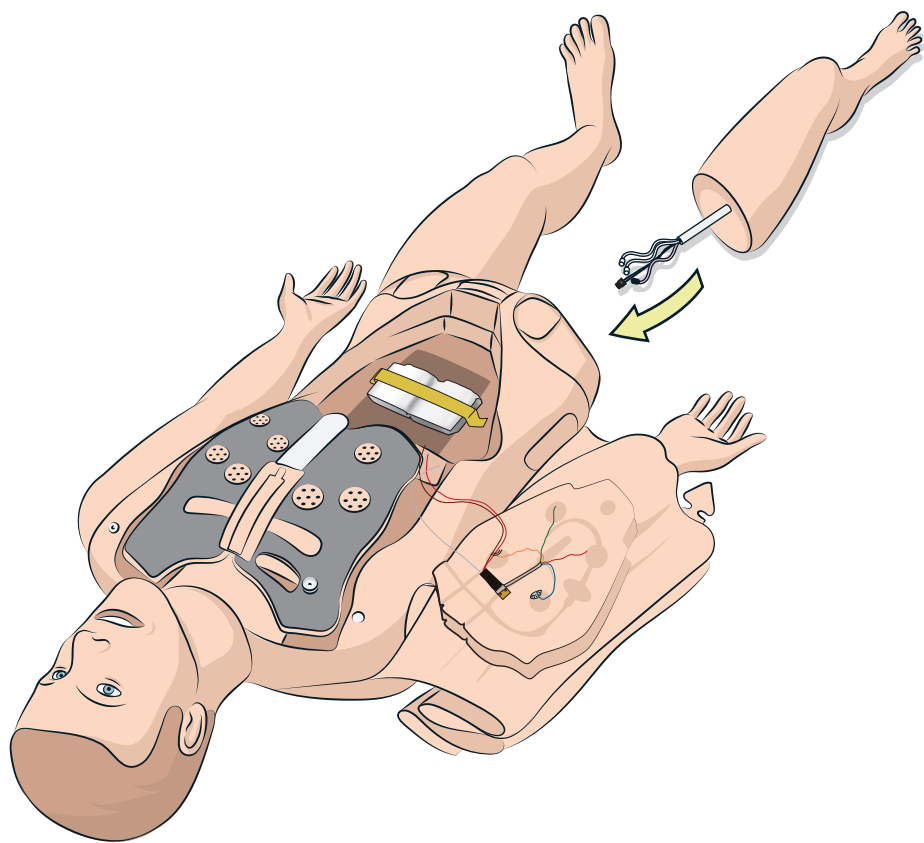

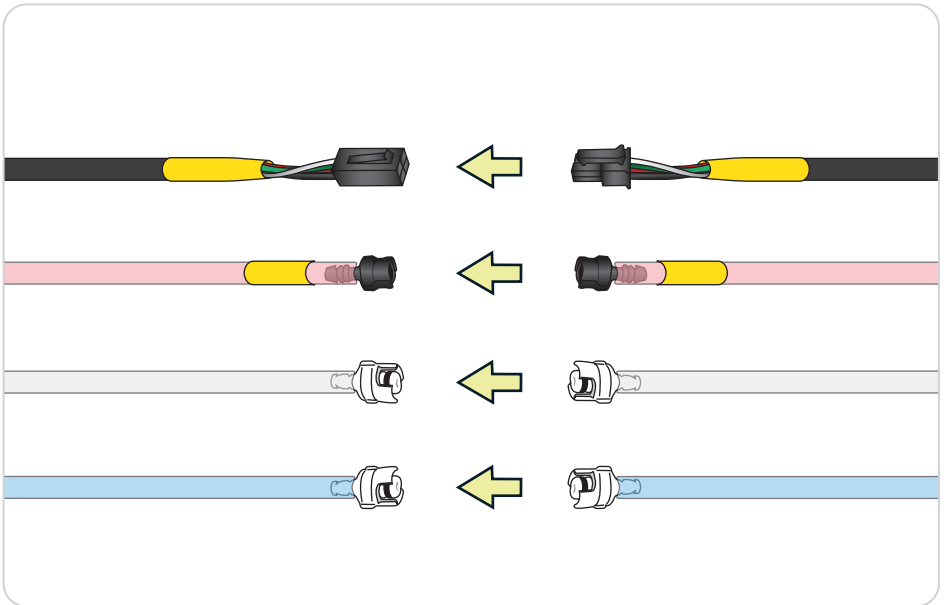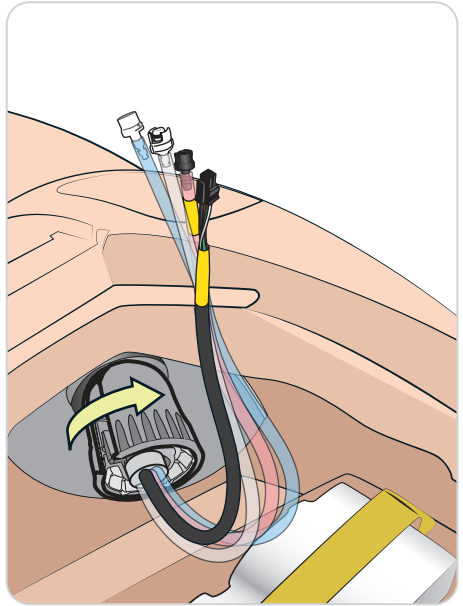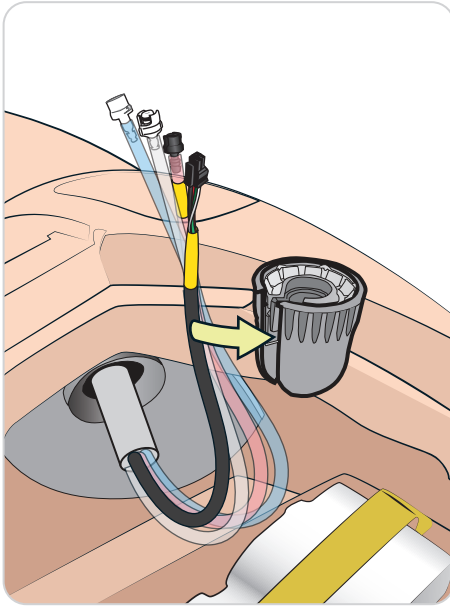


7A

無線セットアップ

ヘッドセット





インストラクター PC

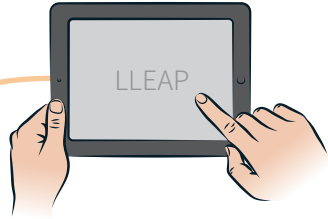

SpO2



患者モニタ

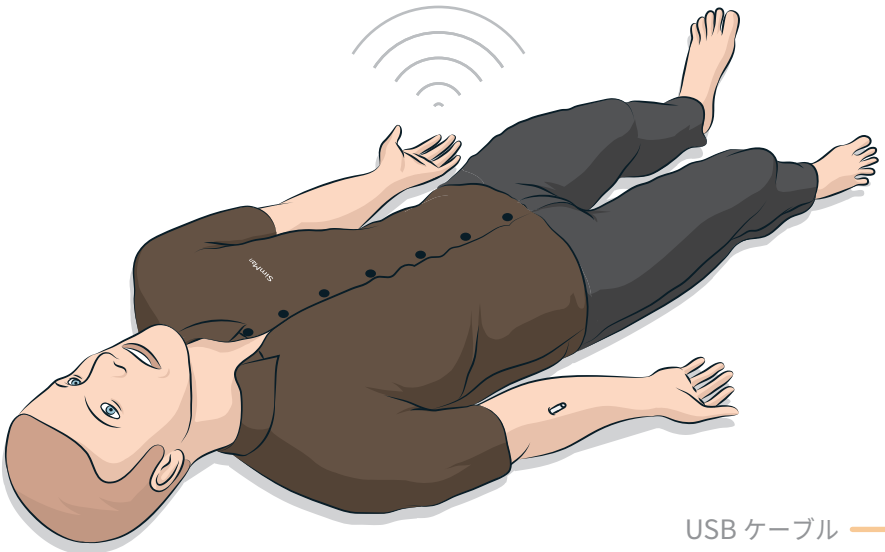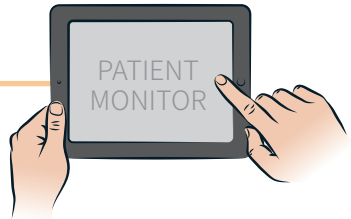

USB ケーブル —


7B

有線セットアップ


ヘッドセット




インストラクター PC

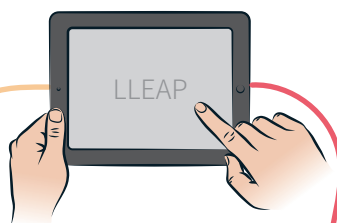



スイッチ

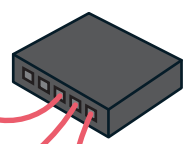

SpO2

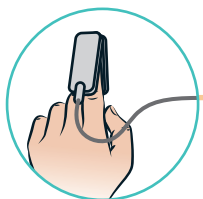

患者モニタ

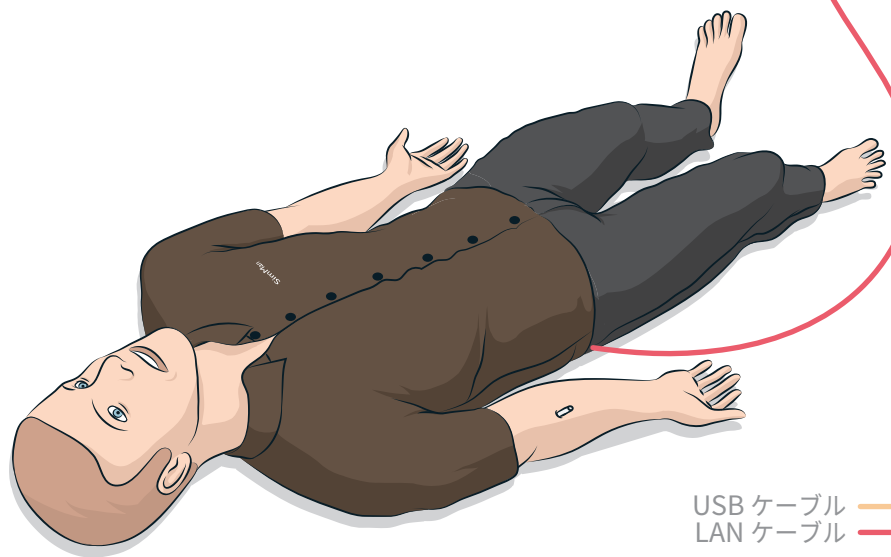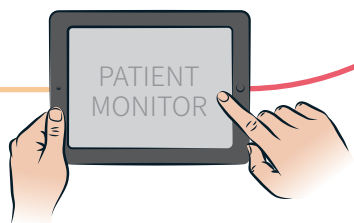

USB ケーブル ————
LAN ケーブル ————

© 2016 Laerdal Medical AS. All rights reserved.
Printed in Norway

20-08122 Rev B

www.laerdal.com/jp/



Laerdal
helping save lives