


# SimMan 3G

快速设定指南

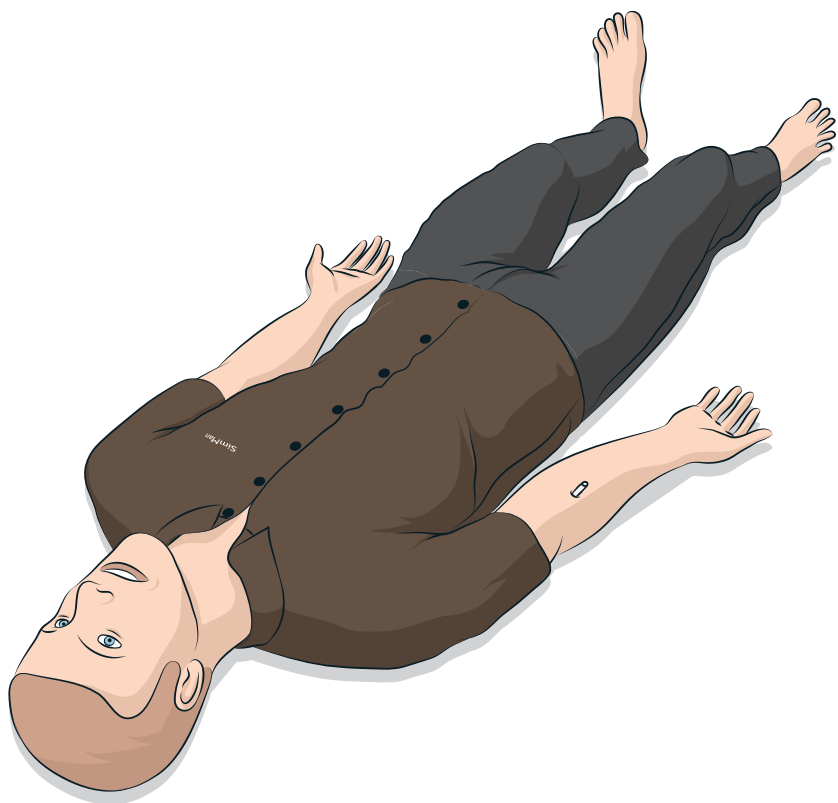




本快速设定指南描述如何装配和设定您的 SimMan 模拟病人。如需了解 SimMan 的使用方法，请查阅 LLEAP 帮助文件和 SimMan 用户指南。


请访问 [www.laerdal.com/downloads](http://www.laerdal.com/downloads)，下载最新的用户指南和软件。



躯干

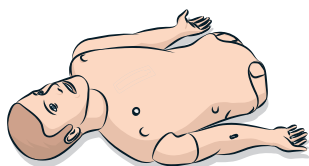

腿部

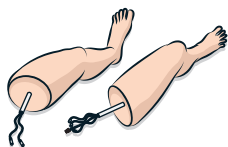


服饰



坚硬的上齿



男性与女性生殖器

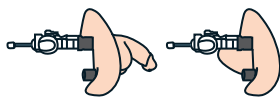


标识带



SimMan 手臂适配器



内嵌过滤器血液  
x 2

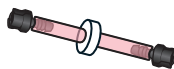


除颤心电图机紧线器



心电图机适配器电极




颈部皮肤  
x 6

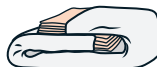

肺部顺应性 O 型环  
x 10



液体与血液续充瓶

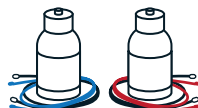

伤口套件



胸部引流胸膜  
x 6



浓缩血液



气道润滑剂



血压袖带



静脉注射袋



静脉输液导管延长装置



环状软骨带




胫骨垫与骨骼  
x 3



肌内衬垫



气胸

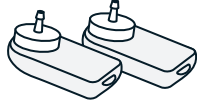

用户指南与  
重要产品信息



耳机



键盘与鼠标



血氧饱和度探头



无线射频识别 (RFID) 套件



工具




外部电源




电池充电器  
x 2





病人监护仪



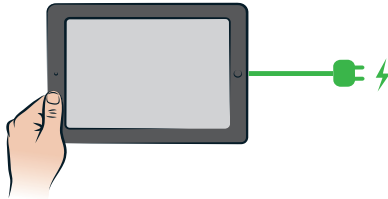


导师个人电脑



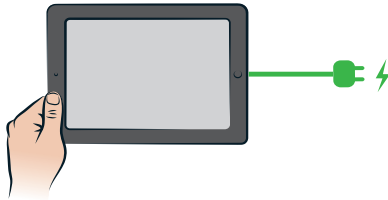


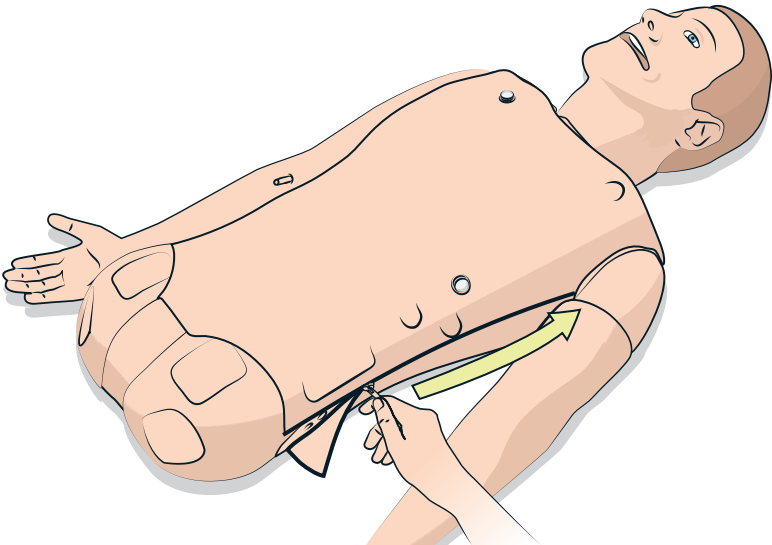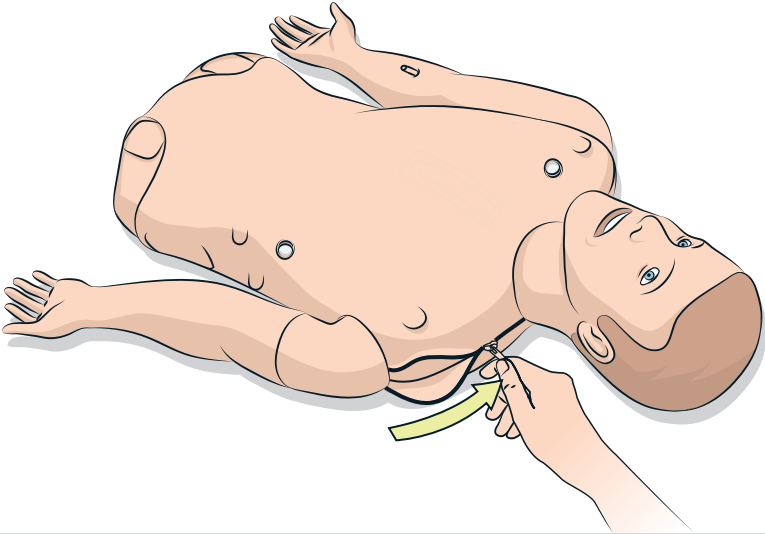





3

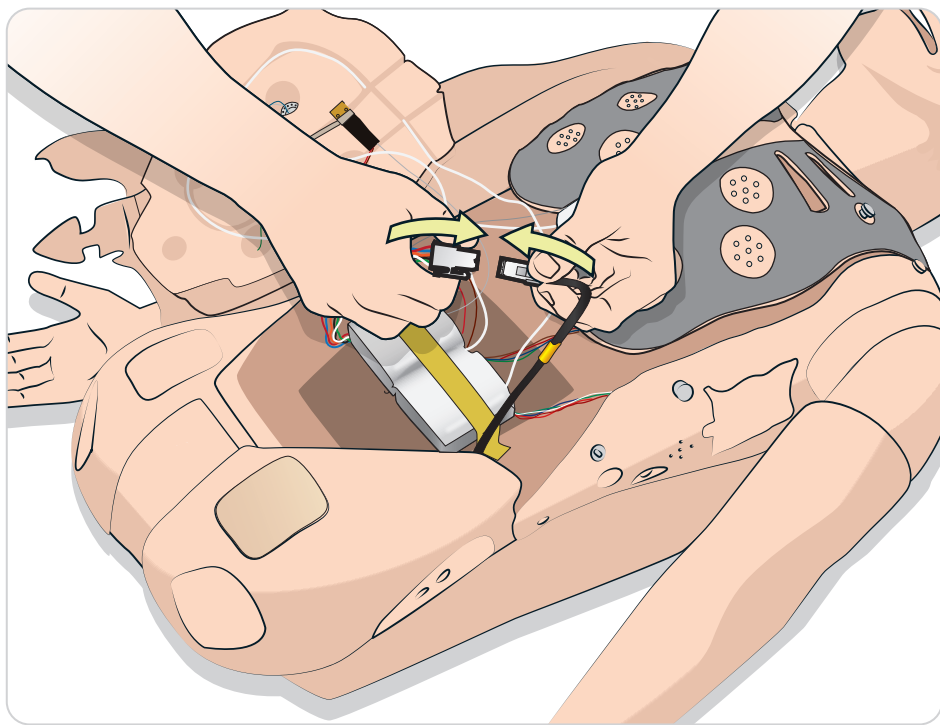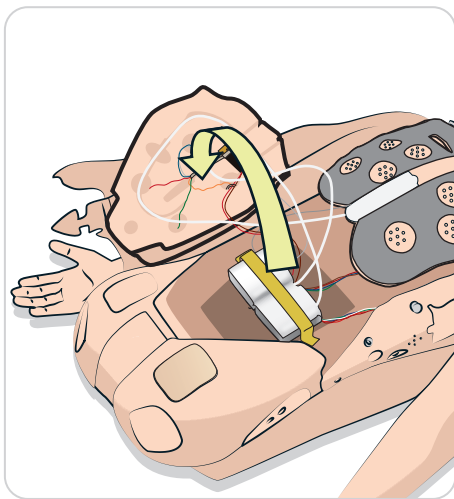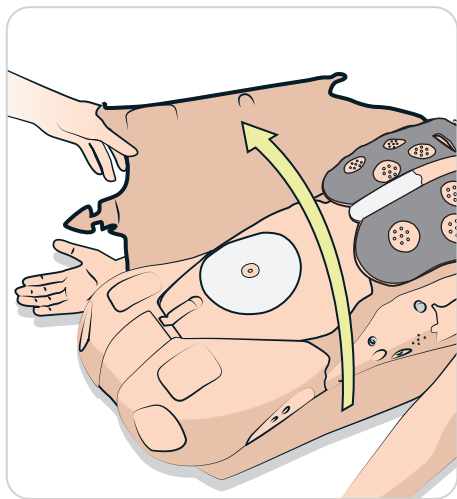







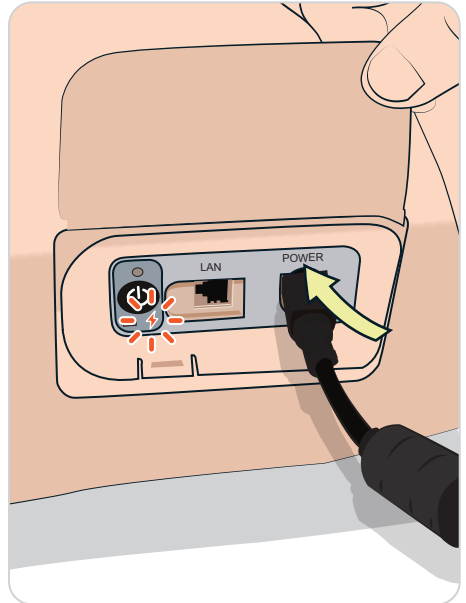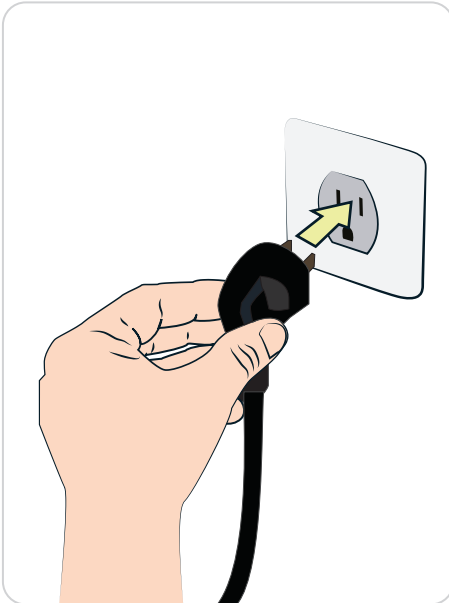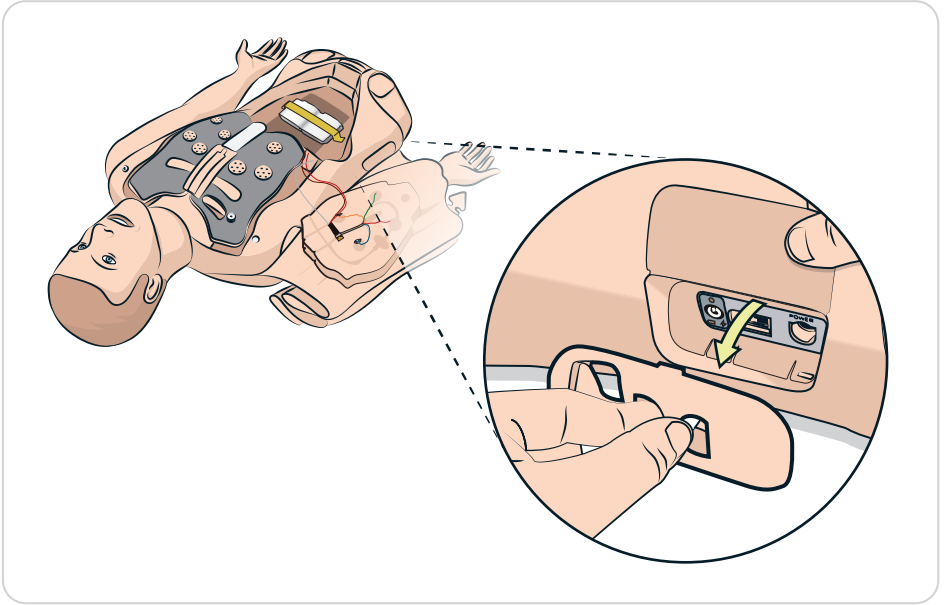

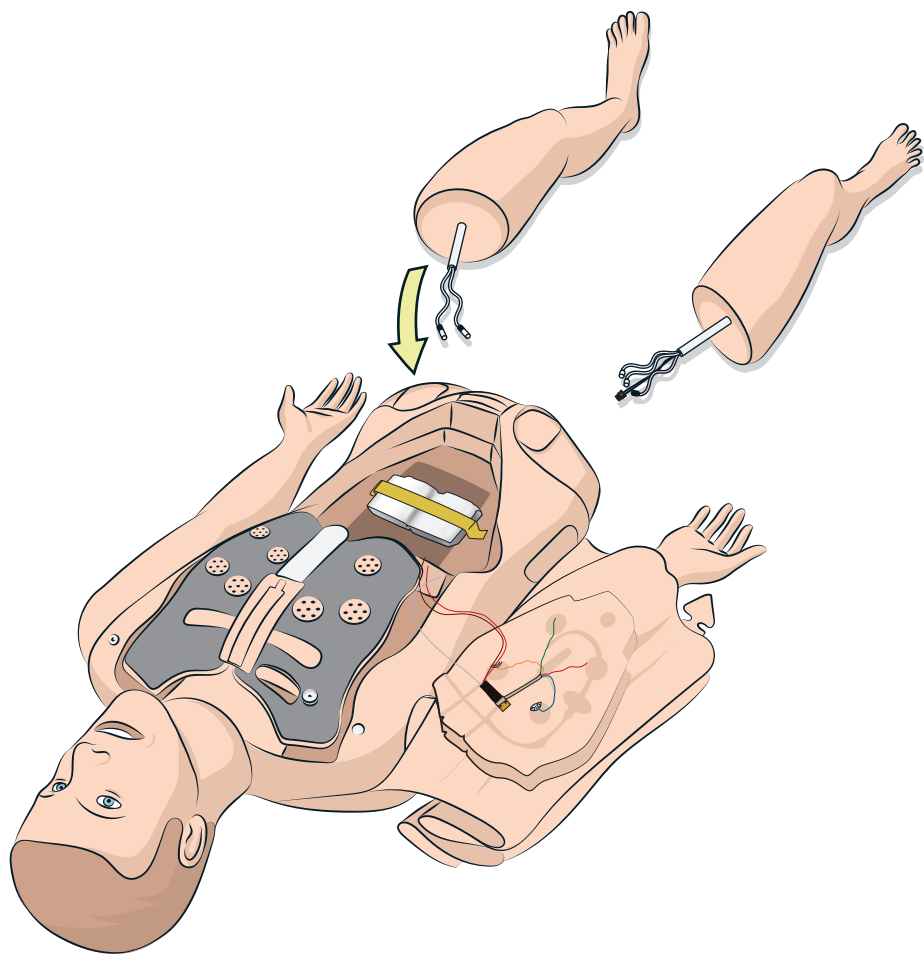

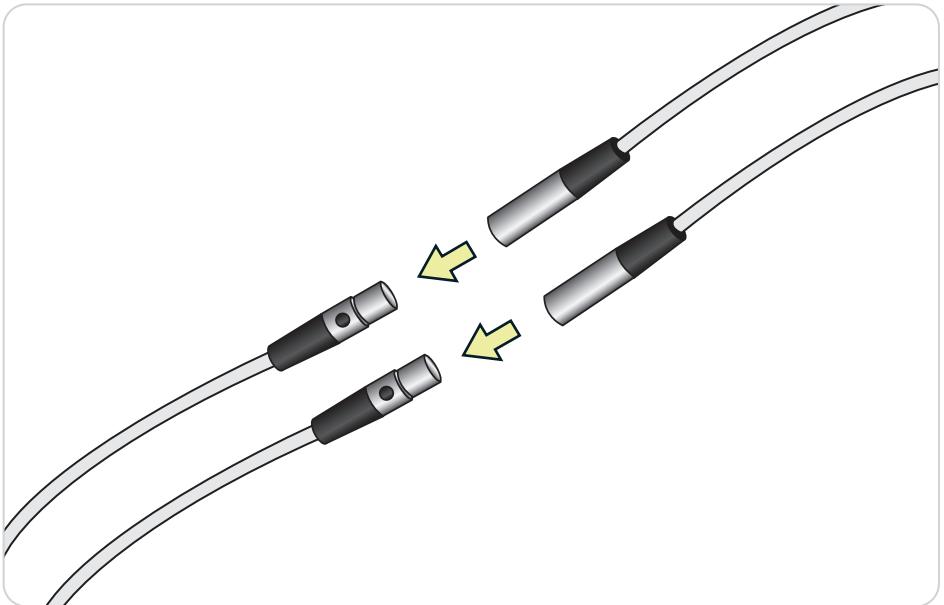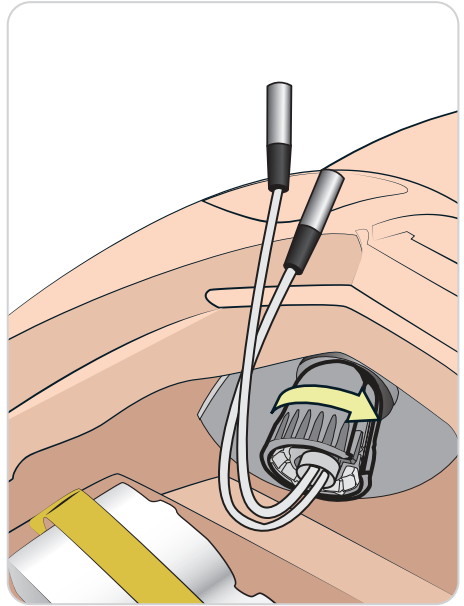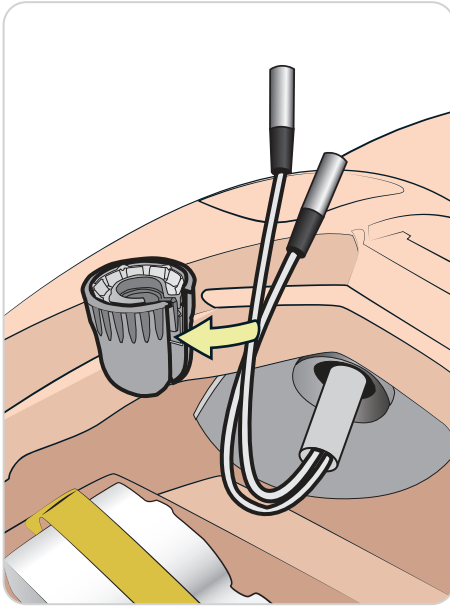

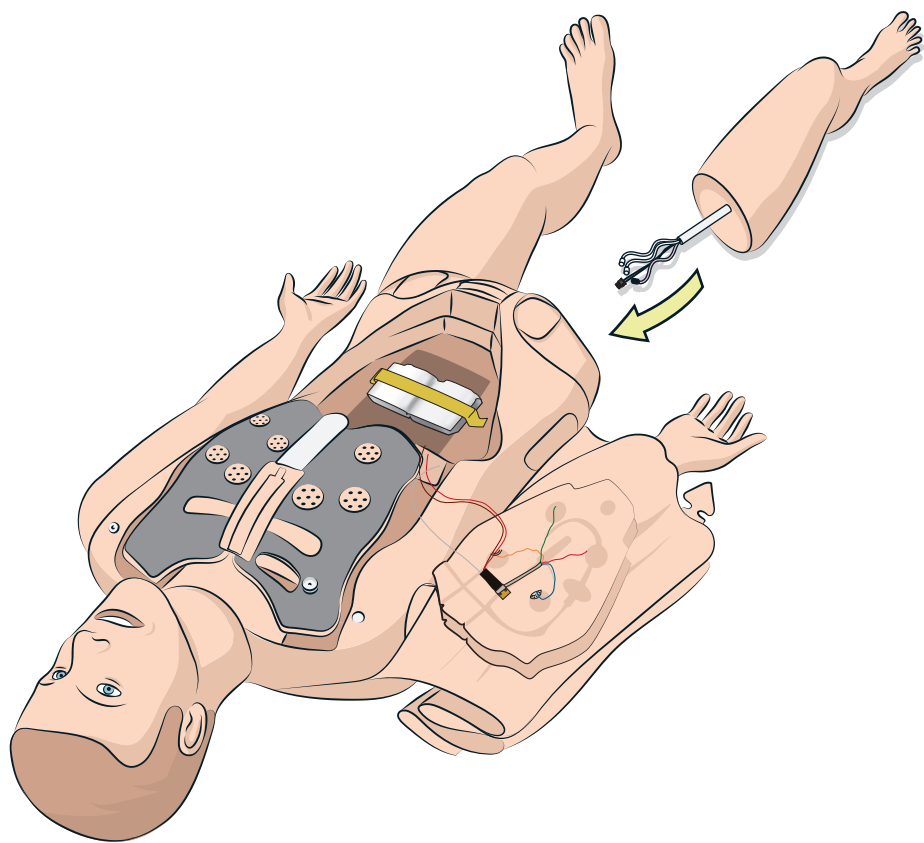


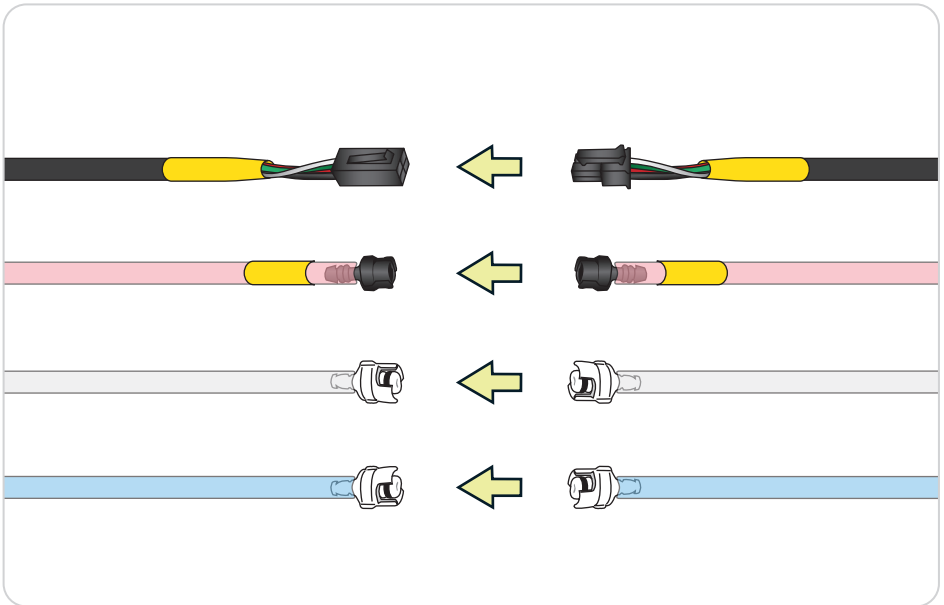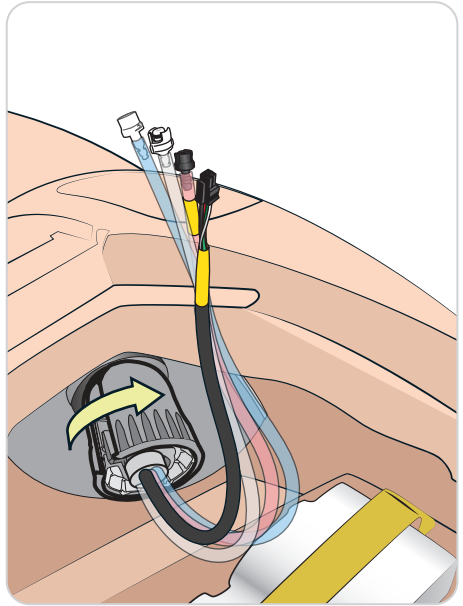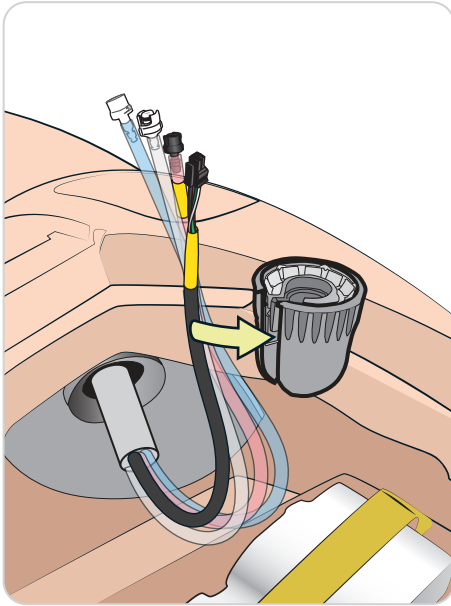

耳机




导师个人电脑

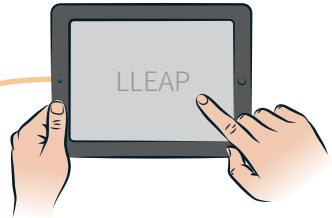

血氧饱和度



病人监护仪

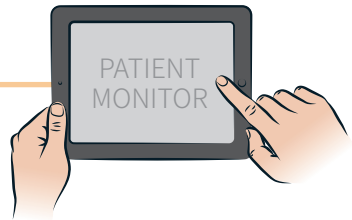


USB 线 —

7B


耳机




导师个人电脑

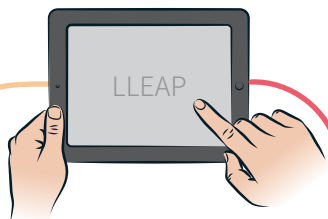



开关

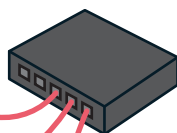

血氧饱和度

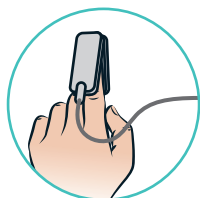

病人监护仪

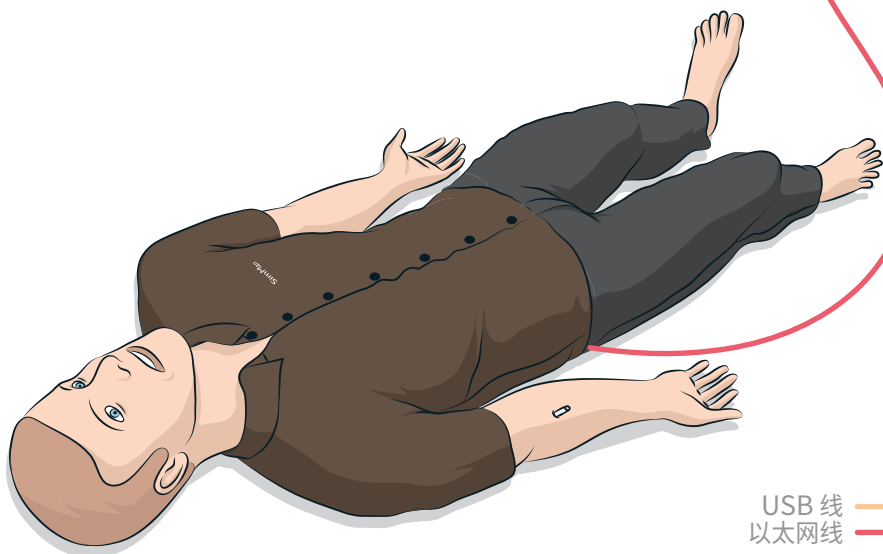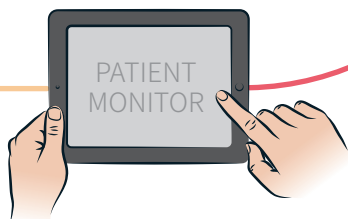

USB 线 ————  
以太网线 ————

© 2016 Laerdal Medical AS. 保留所有权利。  
Printed in Norway

20-08123 Rev B

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives