

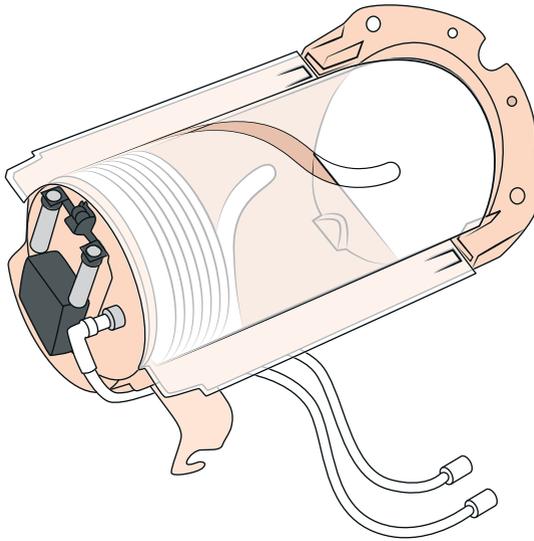
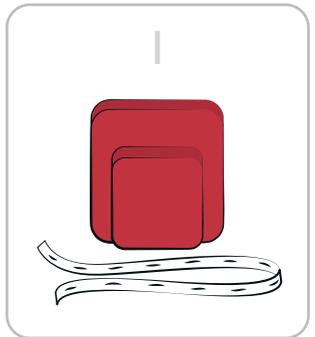
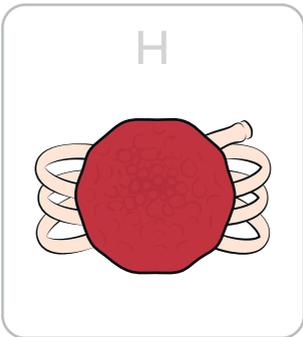
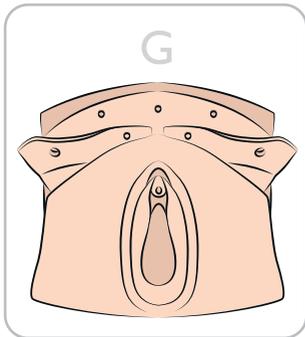
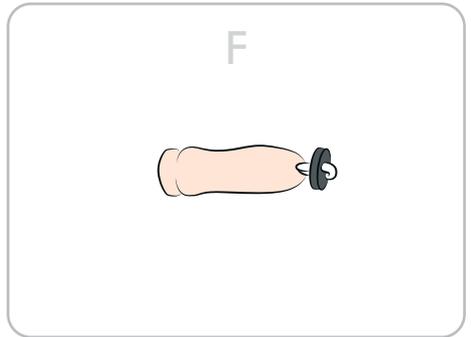
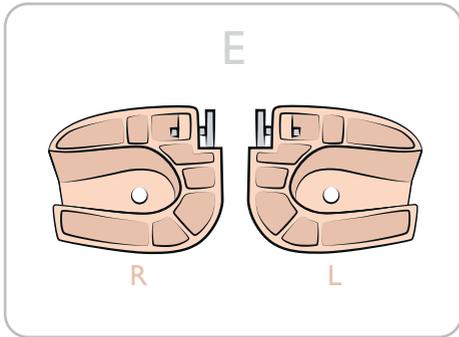
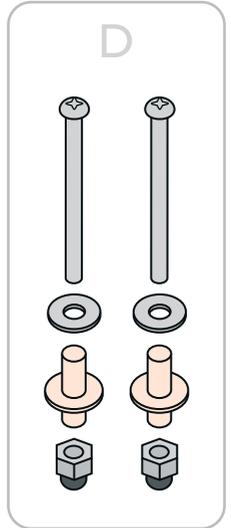
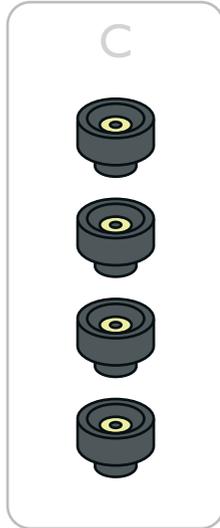


SimMom

자동 분만 모듈 업그레이드 키트
설치 안내서

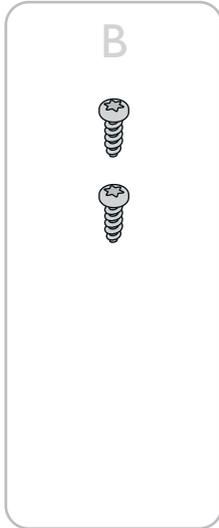

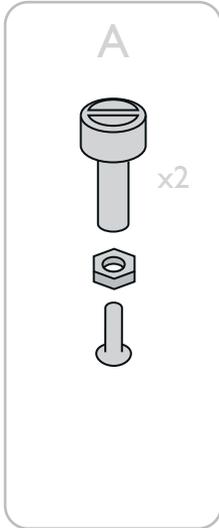


모든 업그레이드 절차를 조심스럽게 따르십시오. 그렇지 않으면 시뮬레이터 작동에 오류가 발생하거나 제품 보증이 무효가 될 수 있습니다.

업그레이드를 시작하기 전에 상반신에서 다리를 분리합니다. 이 업그레이드 키트와 SimMom에 포함된 도구를 사용하여 업그레이드를 합니다.


자동 분만 모듈을 사용하려면 LLEAP 소프트웨어를 작동해야 합니다.

다리를 분리합니다.

1





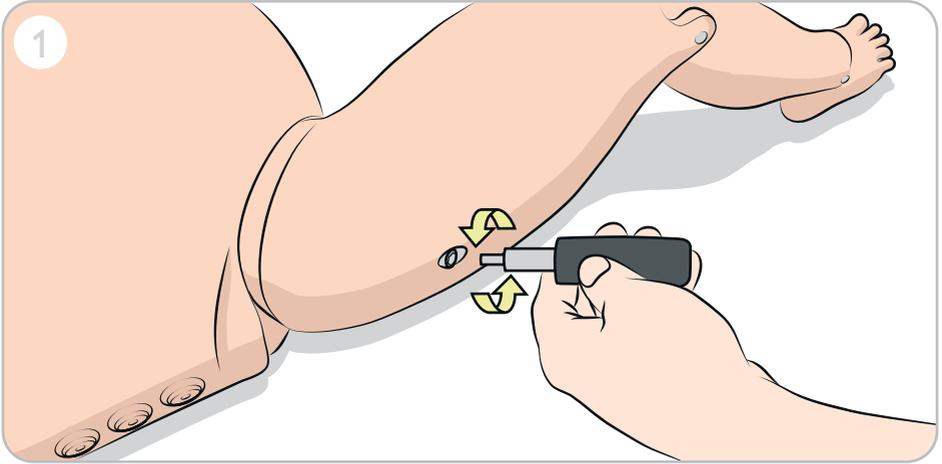


2

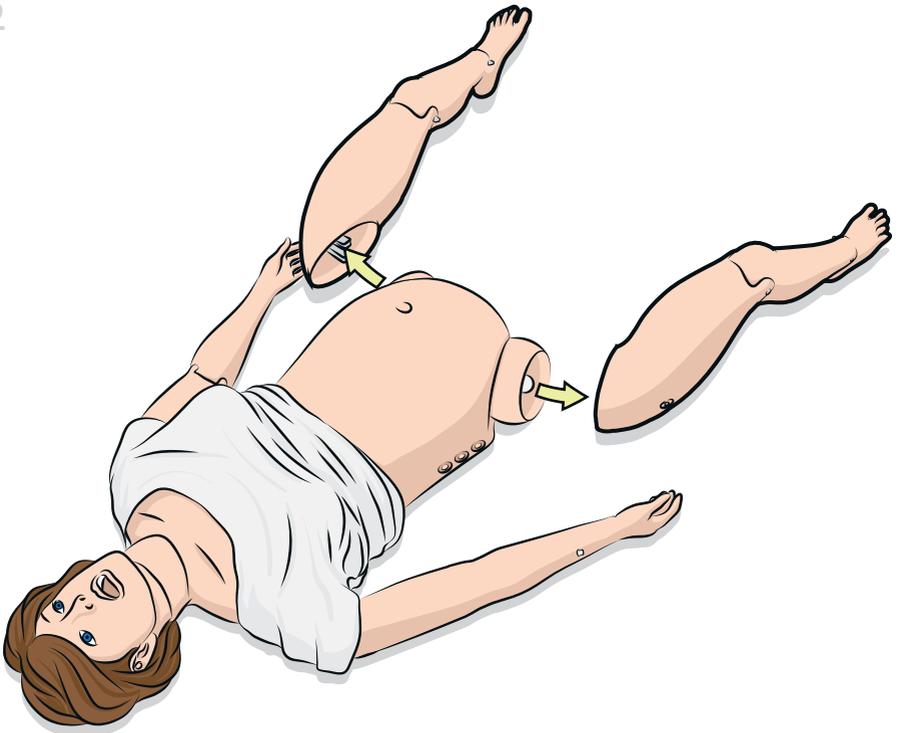







복부 피부를 분리합니다.







2

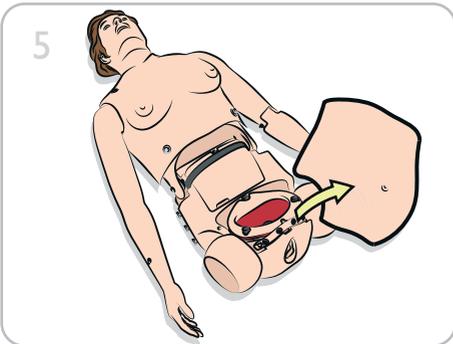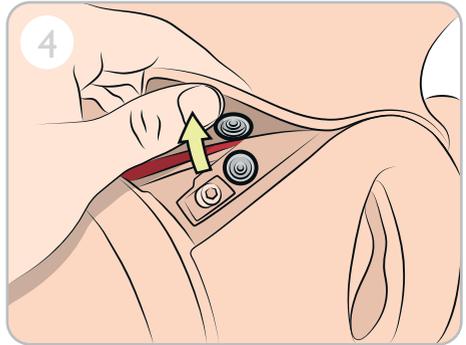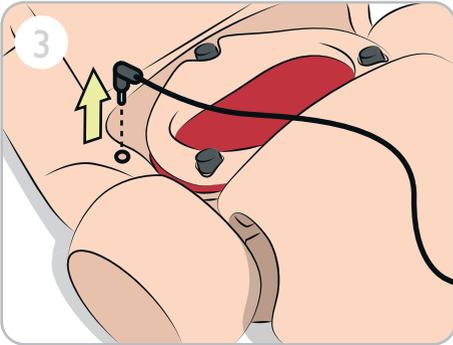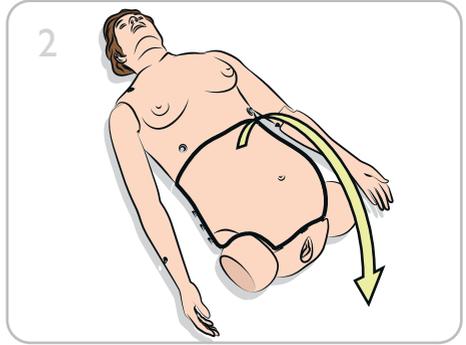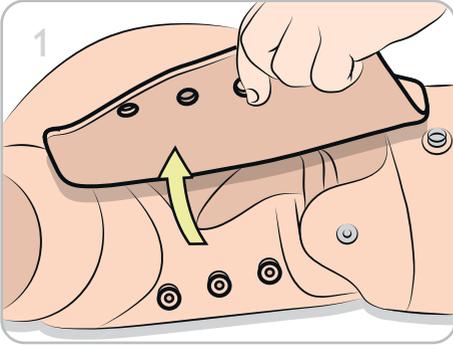

3







기존의 회음부를 분리합니다.

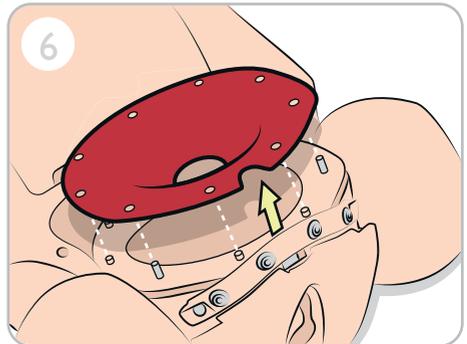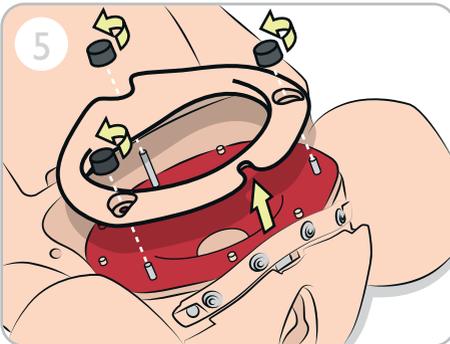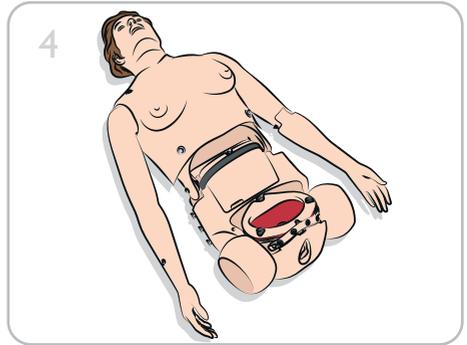
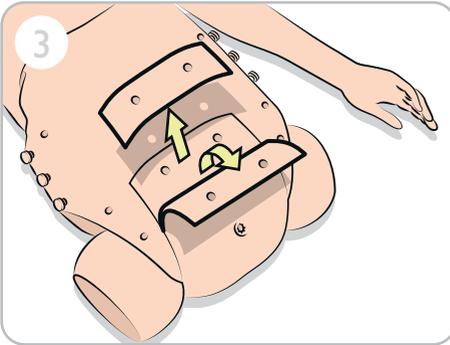
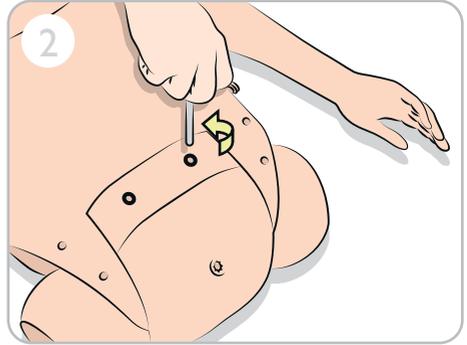
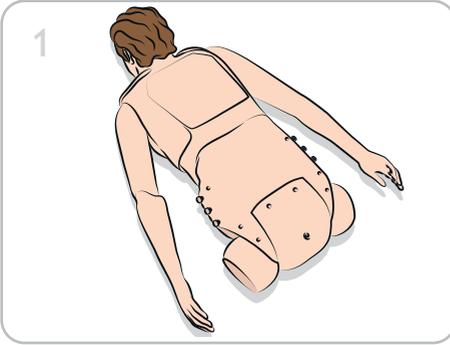


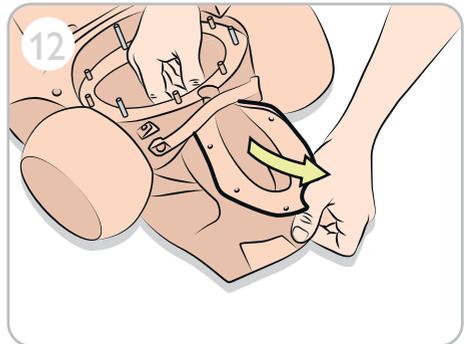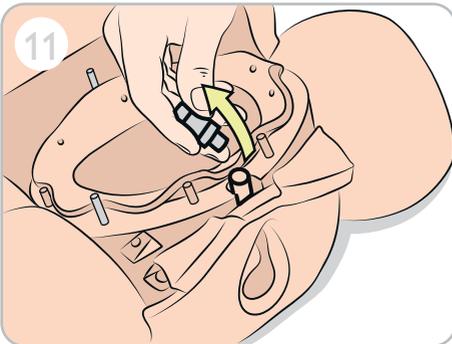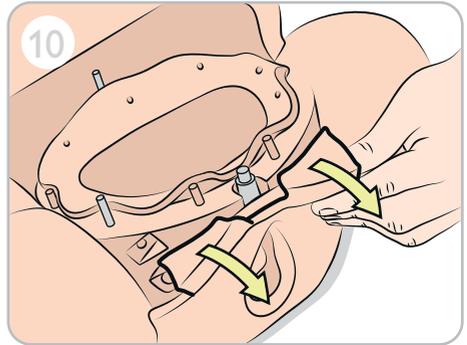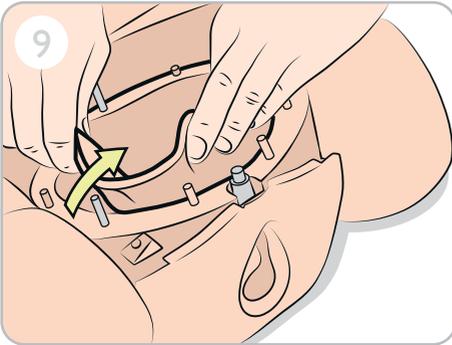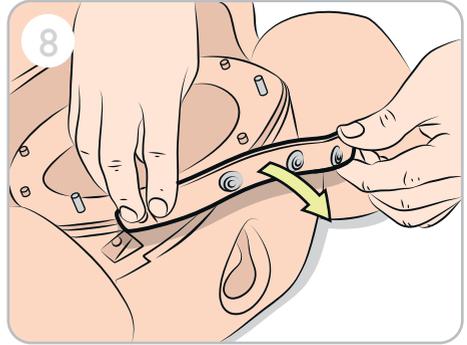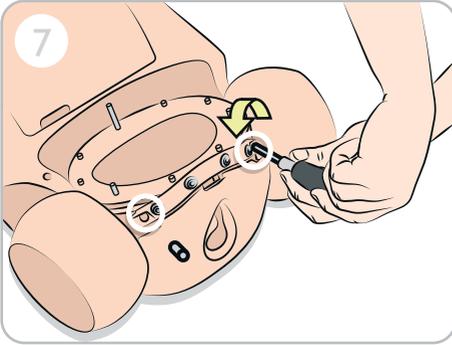







4






하부의 긴 나사를 교체합니다.

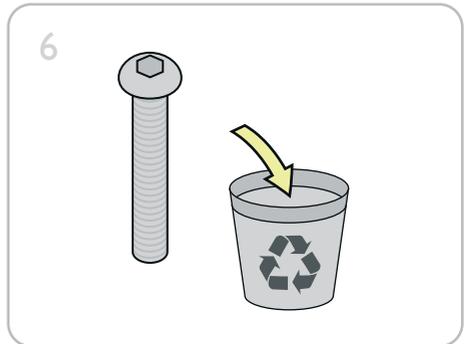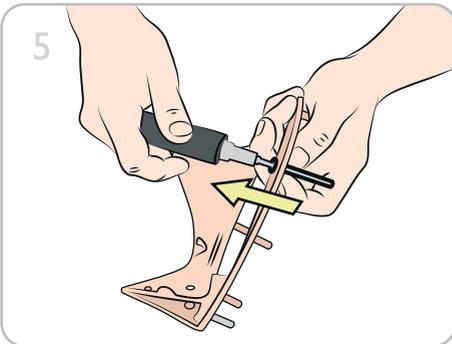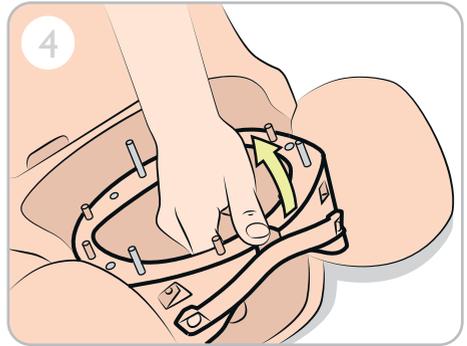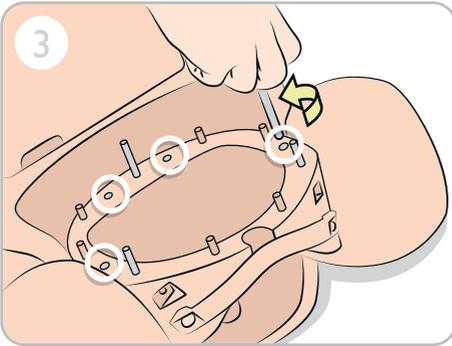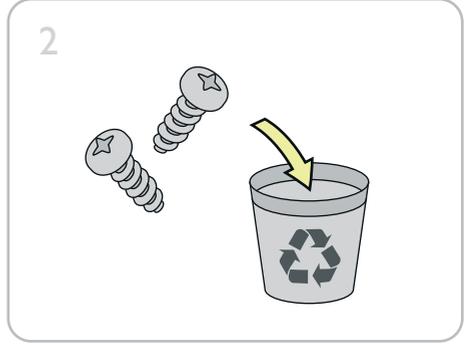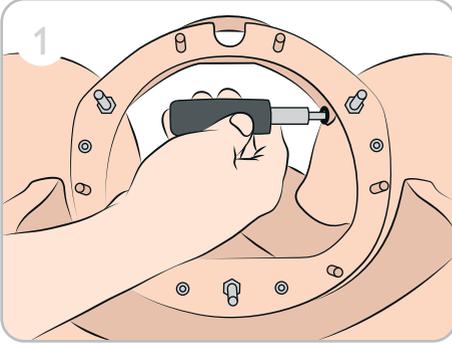

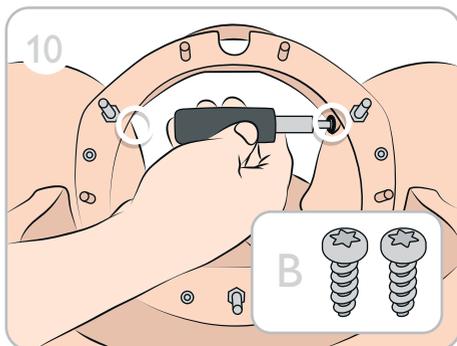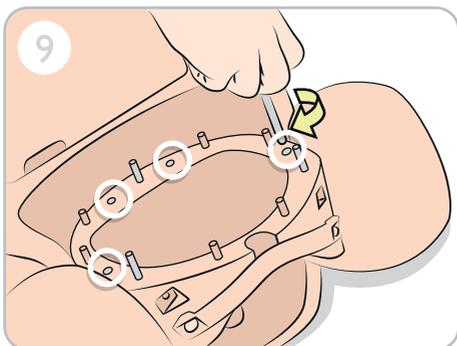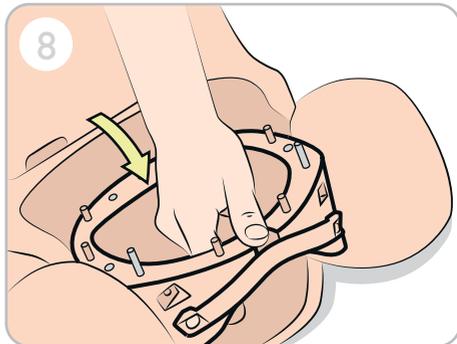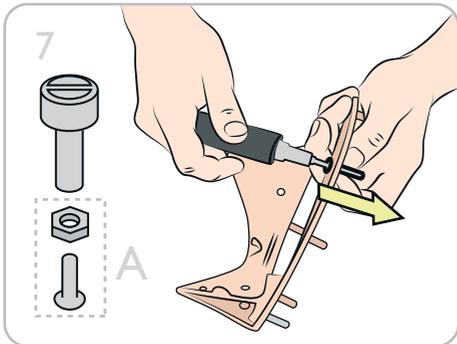




5

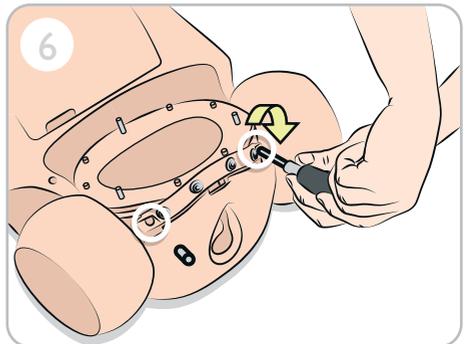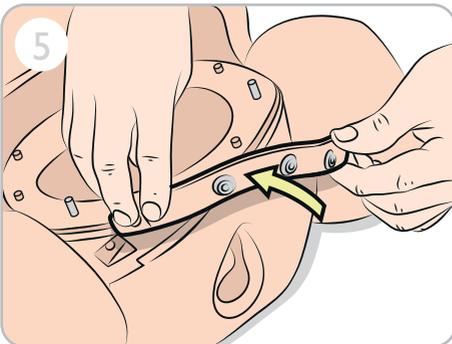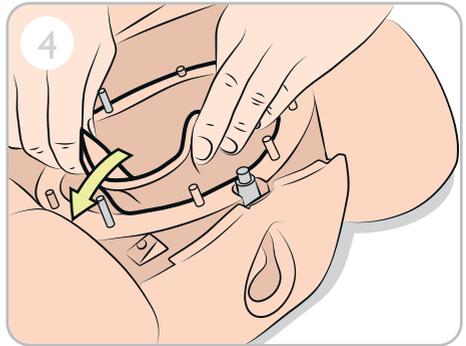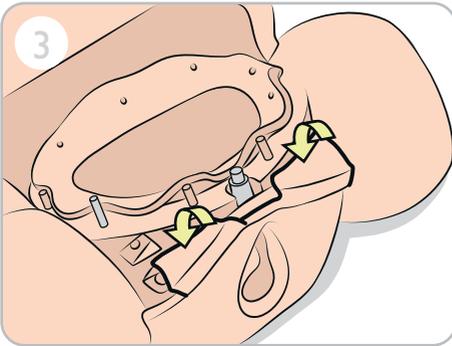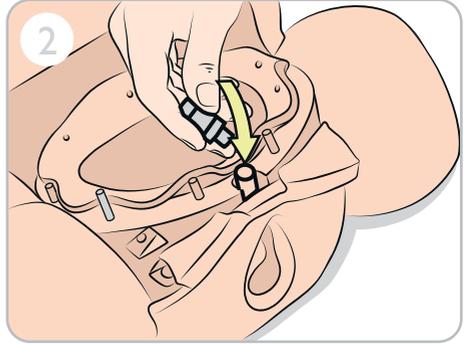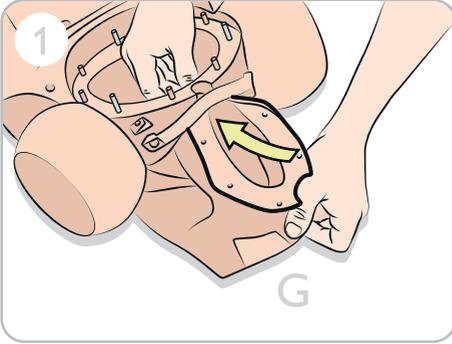

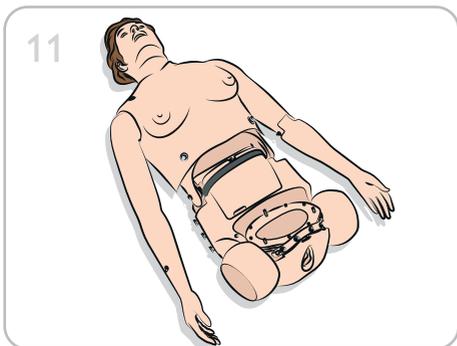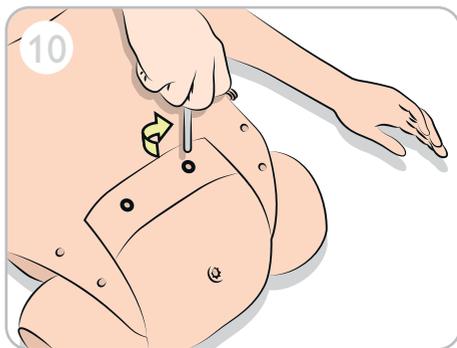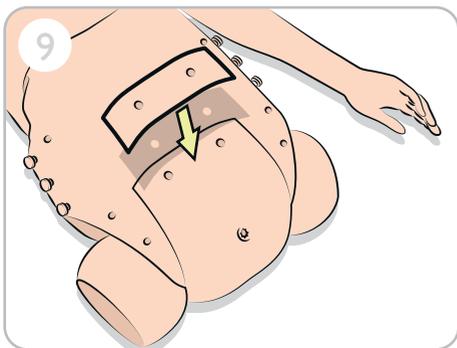
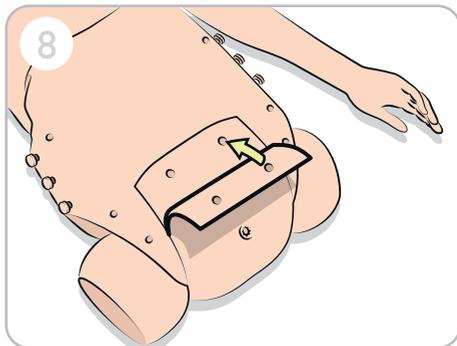
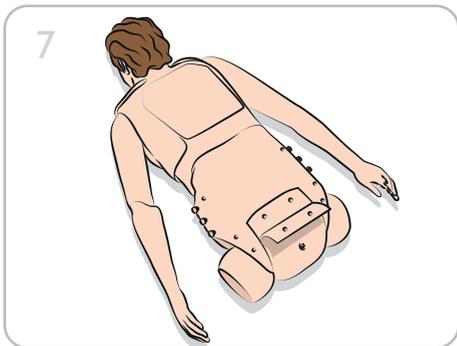





6

골반 고정 장치를 삽입합니다.




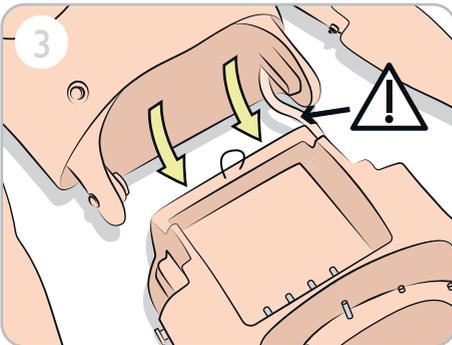
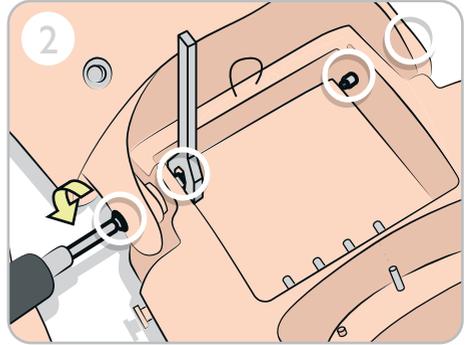
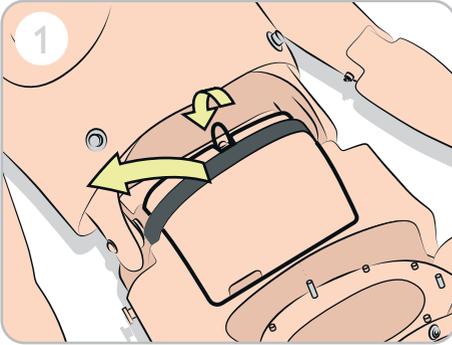


⚠ 케이블을 손상시키지 않도록 주의하세요.



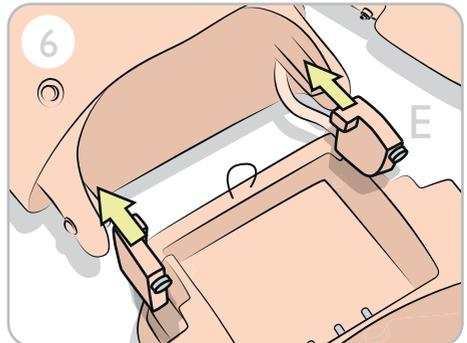
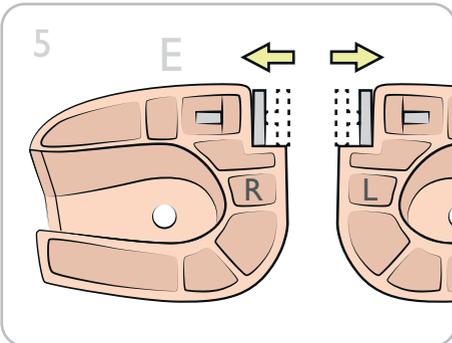
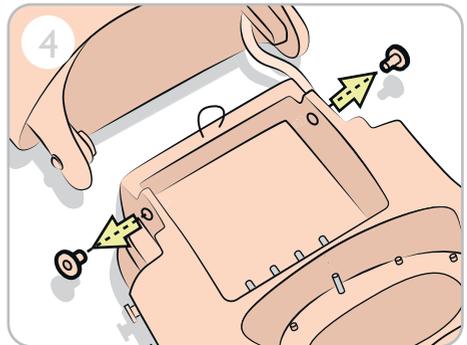





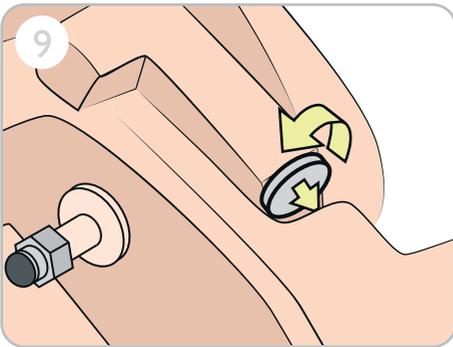
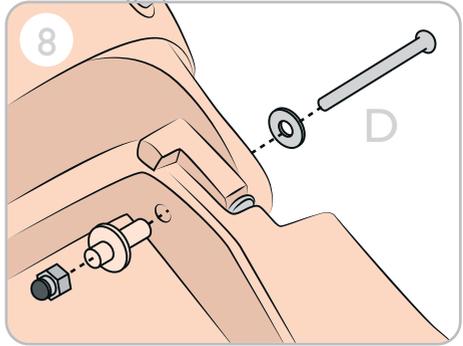
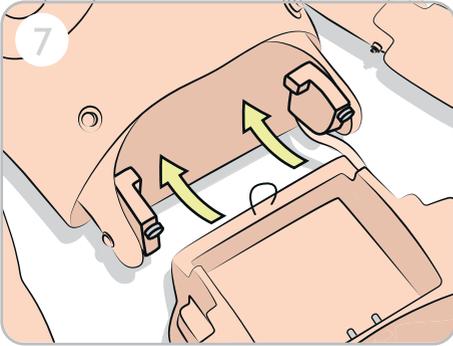


7A

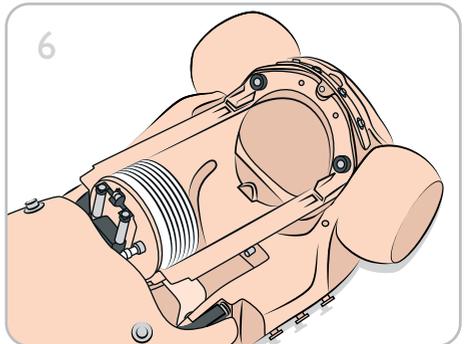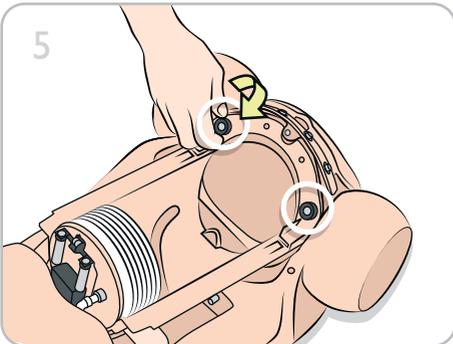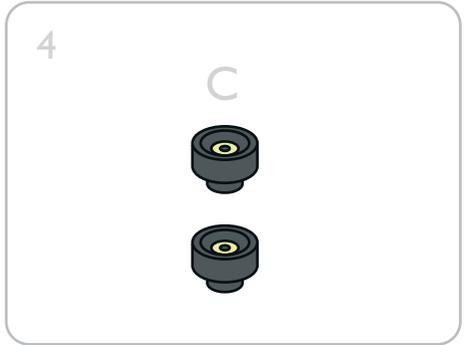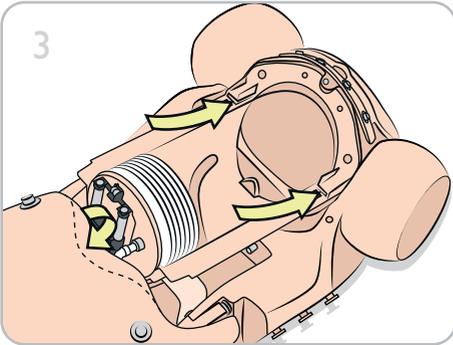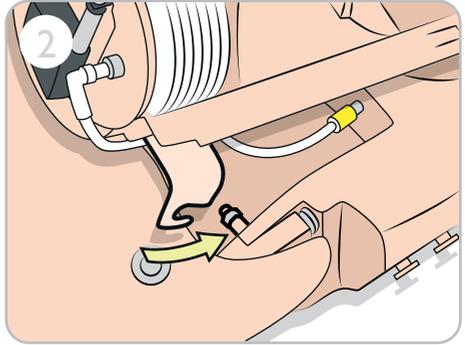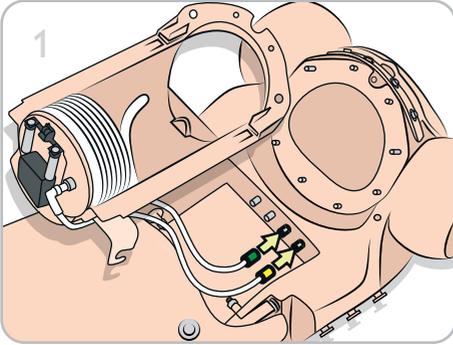







7B

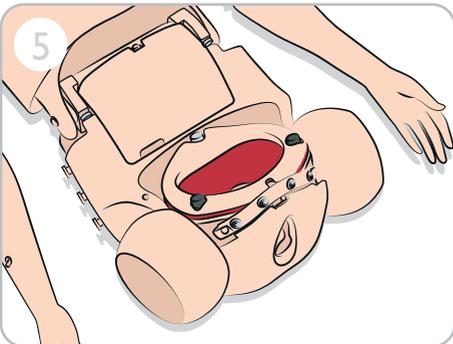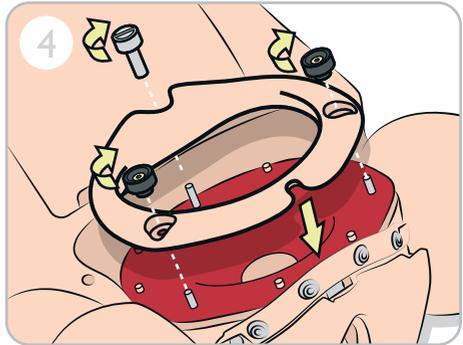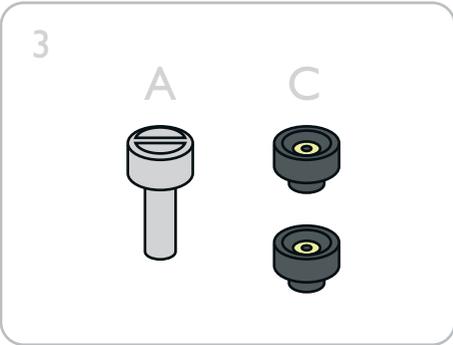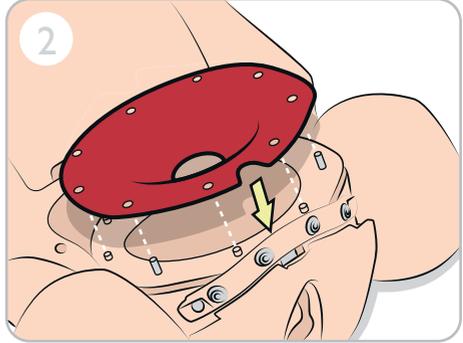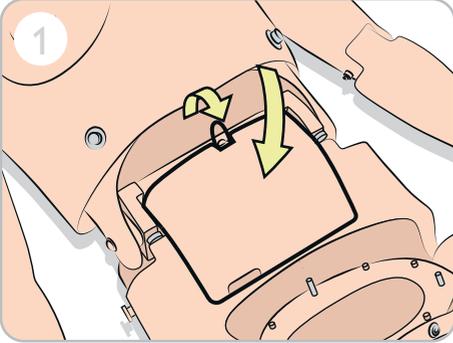

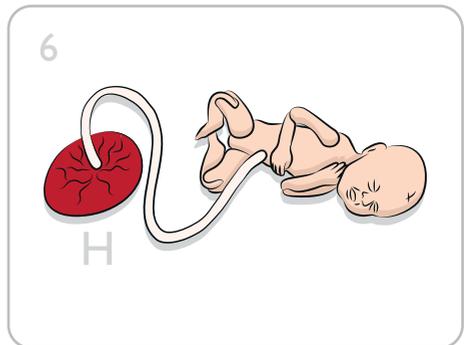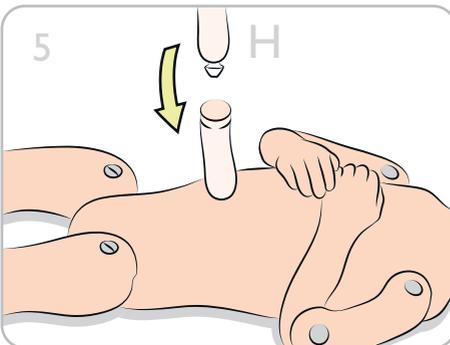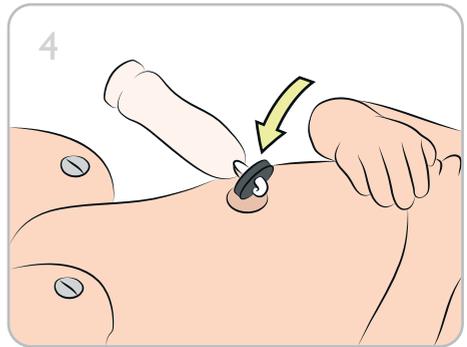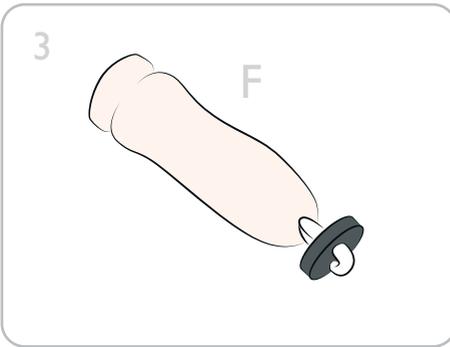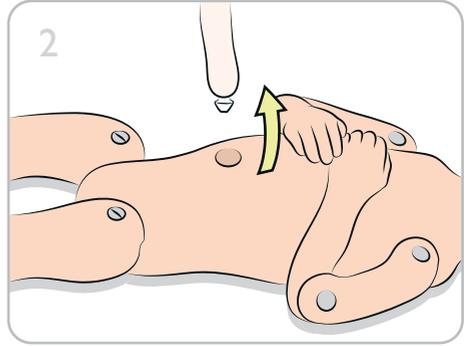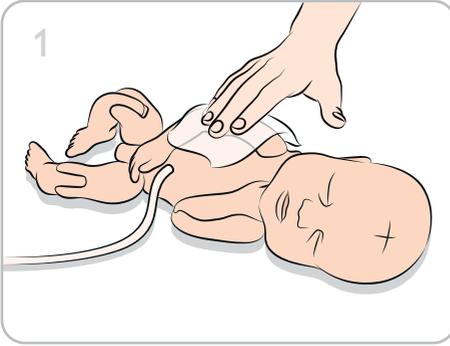

9

치골결합 부위에 스폰지를 배치합니다.

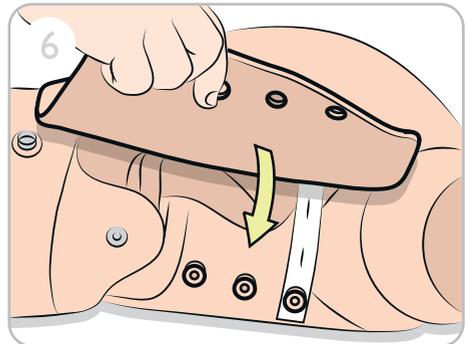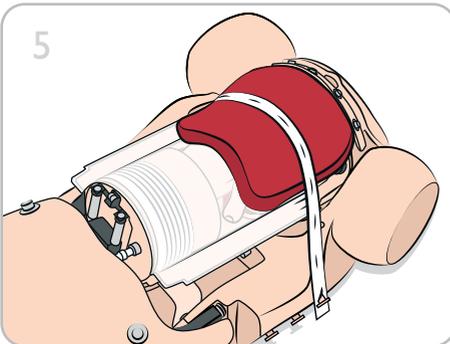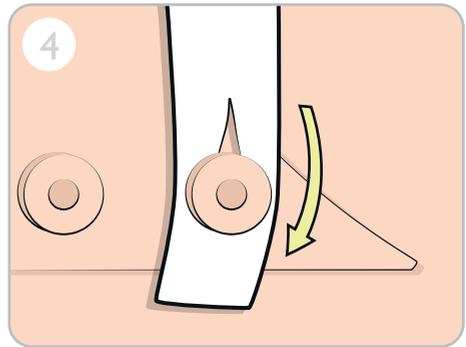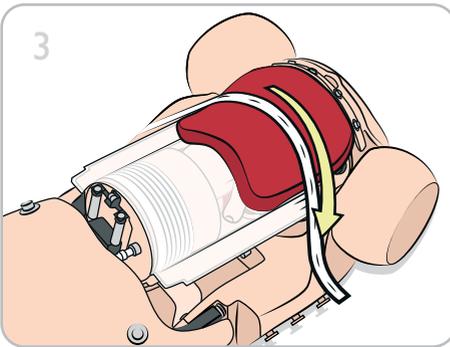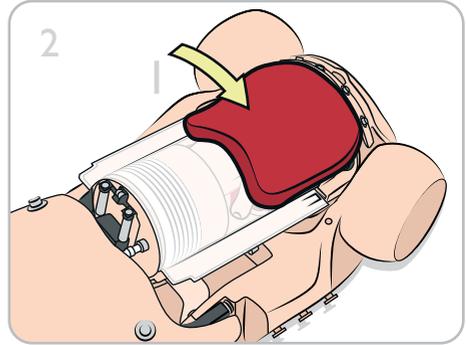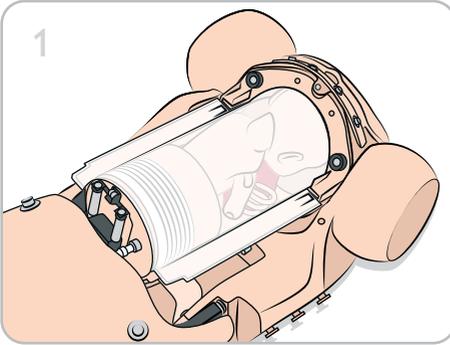





© 2014 Laerdal Medical AS. All rights reserved.
장비 제조업체: Laerdal Medical AS, P.O. Box 377,
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
전화번호: (+47) 5151 1700

Rev A

