


SimMan 3G

Guía de configuración rápida

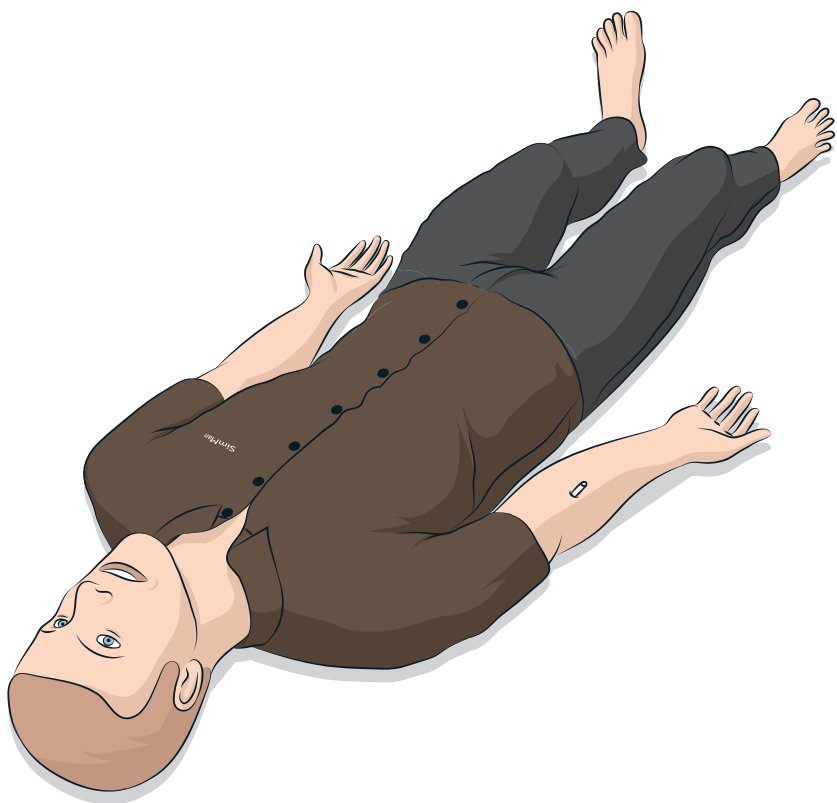


Este manual de configuración rápida describe cómo ensamblar y configurar su simulador del paciente SimMan. Para obtener información sobre cómo utilizar SimMan, consulte los archivos de ayuda de LLEAP y el manual de usuario de SimMan.

Visite www.laerdal.com/download para descargar el último manual del usuario y software.




COMPONENTES

Torso

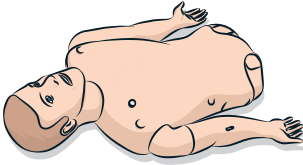

Piernas

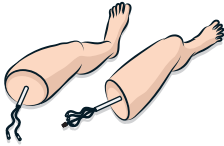


Ropa



Dientes de la parte superior



Genitales masculinos y femeninos

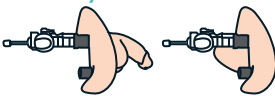


Pulsera de identificación



Adaptador de brazo SimMan



Filtro sangre x 2

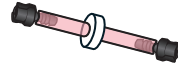


Tensor ECG y Desfibrilador



Adaptador electrodos ECG



Piel de cuello x6

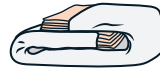

Junta tórica de distensibilidad pulmonar x 10



Botellas de llenado de fluido y sangre



Kit de heridas



Pleura de drenaje del tórax x 6



Concentrado de sangre



Lubricante de vía aérea



Manguito del
esfigmomanómetro



Bolsa IV



Extensión del catéter IV



Cinta cricotiroidea




Almohadillas y hueso
para tibia
x3



Almohadillas IM



Neumotórax

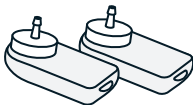

Manual del usuario e información
importante del producto



Auriculares



Teclado y ratón



Sonda de SpO₂



Kit RFID



Herramientas




Fuente de alimentación
externa




Cargador de baterías
x 2



Monitor paciente


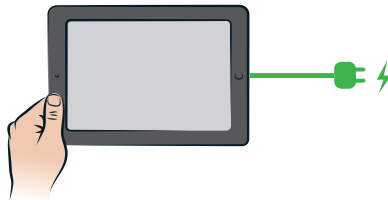





PC del instructor



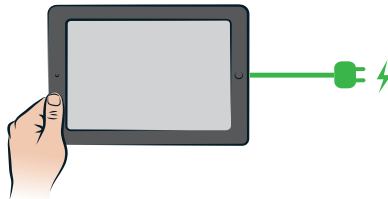


2

ABRIR PIEL DEL TORSO

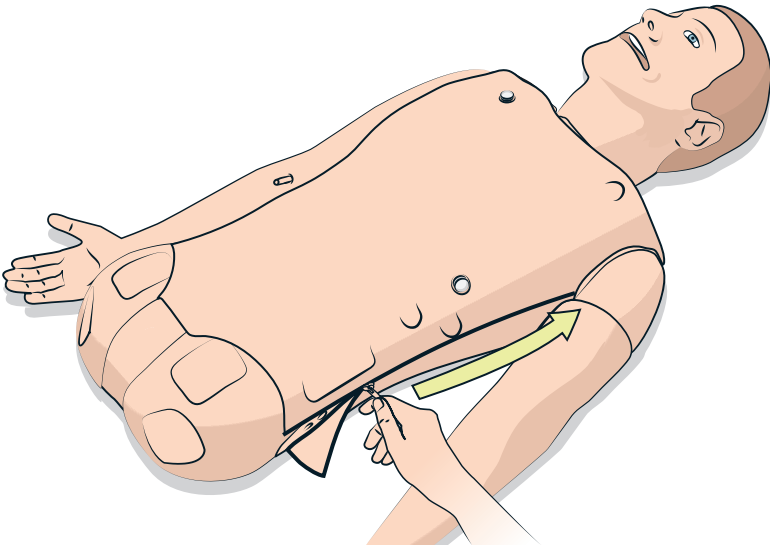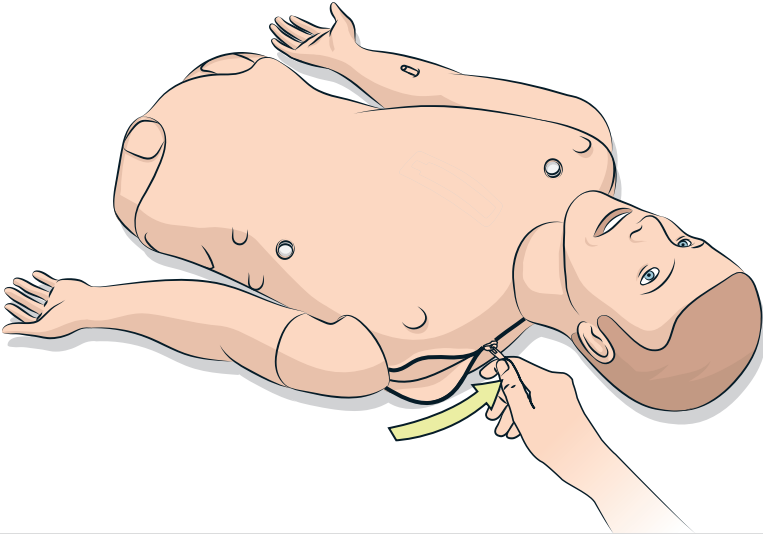


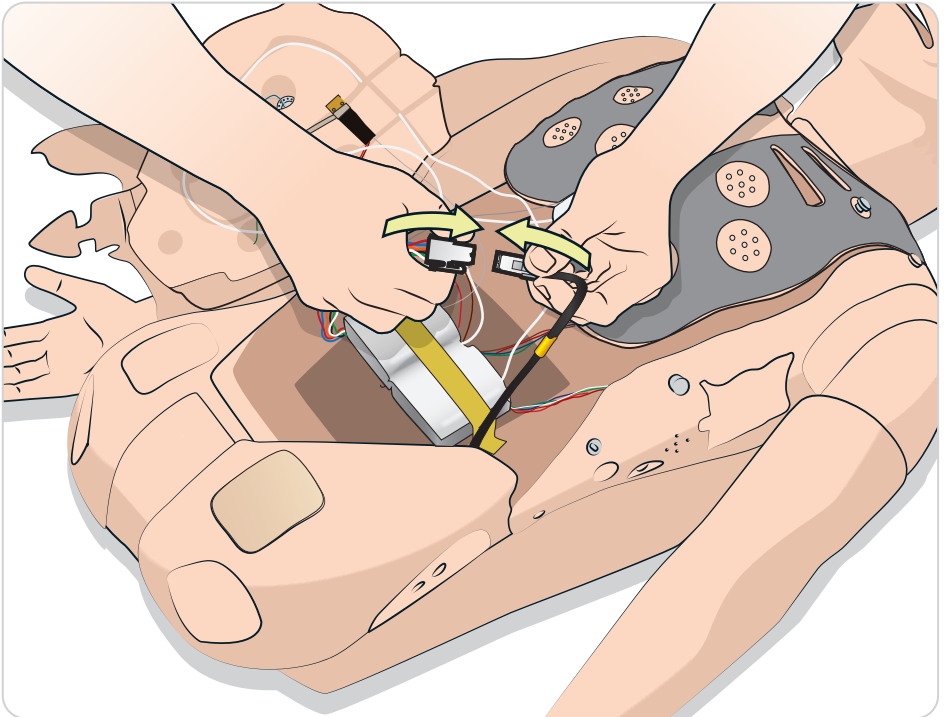
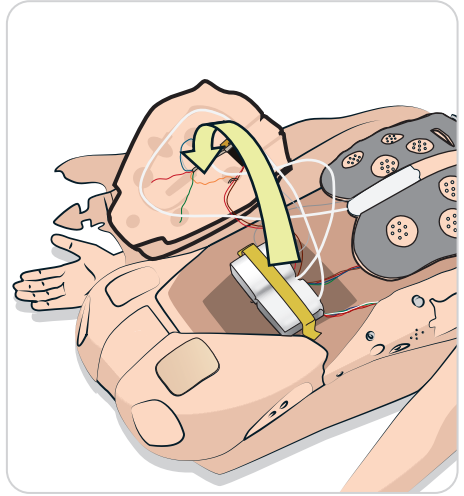
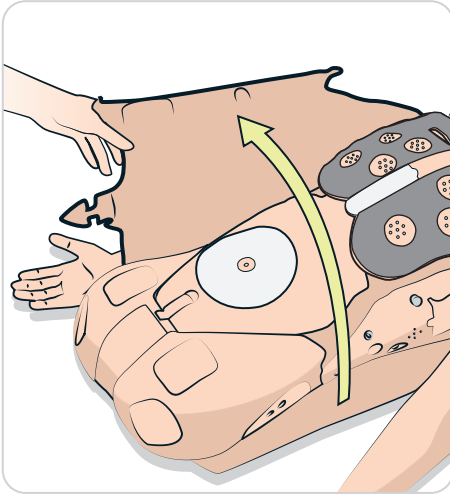


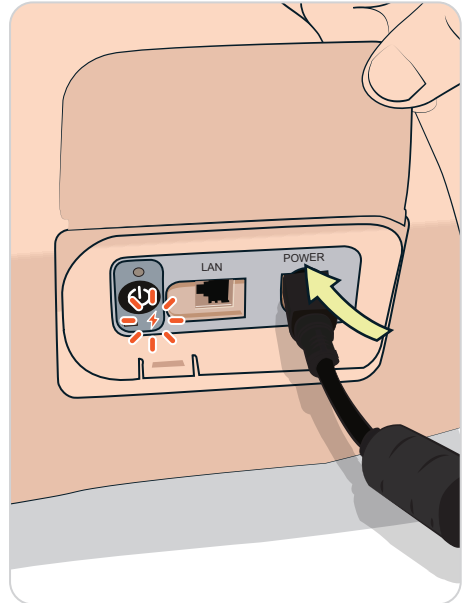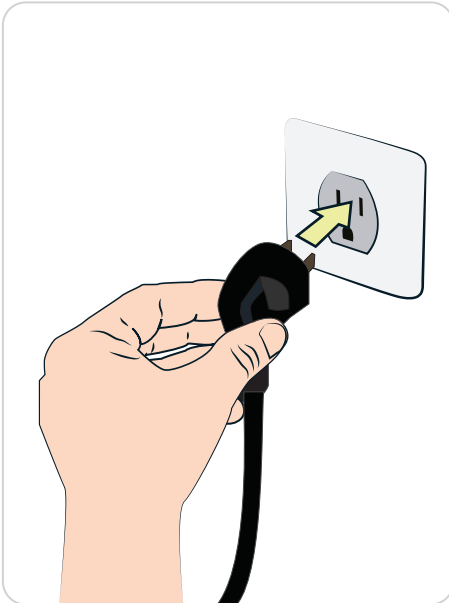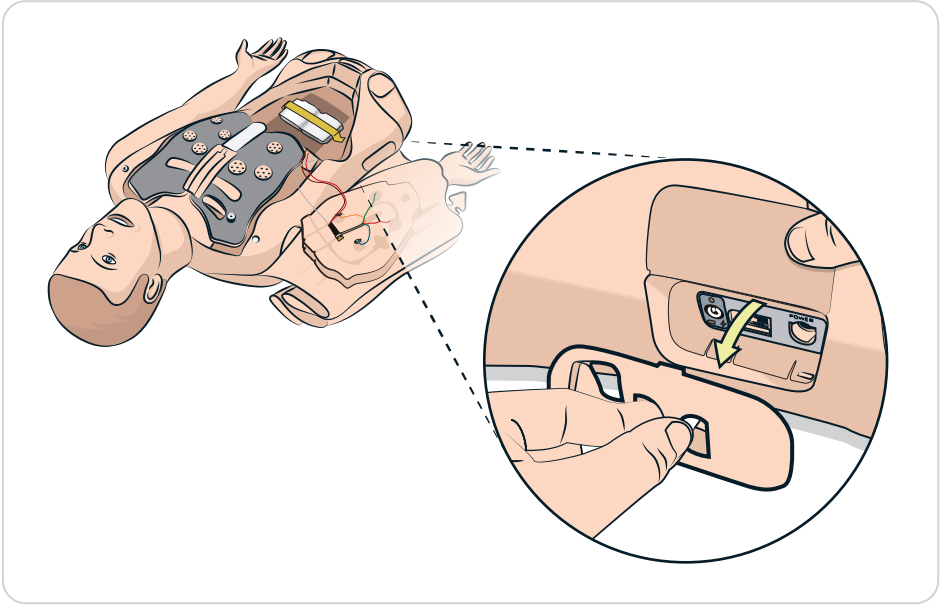





5

COLOCAR PIERNA IZQUIERDA

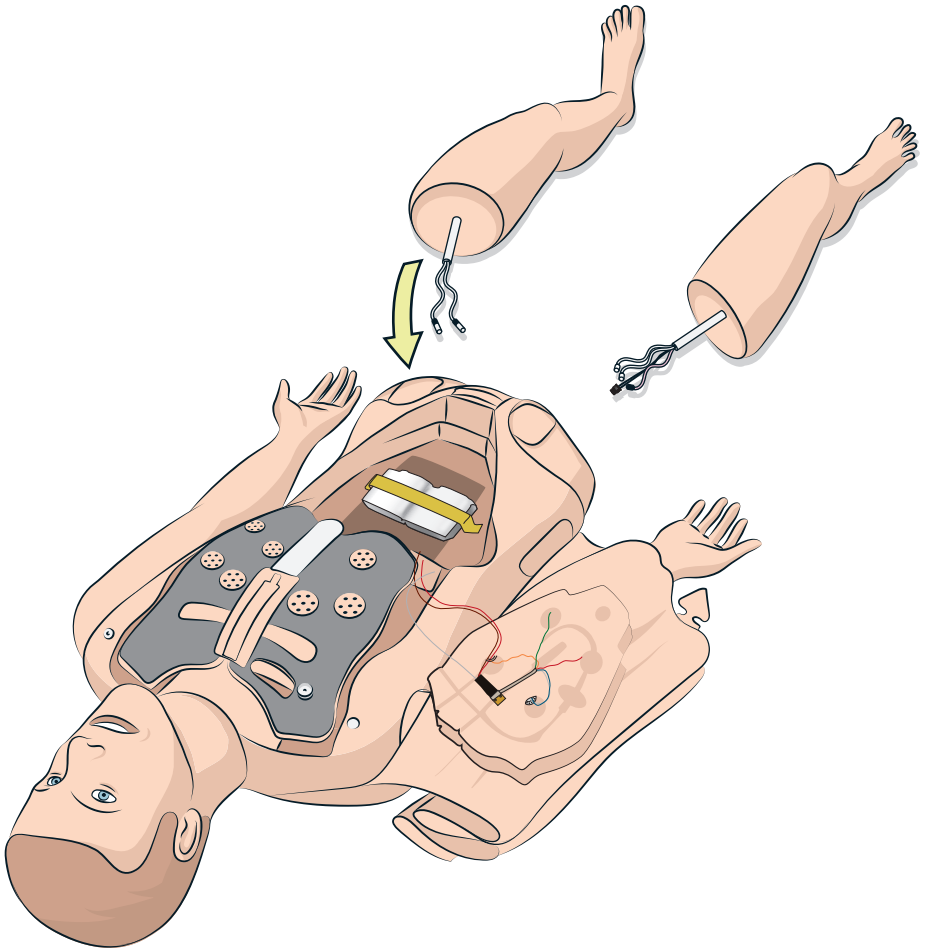

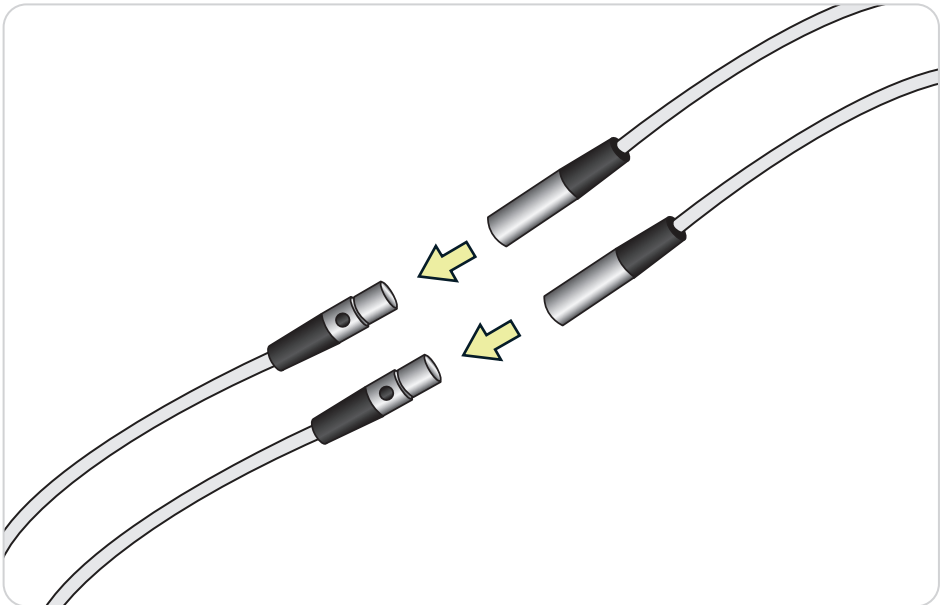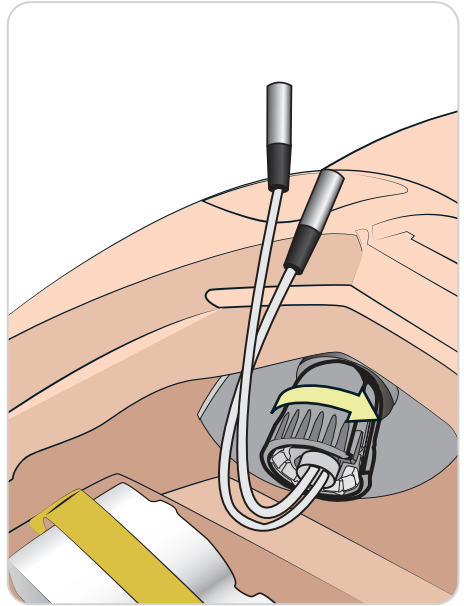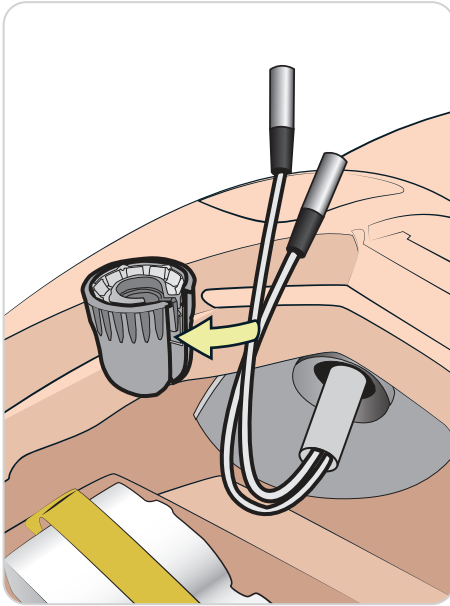

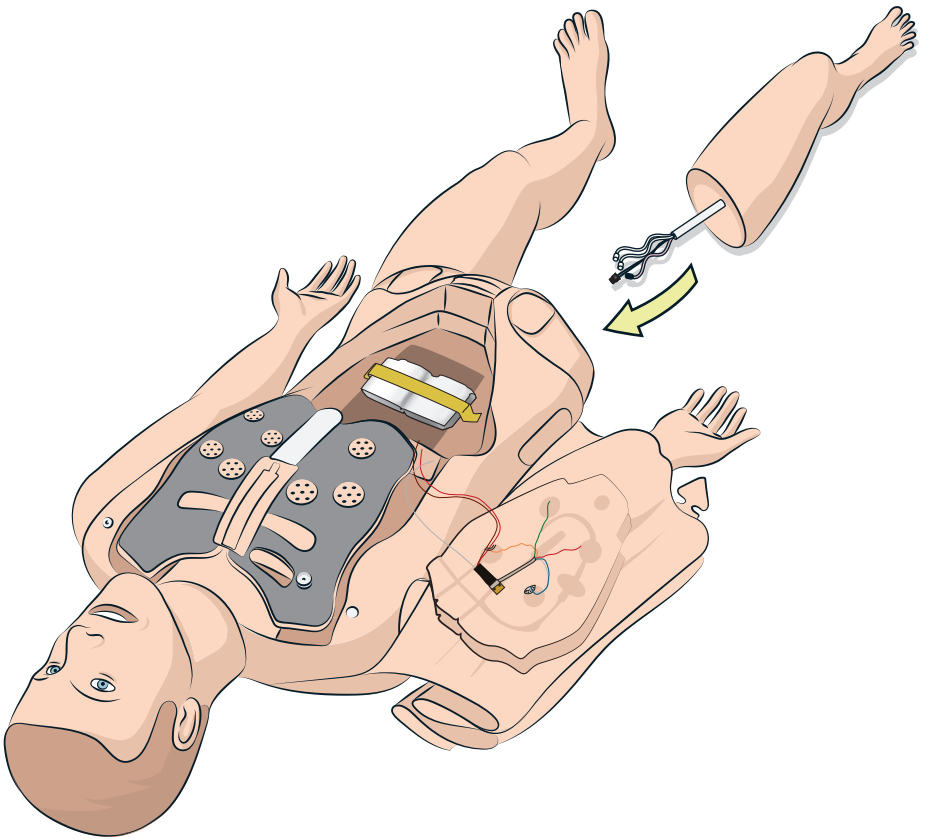

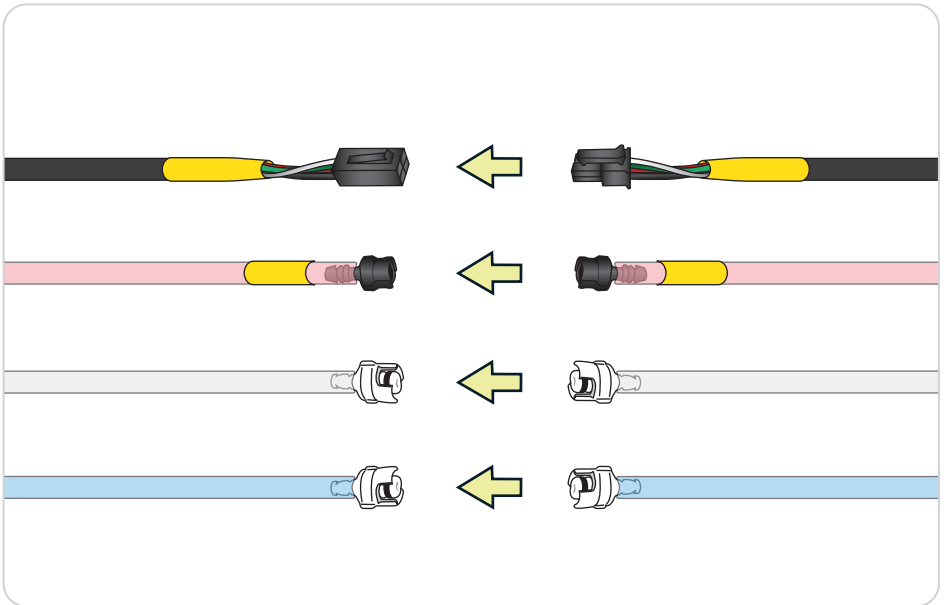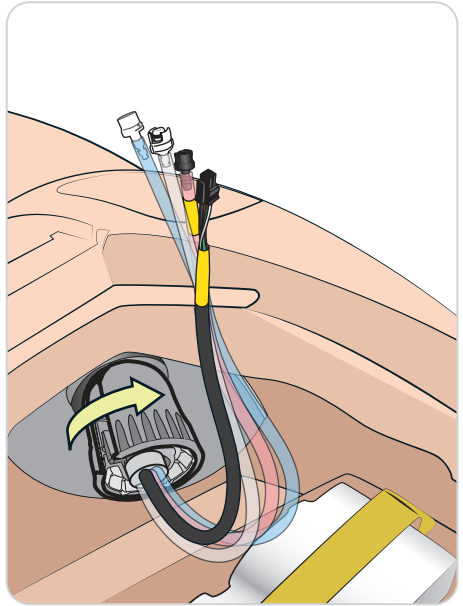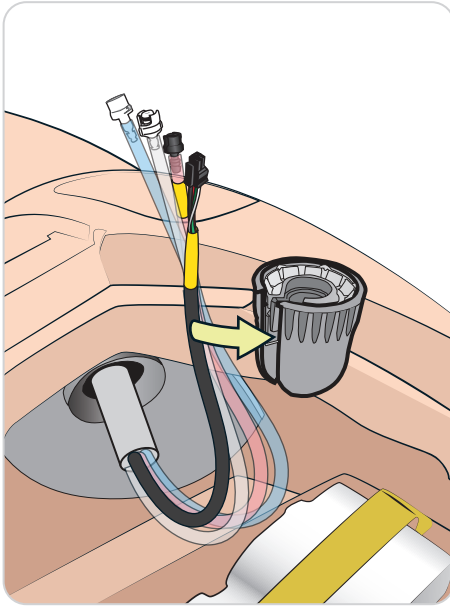


7_A

CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA

Auriculares




PC del instructor

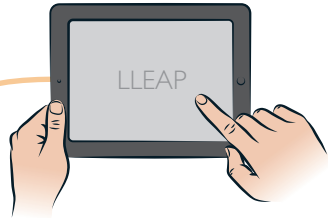

SpO₂



Monitor paciente

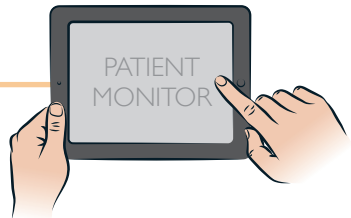


Cable USB —


Auriculares





PC del instructor

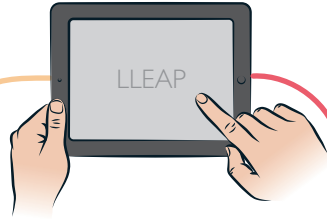

Switch

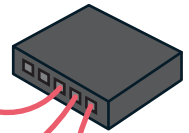SpO₂

Monitor paciente

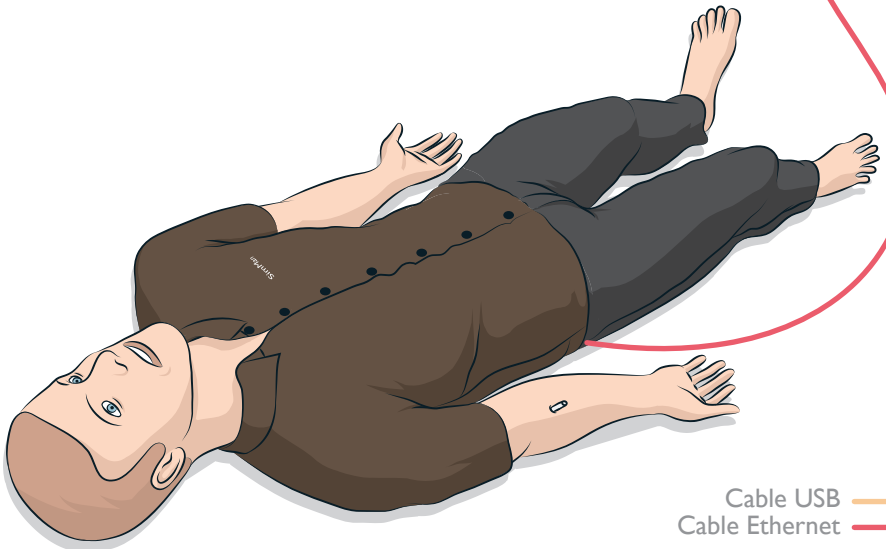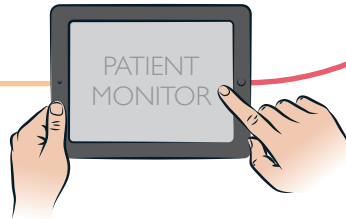Cable USB —
Cable Ethernet —

© 2016 Laerdal Medical AS. Reservados todos los derechos.
Printed in Norway

20-08127 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives