


SimMan 3G Trauma

Guida di configurazione rapida

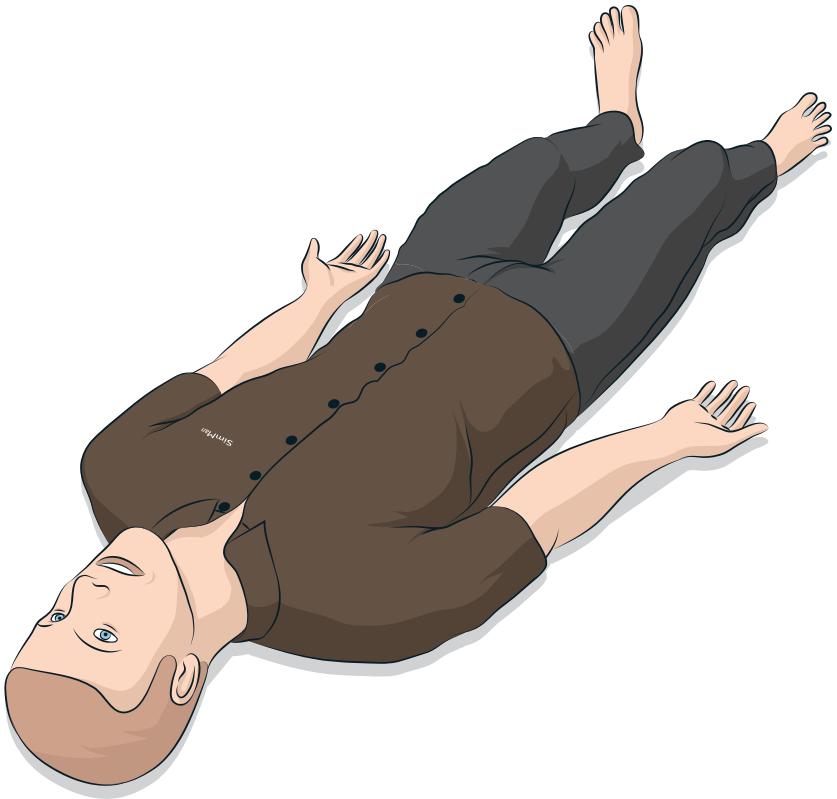


La Guida di configurazione rapida descrive come assemblare e impostare il simulatore paziente SimMan. Per informazioni sull'utilizzo del simulatore SimMan, fare riferimento ai file della guida di LLEAP e alla Guida per l'utente di SimMan.

Per scaricare la Guida per l'utente e il software più recenti, visitare il sito Web www.laerdal.com/download




COMPONENTI


Tronco

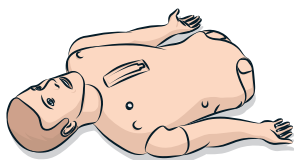


Gambe

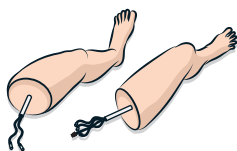

Arti amputati

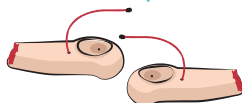

Pelle della gamba destra amputata

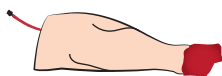


Gamba sinistra amputata



Abbigliamento



Genitali maschili e femminili

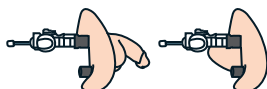

Guida per l'utente e
Informazioni importanti sul prodotto



Arcata dentale superiore rigida



Farfalla per ECG
defibrillatore




Dischi per defibrillazione



O-ring di conformità dei polmoni
x 10



Bottiglie di riempimento dei
fluidi e del sangue

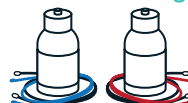

Kit per ferite



Pleura del drenaggio toracico
x 6



Sangue concentrato



Talco



Fascetta ID



Lubrificante vie aeree



Fermo a scatto




Cuffia con microfono



Bracciale per la misurazione della pressione sanguigna



Filtro in linea per sangue x 2

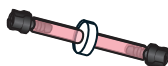

Tastiera e mouse



Sacca EV




Cuscinetti di materiale espanso della gamba per IM




Sonda SpO₂



Pelle del collo x6

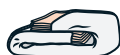

Pneumotorace

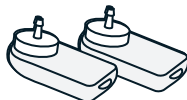

Cavo Ethernet



Ossa e cuscinetti tibia x3



Nastro cricotiroideo



Strumenti



Cuscinetti IM



Perni di montaggio



Alimentatore esterno



Ossa e cuscinetti per IO dello sterno x 4




Adattatore braccio di SimMan




Caricabatterie x 2








Monitor paziente



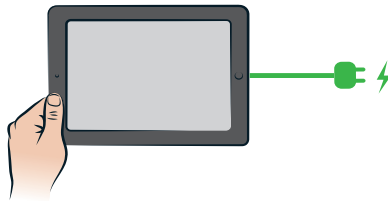



PC dell'istruttore



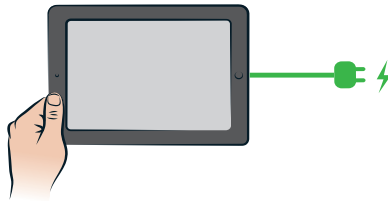


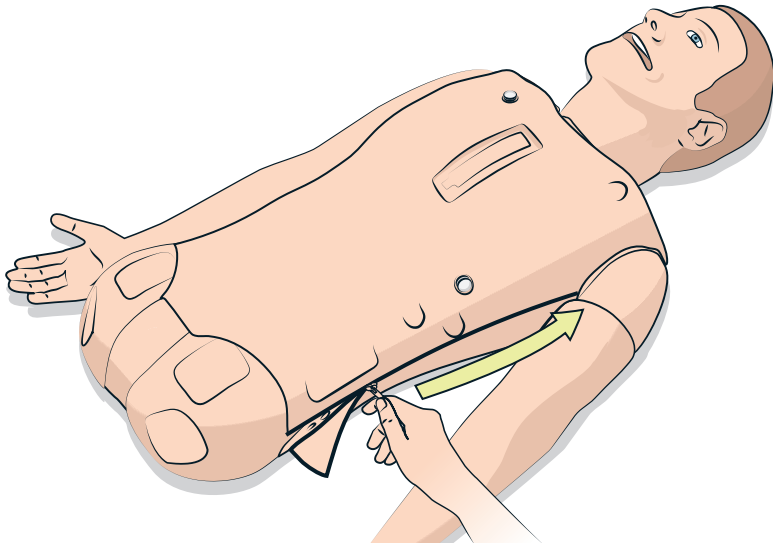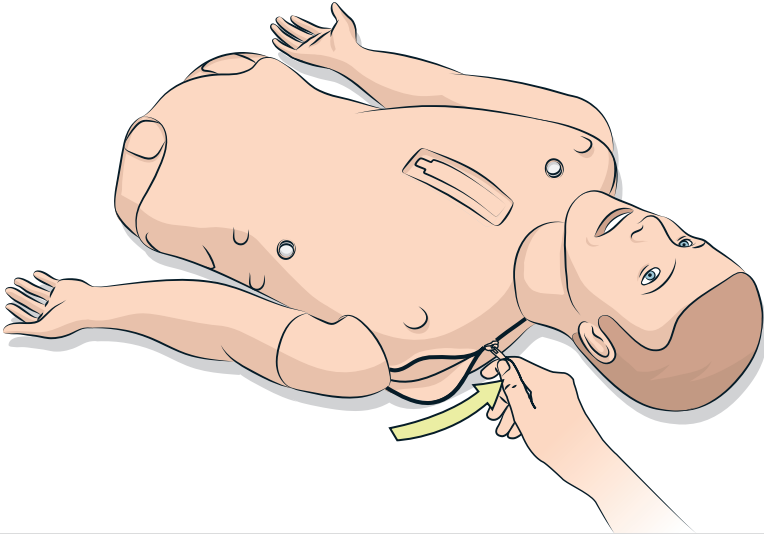


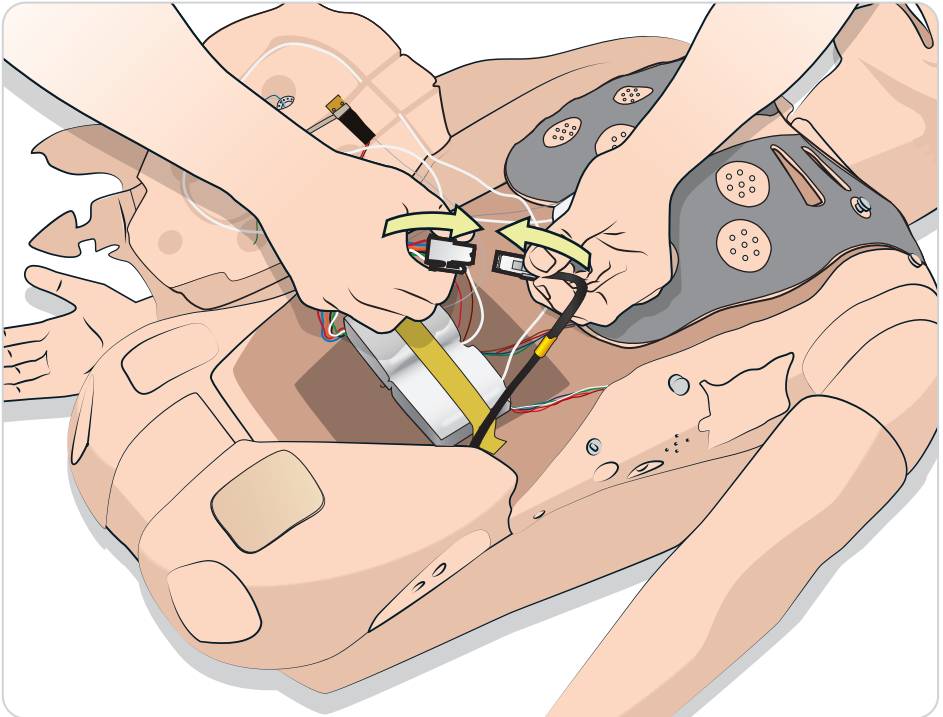
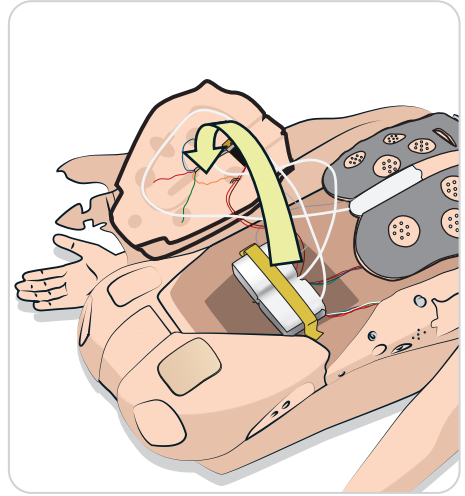
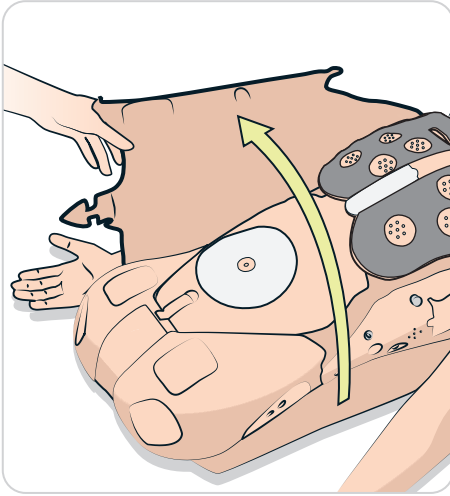


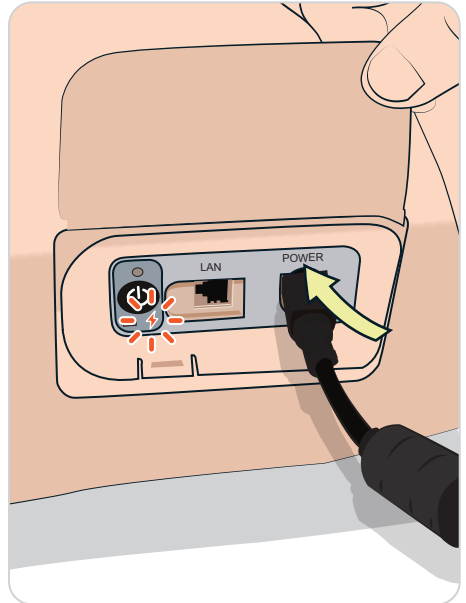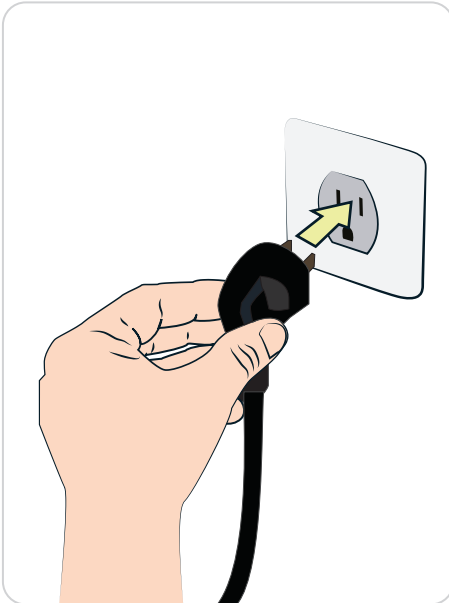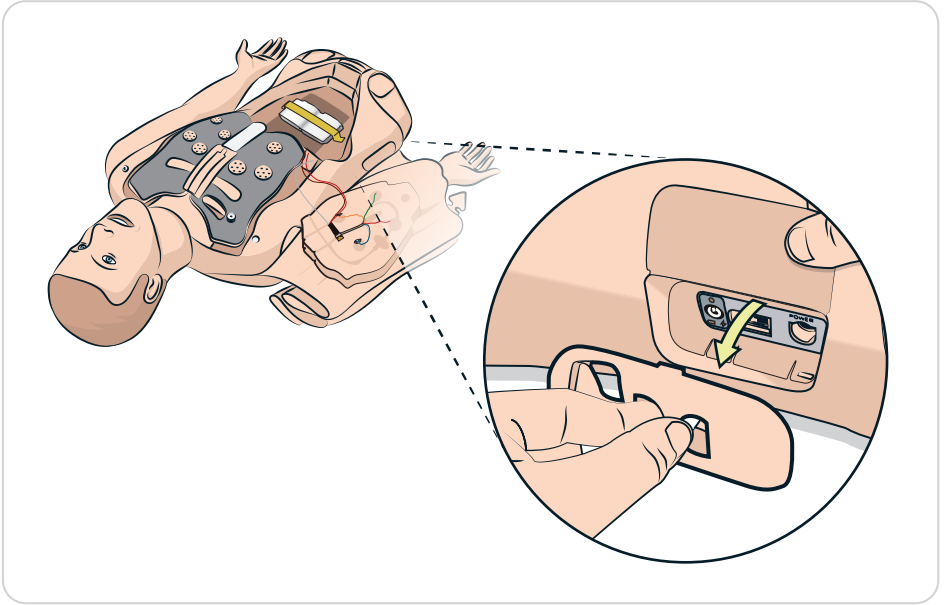

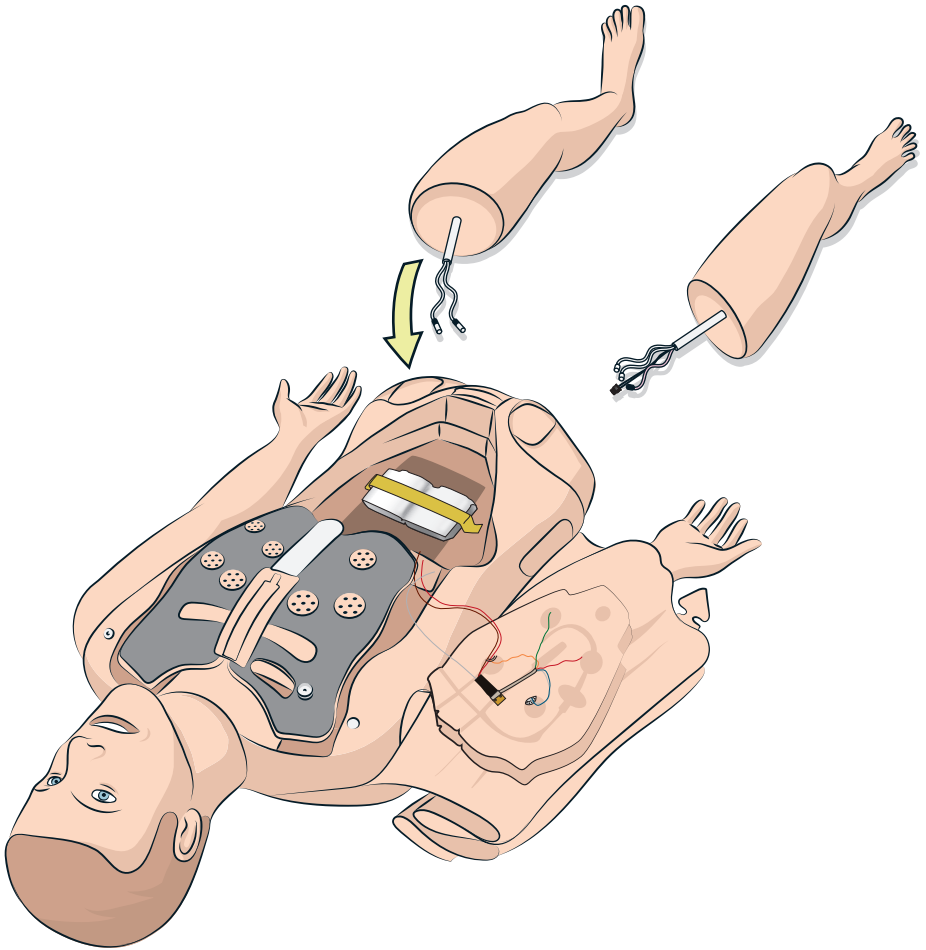

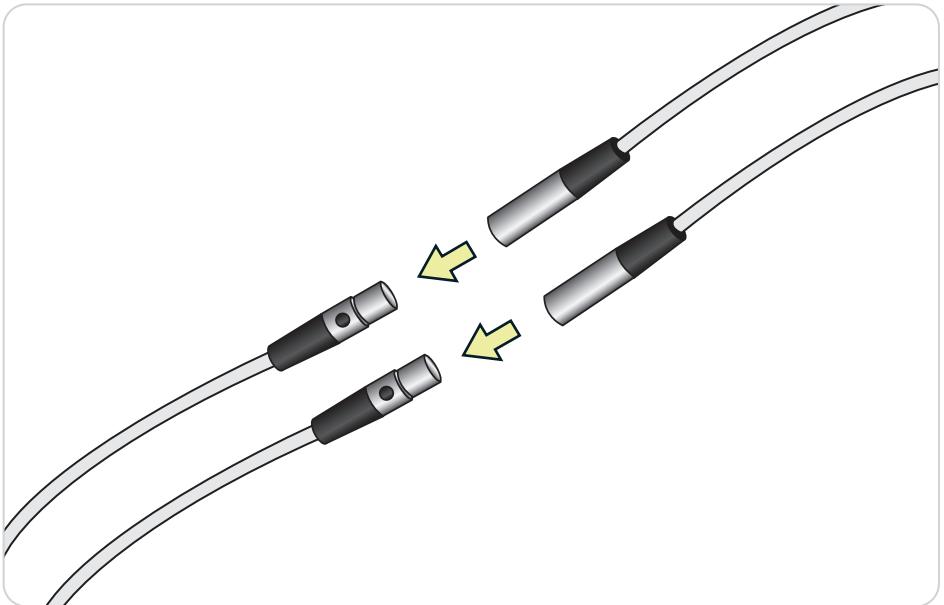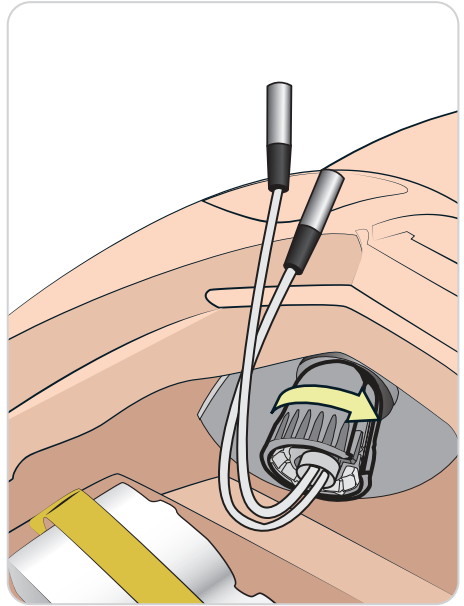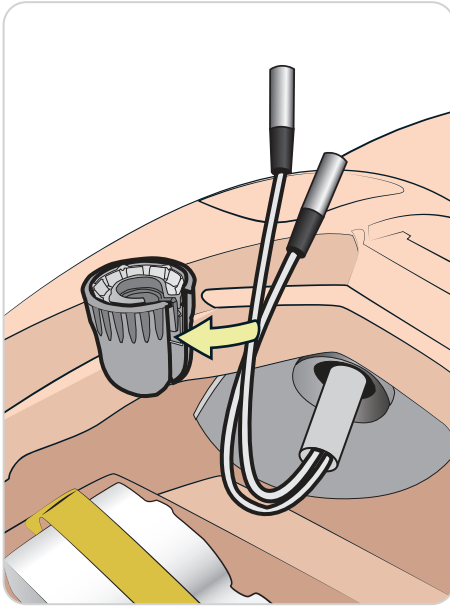

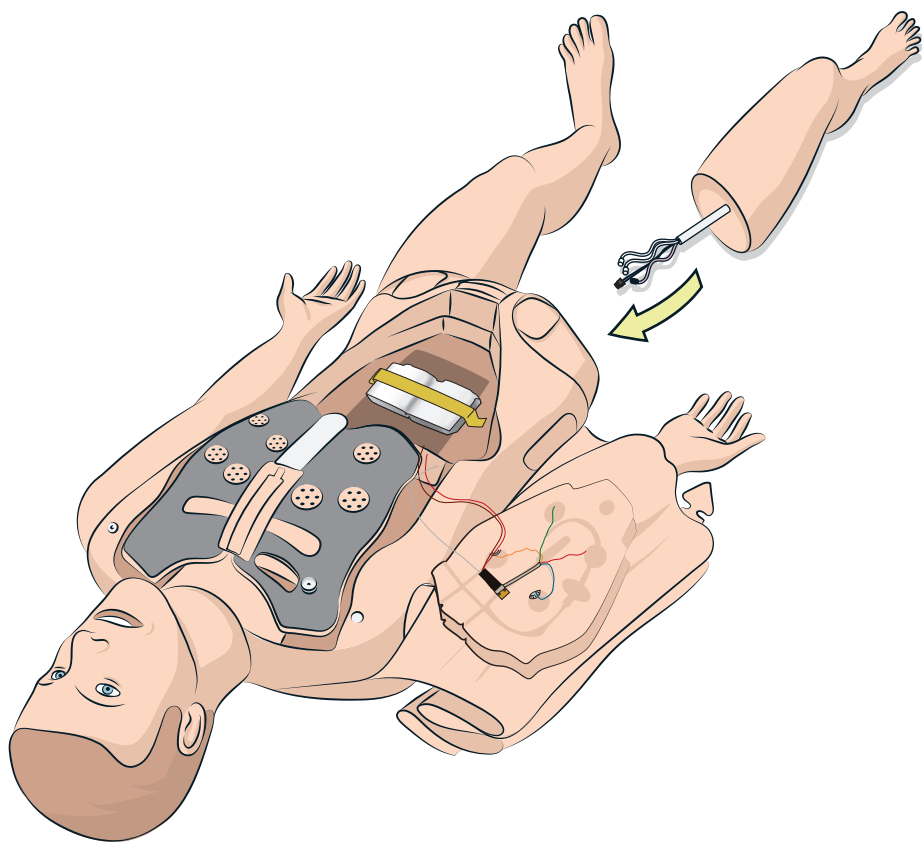

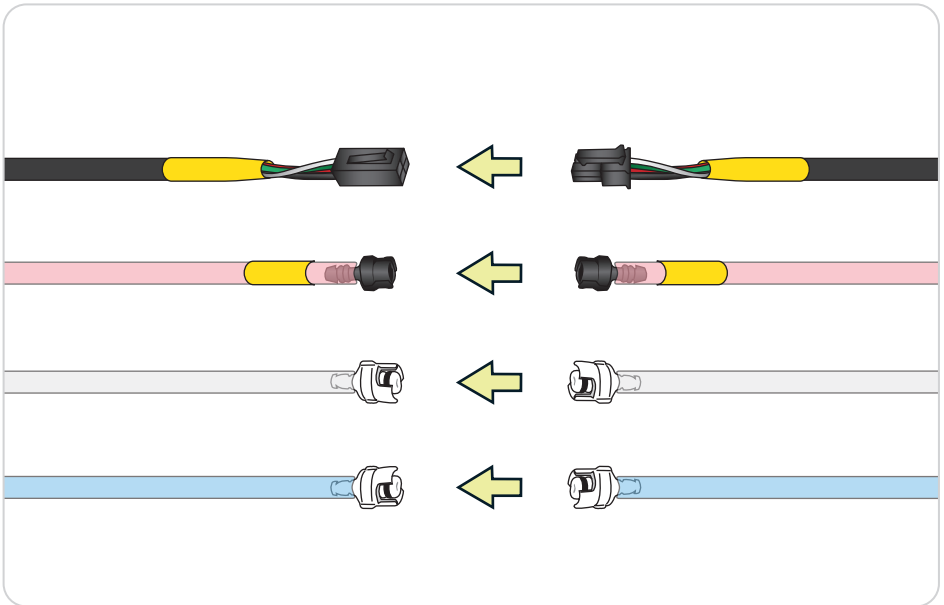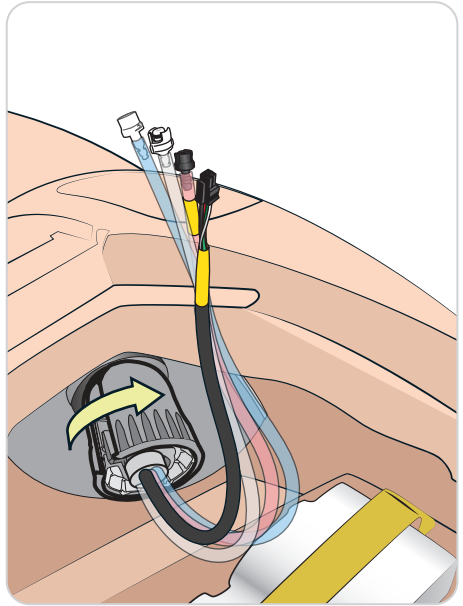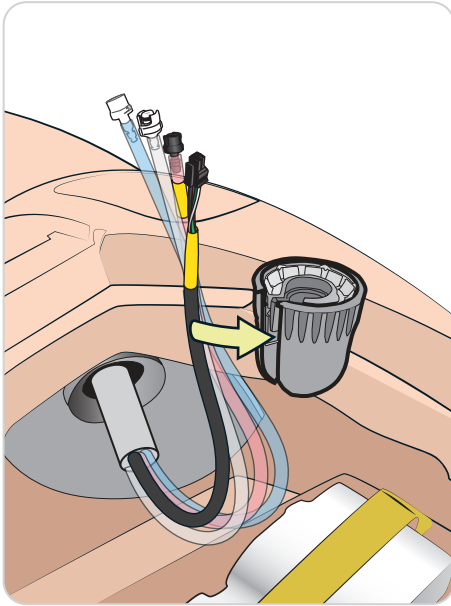


7_A

CONFIGURAZIONE WIRELESS

Cuffia con microfono




PC dell'istruttore

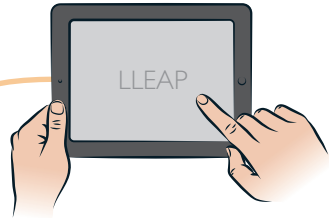

SpO₂



Monitor paziente

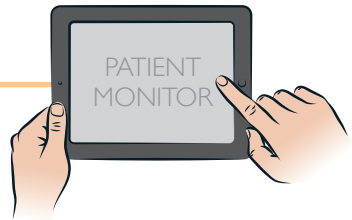


Cavo USB —


Cuffia con microfono





PC dell'istruttore

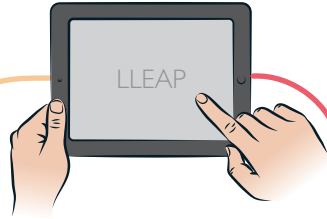

Switch

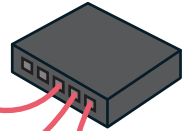SpO₂

Monitor paziente

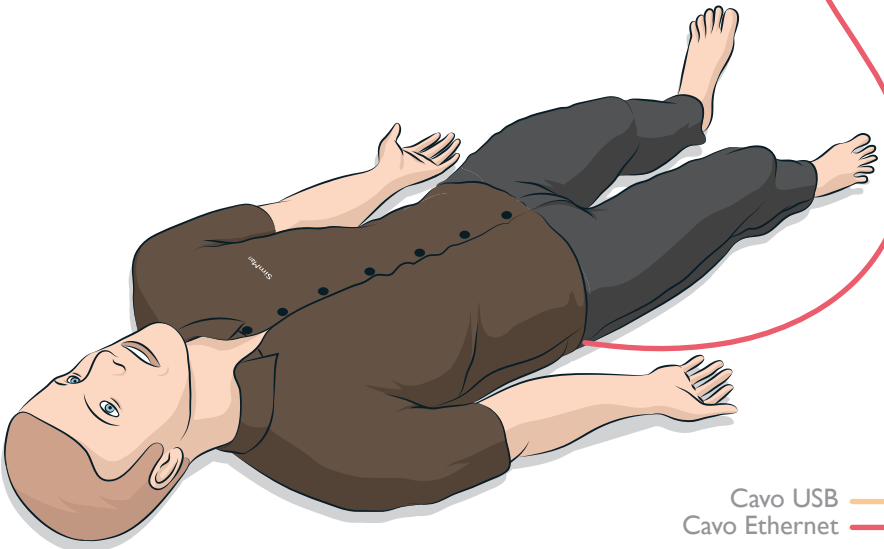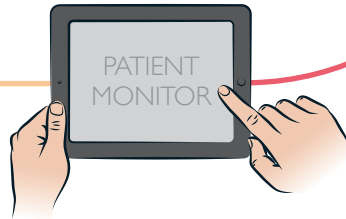

Cavo USB —
Cavo Ethernet —

© 2016 Laerdal Medical AS. Tutti i diritti riservati.
Printed in Norway

20-08143 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives