


SimMan 3G Trauma

Skrócona instrukcja konfiguracji

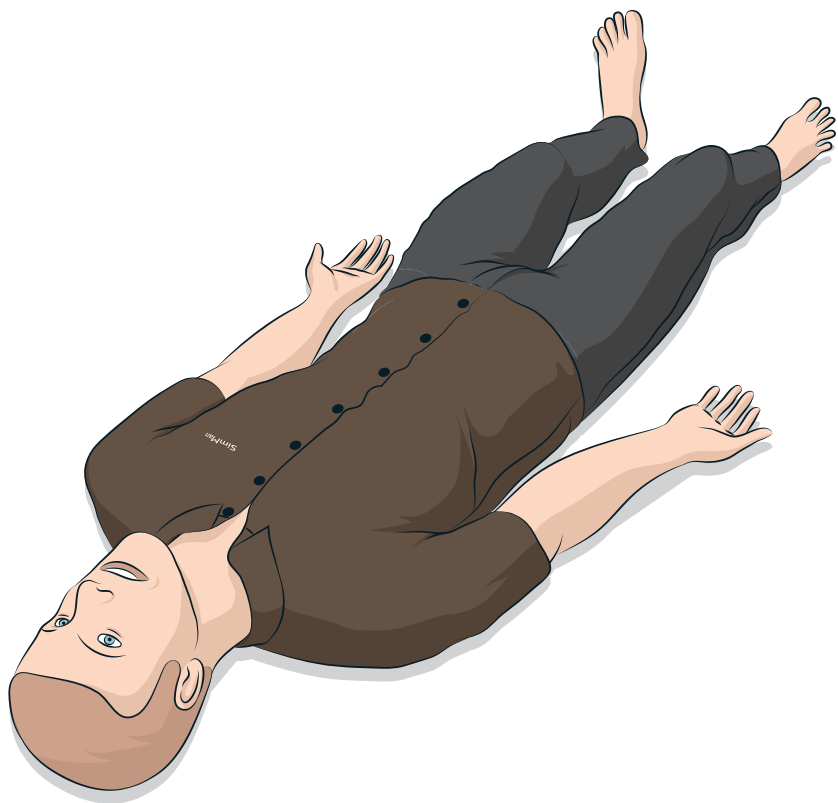


Niniejsza instrukcja szybkiej konfiguracji zawiera opis sposobu montażu i konfiguracji symulatora pacjenta SimMan. Informacje dotyczące sposobu użycia symulatora SimMan znajdują się w plikach pomocy LLEAP i instrukcji obsługi symulatora SimMan.

Najnowsze wydanie instrukcji obsługi i oprogramowanie można pobrać ze strony www.laerdal.com/download



ELEMENTY ZESTAWU


Tułów

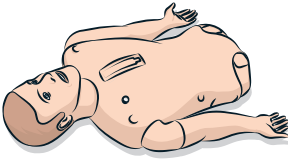

Podręcznik użytkownika i Ważne informacje o produkcie




Nogi

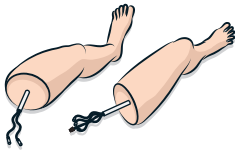

Twarde zęby górne




Amputowane ramiona

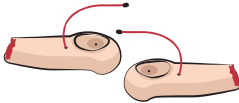

Klucz do końcówki Defib EKG




Skóra amputowanej
prawej nogi

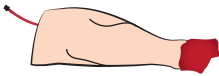

Elektroda adaptera EKG



Amputowana lewa noga

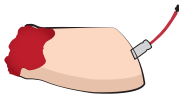

O-ring podatności płuc
x 10




Ubrania



Butelki na płyny i krew



Genitalia męskie i żeńskie

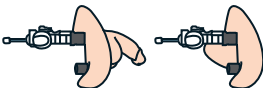

Zestaw ran



Oplućna do symulacji
drenażu klatki piersiowej
x 6



Koncentrat krwi



Lubrykant do dróg oddechowych



Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi



Worek infuzyjny



Skóra szyi
x6



Kość piszczelowa i wkładki na kość piszczelową
x3



Wkładki do wkluc domięśniowych



Kość mostka z wkładką do wkluc doszpikowych
x 4




Talk



Klamra zaciskowa



Wbudowany filtr krwi
x 2

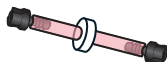

Piankowe wkładki na nogi do wkluc domięśniowych




Odma opłucnowa



Taśma na chrząstkę pierścieniową



Elementy montażowe

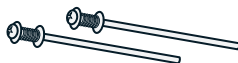

Adapter ramienia SimMan



Pasek identyfikatora



Słuchawki



Klawiatura i mysz



Czujnik SpO₂



Przewód sieciowy Ethernet



Narzędzia




Zasilacz zewnętrzny




Ładowarka
x 2



Monitor pacjenta


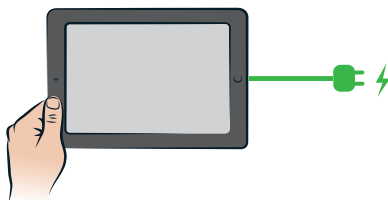





Komputer instruktora



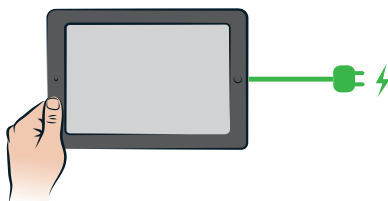


2

ROZPIĄĆ ZAMEK BŁYSKAWICZNY SKÓRY TUŁOWIA

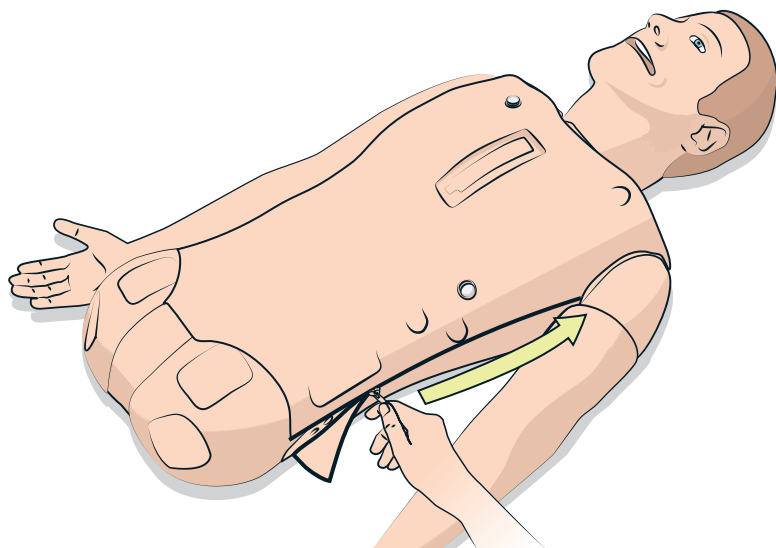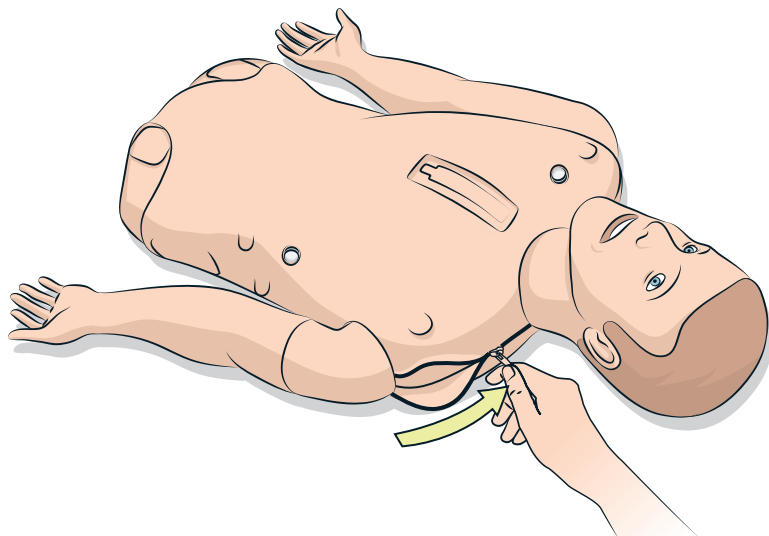


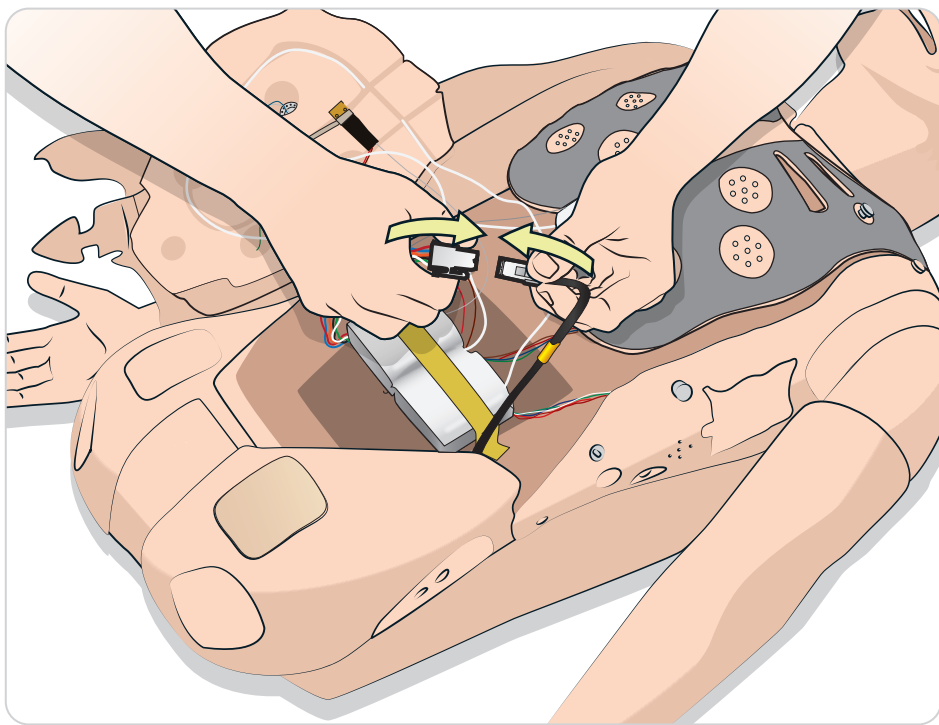
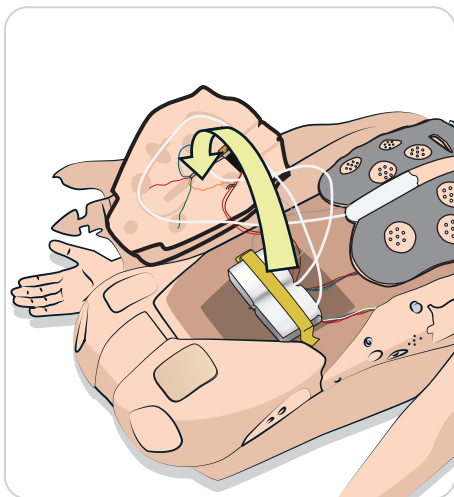
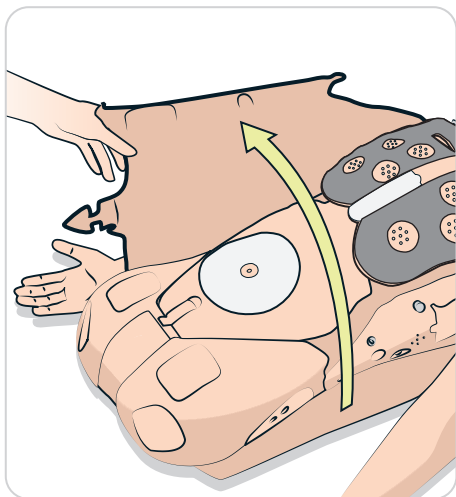


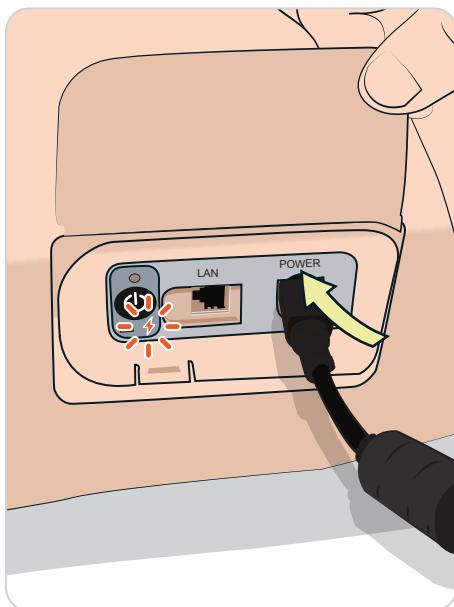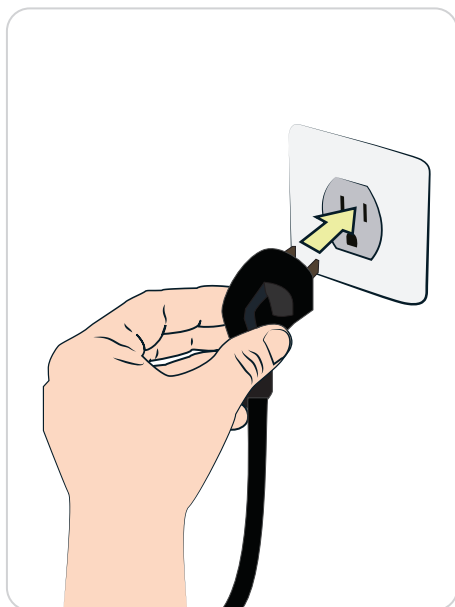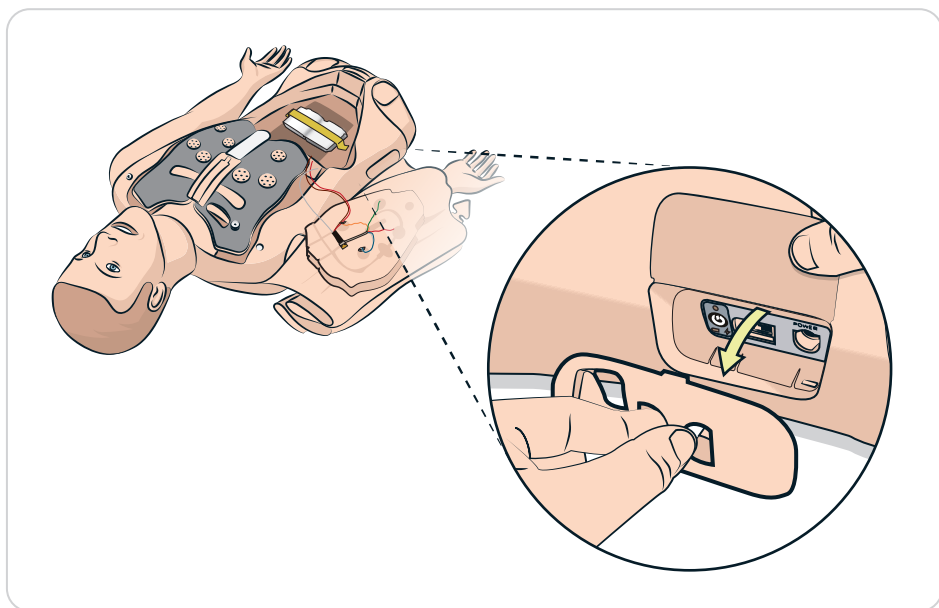





5

PRZYMOCOWAĆ LEWĄ NOGĘ

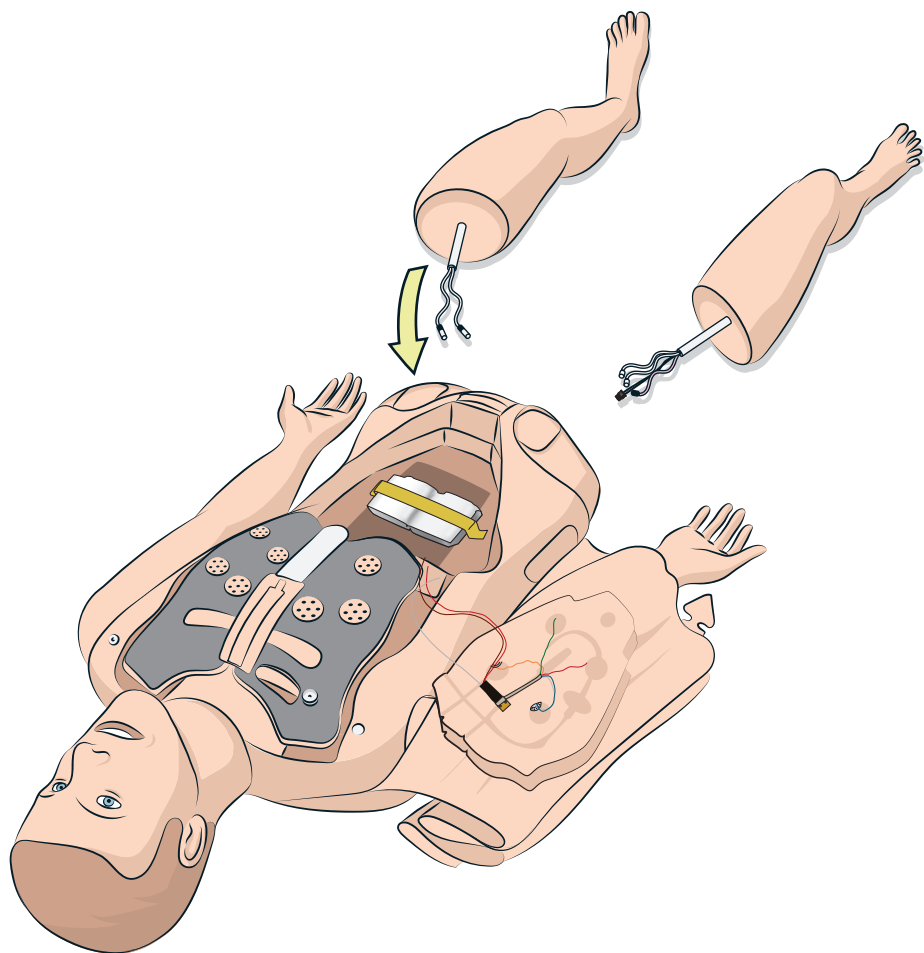

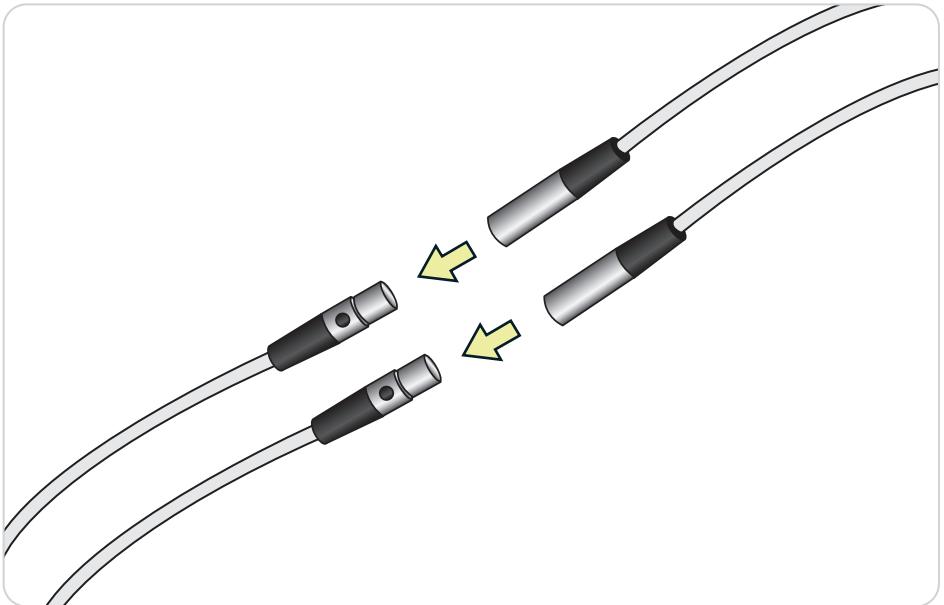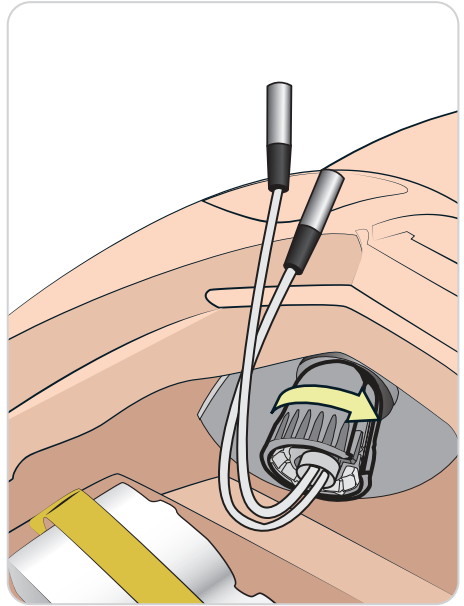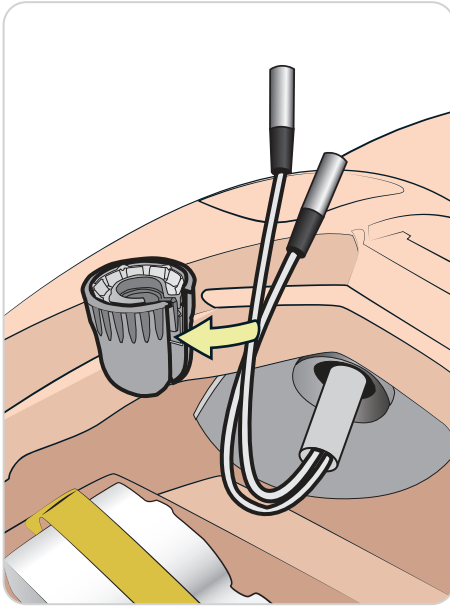

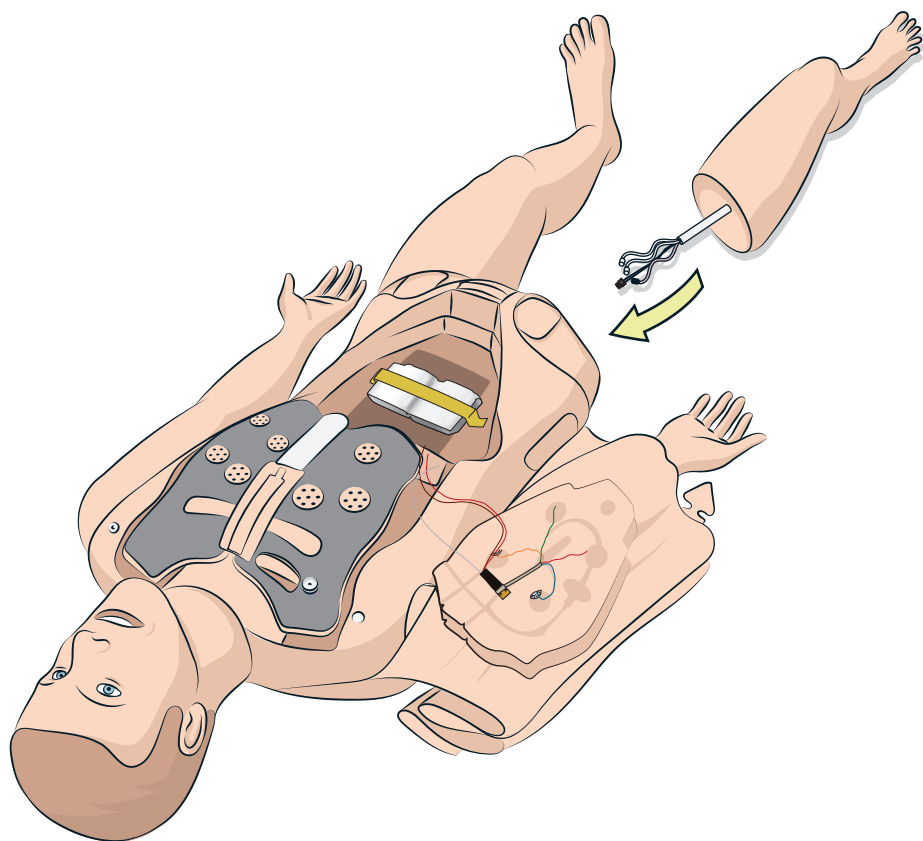

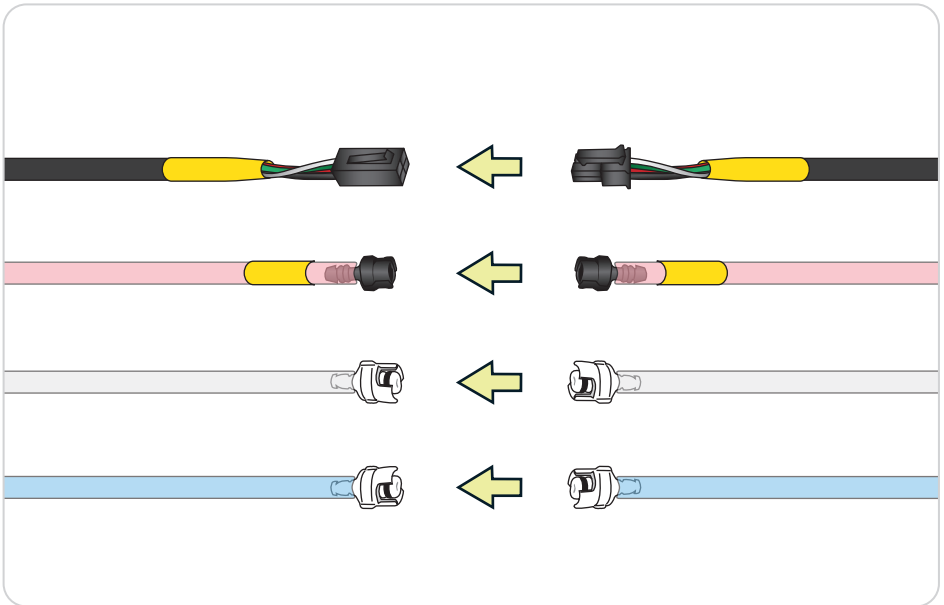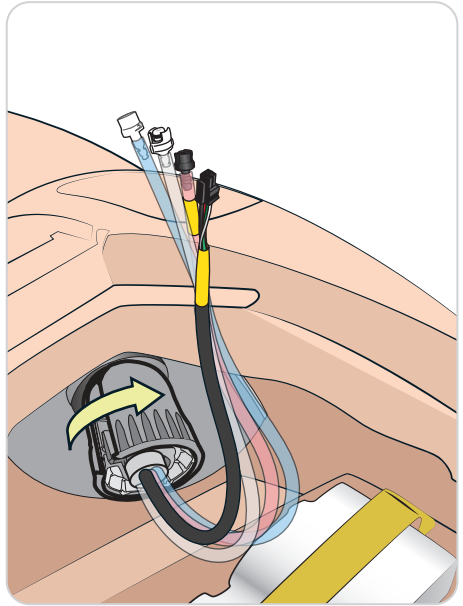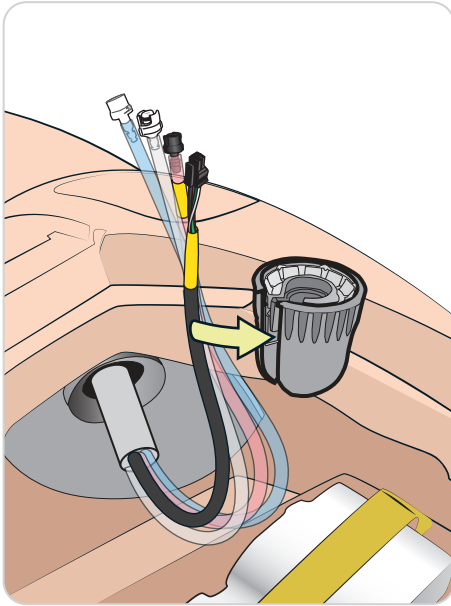


7_A

KONFIGURACJA BEZPRZEWODOWA

Słuchawki




Komputer instruktora

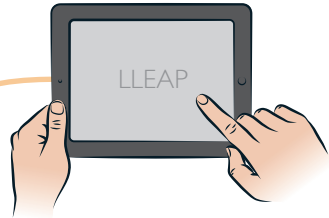

SpO₂



Monitor pacjenta

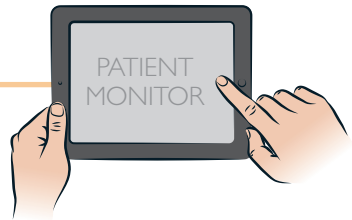


Przewód USB —


Słuchawki





Komputer instruktora

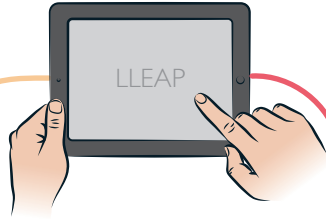

Przełącznik

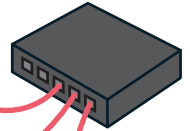SpO₂

Monitor pacjenta

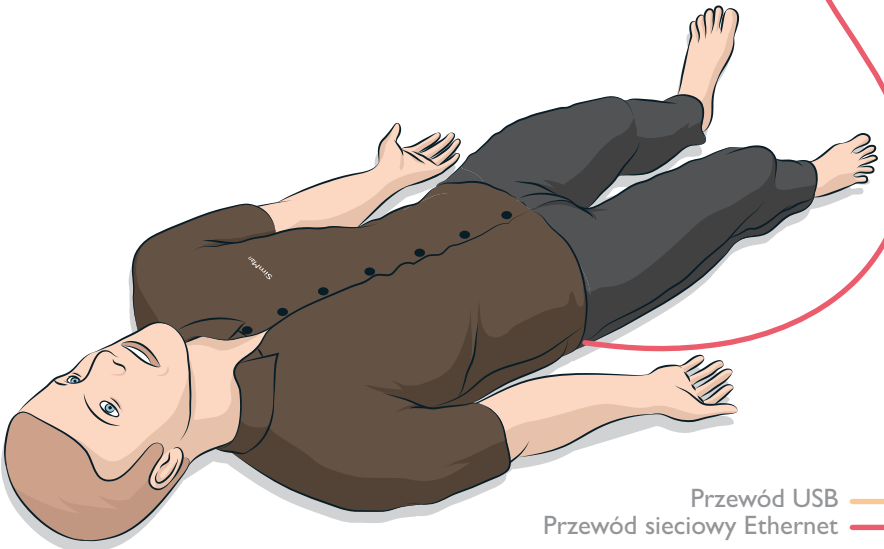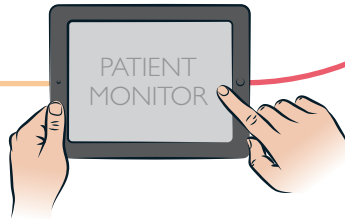

Przewód USB —
Przewód sieciowy Ethernet —

© 2016 Laerdal Medical AS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Printed in Norway

20-08333 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives