


SimMan 3G Trauma


Skrócona instrukcja konfiguracji

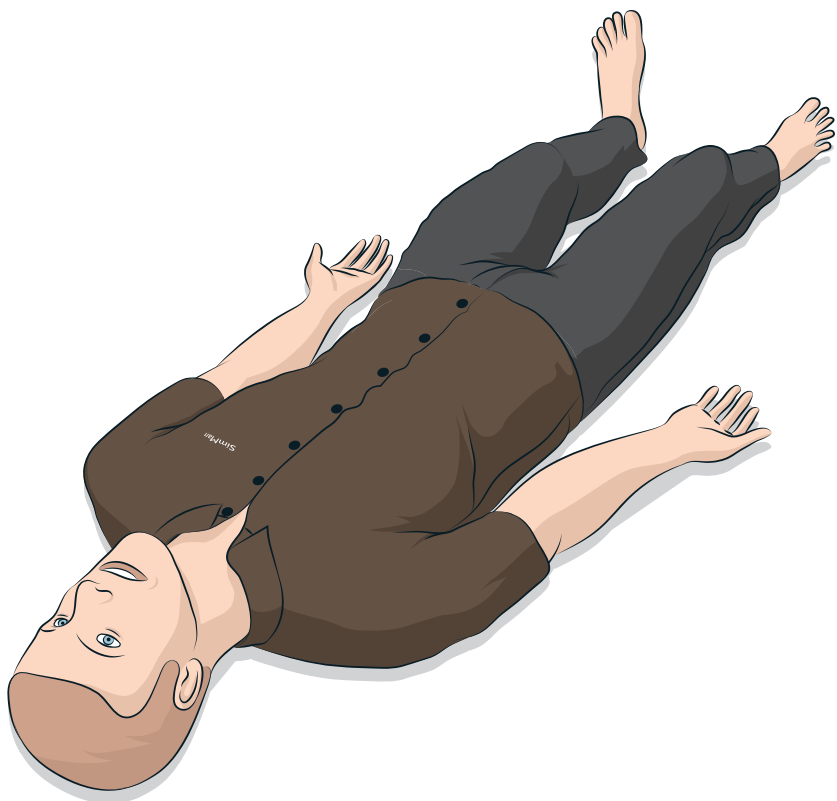


Niniejsza instrukcja szybkiej konfiguracji zawiera opis sposobu montażu i konfiguracji symulatora pacjenta SimMan. Informacje dotyczące sposobu użycia symulatora SimMan znajdują się w plikach pomocy LLEAP i instrukcji obsługi symulatora SimMan.

Najnowsze wydanie instrukcji obsługi i oprogramowanie można pobrać ze strony **www.laerdal.com/download**


Elementy Zestawu

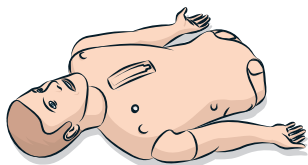


Tułów

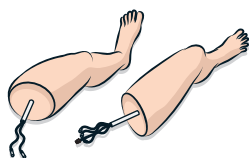


Nogi

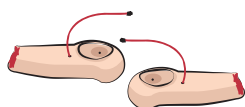


Amputowane ramiona

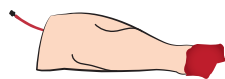


Skóra amputowanej
prawej nogi

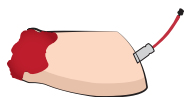

Amputowana lewa noga

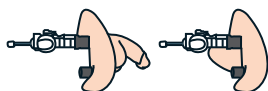

Genitalia męskie i żeńskie

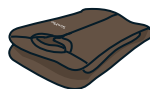

Ubrania



Pasek identyfikatora




Klucz do końcówki Defib EKG




Elektroda adaptera EKG




O-ring podatności płuc
x 10

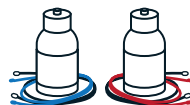

Butelki na płyn i krew

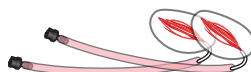

Zestaw ran

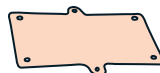

Opłuczna do symulacji drenażu
klatki piersiowej x 6

Elementy Zestawu



Kncentrat krwi



Talk



Podręcznik użytkownika i Ważne informacje o produkcie



Lubrykant do dróg oddechowych




Klamra zaciskowa



Adapter ramienia SimMan



Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi

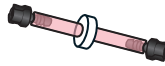

Wbudowany filtr krwi
x 2



Kość mostka z wkładką do wkluc doszpikowych
x 4



Worek infuzyjny




Piankowe wkładki na nogi do wkluc domięśniowych



Czujnik SpO₂



Skóra szyi
x3

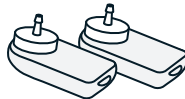

Odma opłucnowa




Narzędzia



Kość piszczelowa i wkładki na kość piszczelową x3




Taśma na chrząstkę pierścieną

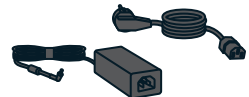

Zasilacz zewnętrzny




Wkładki do wkluc domięśniowych

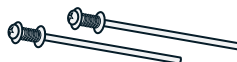




Elementy montażowe

Monitor pacjenta



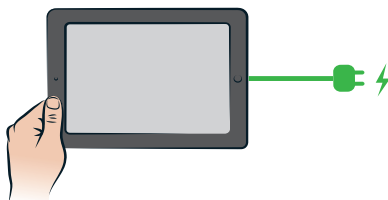





Komputer instruktora

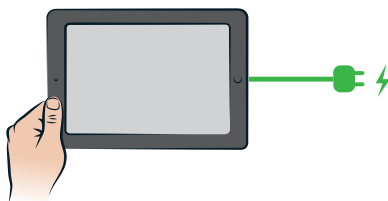

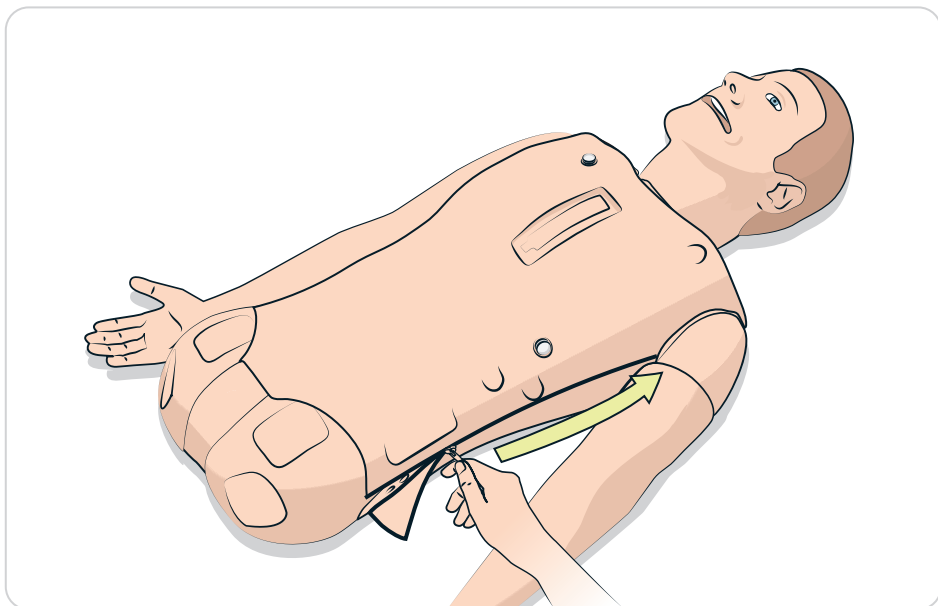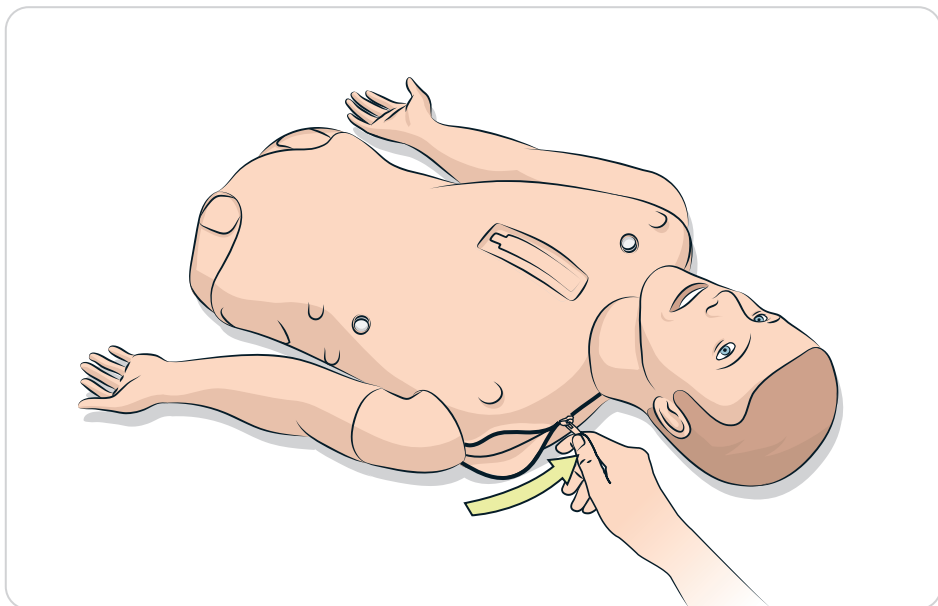





Podłączyć Akumulator

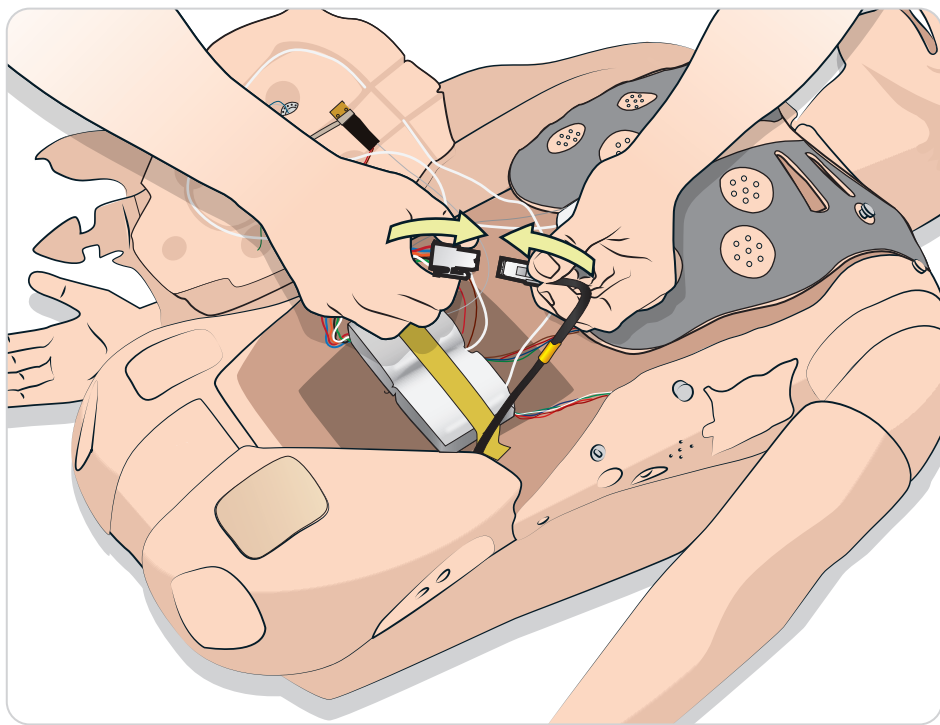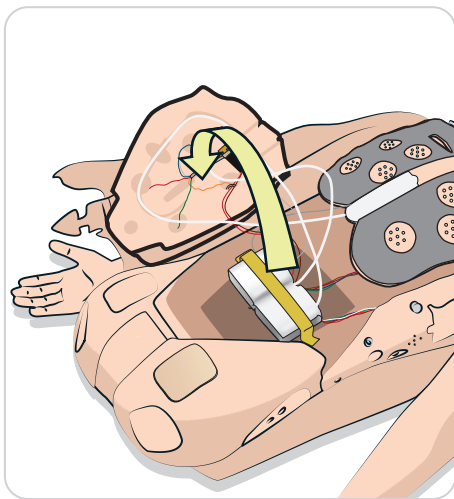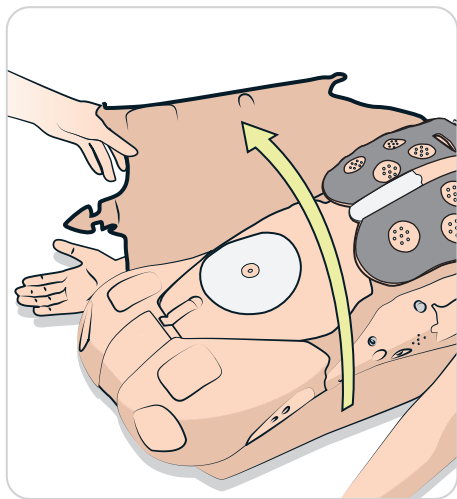

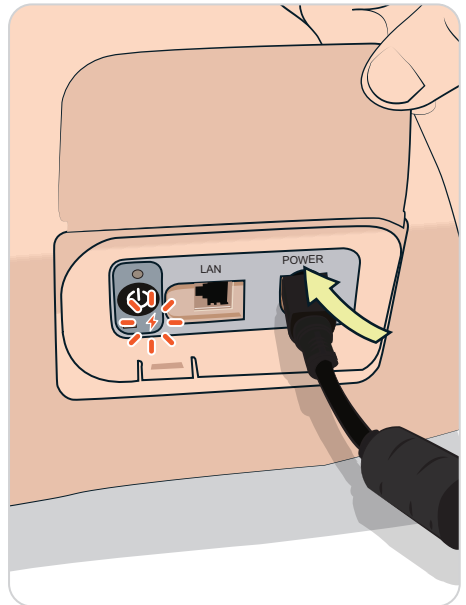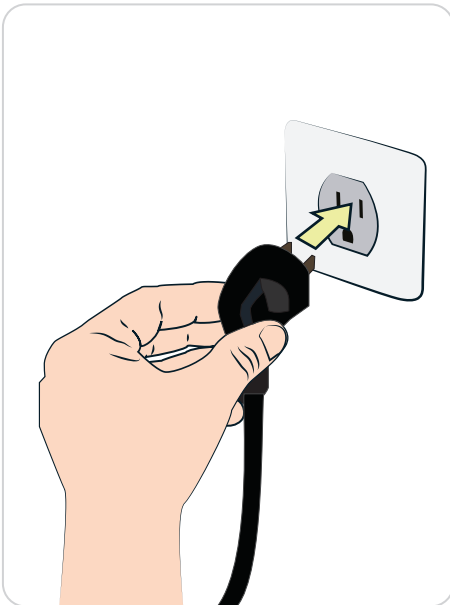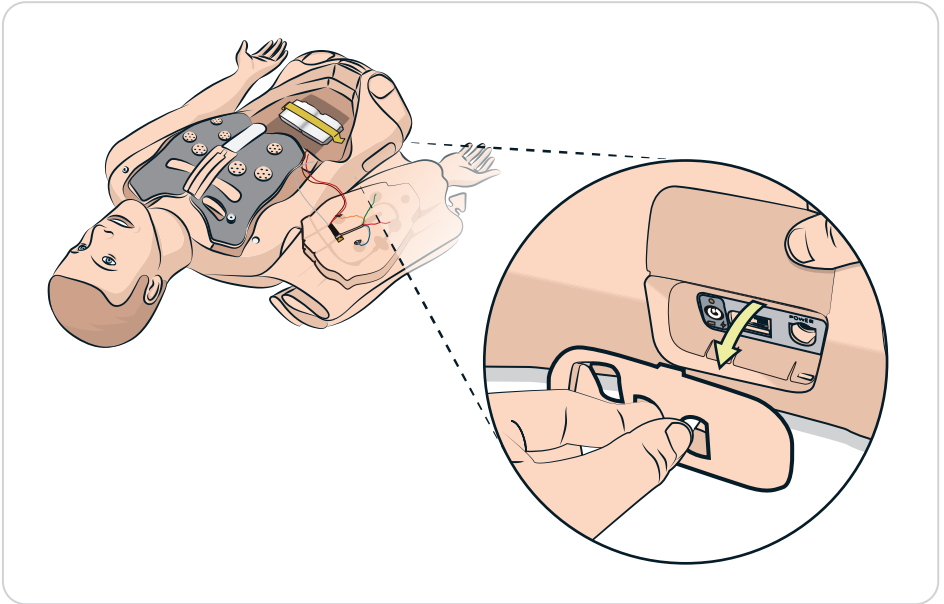





Przymocować Lewą Nogę

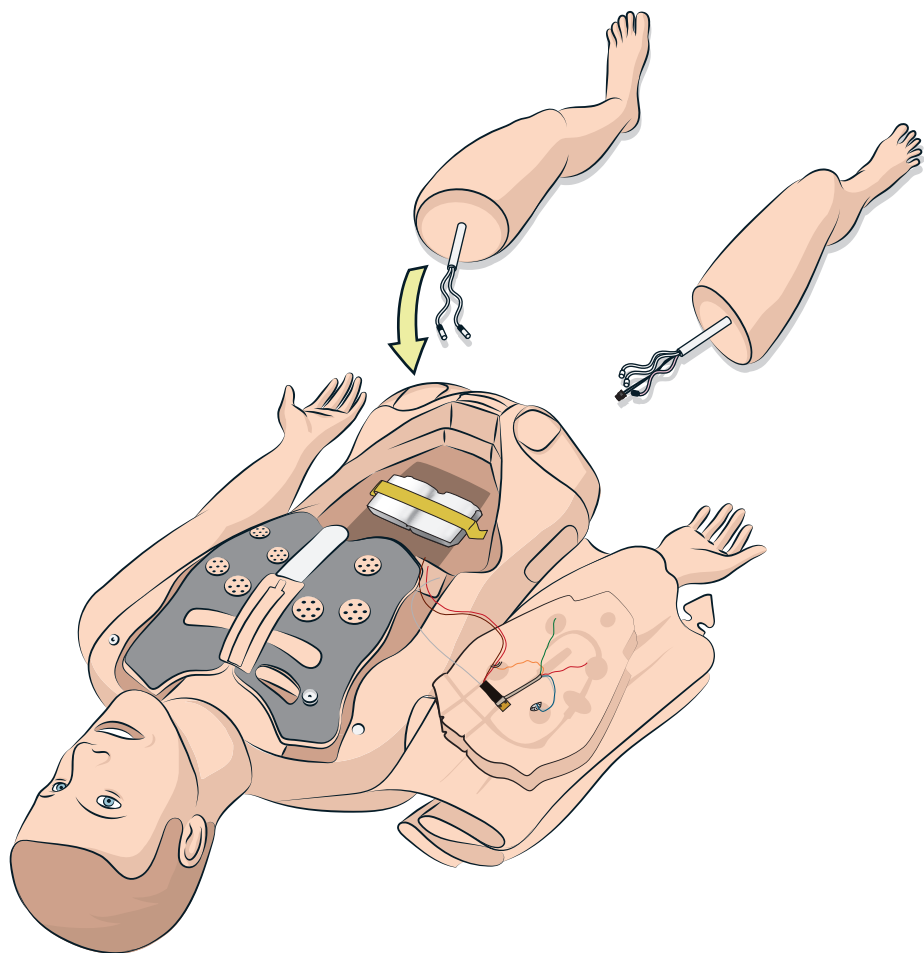

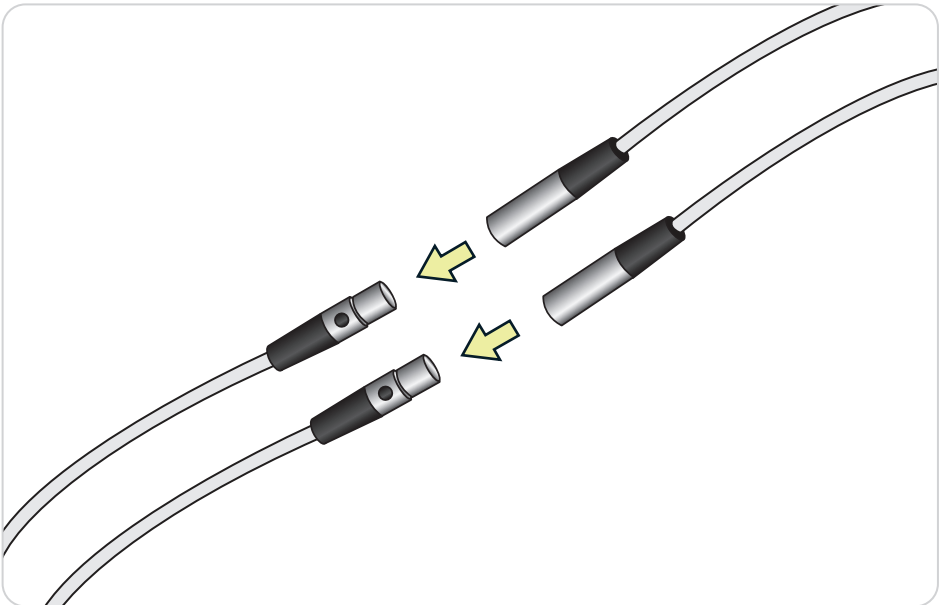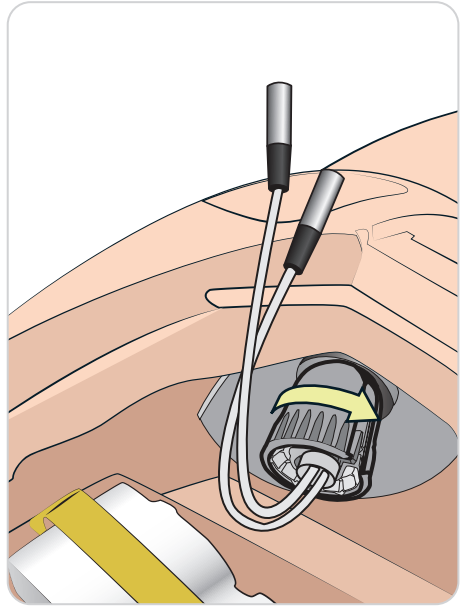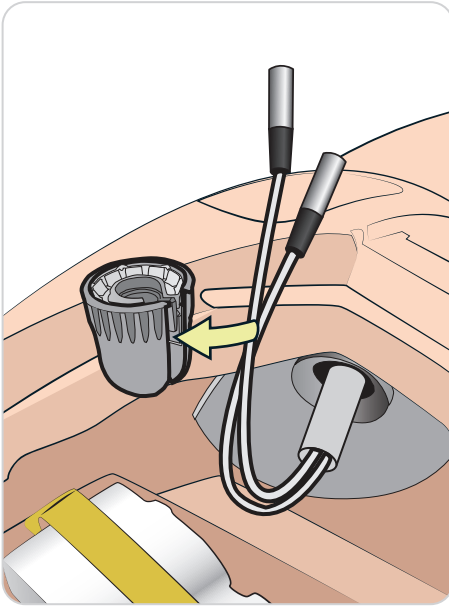

Przymocować Prawą Nogę

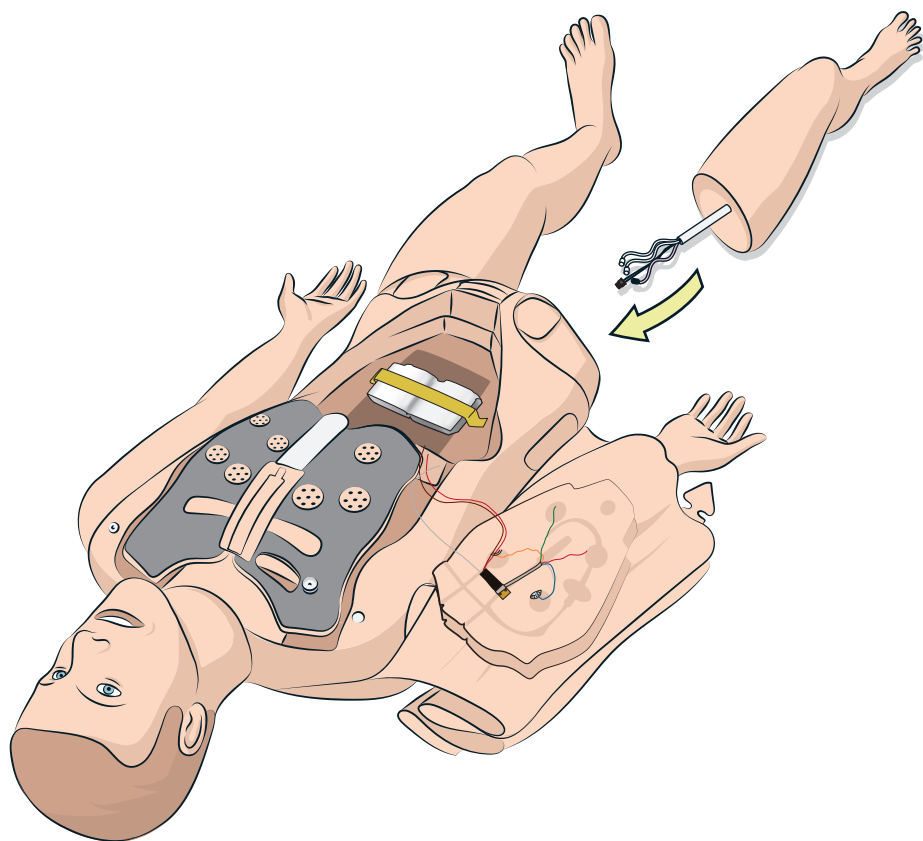

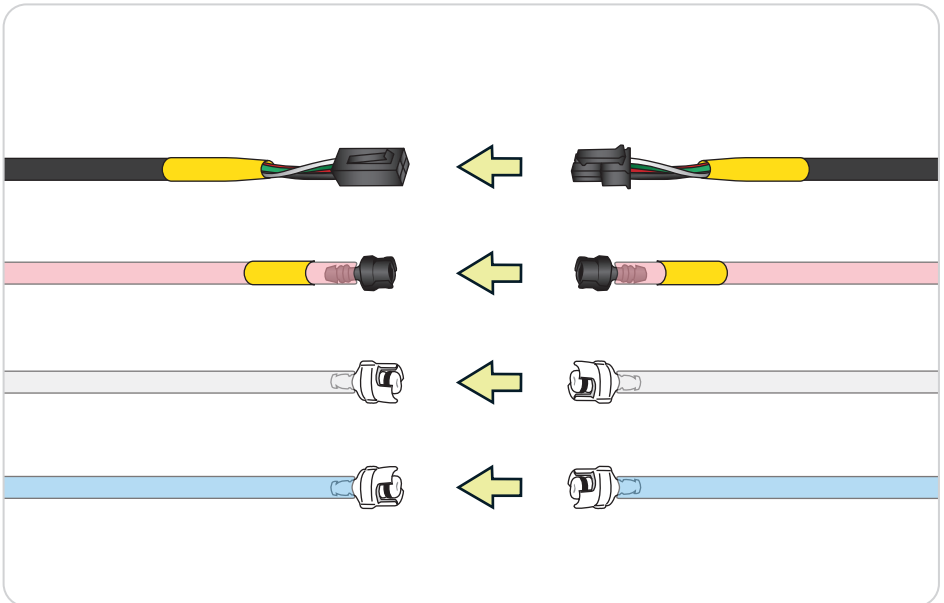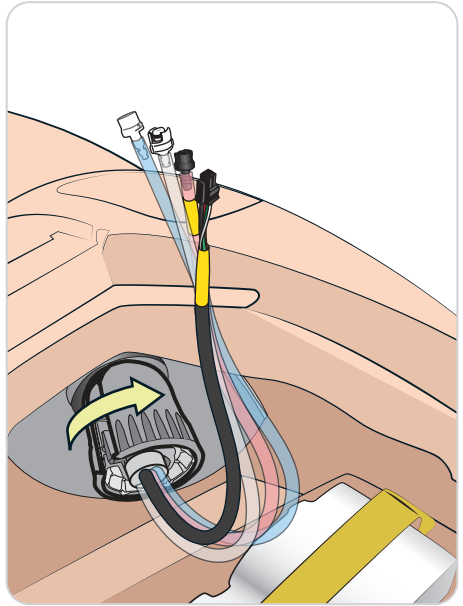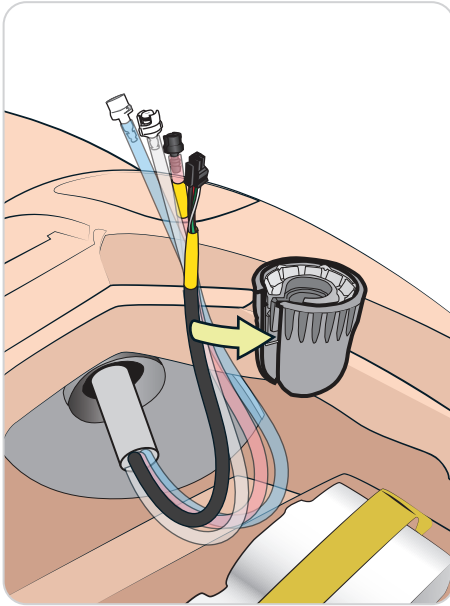


Konfiguracja Bezprzewodowa


Słuchawki




Komputer instruktora

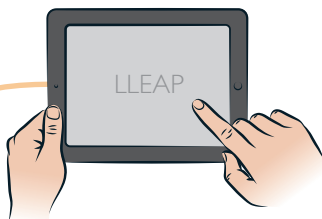


SpO₂

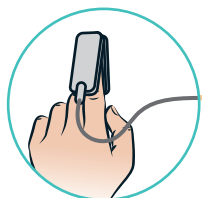

Monitor pacjenta

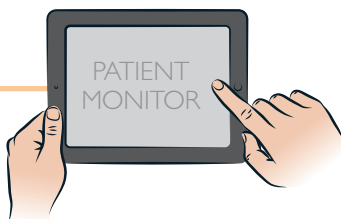

Przewód USB —

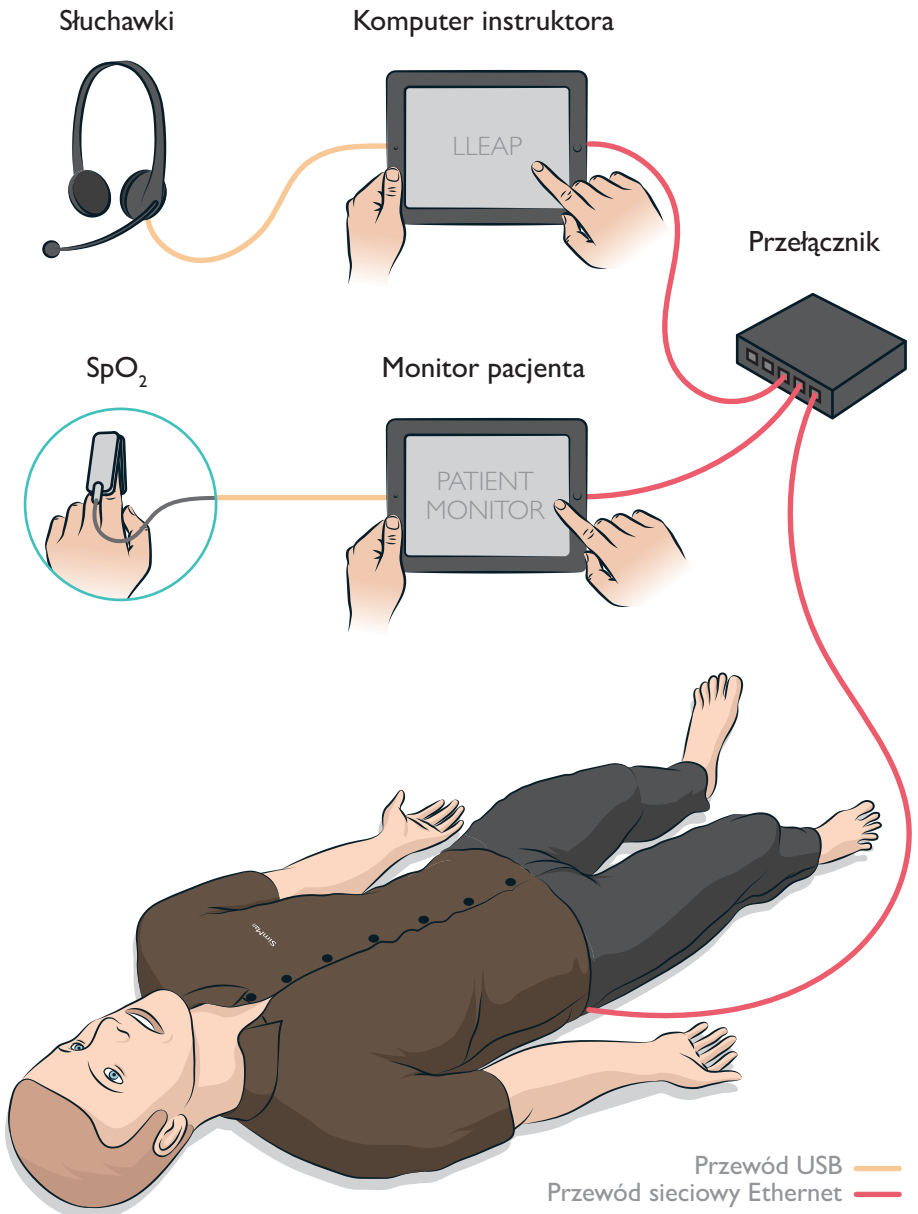

© 2023 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufacturer: Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

20-08333 Rev E

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives