


SimMan 3G

Skrócona instrukcja konfiguracji

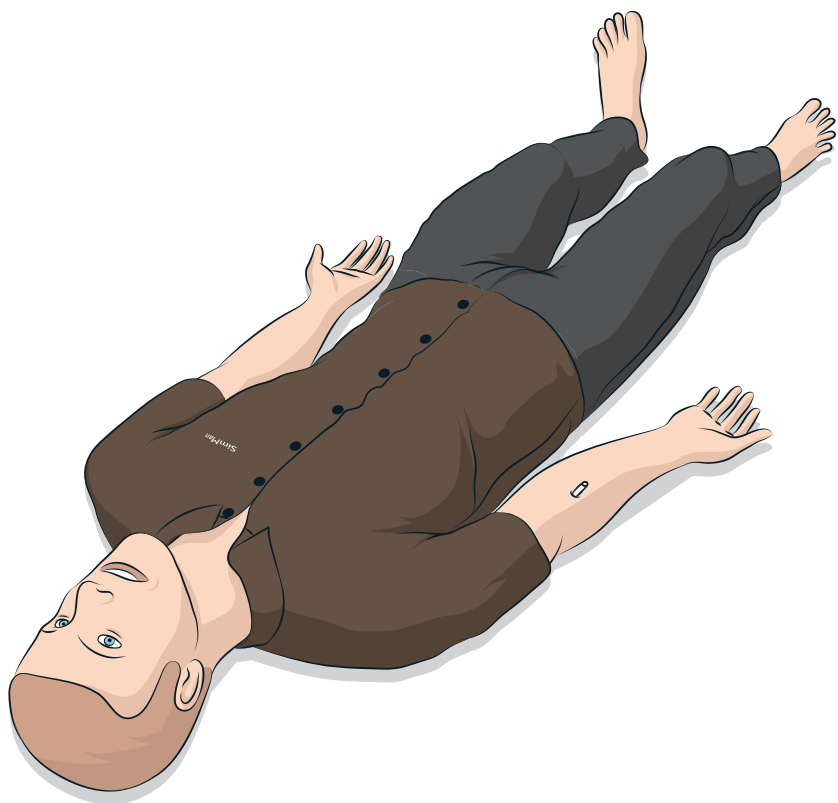


Niniejsza instrukcja szybkiej konfiguracji zawiera opis sposobu montażu i konfiguracji symulatora pacjenta SimMan. Informacje dotyczące sposobu użycia symulatora SimMan znajdują się w plikach pomocy LLEAP i instrukcji obsługi symulatora SimMan.

Najnowsze wydanie instrukcji obsługi i oprogramowanie można pobrać ze strony www.laerdal.com/download.




ELEMENTY ZESTAWU

Tułów

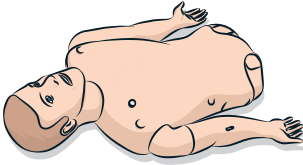

Nogi

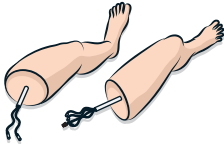


Ubrania



Twarde zęby górne



Genitalia męskie i żeńskie

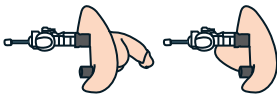


Pasek identyfikatora



Adapter ramienia SimMan



Wbudowany filtr krwi
x 2

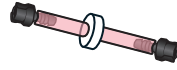

Klucz do końcówki Defib EKG



Elektroda adaptera EKG



Skóra szyi
x6




O-ring podatności płuc
x 10



Butelki na płyny i krew



Zestaw ran

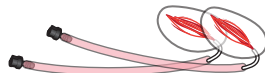

Opłucna do symulacji drenażu
klatki piersiowej
x 6



Koncentrat krwi



Lubrykant do dróg oddechowych



Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi



Worek infuzyjny



Przedłużacz cewnika do wlewów dożylnych



Taśma na chrząstkę pierścieniową



Kość piszczelowa i wkładki na kość piszczelową x3



Wkładki do wkluc domięśniowych



Odma opłucnowa



Podręcznik użytkownika i Ważne informacje o produkcie



Słuchawki



Klawiatura i mysz



Czujnik SpO₂



Zestaw czytnika RFID



Narzędzia



Zasilacz zewnętrzny




Ładowarka x 2






ŁADOWANIE AKUMULATORÓW KOMPUTERA

Monitor pacjenta


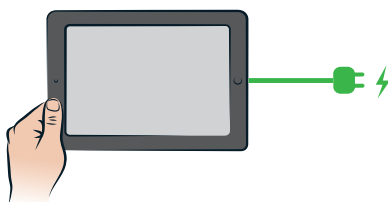





Komputer instruktora



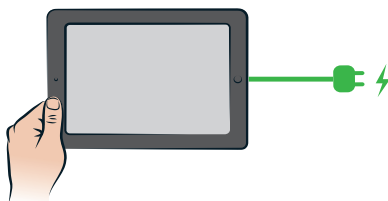


2

ROZPIĄĆ ZAMEK BŁYSKAWICZNY SKÓRY TUŁOWIA

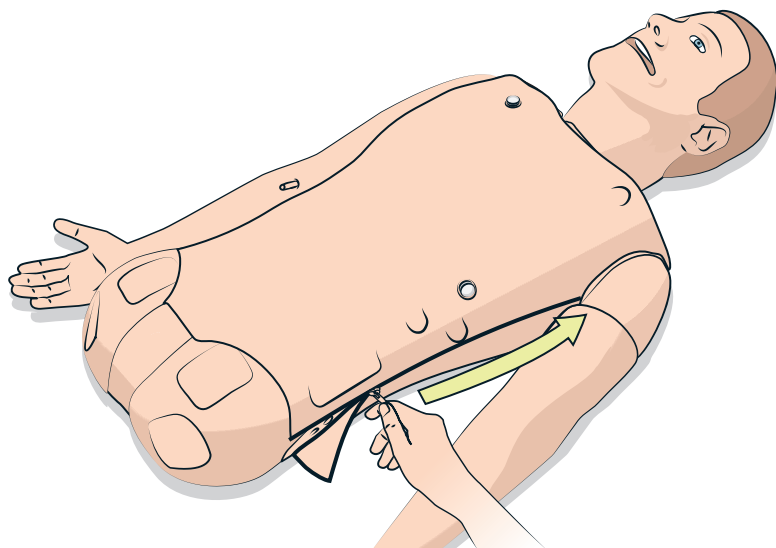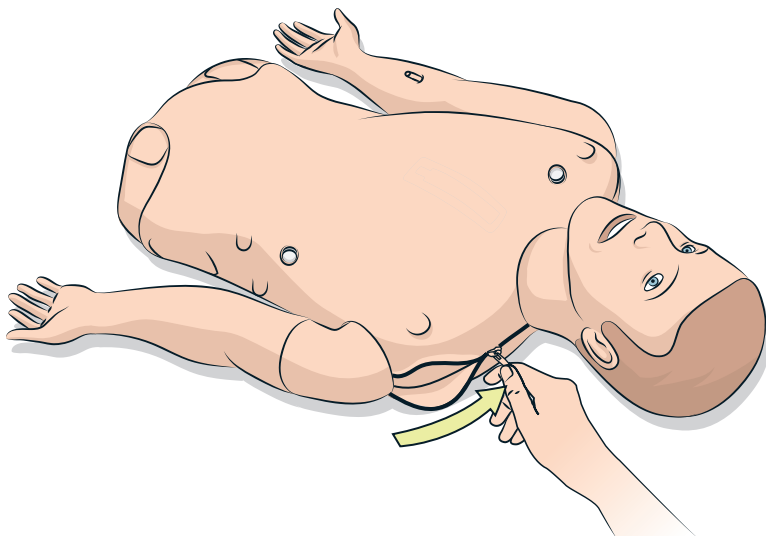


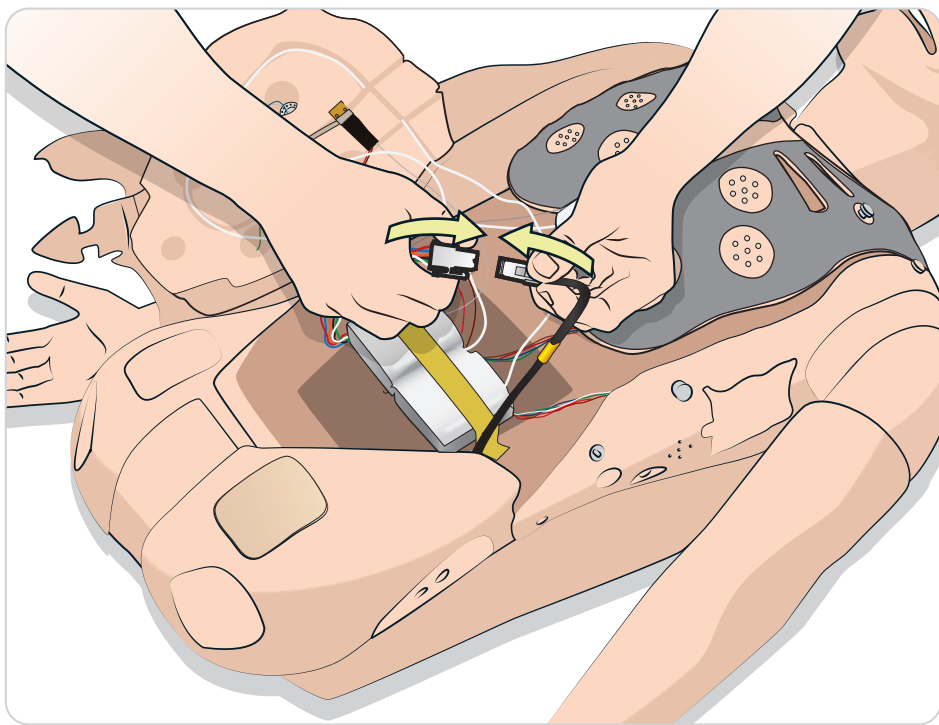
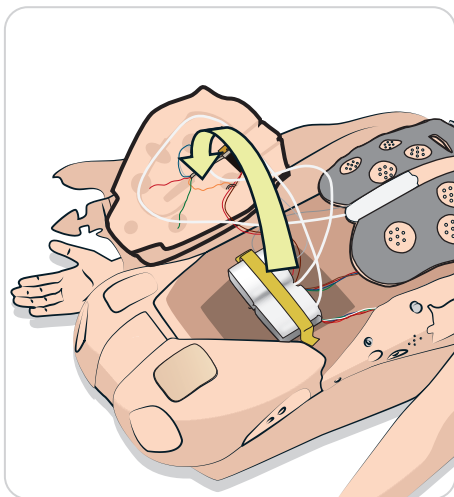
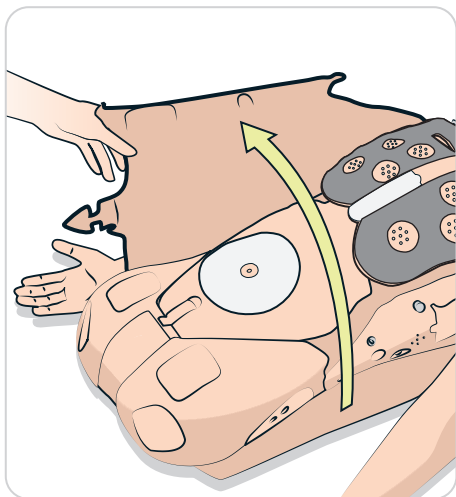


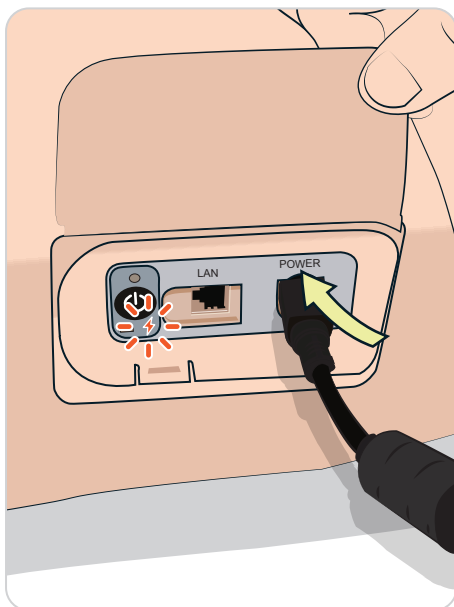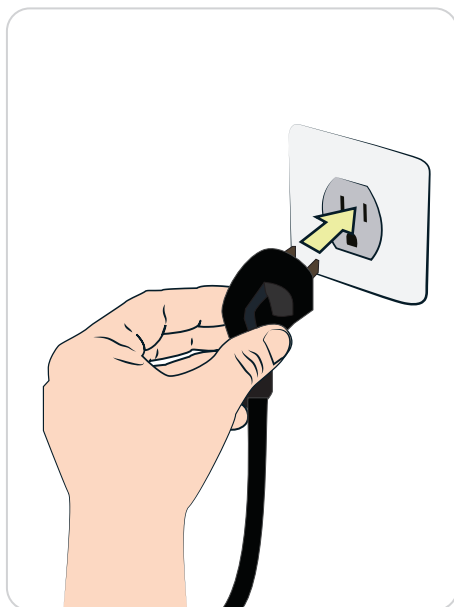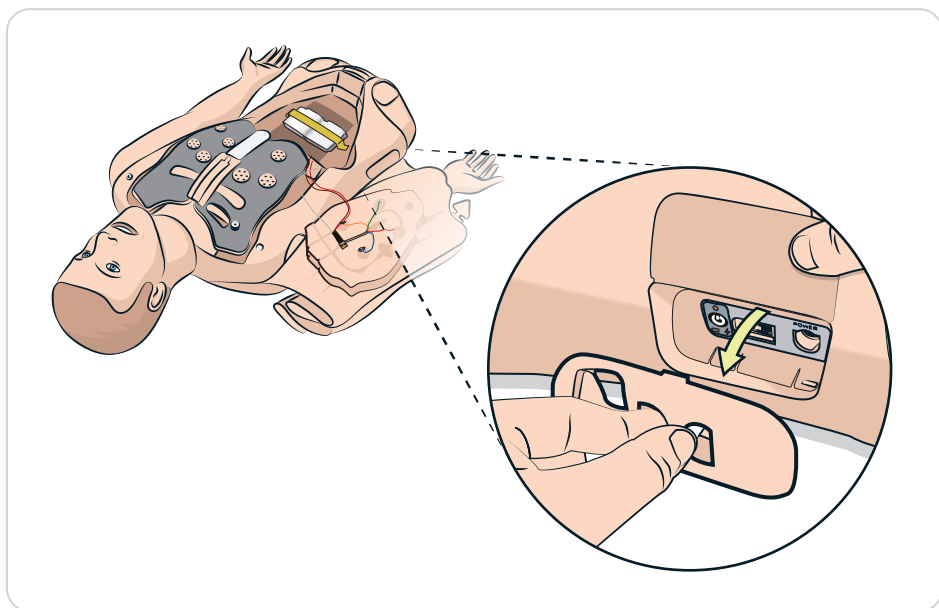





5

PRZYMOCOWAĆ LEWĄ NOGĘ

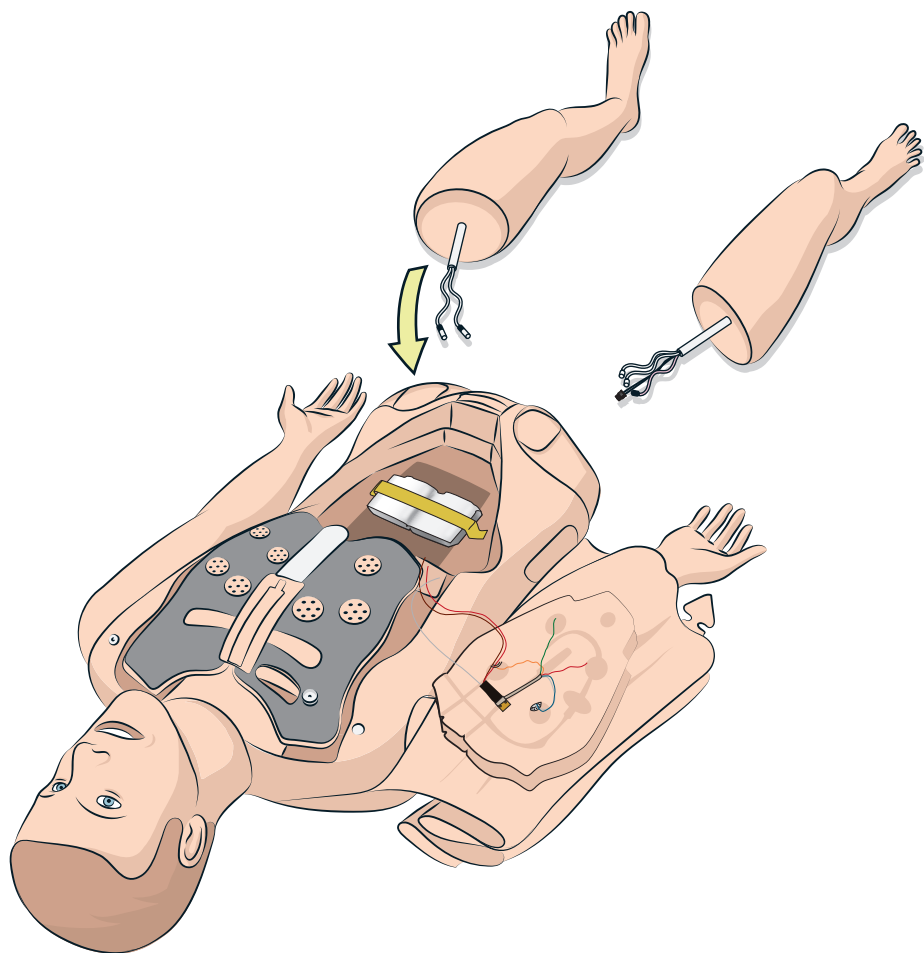

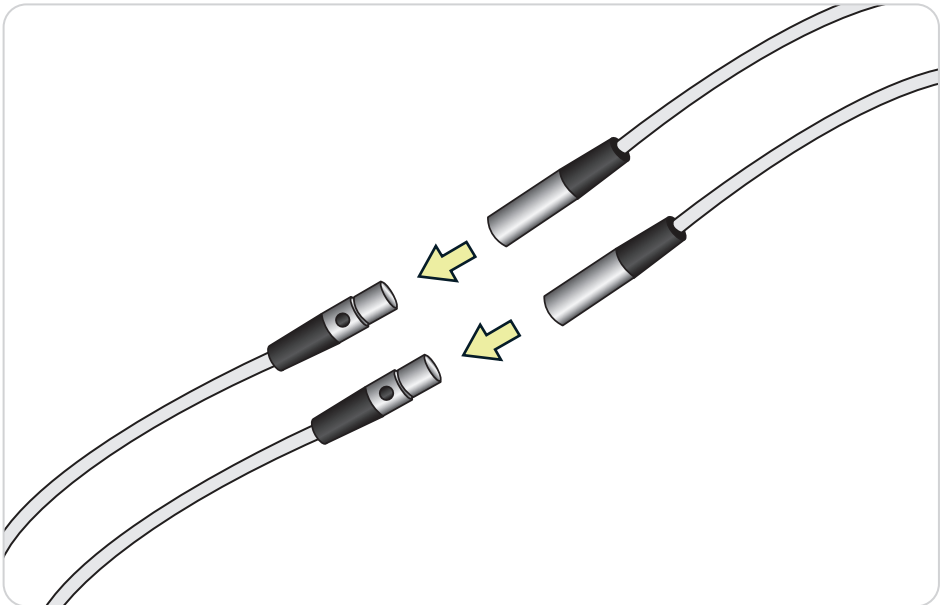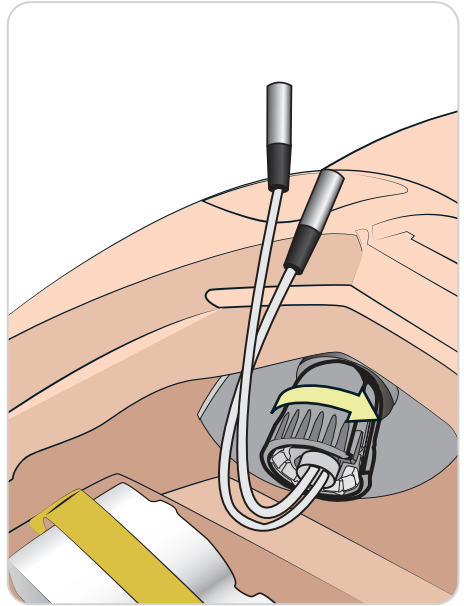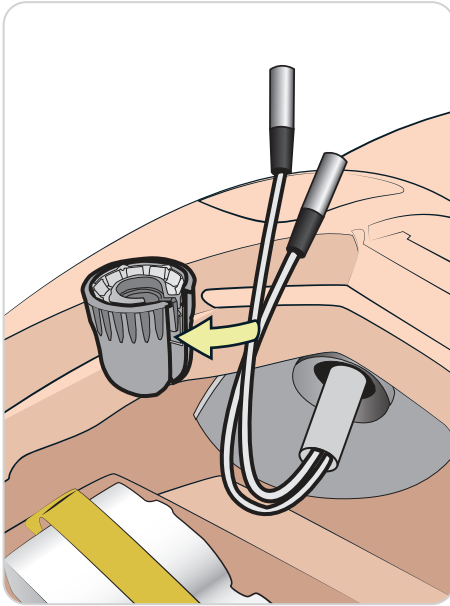

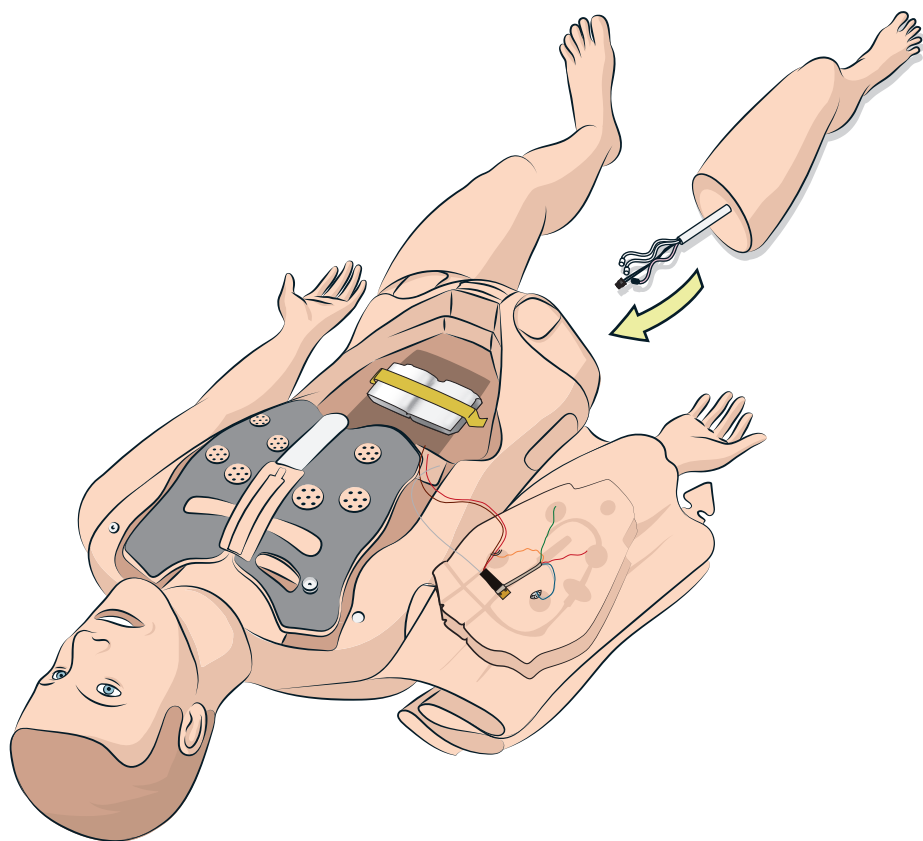

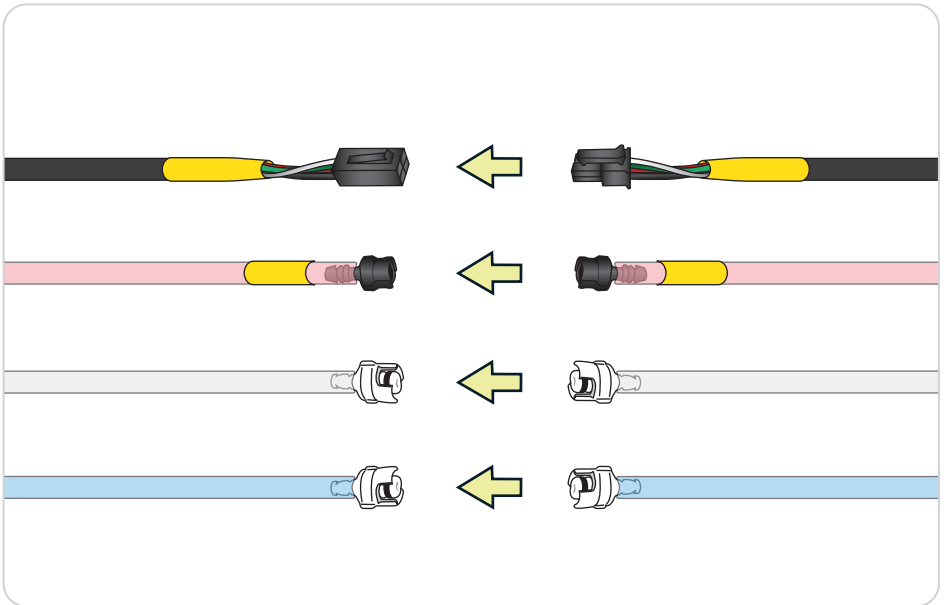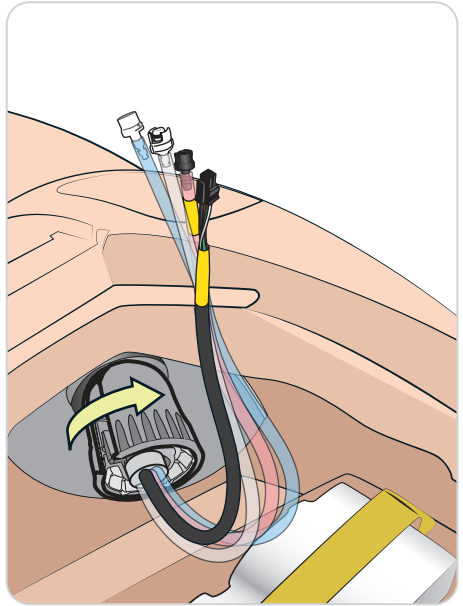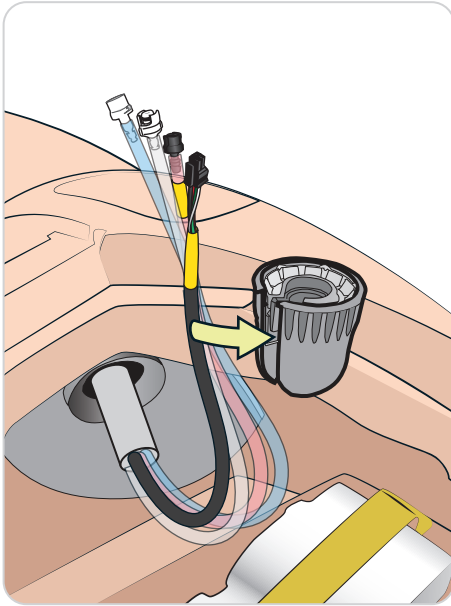


7_A

KONFIGURACJA BEZPRZEWODOWA

Słuchawki




Komputer instruktora

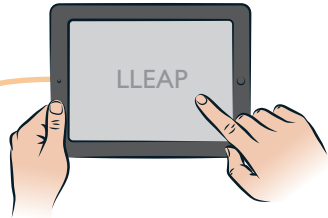

SpO₂



Monitor pacjenta

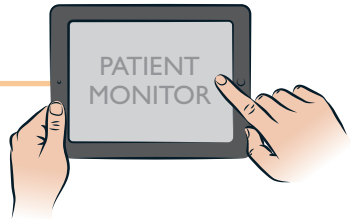


Przewód USB —


Słuchawki





Komputer instruktora

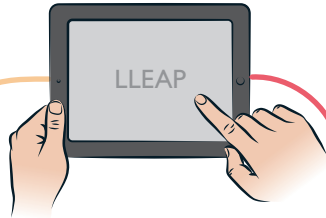

Przełącznik

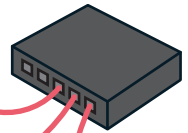SpO₂

Monitor pacjenta

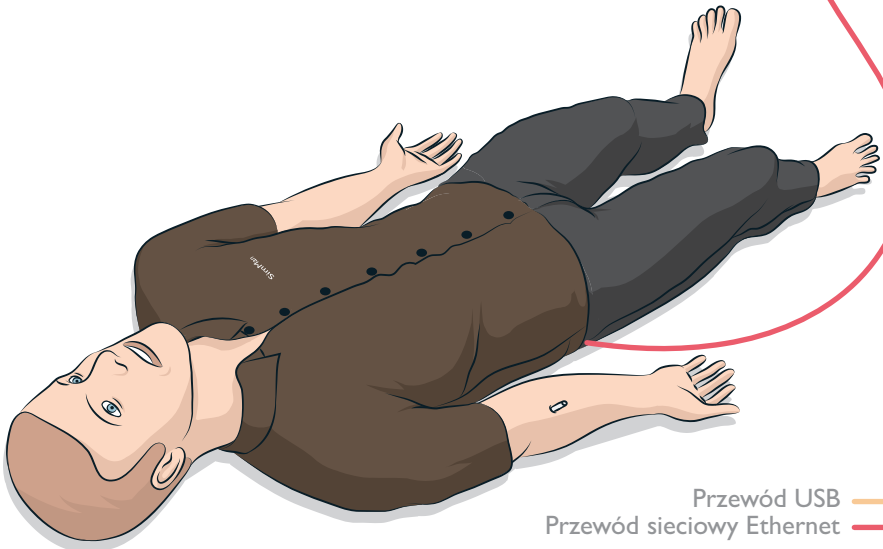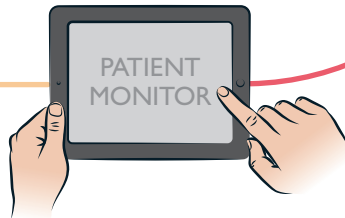

Przewód USB —
Przewód sieciowy Ethernet —

© 2016 Laerdal Medical AS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Printed in Norway

20-08332 Rev B

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives