

# SimMan Essential

Schnellanleitung






Diese Schnellanleitung beschreibt, wie der SimMan-Patientensimulator aufgebaut und gestartet wird. Informationen über die Verwendung des SimMan-Modells finden Sie in den Dateien der LLEAP-Hilfe sowie im Benutzerhandbuch zu SimMan.

Unter [www.laerdal.com/download](http://www.laerdal.com/download) können Sie das aktuelle Benutzerhandbuch und die Software herunterladen.



# KOMPONENTEN

Torso

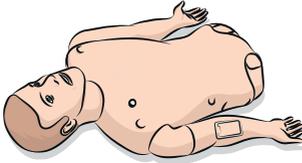

Beine



Kleidung



Obere Zahnreihe, hart



Männliche und weibliche  
Genitalien



Patientenarmband



SimMan Armadapter



Injektionsspritze



Defib. EKG-Spanner



EKG-Anschlusselektrode



Hals-/Nackenhaut  
x 6



Rundring für  
Lungencompliance  
x 10




Nachfüllflasche für  
Flüssigkeit



IV-Armpads  
x 3



Pleura zur Thoraxdrainage  
x 6

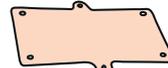

---

Blutdruckmanschette



Benutzerhandbuch & Wichtige  
Produktinformationen



Gleitmittel für Atemwege



Headset




Augeneinlagenkit



Tastatur & Maus



IV-Beutel

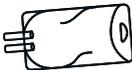

SpO<sub>2</sub>-Sonde



Krikothyroidband



Ethernet-Kabel




Tibia-Pads & Knochen  
x 3



Inbusschlüssel




IM-Pads

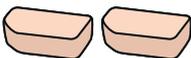

Externes Netzgerät




Pneumothorax

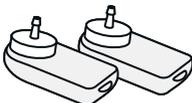


Batterieladegerät  
x 2



Patientenmonitor


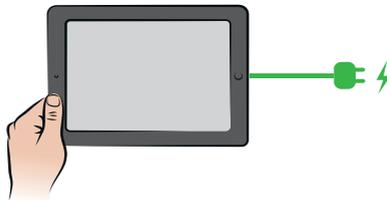





Ausbilder-PC



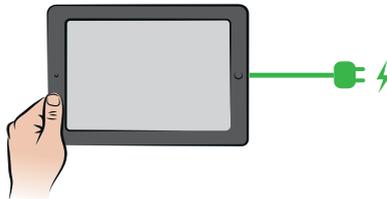


2

## REIßVERSCHLUSS DER TORSOHAUT ÖFFNEN

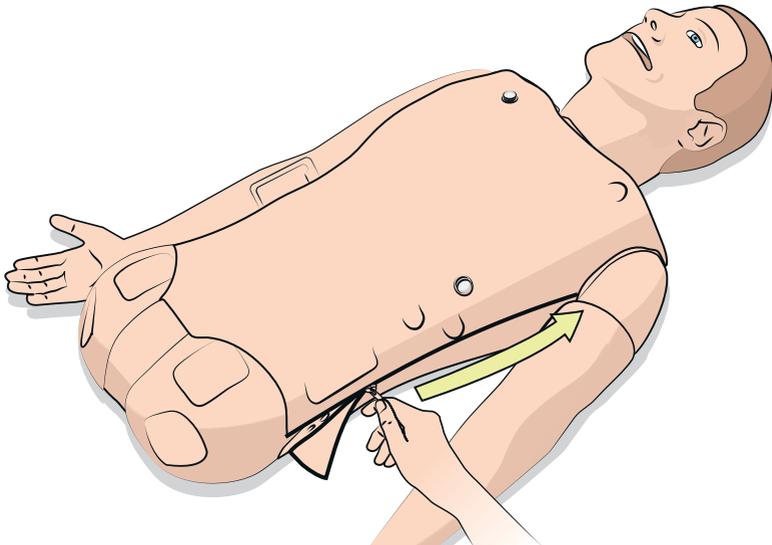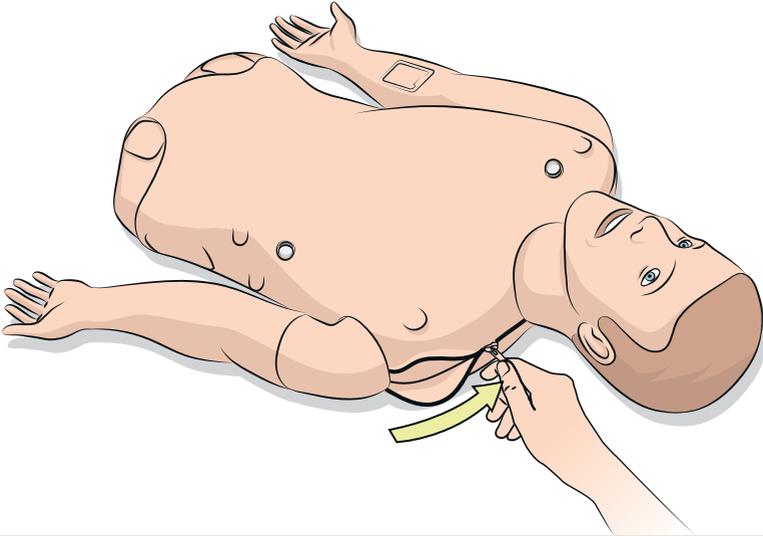


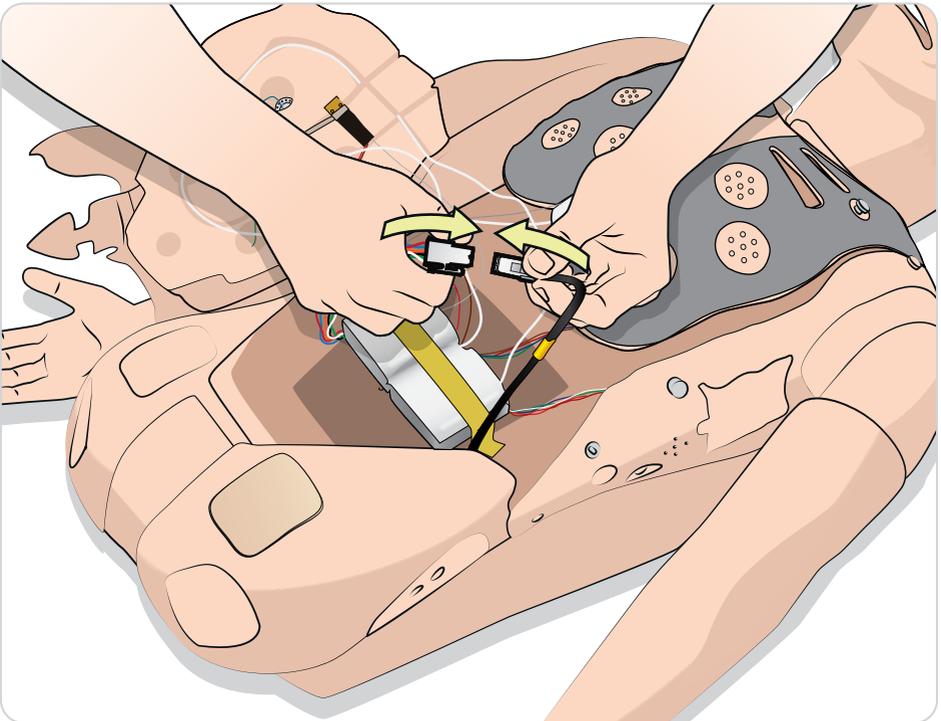
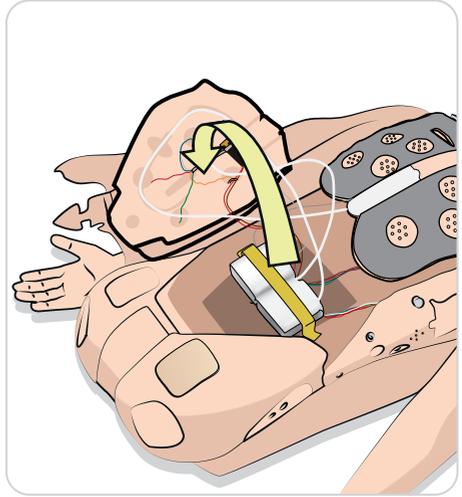
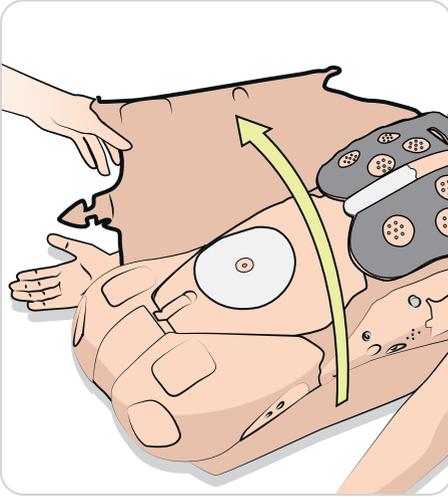


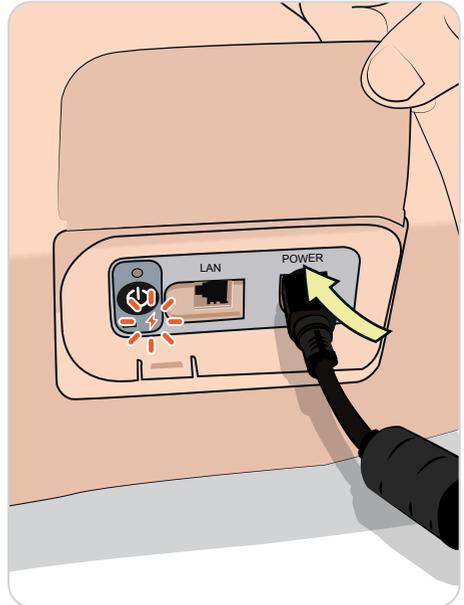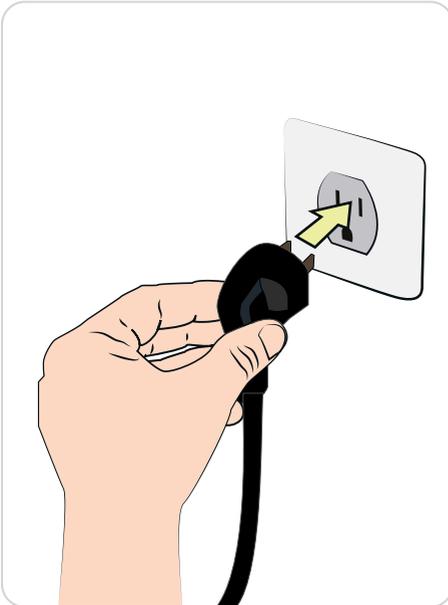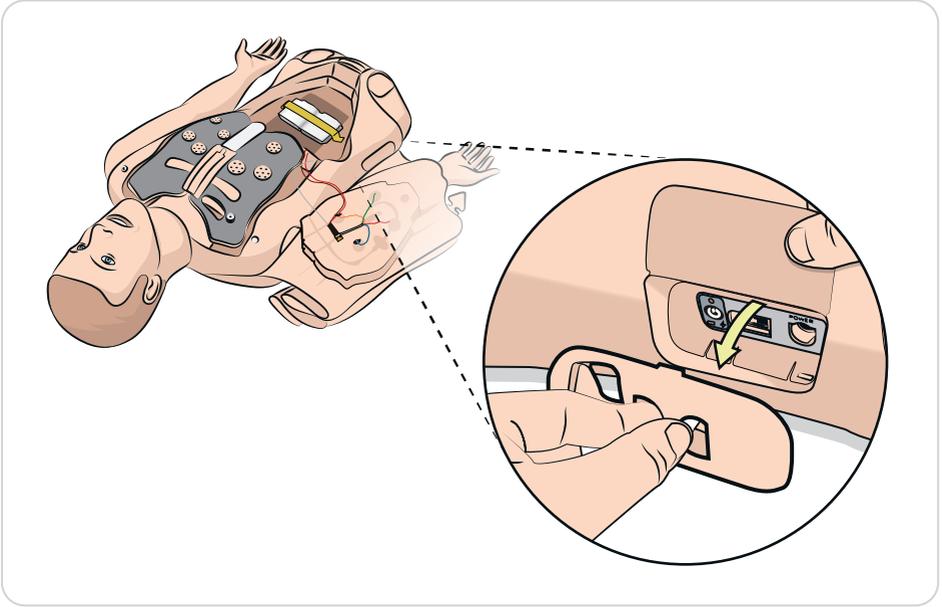





5

## LINKES BEIN ANBRINGEN

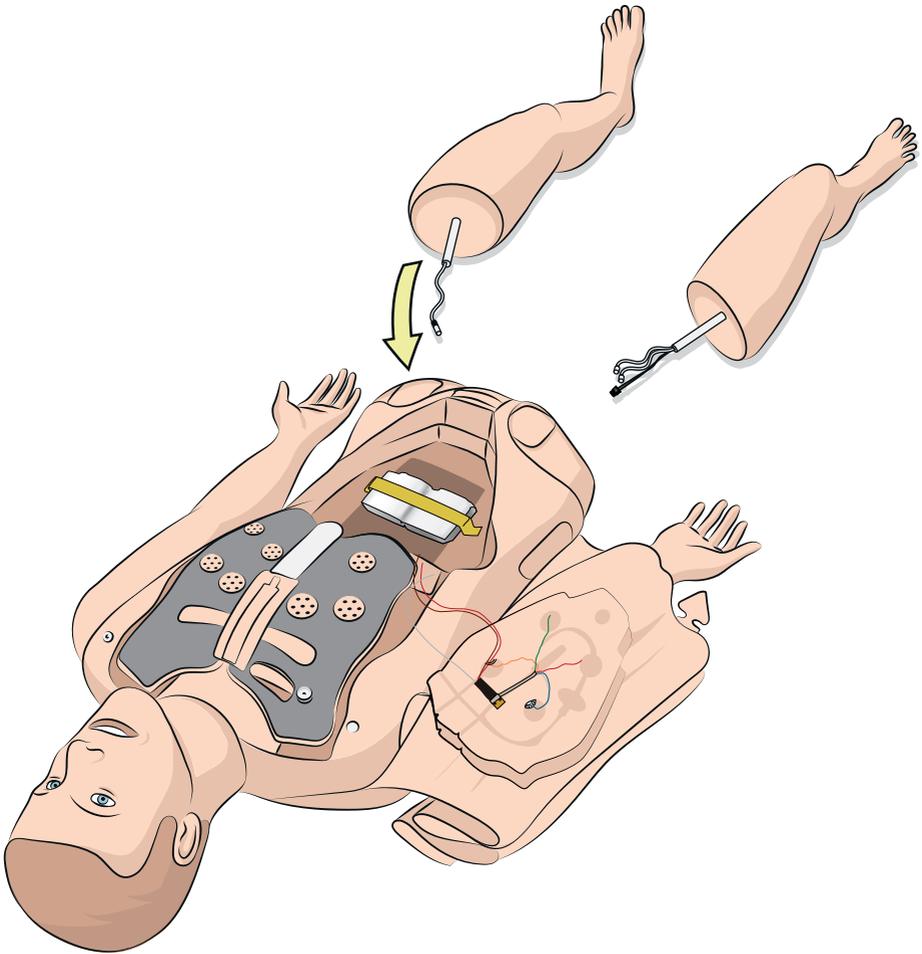

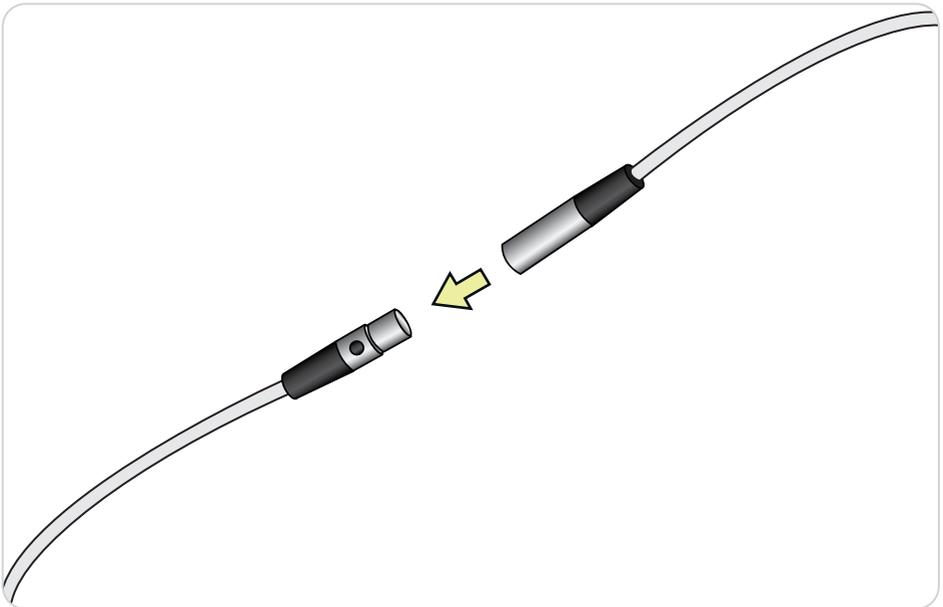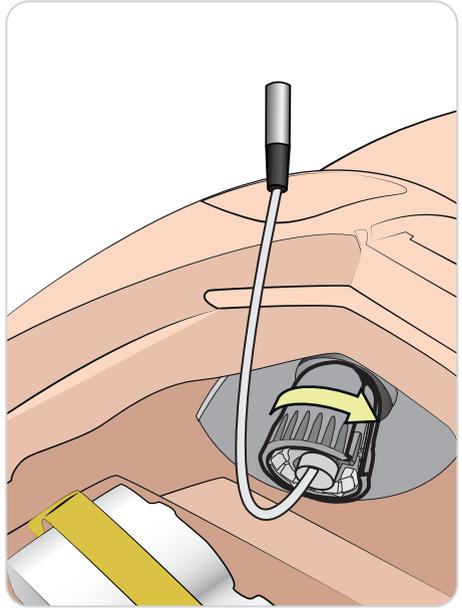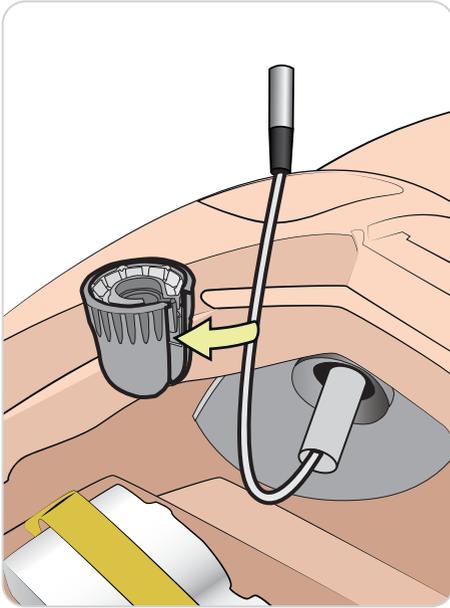

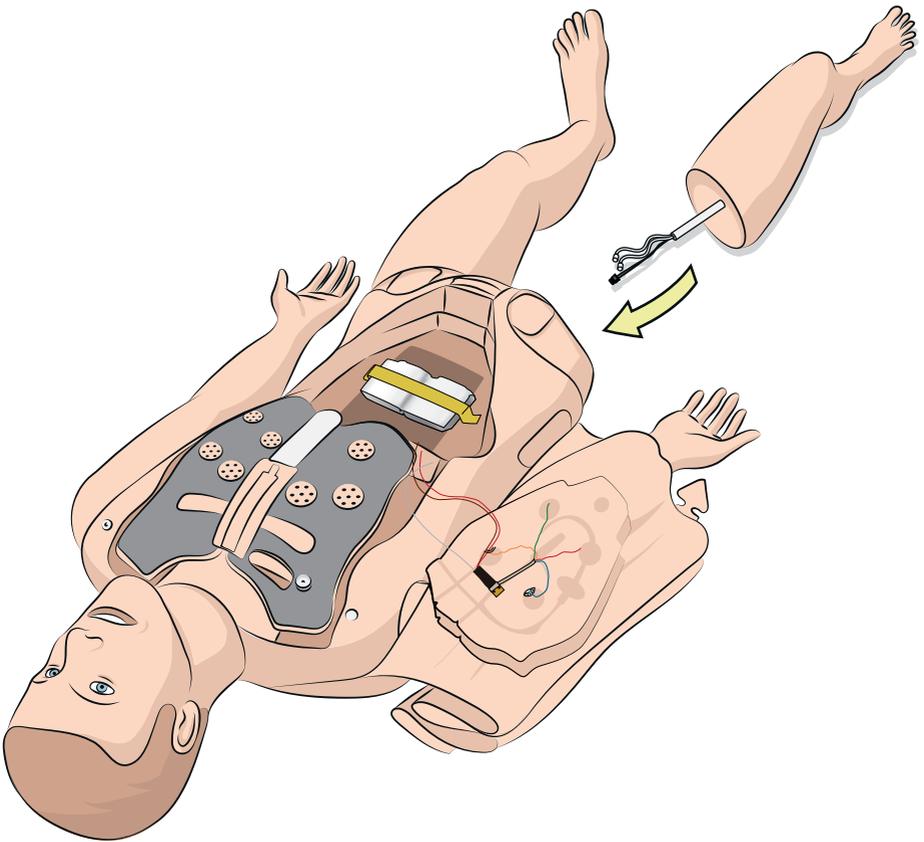

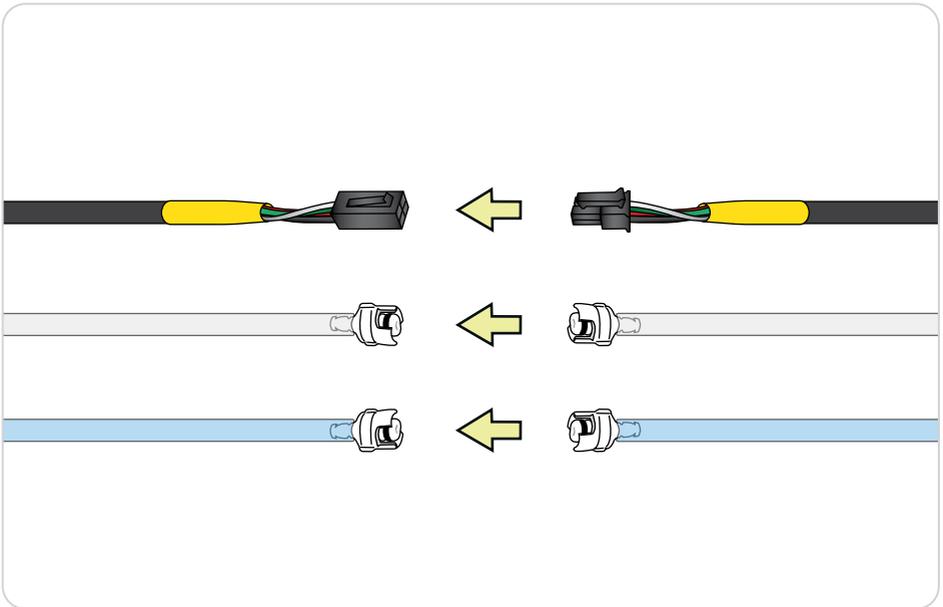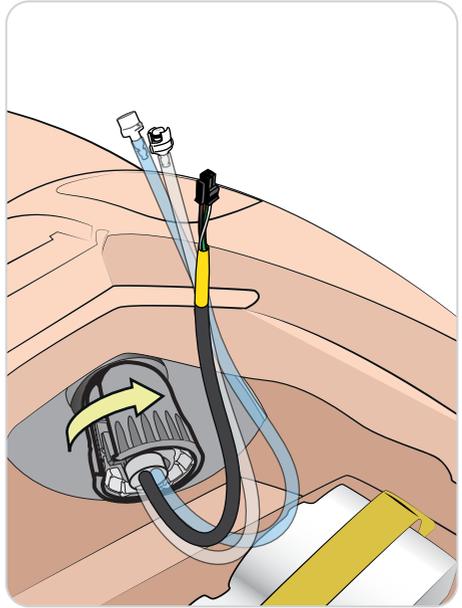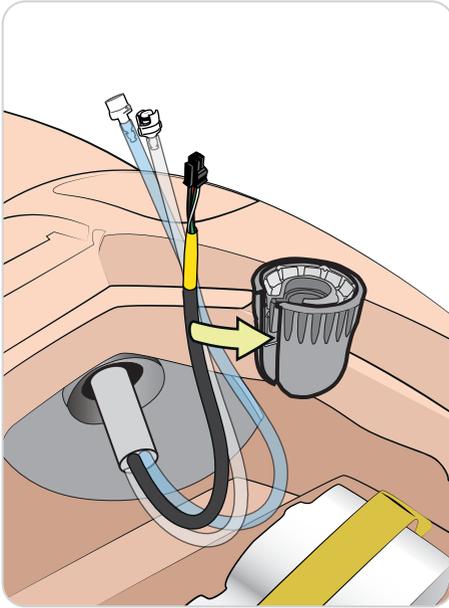

# 7<sub>A</sub>

## DRAHTLOSE EINRICHTUNG

Headset




Ausbilder-PC




SpO<sub>2</sub>



Patientenmonitor

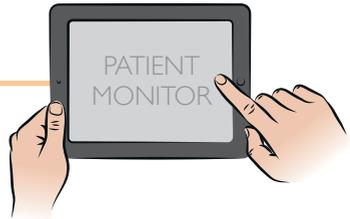

USB-Kabel —

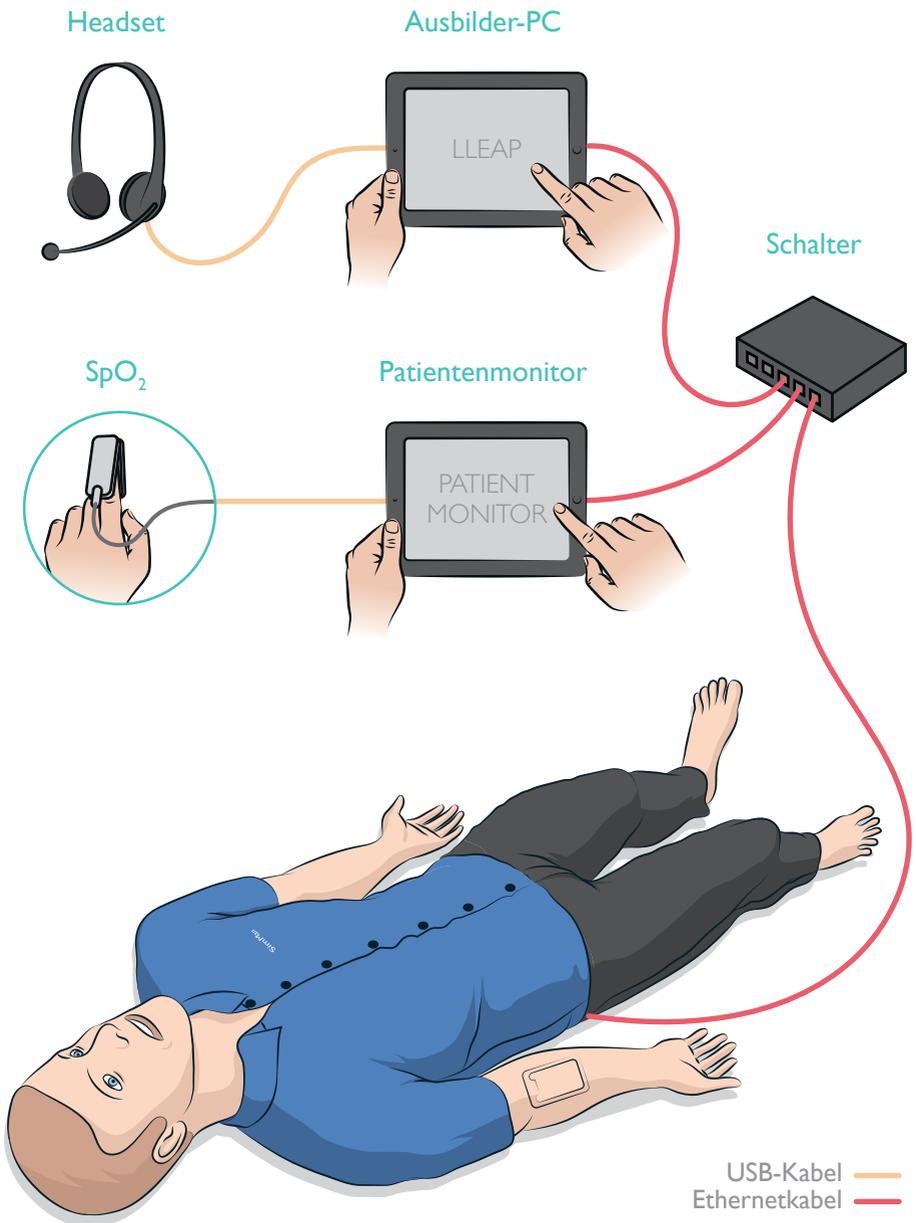

© 2014 Laerdal Medical AS. Alle Rechte vorbehalten.  
Printed in Norway

20-08148 Rev A

---

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives