


# SimMan Essential

Guía de configuración rápida

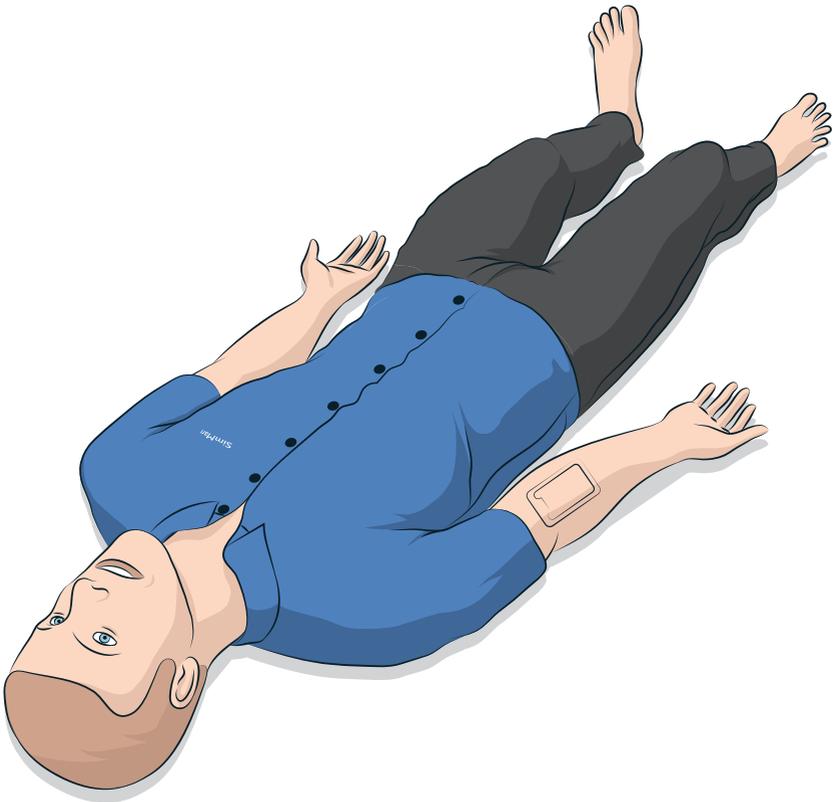




Este manual de configuración rápida describe cómo ensamblar y configurar su simulador del paciente SimMan. Para obtener información sobre cómo utilizar SimMan, consulte los archivos de ayuda de LLEAP y el manual de usuario de SimMan.

Visite [www.laerdal.com/download](http://www.laerdal.com/download) para descargar el último manual del usuario y software.




# COMPONENTES

Torso

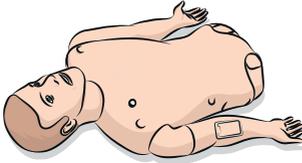

Piernas

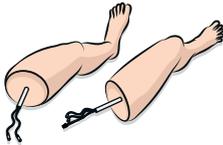


Ropa



Dientes de la parte superior



Genitales masculinos y femeninos

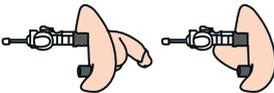

Pulsera de identificación



Adaptador de brazo SimMan



Jeringa



Tensor ECG y Desfibrilador



Adaptadores electrodos ECG



Piel de cuello x6




Junta tórica de distensibilidad pulmonar x 10




Botella de llenado de fluido



Almohadilla de brazo IV x3

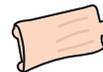

Pleura de drenaje del tórax x 6

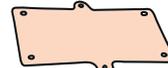

---

Manguito del  
esfigmomanómetro



Lubricante de vía aérea



Kit de insertos oculares



Bolsa IV




Cinta cricotiroidea




Almohadillas y hueso  
para tibia  
x3



Almohadillas IM

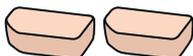

Neumotórax

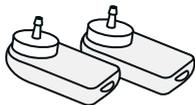

Manual del usuario e información  
importante del producto



Auriculares



Teclado y ratón



Sonda de SpO<sub>2</sub>



Cable Ethernet



Llave Allen




Fuente de alimentación  
externa




Cargador de baterías  
x 2








Monitor paciente



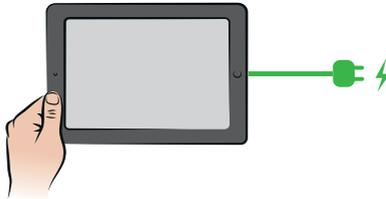


PC del instructor

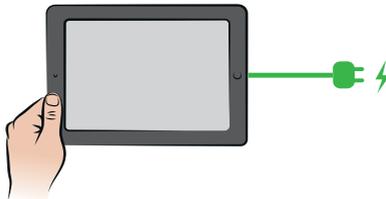

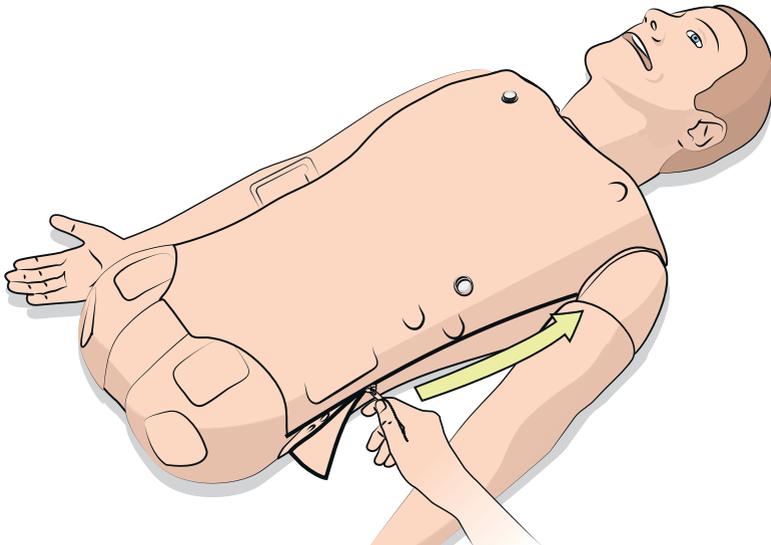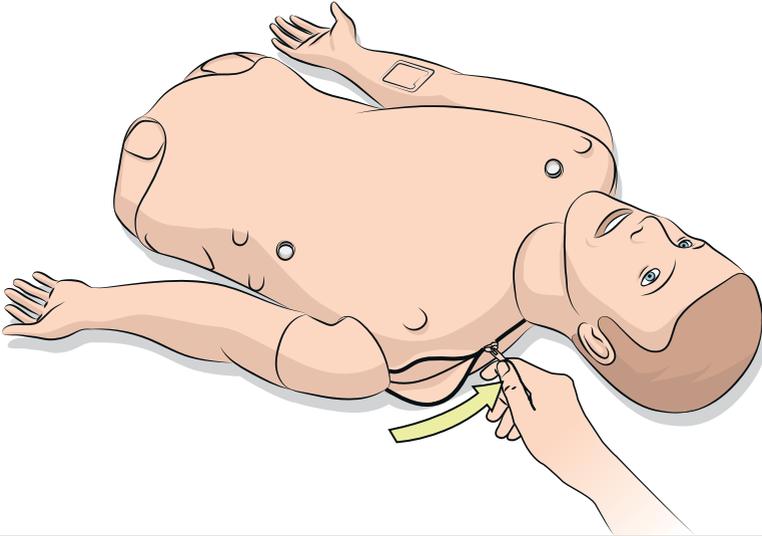


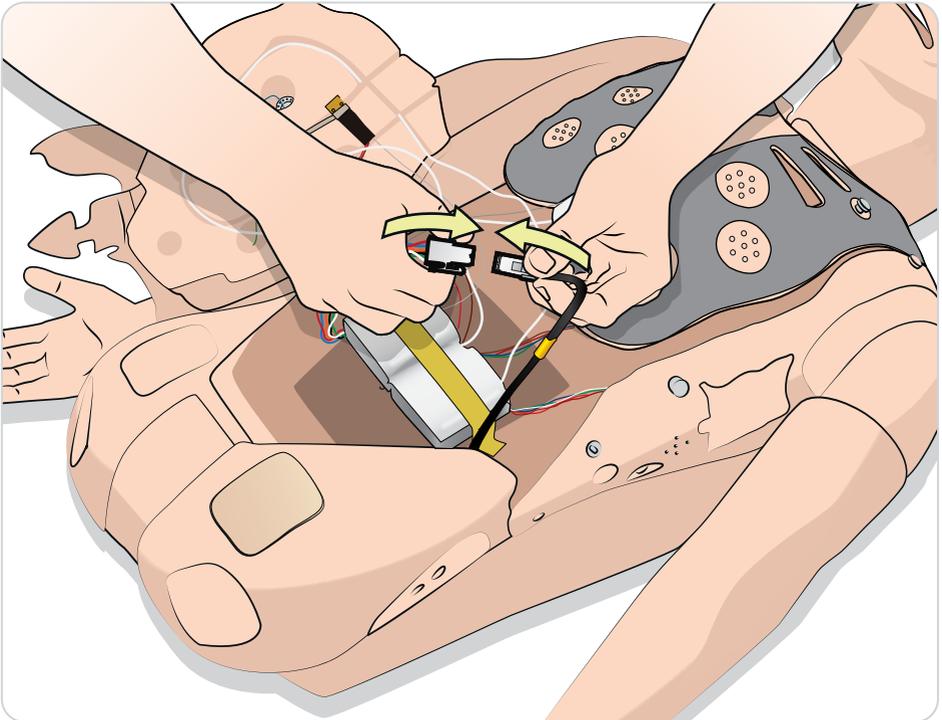
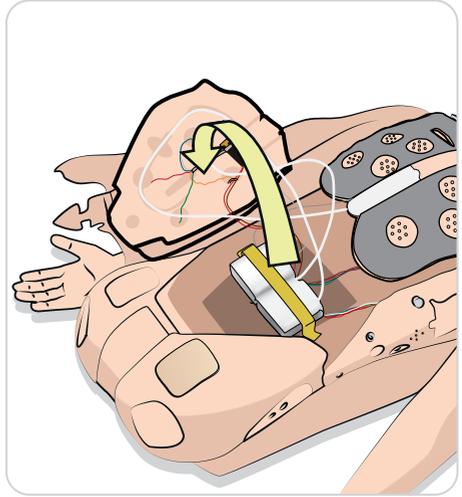
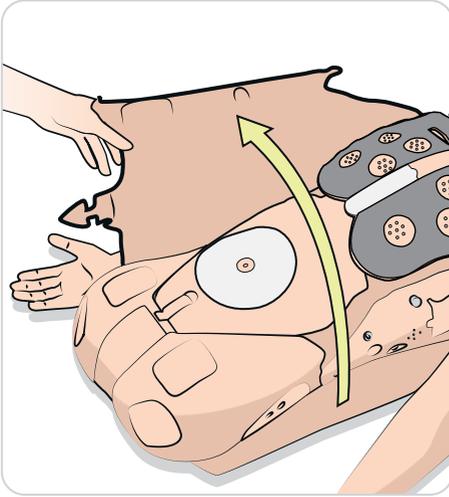


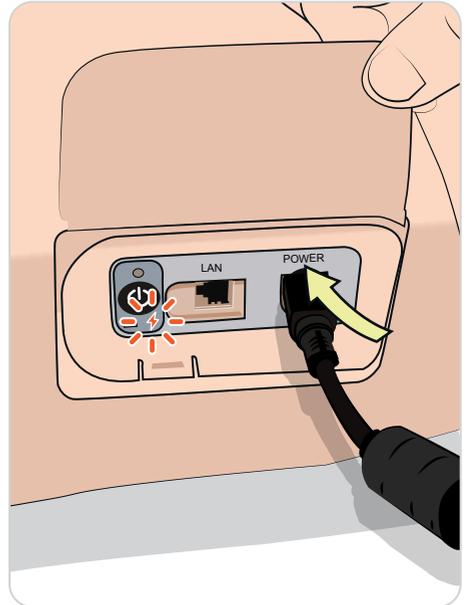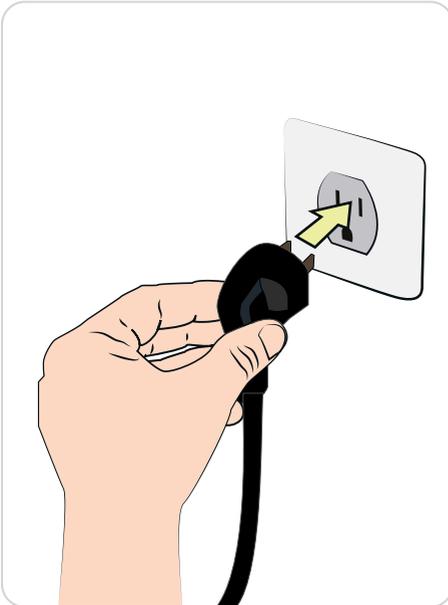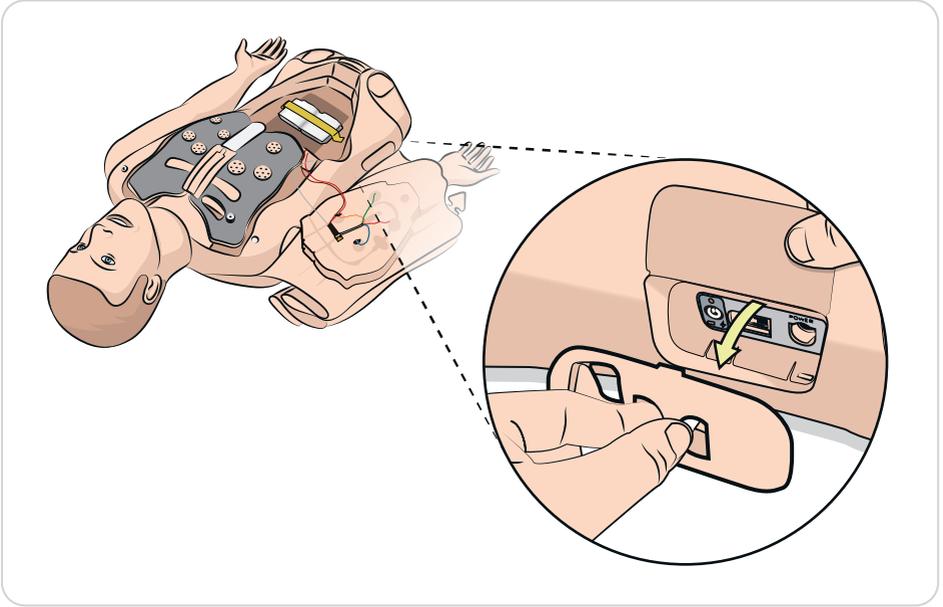





5

## CONECTAR PIERNA IZQUIERDA

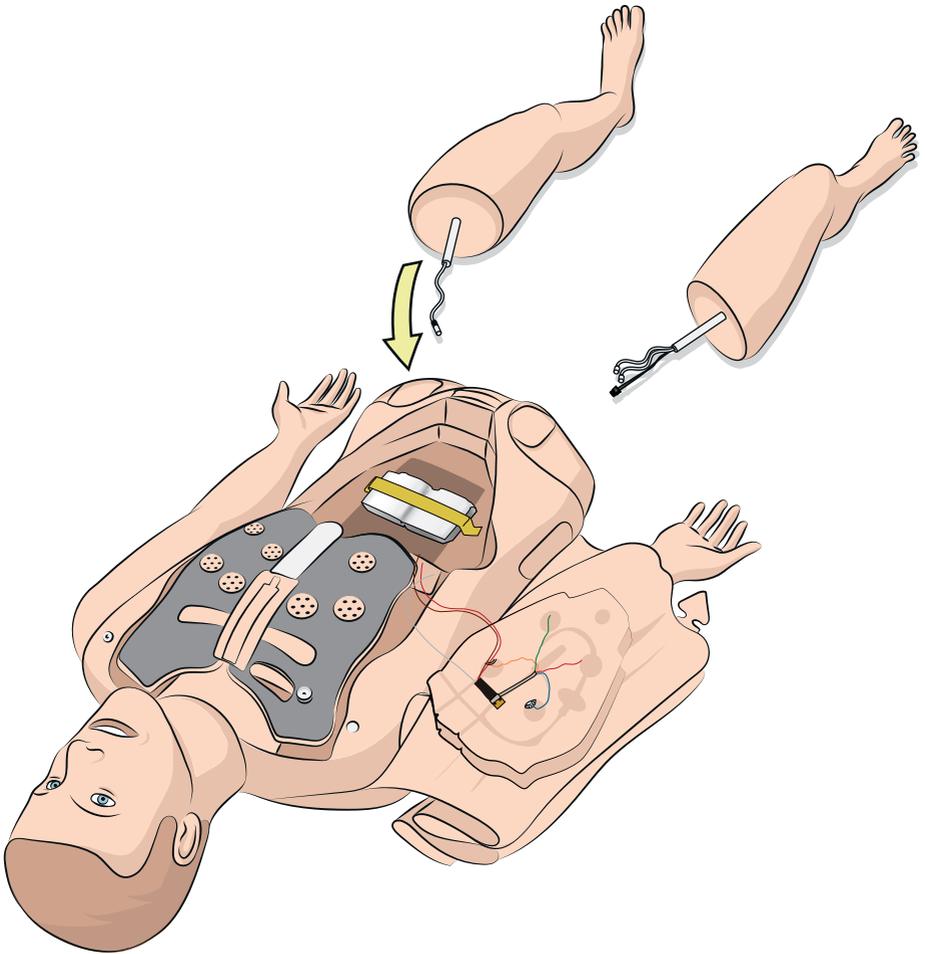

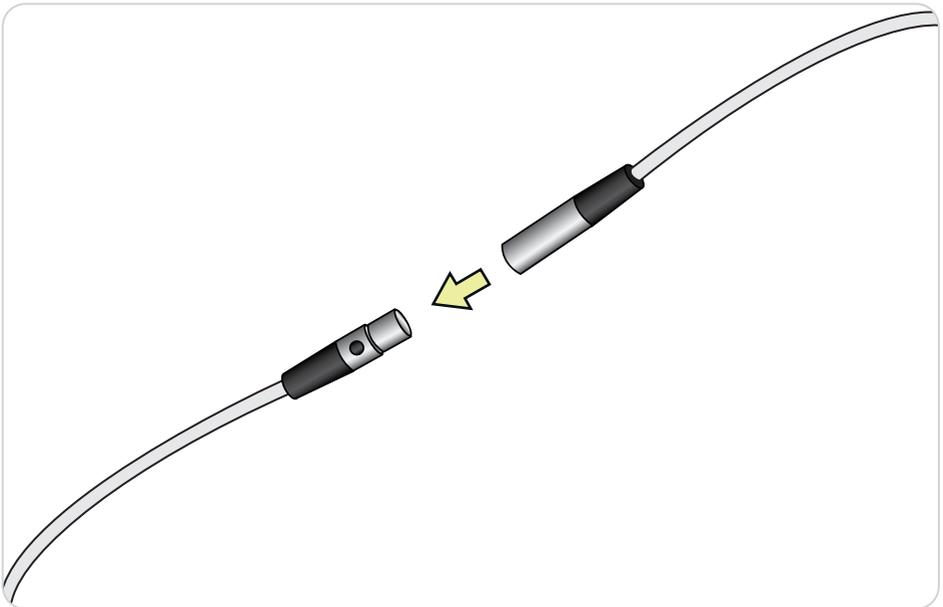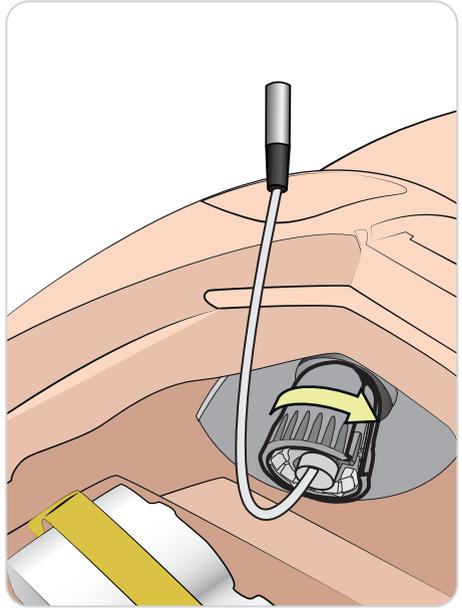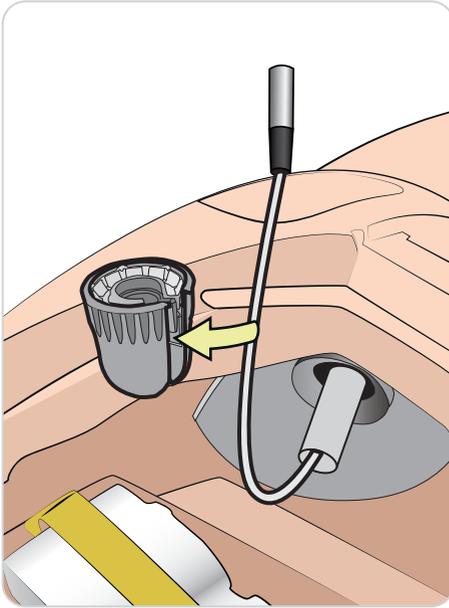

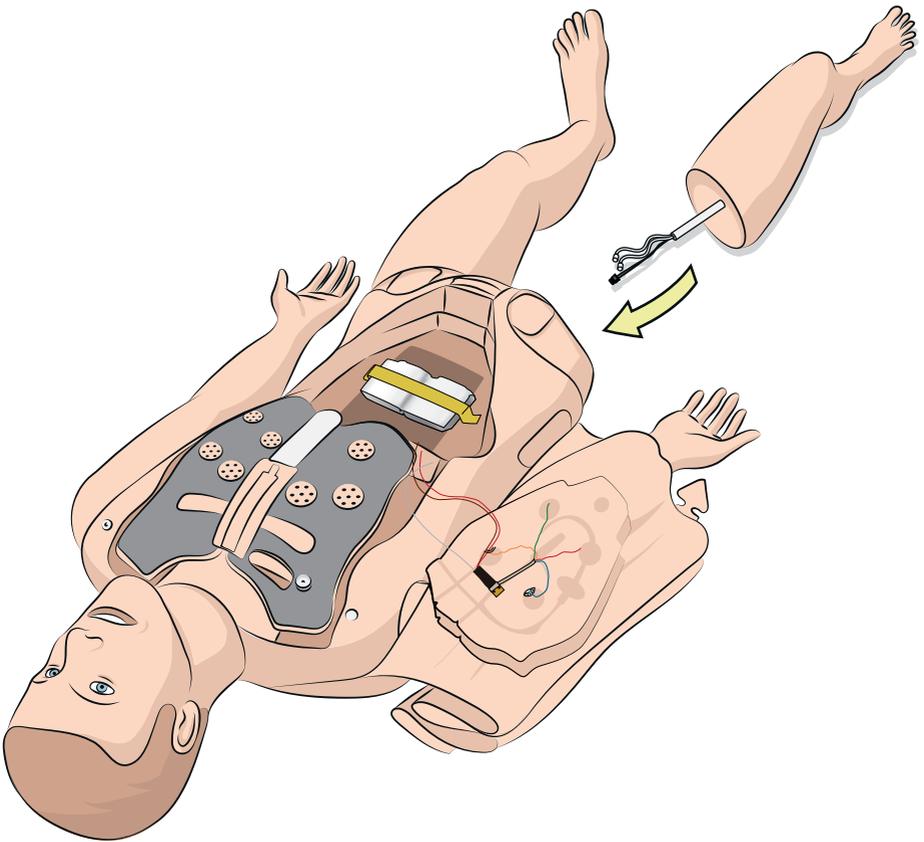

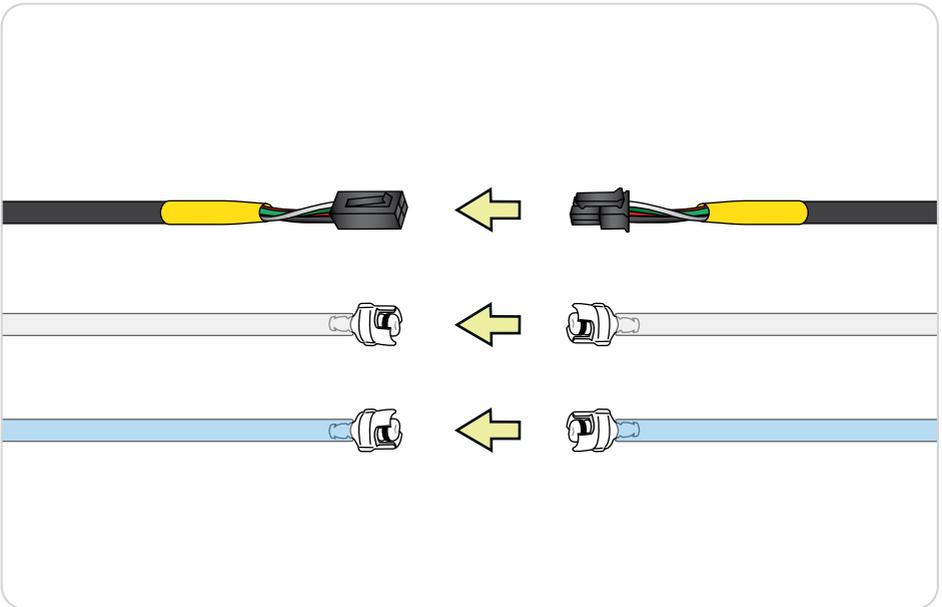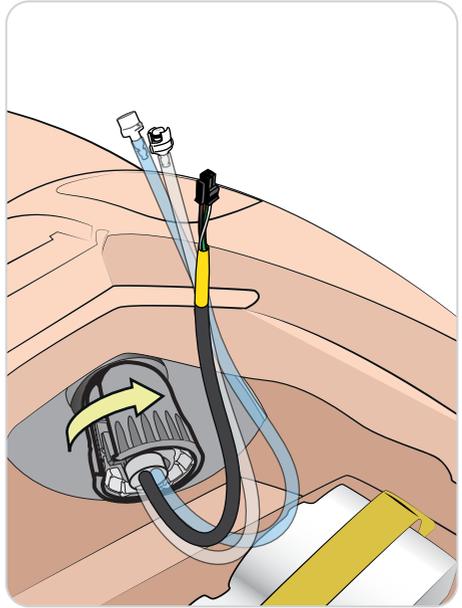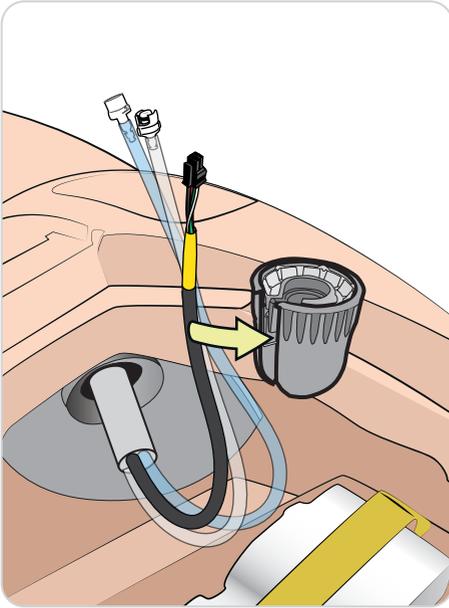

# 7<sub>A</sub>

## CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA

Auriculares




PC del instructor



SpO<sub>2</sub>



Monitor paciente

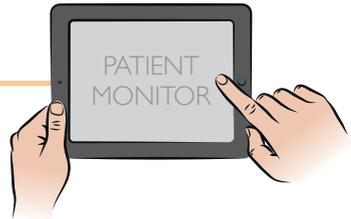

Cable USB —


# 7<sub>B</sub>

## CONFIGURACIÓN CON CABLE


Auriculares



PC del instructor

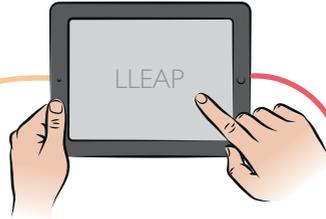



Switch

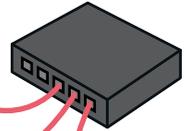

SpO<sub>2</sub>



Monitor paciente

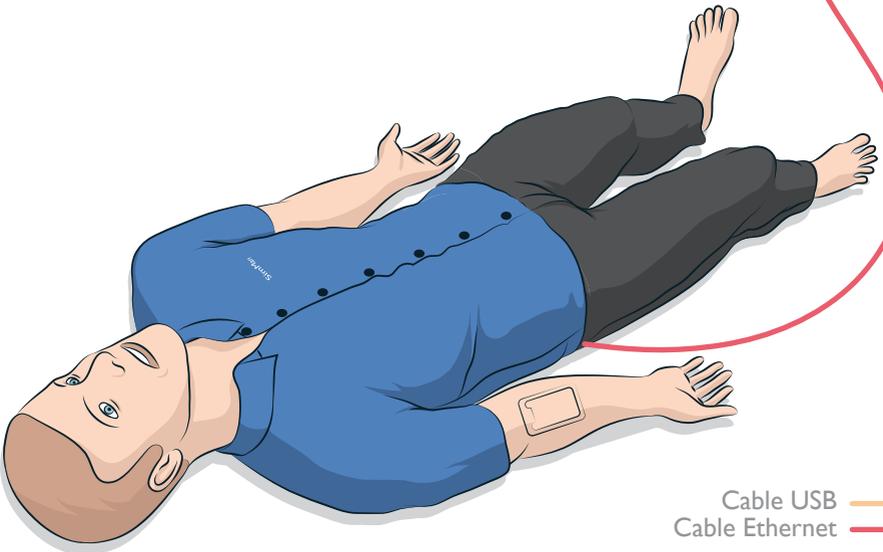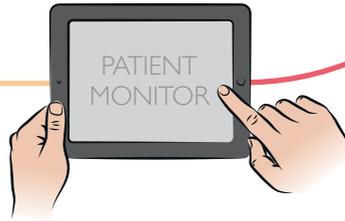

Cable USB ———  
Cable Ethernet ———

© 2014 Laerdal Medical AS. Reservados todos los derechos.  
Printed in Norway

20-08149 Rev A

---

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives