


# Symulator SimMan Essential

Skrócona instrukcja konfiguracji

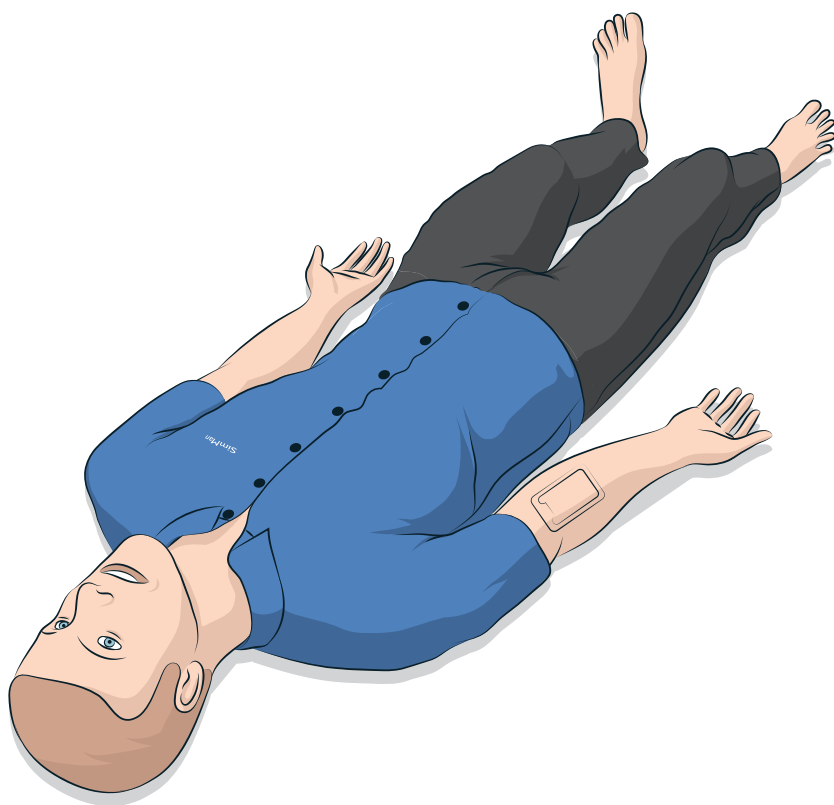




Niniejsza instrukcja szybkiej konfiguracji zawiera opis sposobu montażu i konfiguracji symulatora pacjenta SimMan. Informacje dotyczące sposobu użycia symulatora SimMan znajdują się w plikach pomocy LLEAP i instrukcji obsługi symulatora SimMan.

Najnowsze wydanie instrukcji obsługi i oprogramowanie można pobrać ze strony [www.laerdal.com/download](http://www.laerdal.com/download).




## ELEMENTY ZESTAWU

Tułów

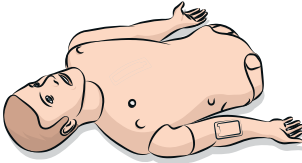

Nogi

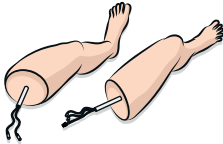


Ubrania




Twarde zęby górne



Genitalia męskie i żeńskie

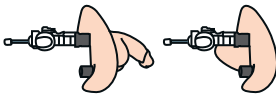

Pasek identyfikatora

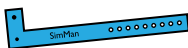

Adapter ramienia SimMan



Strzykawka



Klucz do końcówki Defib EKG



Elektroda adaptera EKG



Skóra szyi  
x6



O-ring podatności płuc  
x 10




Butelka na płyny



Wkładki na ramię do wkłuc  
dożylnych  
x3



Oplucna do symulacji  
drenażu klatki piersiowej  
x 6

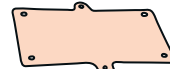

---

Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi



Lubrykant do dróg oddechowych



Zestaw wymiennych gałek ocznych



Worek infuzyjny



Taśma na chrząstkę pierścinną



Kość piszczelowa i wkładki na kość piszczelową x3



Wkładki do wkłuc domięśniowych



Odma płucnowa



Podręcznik użytkownika i Ważne informacje o produkcie



Słuchawki



Klawiatura i mysz



Czujnik SpO<sub>2</sub>



Przewód sieciowy Ethernet



Klucz imbusowy



Zasilacz zewnętrzny



Ładowarka x 2




# 1


## ŁADOWANIE AKUMULATORÓW KOMPUTERA



---




Monitor pacjenta

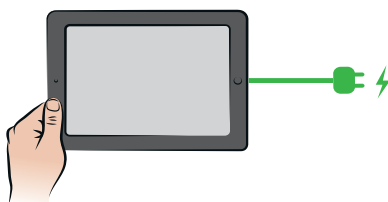




Komputer instruktora

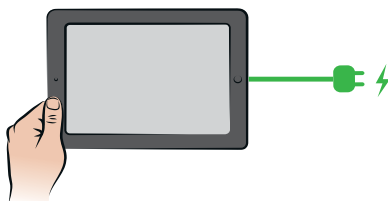

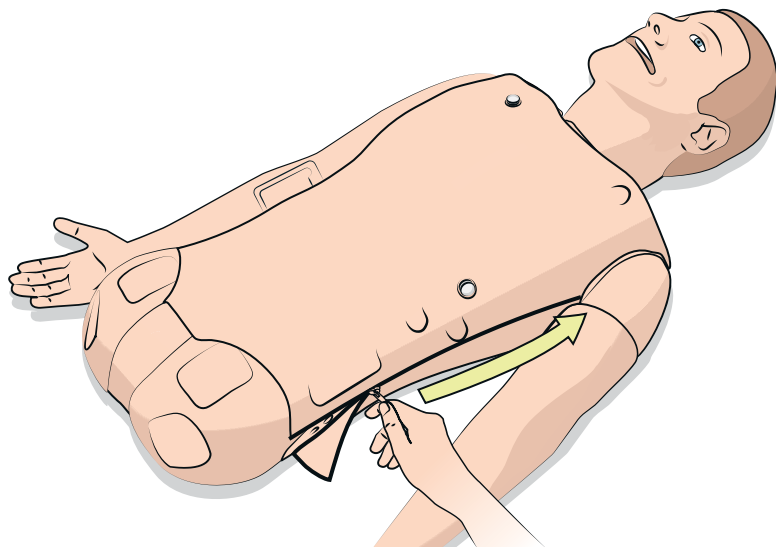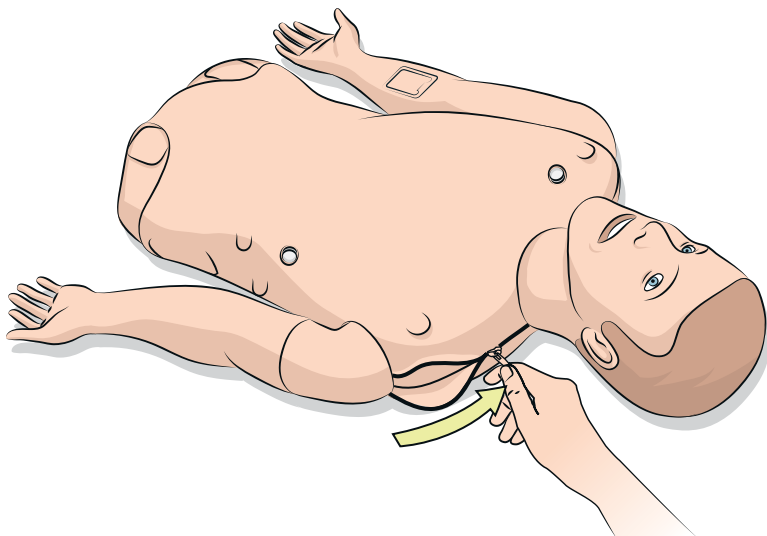

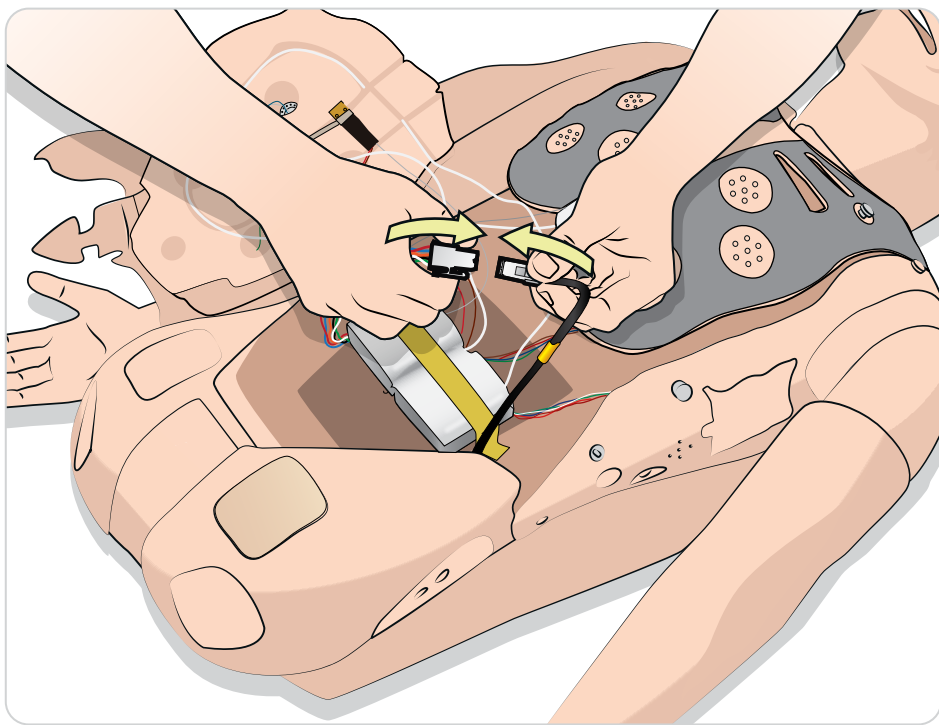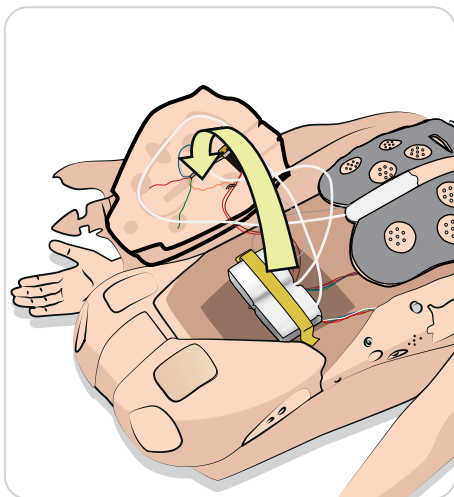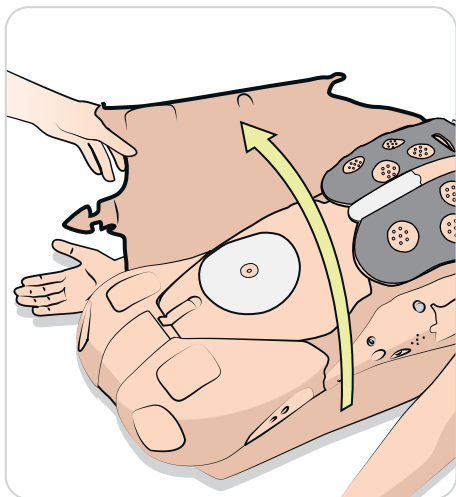







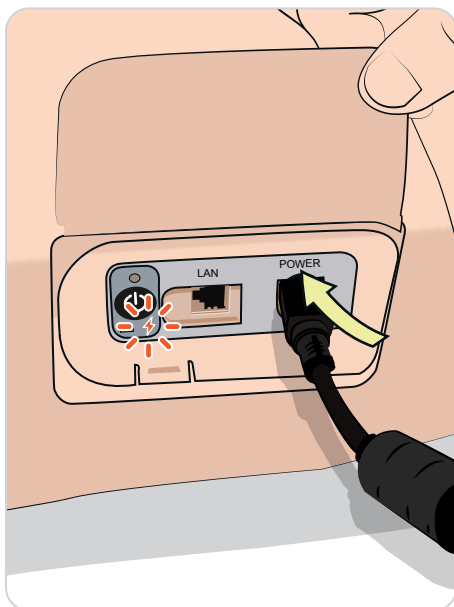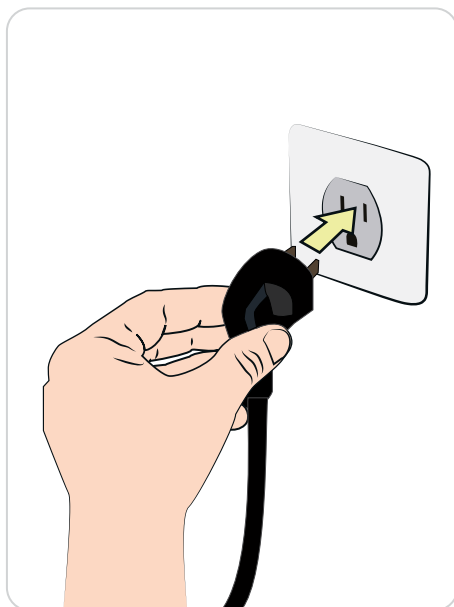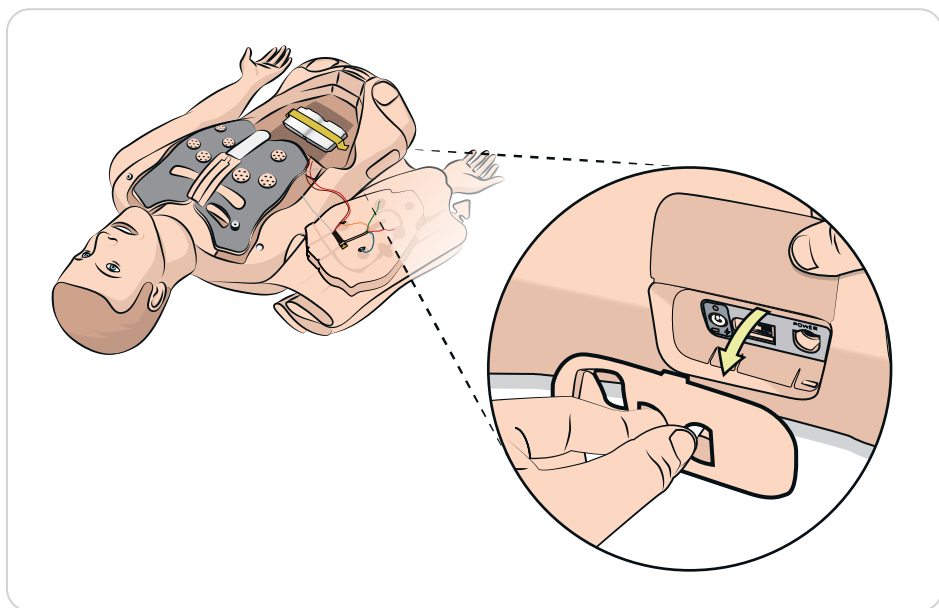





5

## PRZYMOCOWAĆ LEWĄ NOGĘ

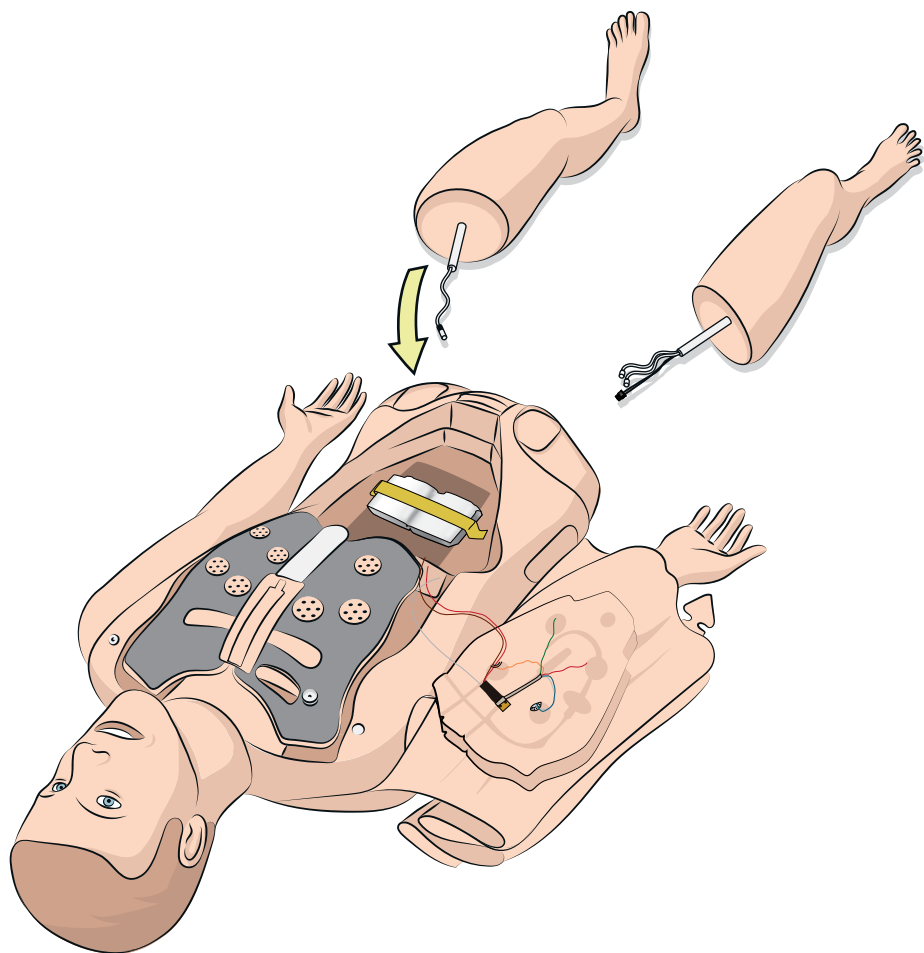

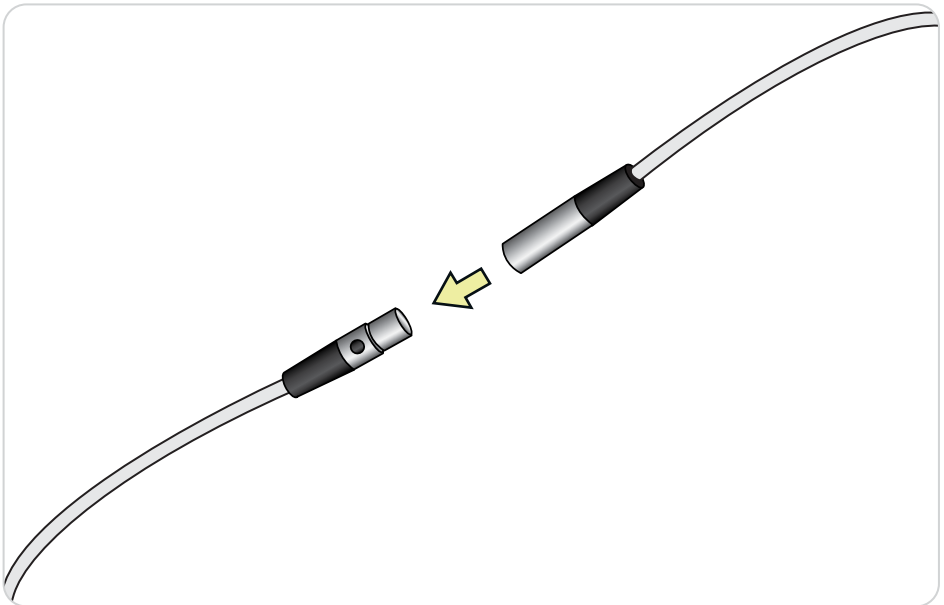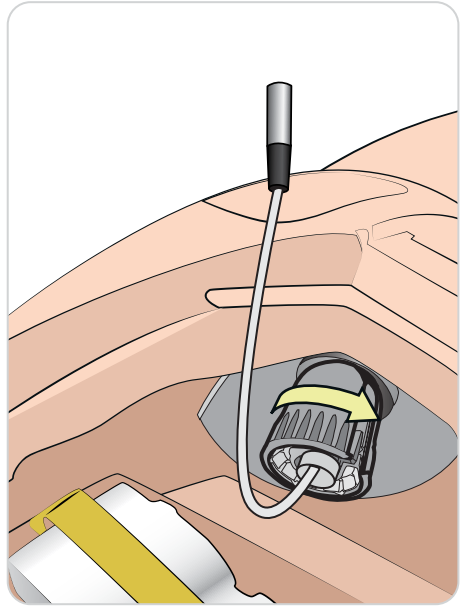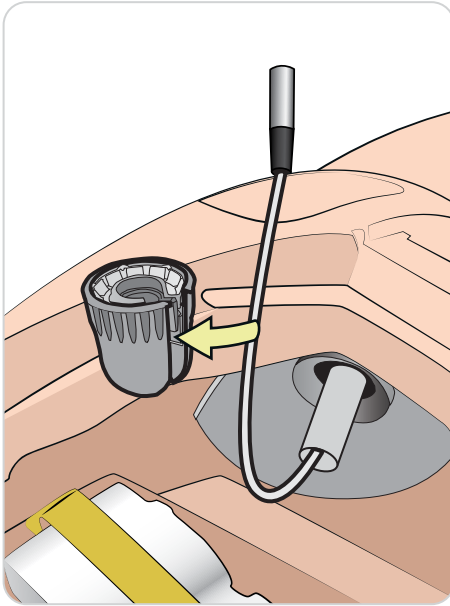

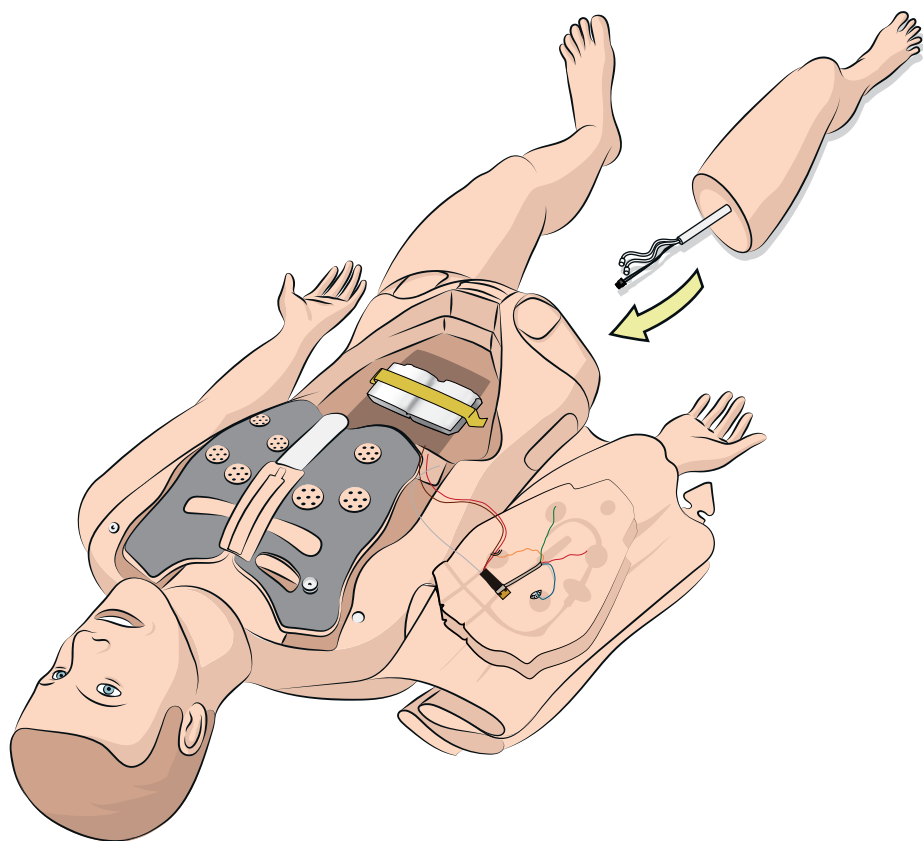

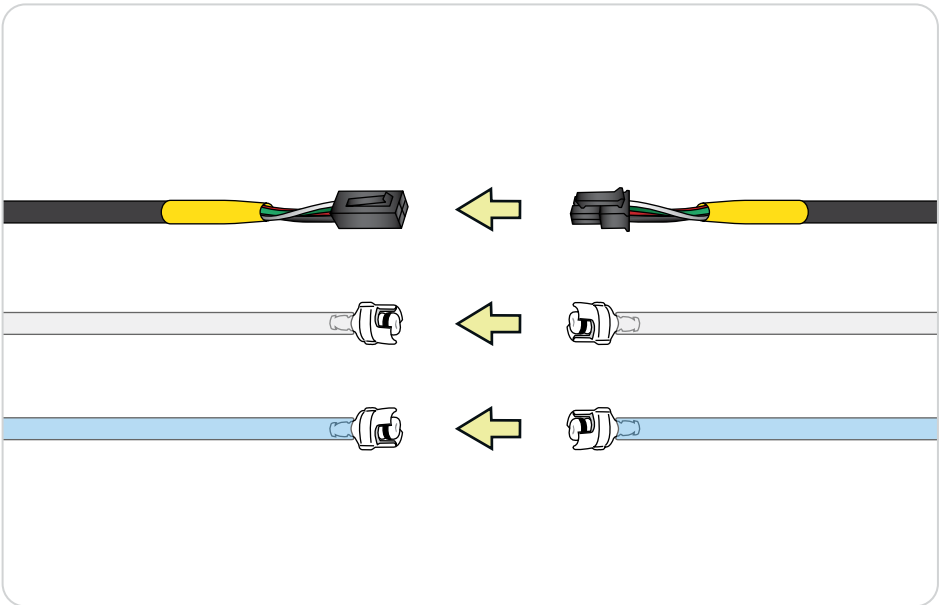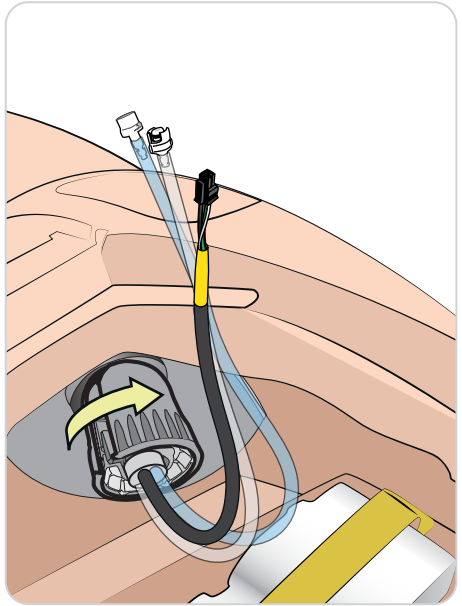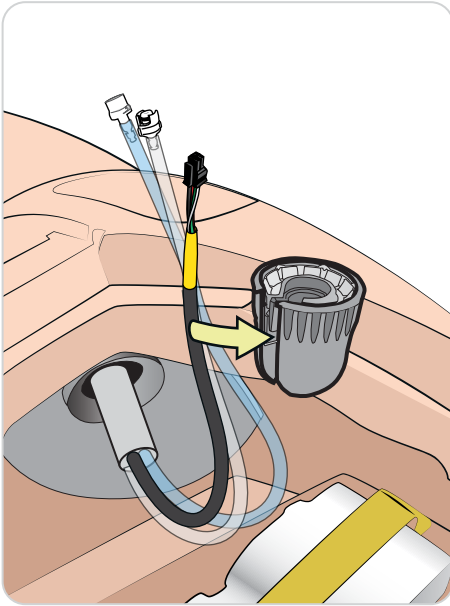


# 7<sub>A</sub>

## KONFIGURACJA BEZPRZEWODOWA

Słuchawki




Komputer instruktora

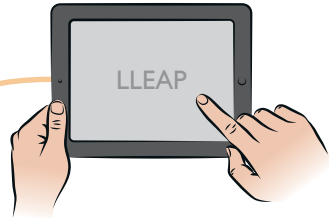


SpO<sub>2</sub>



Monitor pacjenta

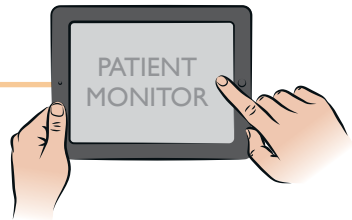

Przewód USB —

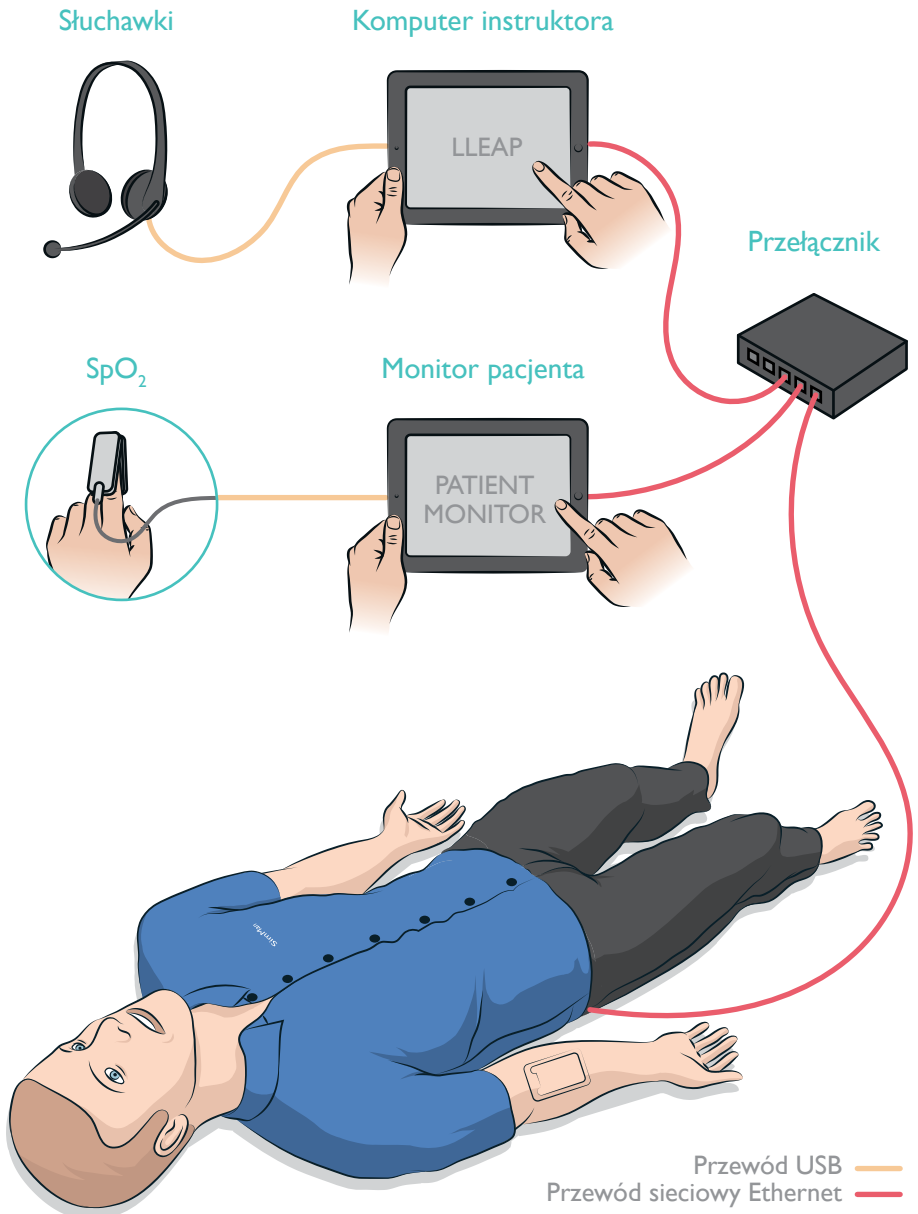

© 2014 Laerdal Medical AS. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Printed in Norway

20-08334 Rev A

---

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives