


# SimJunior

## クイック セットアップ ガイド

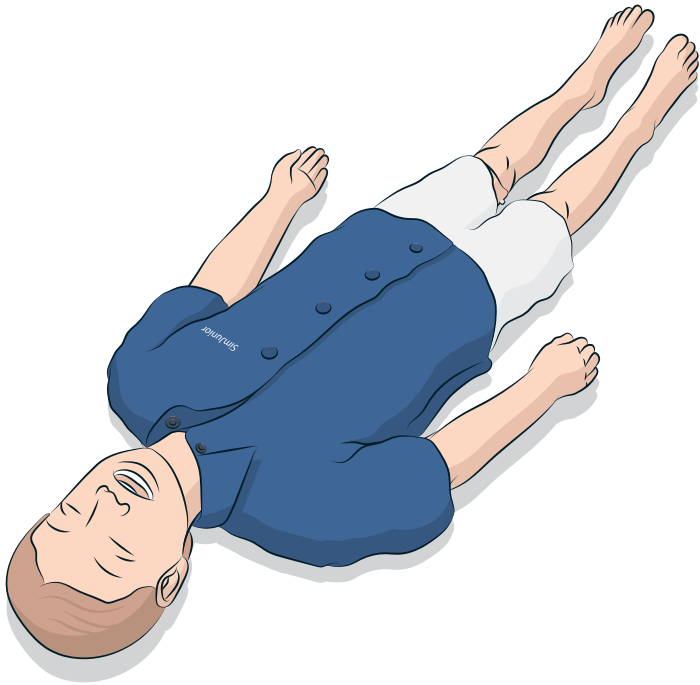




本クイック セットアップ ガイドでは、SimJunior 小児シミュレータの組み立て方法とセットアップ方法を解説しています。SimJunior の使用方法については、LLEAP のヘルプファイルと SimJunior の取扱説明書をご参照ください。

[www.laerdal.com/downloads](http://www.laerdal.com/downloads) から、最新の取扱説明書およびソフトウェアをダウンロードできます。



シミュレータ

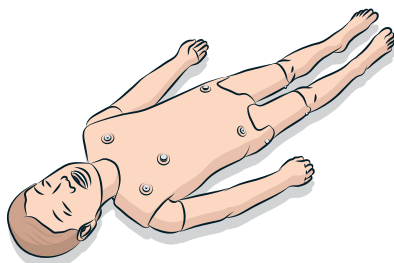

ジャケット・パンツ



マニュアル & 保証書



ハードウェアキット



血圧計カフ



瞳孔セット



IV バッグ (IVR)



IV バッグ (SNB)



AC アダプタ



潤滑スプレー



ショルダーアダプタ



疑似血液 (95 ml)



ベビーパウダー



モデリングワックス



必須

インストラクター PC




または  
SimPad



Link Box



電源アダプタ

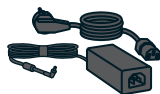

LAN ケーブル (PC 用)



推奨


患者モニター



ヘッドセット



イーサネットスイッチ  
(スイッチングハブ)

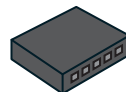

SpO<sub>2</sub> プローブ




LAN ケーブル  
(患者モニター用)




1

バッテリーの充電


インストラクター PC

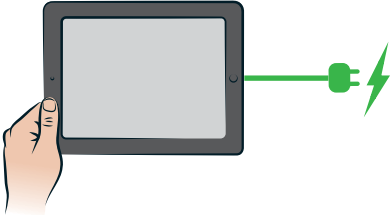


SimPad

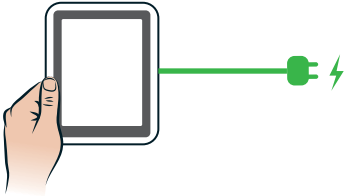

患者モニタ

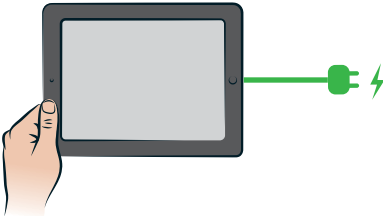


Link Box

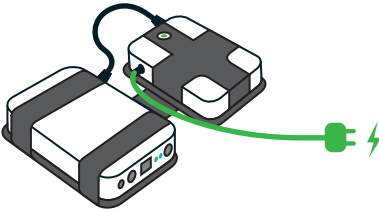


2A

有線セットアップ

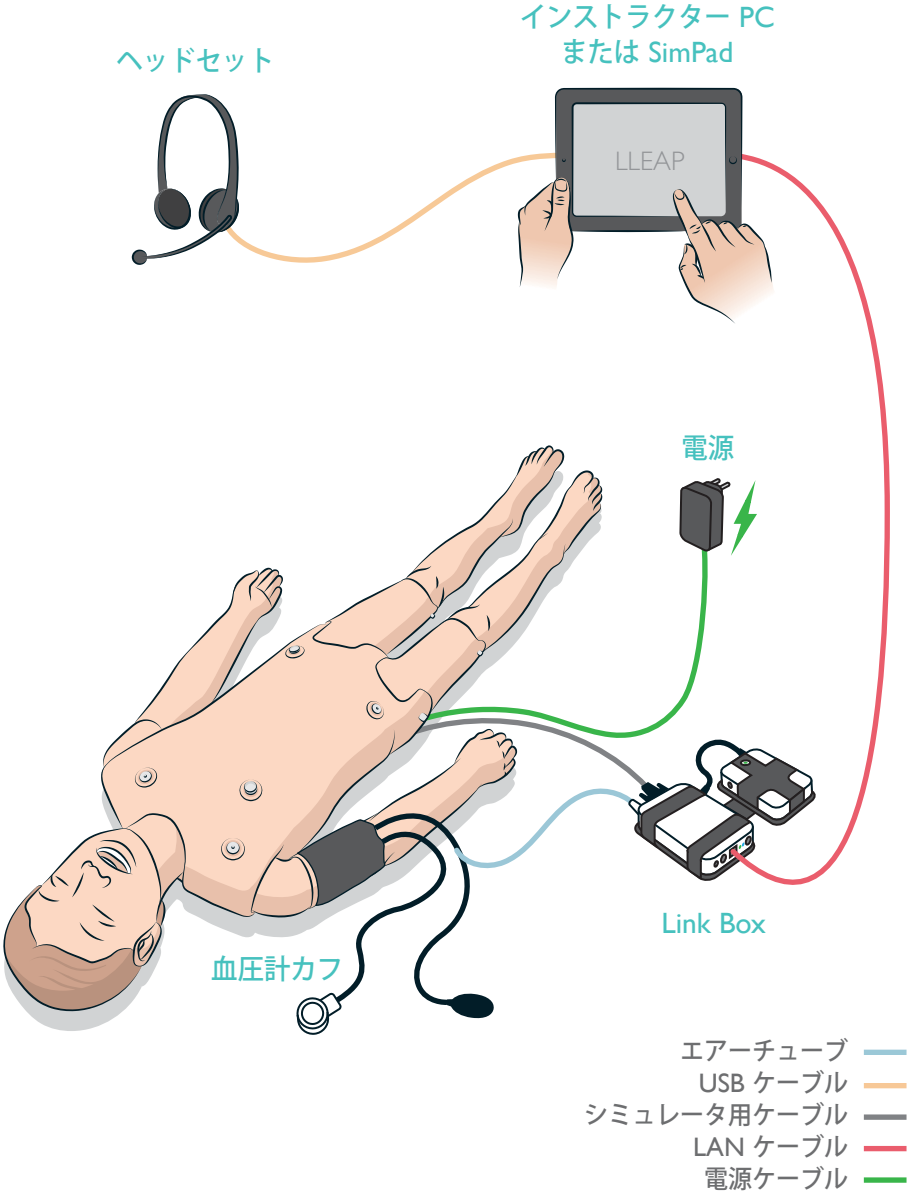


2B

SIMPAD 無線セットアップ

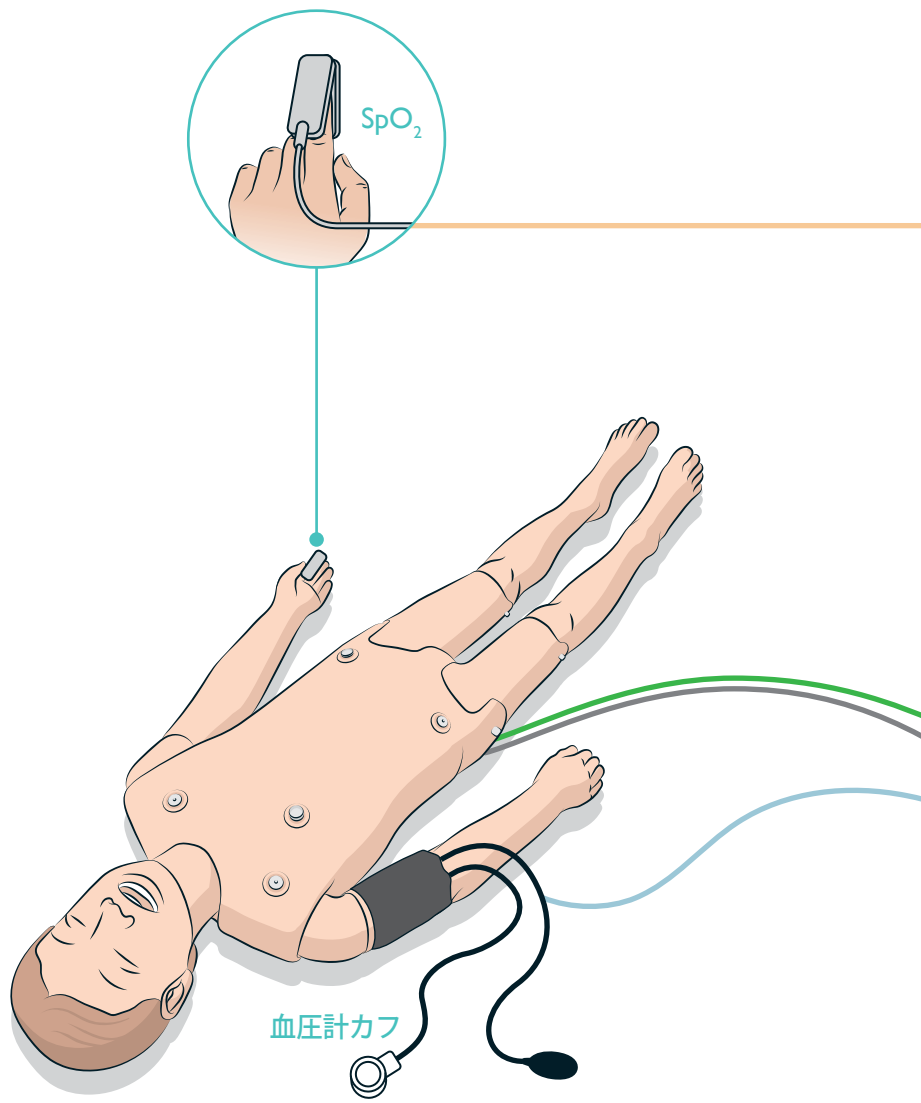




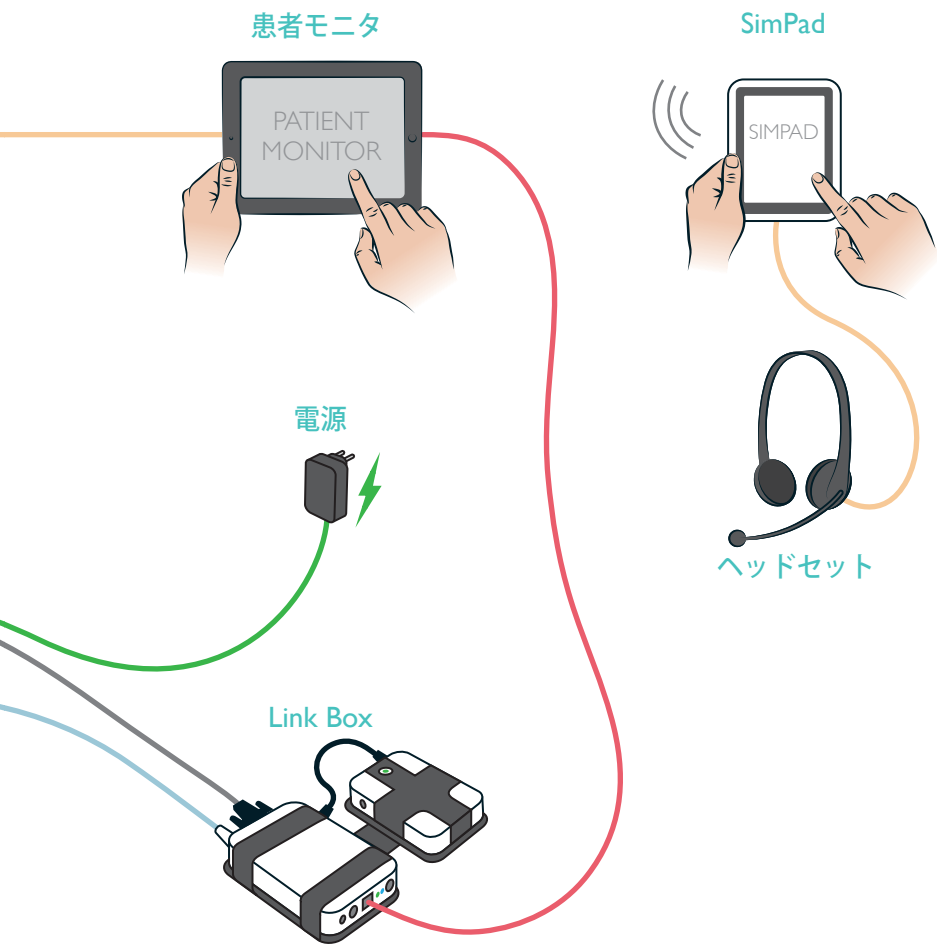


- エアーチューブ ————
- USB ケーブル ————
- シミュレータ用ケーブル ————
- LAN ケーブル ————
- 電源ケーブル ————

2c

患者モニタとの有線セットアップ

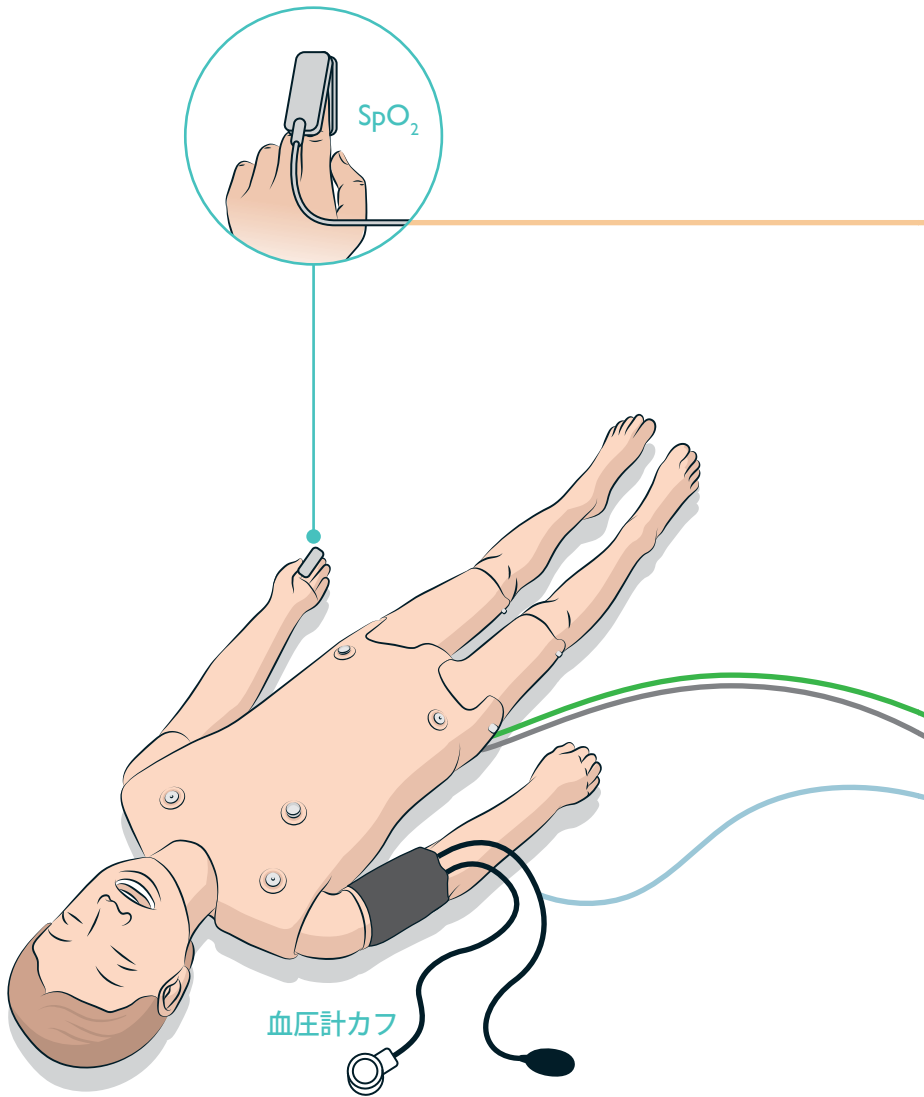

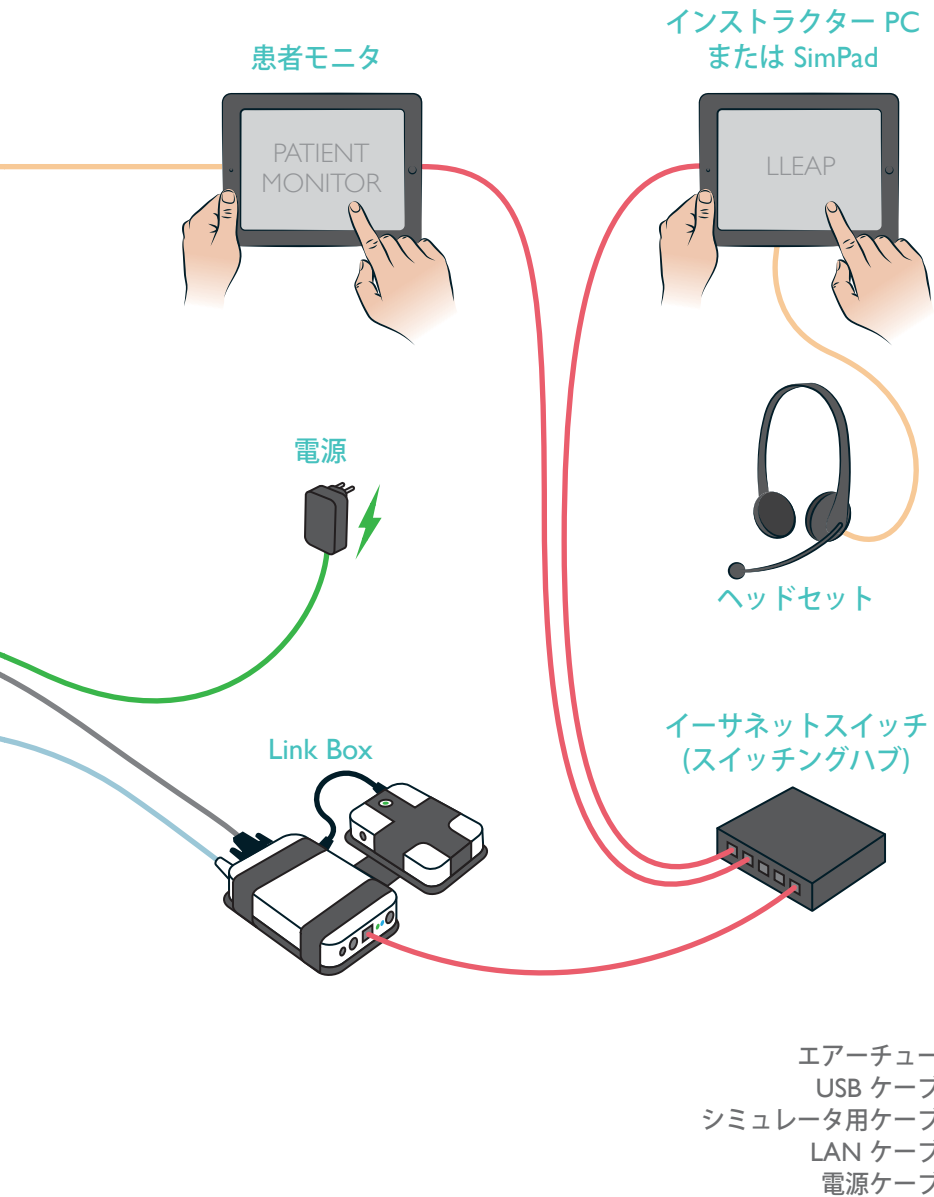

© 2014 Laerdal Medical. All rights reserved  
Printed in USA.  
Device Manufacturer: Laerdal Medical, P.O. Box 38,  
226 FM 116, Gatesville, Texas 76528 USA

Rev A



---

[www.laerdal.com/jp/](http://www.laerdal.com/jp/)



**Laerdal**  
helping save lives