


トーマス チューブホルダー

成人用

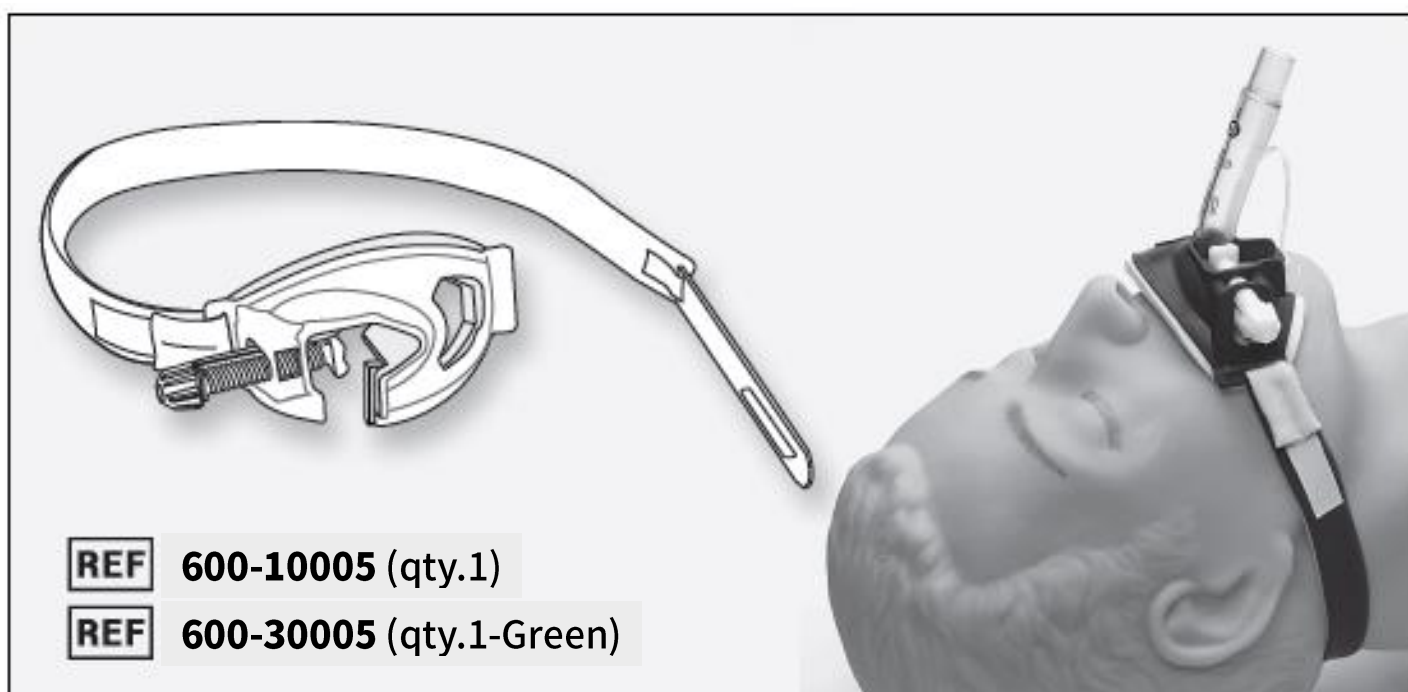

REF 600-10005 (qty.1)

REF 600-30005 (qty.1-Green)



使用可能チューブ外径：6.5mm ～ 21.0mm
•未滅菌•未消毒

Made in China

Manufactured for:
LAERDAL MEDICAL AS
P.O.Box 377,4002 Stavanger
Norway

Thomas is a trademark of Laerdal Medical AS

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives

トーマス チューブホルダー取扱説明書

警告：

1. 本製品を使用できるのは、適切な訓練を受けた人に限られます。
2. 一人の患者にのみ使用してください。再使用はしないでください。
3. 使用前に製品に損傷なく、適切に動作するか確認してください。
4. 使用は短期間に限定して下さい。24時間後には取り外してください。
5. 製品の使用中は常に患者を観察して下さい。



保管温度／使用温度：

1. 保管温度：-34℃～52℃
2. 使用温度：-18℃～43℃

グローバル保証：

www.laerdal.co.jp をご参照ください

使用目的：本製品は挿管後の気管チューブを固定し、偶発的抜管のリスクを軽減します。

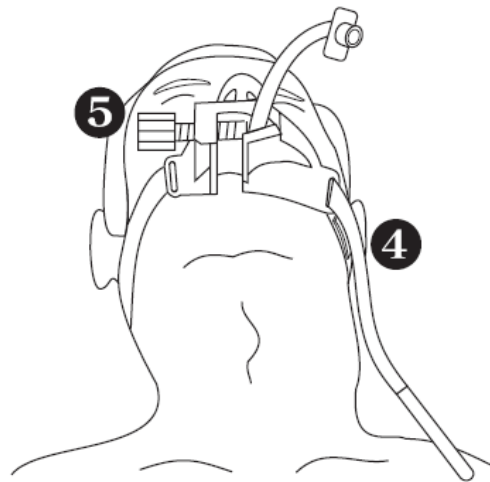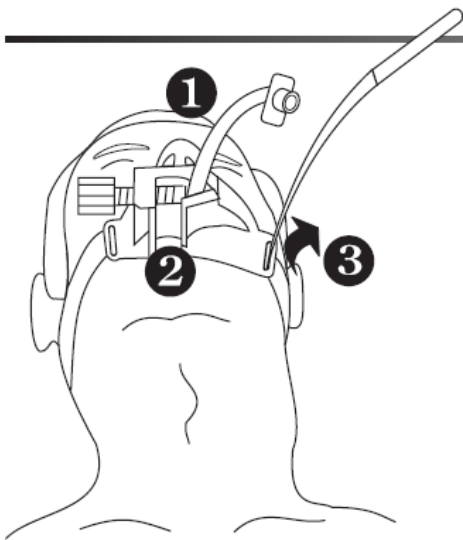

1. マウスピースの開口部が患者の足方向へ向いていることを確認し、マウスピースのVエッジ部に気管チューブが位置するようにマウスピースをスライドして下さい。
2. 唇がマウスピースのチューブ押さえ部と歯に挟まれないように、チューブ押さえ部を患者の口腔内に差し込みます。
3. スライドスティックを患者の首の下を通し、マウスピースの反対側のスリットに挿入します。

注：しっかりと十分な圧で気管チューブを確実に固定してください。過剰な圧が加わると完全、或いは部分的なチューブの閉塞が起こり、適切な空気の流れが制限されたり妨げられる可能性があります。

4. スライドスティックを外し、ベルクロテープでヘッドストラップを完全に固定します。頭部及び頸部の小さい患者の場合は、調整ベルクロテープを用いてヘッドストラップの長さを調整します。
5. スクリューを回してクランプを進め、チューブをしっかりと固定します。

注：頭や首の小さいサイズの患者にはストラップ上の調整ベルクロテープを使用し調整して下さい。スクリューで締める前に気管チューブを適切な位置にし、ヘッドストラップをしっかりと固定することは大切です。

製造販売業者：レールダルメディカルジャパン株式会社
住 所：東京都千代田区一番町8住友不動産一番町ビル
電 話 番 号：0120-309-060