

GUIDE D'UTILISATION DES ELECTRODES AED TRAINER 3

Au préalable, il faut penser à activer la télécommande (voir page 9 du mode d'emploi « modification de la configuration »).

3 Possibilités :


1- Avec la télécommande (sans la bande aluminium)

- Avant de mettre l'AED Trainer 3 sous tension, pré-connecter les électrodes. (cf. « Connexion des électrodes de formation » dans le mode d'emploi).
- Mettre en route l'appareil.
- Valider sur la télécommande en appuyant sur la touche « électrodes OK » (en jaune ci-dessous) pour simuler une connexion correcte des électrodes à l'AEDT3.



2- Sans la télécommande (avec la bande aluminium)

Fixer la bande aluminium sur la peau du mannequin, puis placer les électrodes sur cette bande comme indiqué sur les schémas ci-dessous.

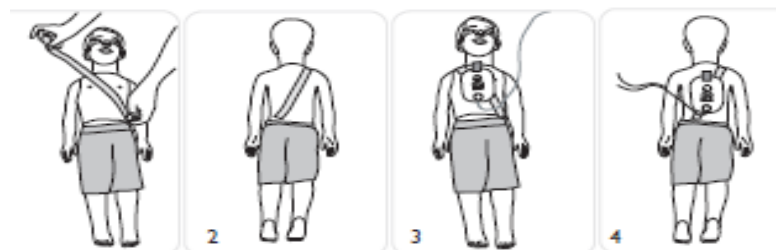

3- Avec des électrodes AED Trainer 2 (adultes ref 198-80550 / Pédiatriques réf 198-80650)

Nul besoin de la télécommande AED Trainer 3 ou de la bande aluminium.