



Laerdal

helping save lives

Gentile Cliente,

La situazione Covid-19 richiama tutti al bisogno di disciplinare le situazioni di potenziale contagio. Al tal fine abbiamo predisposto una procedura per ridurre il rischio relativo gli Aspiratori **Laerdal Suction Unit (LSU)** che vengono spediti al nostro centro di assistenza in riparazione o per la gestione di test e prove elettriche.

Richiamiamo quindi la tua attenzione alla Procedura seguente

- Avvisare il Servizio Clienti Laerdal tramite l'indirizzo email laerdal.italy@laerdal.com dell'arrivo di un aspiratore **Laerdal Suction Unit (LSU)** da riparare;
- Spedire l'aspiratore o gli aspiratori esclusivamente tramite corriere - in porto franco e con consegna entro le ore 12:00 al seguente indirizzo:
LAERDAL ITALIA SRL - CENTRO ASSISTENZA LSU
VIA DELLA BEVERARA 48/3B
40131 BOLOGNA BO
+39051355587
- L'aspiratore all'interno dell'imballo deve essere sigillato in un sacchetto o altro involucro;
- L'aspiratore deve arrivare con la batteria inserita e provvisto del cavo di alimentazione 220V in dotazione.
- L'aspiratore deve essere spedito senza vaso, sacchetto e tubo di aspirazione poichè questi componenti potrebbero essere contaminati o presentare residui organici.
- All'esterno dell'imballo devono tassativamente essere presenti, opportunamente protetti in eventuale tasca adesiva, il documento di trasporto con indicazione del numero seriale dell'aspiratore Laerdal Suction Unit (è numero a 11 cifre che comincia con 78, impresso nel retro dell'apparecchiatura dove è presente un coice a barre), oltre a dichiarazione da parte dell'Ente che l'aspiratore è stato decontaminato, secondo le indicazioni riportate sul nostro sito (<https://www.laerdal.com/it/doc/135/Aspiratore-Laerdal#/Downloads>) in sintesi qui riportato:

Part name	Material type	70% EtOH	0,5% NaClO
Cabinet front	PC/ABS	Damage may occur	OK
Protection cap front	TPE (SEBS)	OK	OK
Cabinet back	PC/ABS	Damage may occur	OK
Cabinet base w/protector	PC/ABS + TPE (SEBS)	Damage may occur	OK
Battery door	TPE (SEBS)	OK	OK
Operating knob	POM	OK	Damage may occur
Handle w/Protector	PC/ABS + TPE (SEBS)	Damage may occur	OK
Strap for tubing	TPE (SEBS)	OK	OK
Clamping plate, right	Stainless steel	OK	OK / Little effect
Hook for strap	St 37 – Carbon Steel	OK	Damage may occur
Lock, canister holder	POM	OK	Damage may occur
Clamping plate, left	Stainless steel	OK	OK / Little effect
Vacuum inlet	Silicone	OK	OK / Little effect
Display LSU	Polyester	OK	OK



Laerdal

helping save lives

La **riconsegna** dell'aspiratore avverrà esclusivamente **tramite corriere**; a tal fine vi chiediamo di indicarci l'esatto indirizzo di consegna, completo di contatto e numero telefonico.

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

Cordiali Saluti,

Lo Staff di Laerdal Medical AS