


# SimBaby

Tracheostomie

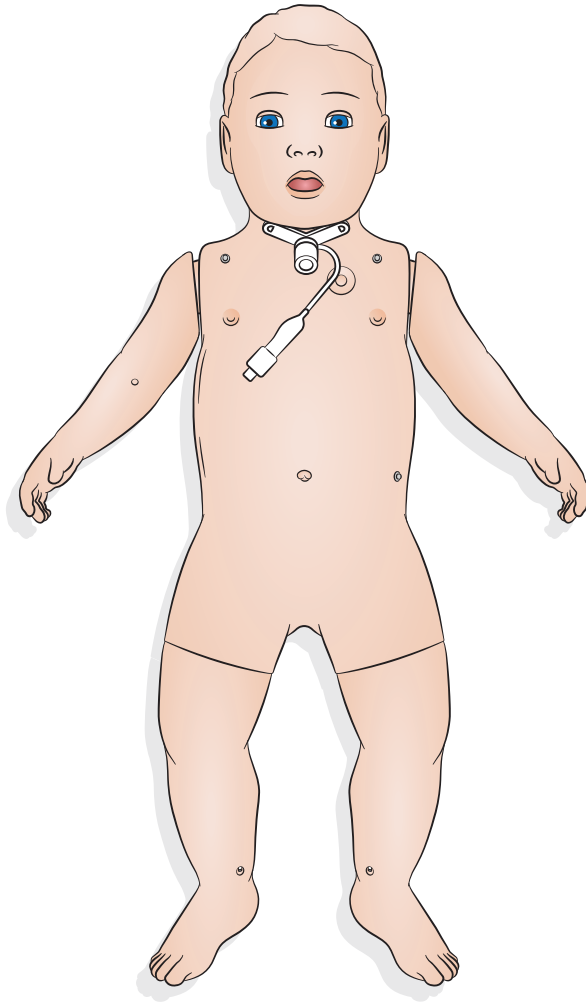

# Gebruik - Tracheostomie

---

## Tracheostomie

Om tracheostomiezorg- en noodprocedures uit te voeren, selecteert u de gewenste instelling in SimPad PLUS of LLEAP.

Beschikbare instellingen:


- Open
- Gedeeltelijk
- Gesloten
- Verkeerde plaatsing
- Geïntubeerd




### Opmerkingen

- *De functionaliteit voor zwelling van de keelholte is niet beschikbaar voor de SimBaby met Tracheostomie.*
- *Gebruik alleen tracheostomietubes tot 4,0 mm zonder manchet en tot 3,5 mm met manchet.*
- *Vergeet na gebruik niet om de tracheostomaplug weer terug te plaatsen.*

SimPad PLUS

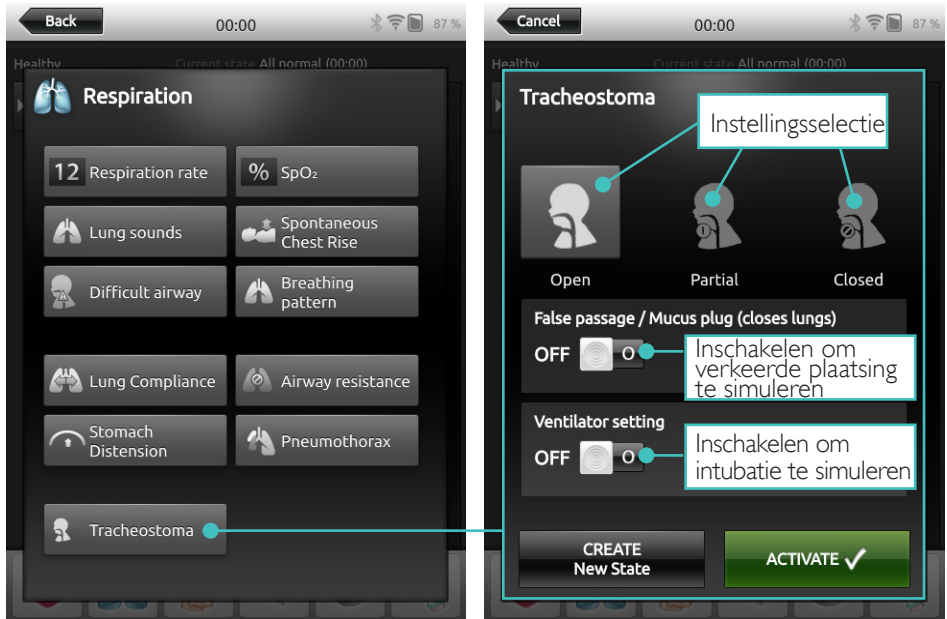

LLEAP

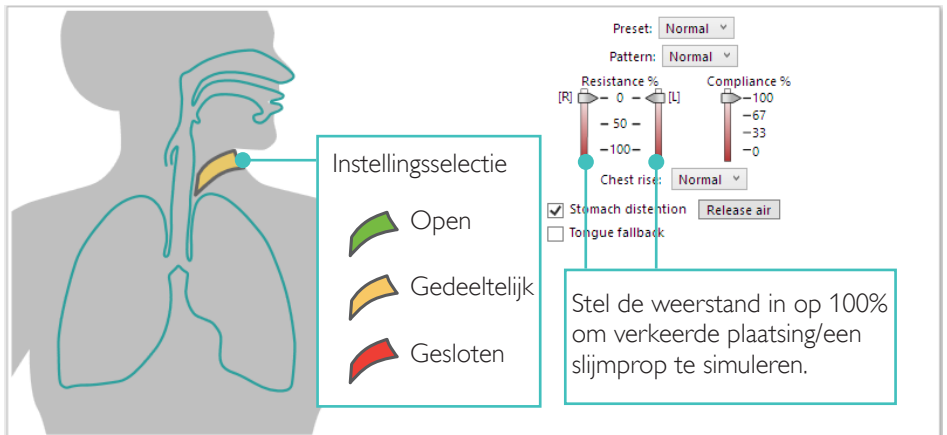

© 2020 Laerdal Medical AS. Alle rechten voorbehouden.

Fabrikant: Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
T: (+47) 51 51 17 00

Gedrukt in Noorwegen

20-16247 Rev A

---

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives