

Une classe virtuelle avec Anniewhere

Voici un guide pour vous aider à configurer un cours virtuel avec Anniewhere



&


OU

OU


Préparez-vous pour votre classe virtuelle

Accédez à Anniewhere depuis n'importe quel dispositif et commencez à former des premiers intervenants où qu'ils soient.

Nous recommandons l'utilisation d'un autre écran ou un autre appareil pour la vidéo conférence durant le cours.

Commencez un cours

Cliquez sur « Create a class » sur la page d'accueil Anniewhere et partagez le code Classroom avec les apprenants.

Les apprenants entrent dans le cours en tapant le code et leur nom dans l'application QCPR Classroom.

Vous pouvez voir qui est entré dans le cours avec succès lorsque les apprenants cliquent sur « Join class ».

Cliquez sur « Continue » lorsque tout le monde est entré.

Identification des apprenants :
Rappelez aux apprenants de taper un nom tel qu'il apparaîtra sur l'éventuel certificat de passage.



Ecran instructeur



Ecran apprenants



Page d'accueil

Commencez un cours

Sélectionnez un type de session depuis le menu déroulant au coin supérieur gauche de votre écran et cliquez sur « Start ».

Vous pouvez suivre le minuteur et stopper la session à un temps prédéfini par vous en cliquant sur « Stop ».

Types de sessions disponibles :
Compressions seules, Ventilations seules ou RCP (30 :2)

Utilisation de mannequins Laerdal QCPR :
Les apprenants compriment le mannequin pour l'activer et commencent à recevoir un feedback.

Utilisation d'autres mannequins :
Les apprenants utilisent le feedback vidéo sur le rythme des compressions.

Les apprenants qui utilisent un mannequin activé apparaissent avec une icône de feedback grise, sur la page d'accueil

Feedback en temps réel

Pendant le cours, les apprenants voient leur feedback individuel sur leur application QCPR Classroom.

En même temps, vous pouvez suivre le développement de leurs compétences avec une vue d'ensemble objective et délivrer un feedback à un apprenant et à la classe entière.



Ecran apprenants



Ecran instructeur



Ecran résultats

Débriefing et résultats

Après la session, vous pouvez revoir les résultats de chacun des apprenants. Pour améliorer les objectifs du cours, vous pouvez également délivrer un feedback détaillé aux apprenants en utilisant les scores et les pistes d'amélioration données dans les résultats.

Que signifie chaque icône ?

Comment interpréter les conseils d'amélioration sur la performance des apprenants



Bien



Relâchez complètement



Comprimez plus fort



Comprimez plus vite



Comprimez plus lentement



Trop d'air

Conseils pour la vidéo conférence

Voici quelques conseils pour vous aider à animer une classe virtuelle en utilisant Anniewhere avec une application vidéo conférence

Ajustez la caméra
Lorsque l'instructeur montre aux apprenants



Placez-vous ainsi que le mannequin dans le cadre vidéo
Pendant la formation, disposez le dispositif utilisé pour la vidéo et le mannequin sur une surface plane. Assurez-vous que le mannequin et vous êtes visibles dans le cadre vidéo.

Activer/désactiver le clicker
Le clicker peut être activé ou désactivé avec la tirette présente sous Little Anne QCPR ou Little Junior QCPR.

Couper/réactiver le son des participants
Il peut être compliqué d'entendre les participants pendant la session. Il est pratique de couper ou d'activer le son des participants sur votre application de vidéo conférence.

Porter un casque audio pendant la RCP ?
Il peut être compliqué de maintenir le casque en place pendant les compressions et les ventilations. Si un casque est nécessaire et qu'il ne reste pas en place, placez-le au niveau du cou par exemple, pendant la session.

Demandez aux apprenants de télécharger l'application QCPR Classroom

Guide des apprenants

Un guide étape-par-étape pour aider vos apprenants à se préparer à suivre un cours.

Télécharger l'application QCPR Classroom

L'application QCPR Classroom est directement téléchargeable depuis Google Play ou Apple Store.

Vos apprenants trouveront également sur Laerdal.com, le Guide Apprenants pour une classe virtuelle afin qu'ils soient prêts à suivre un cours.

www.laerdal.com