


QCPR Classroom App

Guida per studente

Guida rapida per configurare QCPR Classroom App e partecipare a una sessione di formazione in un'aula virtuale con AnnieWhere



Installa la QCPR Classroom App sul tuo dispositivo (Tablet/Smarthphone)
L'applicazione è gratuita.

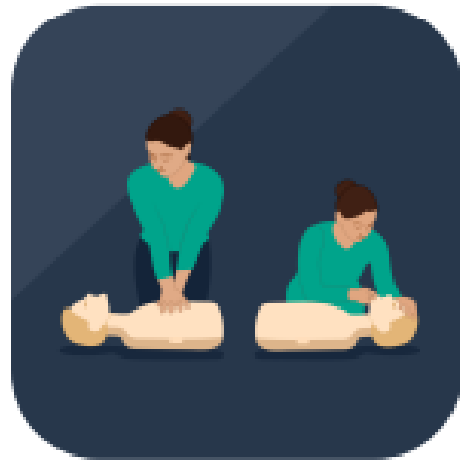


Partecipa alla lezione inserendo il Codice Classe

Seleziona "I am a Learner" e inserisci il Codice Classe fornito dall'istruttore durante la lezione.

Potrai unirti alla classe dopo aver inserito il tuo nome.

Attenzione: se per sbaglio hai selezionato "I am an Instructor" puoi tornare indietro alla homepage, cliccando nelle impostazioni ⚙️ "Exit instructor mode" .

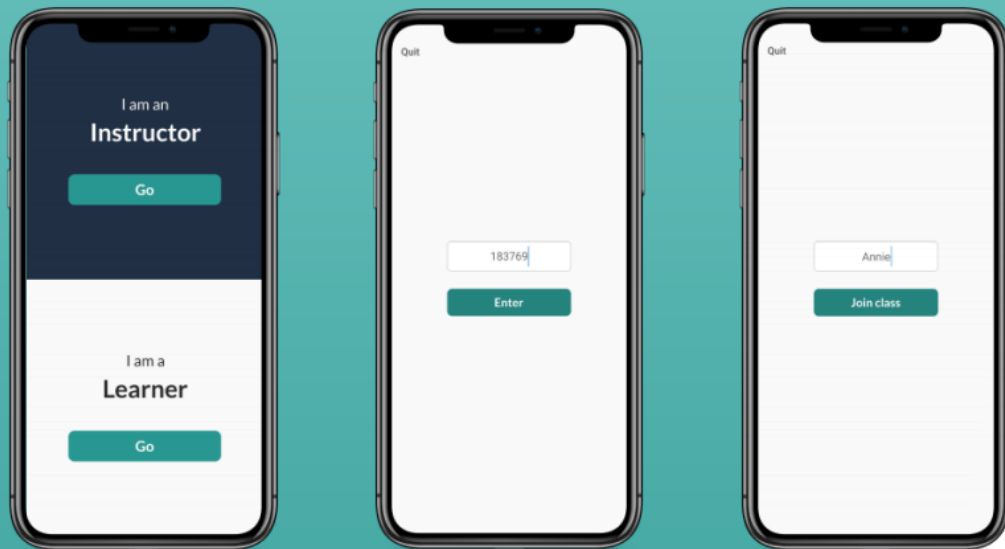


Seleziona un manichino

In base al manichino utilizzato riceverai diversi feedback sulla tua performance di RCP.

Con un manichino Little QCPR: Se stai utilizzando un manichino QCPR, attivalo con qualche compressione e selezionalo dall'elenco visibile nella schermata dell'applicazione.

Con qualsiasi altro manichino: se stai utilizzando un Mini Anne o un qualsiasi altro manichino, clicca in basso «Don't have a sensorized manikin? PRESS HERE» per attivare il video di rilevazione della frequenza delle compressioni sul tuo dispositivo.

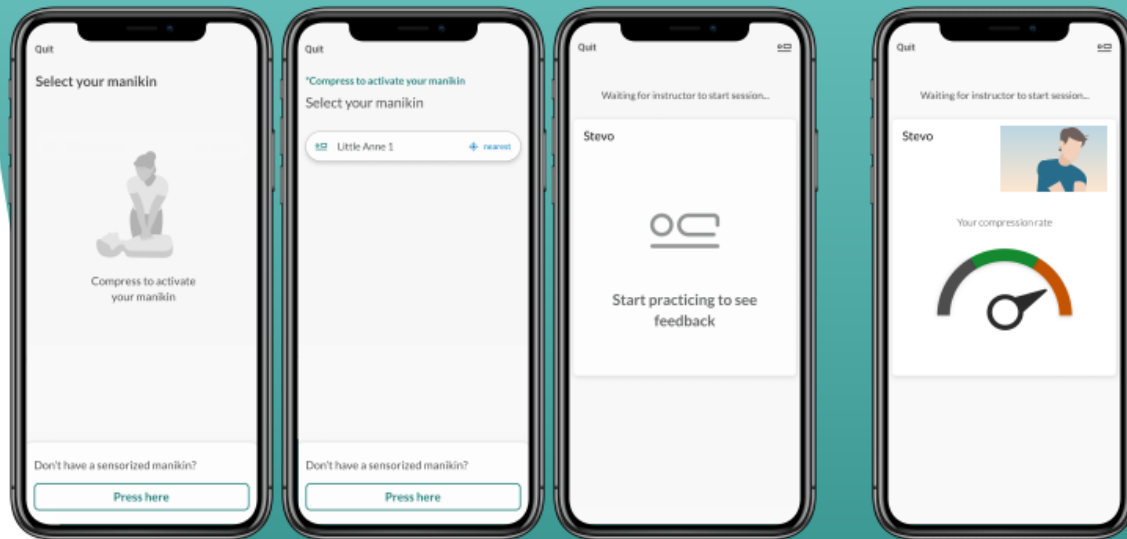

QCPR Manikin




Other


Feedback in tempo reale e risultati

Quando l'istruttore dà inizio alla sessione, inizia a comprimere.

Riceverai da subito il feedback in tempo reale sulla tua performance di RCP.

Al termine della sessione otterrai il punteggio complessivo della tua sessione di RCP e utili suggerimenti per migliorare per la prossima lezione.

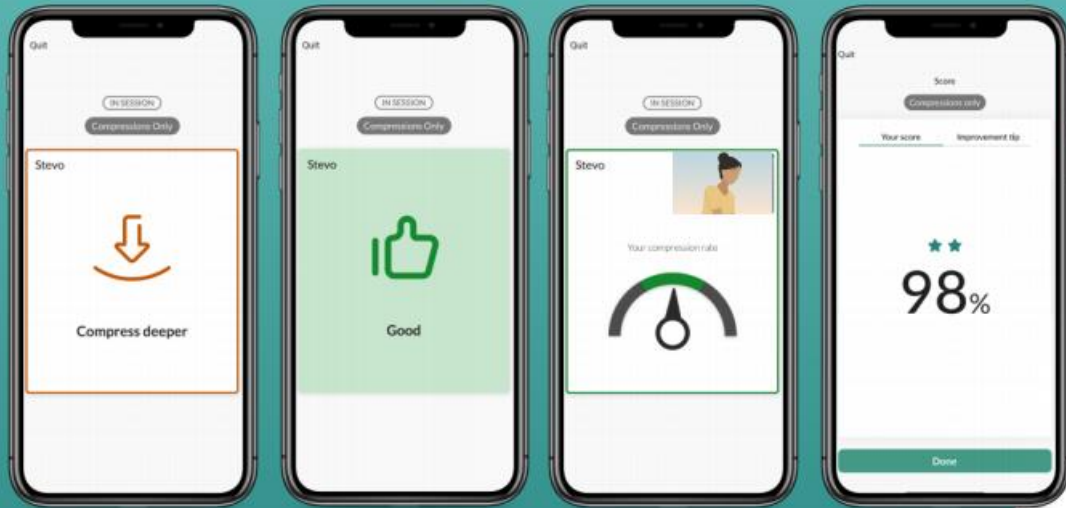


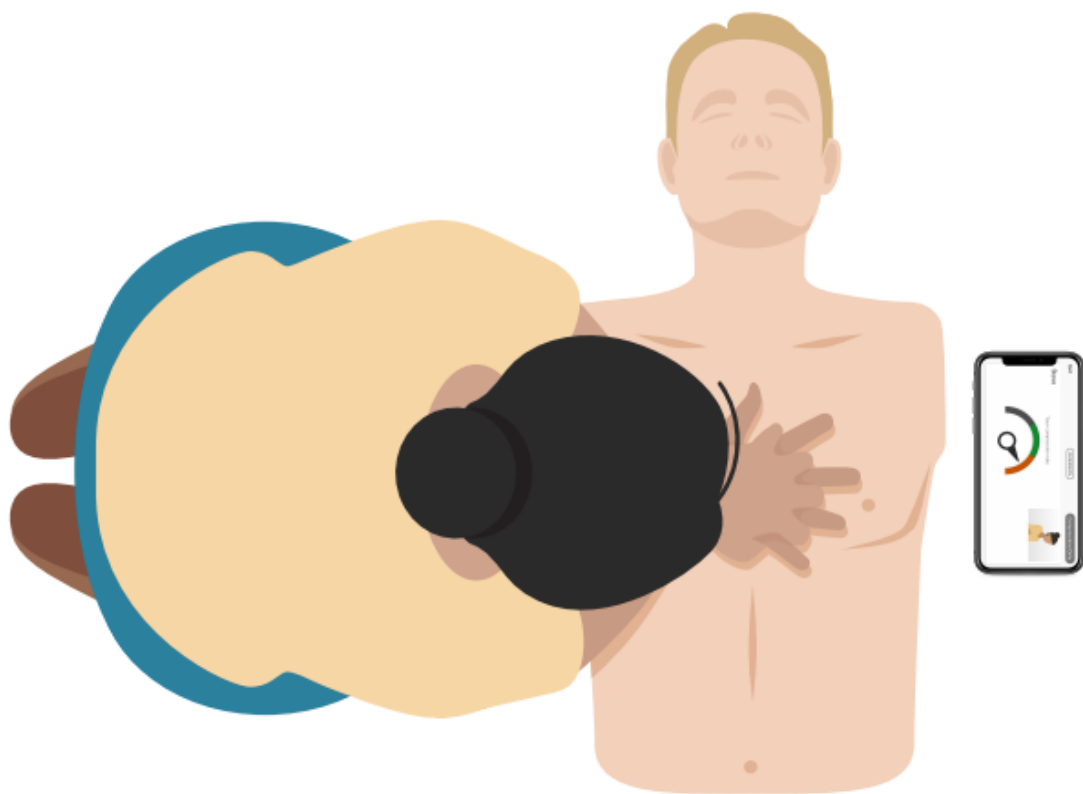

Posiziona il dispositivo con la QCPR Classroom App vicino al manichino per seguire facilmente il feedback ricevuto.

Se stai utilizzando un manichino senza sensore QCPR: Posiziona il dispositivo dall'altro lato del manichino assicurandoti che la fotocamera riesca a rilevare il tuo movimento per fornire il feedback sulla frequenza delle compressioni.

Cosa significano queste icone?

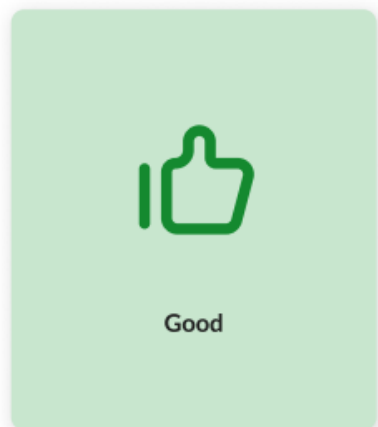

Bene




Rilascia
completamente



Comprimi più
in profondità



Comprimi più
velocemente

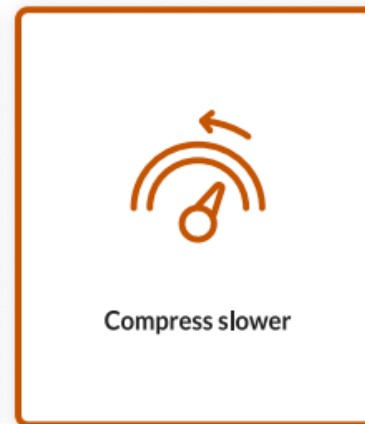

Comprimi più
lentamente



Troppa aria

Saper interpretare questi simboli ti aiuterà a migliorare la tua RCP



Laerdal

helping save lives