

AnnieWhere

Guida per istruttore


Guida rapida per configurare un'aula virtuale con AnnieWhere



Preparati per le tue lezioni virtuali

Accedi ad AnnieWhere da qualsiasi dispositivo e inizia il corso da qualsiasi luogo.

Si consiglia di utilizzare uno schermo (monitor) aggiuntivo o un altro dispositivo come video per la videoconferenza durante la lezione.

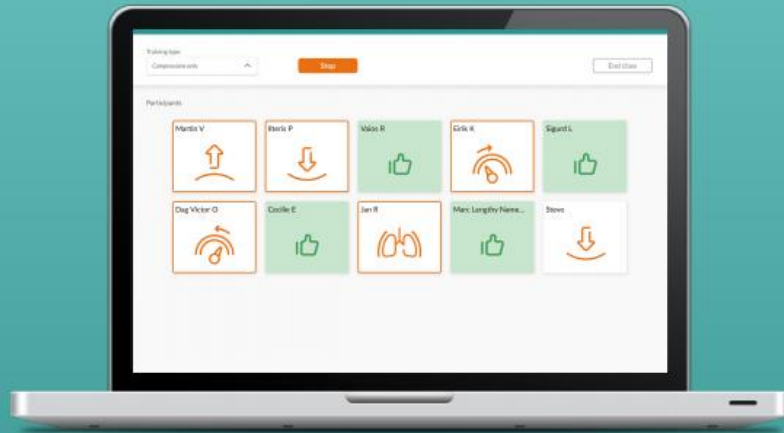

&




or



or



Inizia una lezione

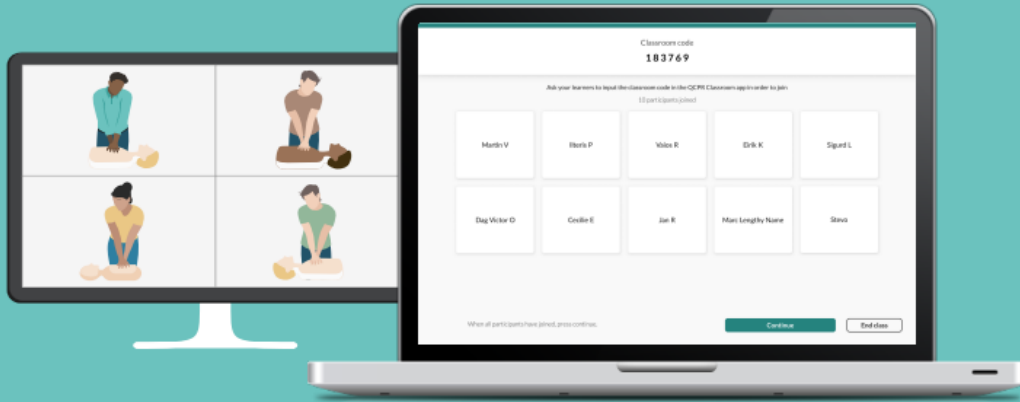

Instructor screens



Learner screens

Clicca su "Crea un corso" nella homepage di Anniewhere

e condivi il "Codice classe" con i tuoi studenti.

Gli studenti partecipano a un corso inserendo il codice classe e il loro nome nella QCPR Classroom app.

Puoi vedere chi partecipa alla lezione quando gli studenti cliccano su "Iscriviti al corso".

Clicca su "Continua" una volta che tutti gli studenti si saranno uniti alla classe.

Ricorda agli studenti che il nome che avranno inserito verrà indicato sulla scheda o il certificato di completamento del corso.


Inizia una sessione di training

Seleziona un "Tipo di sessione" (solo compressioni, solo ventilazioni, RCP) dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e clicca su "Start".

Puoi tenere traccia del timer e interrompere una sessione in qualsiasi momento facendo clic su "Interrompi".


Con un manichino Little QCPR: Gli studenti comprimono il manichino per attivarlo e iniziare a ricevere il feedback.

Con qualsiasi altro manichino: gli studenti avranno il feedback della frequenza della compressione attivando il video sul loro dispositivo. Questi verranno visualizzati con un'icona di colore grigio nella schermata della classe.

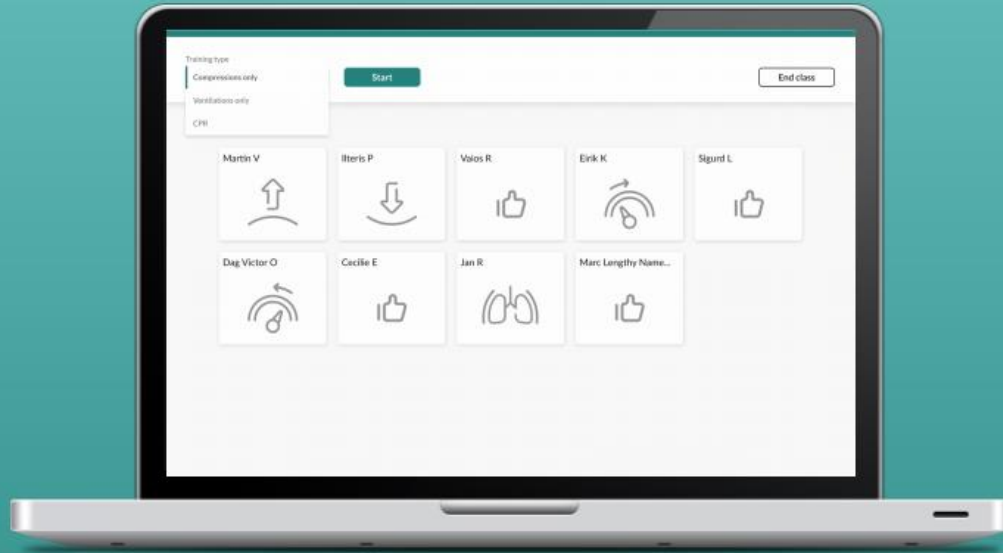


Lobby screen

Feedback in tempo reale

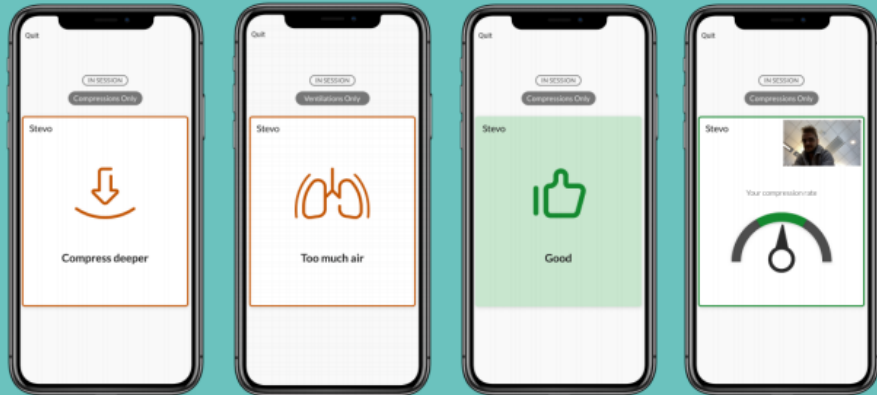

Learner screen


Instructor screen

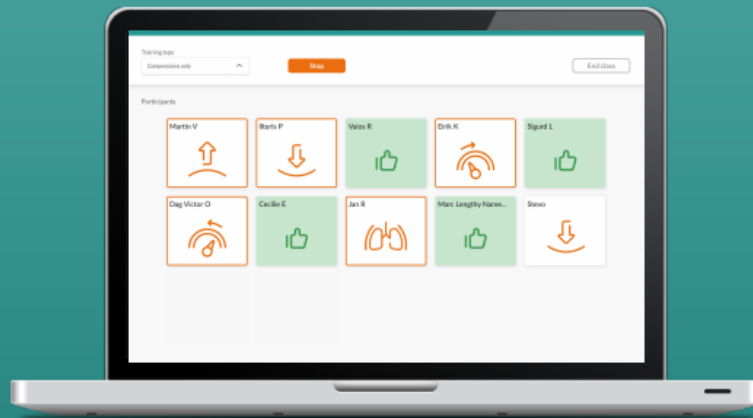

Durante il training, gli studenti vedono la loro performance individuale sullo schermo del loro dispositivo con la QCPR Classroom app. Allo stesso tempo, anche l'istruttore può monitorare l'andamento della sessione di training e interagire con il singolo studente e la classe dando suggerimenti e correggendo le manovre fatte nella maniera non corretta.


Debrief e Risultati

Al termine di ogni sessione, è possibile esaminare i risultati di ogni singolo studente. Per migliorare gli obiettivi formativi, è possibile fornire un feedback dettagliato a ogni singolo studente utilizzando il punteggio ottenuto e i suggerimenti per migliorare presenti nei risultati.

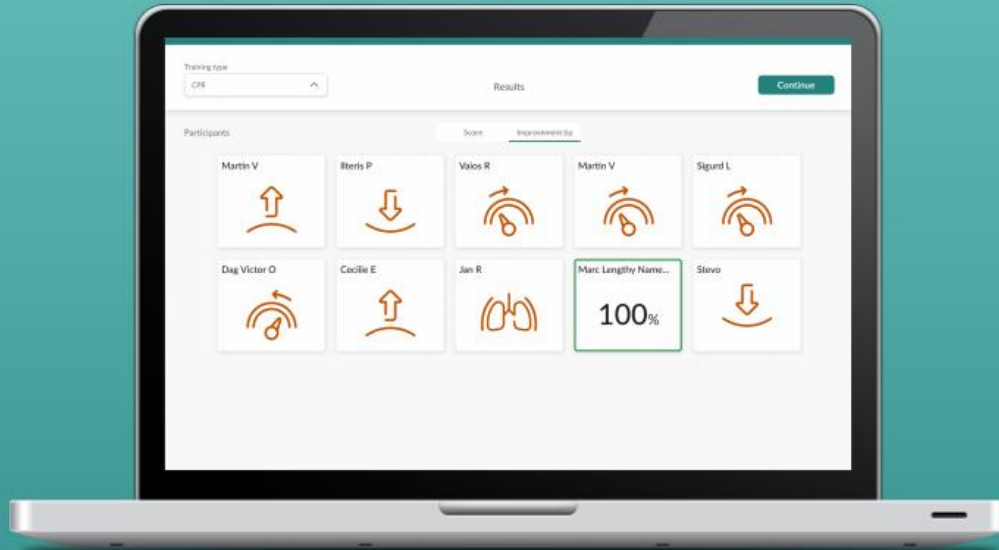

Result screen

Cosa significano queste icone?

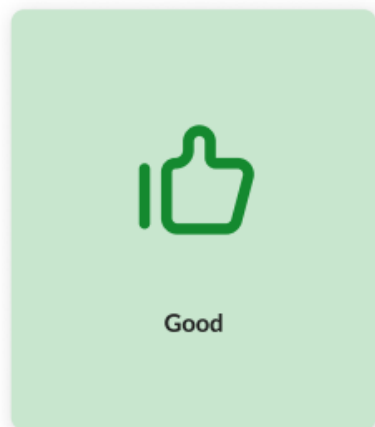


Bene




Rilascia
completamente



Comprimi più
in profondità

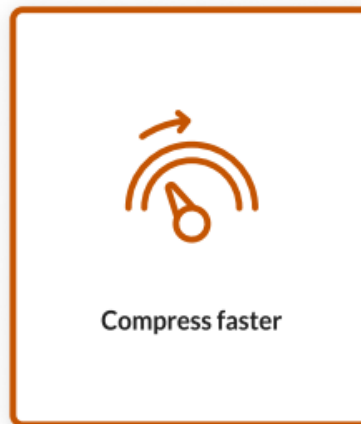

Comprimi più
velocemente

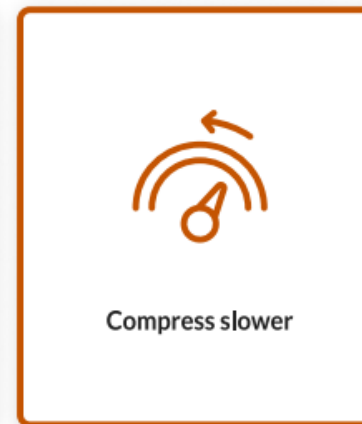

Comprimi più
lentamente



Troppa aria

Saper interpretare questi simboli ti aiuterà a dare ai tuoi studenti efficaci consigli per migliorare la loro RCP

Learners Guide to Virtual Training

Here is a step by step guide to help your learner get ready for the training session.

Prepara i tuoi studenti aiutandoli a scaricare la QCPR Classroom App

Condividi questo [link](#) con i tuoi studenti

Clicca sul «Pulsante destro» del mouse "copia" il link sopra e condividilo con i tuoi studenti, per accedere alla guida e essere pronti a iniziare una sessione di formazione virtuale.



Laerdal

helping save lives