
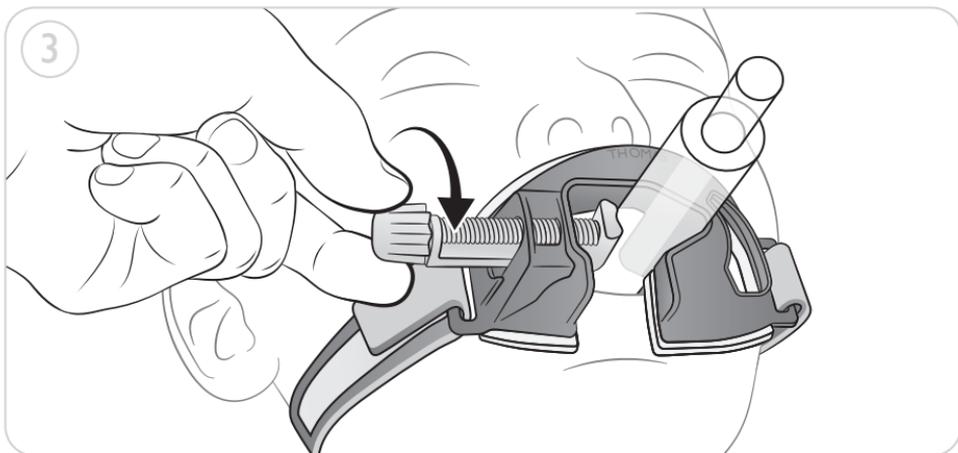
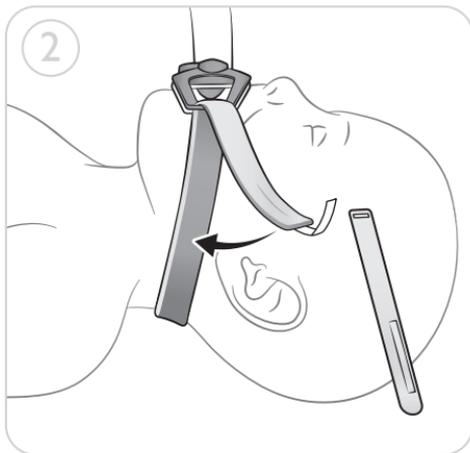


# トーマスチューブホルダー - 小児用

取扱説明書

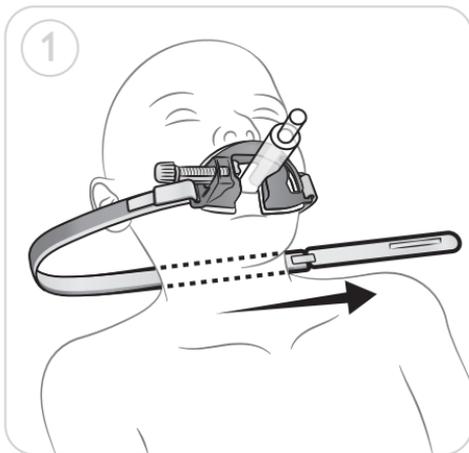

 サイズ 2-3

 8歳以下.  
≥8

Rx ONLY

REF 600-20000



 4.3-15.8 mm

 -34°C~+52°C  
(-30°F~+124°F)

CE





MD




**Laerdal**  
helping save lives


A

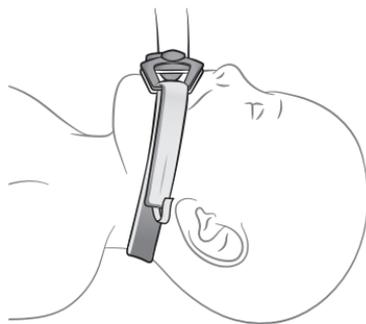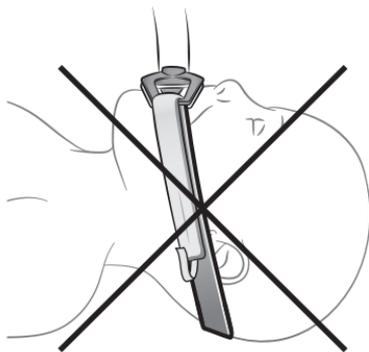

B

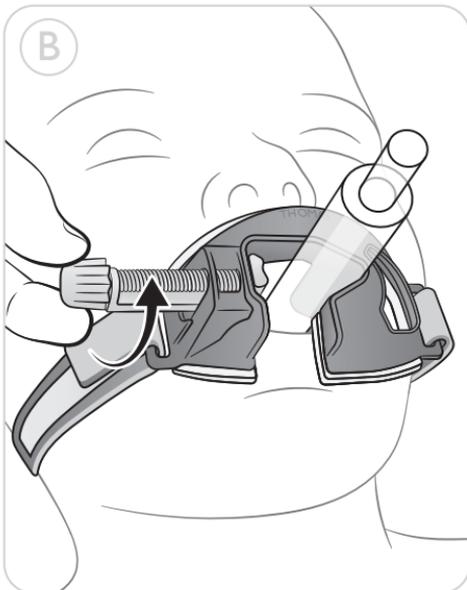

C

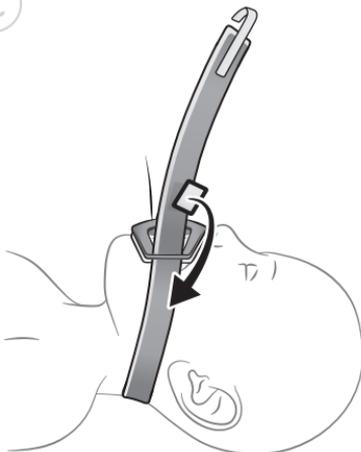

## 使用目的

トーマスチューブホルダーは、気管または食道への挿入後に事故抜管のリスクを軽減するため、シングルおよびダブルルーメン気道チューブ (例: 気管チューブ (ET)、ラリンゲルマスク (LMA) やその他の声門上エアウェイデバイス (SGA)) を固定することを目的としています。気道チューブデバイスの管理を短期間 (24 時間未満) 必要とする 8 歳未満の患者用です。

## セットアップ手順

- 図のように製品を固定します (図 1~3)。
- 滑らないように正しい位置にヘッドストラップを固定します (図 A)。
- 図のようにチューブクランプを外します (図 B)。
- 首のサイズに合わせて、ストラップの取り外し可能なフックタブの位置を調節します (図 C)。

## 注

製品および取扱いに関する重要な情報

- トーマスチューブホルダーは以下の規格に準拠しています: EN 1789, ISO 13485, ISO 14971, ISO 10993-1。
- 非滅菌製品

## 警告

「警告」は、重度の人身傷害や死亡につながる条件、危険を生じさせる要因または安全性に欠ける行為を特定するものです。

- このデバイスは、必ずユーザーガイドに従って研修を受けた人が使用してください。
- 適切な位置に固定されるように、チューブを適度に加圧してください。ねじを締めすぎるとエアフローが制限される場合があります。
- 8 歳以上の小児には使用しないでください。
- 一人の患者のみに使用するよう設計されています。再使用しないでください。繰り返し使用することで、二次汚染、性能低下、器具の故障を招く危険性が高まります。レールダルは再使用による生じた結果に責任を負いません。
- 使用する前に、破損がないか、また正しく機能しているか、すべてのパーツを点検してください。
- 本製品の使用中は患者を常に監視してください。

## 注意

「注意」は、軽度の人身傷害またはトーマスチューブホルダーの損傷につながる状況、危険を生じさせる要因、または安全性に欠ける行為に対する内容です。

- 本デバイスは、必ずアドバンドス気道デバイス挿入後に患者に取り付けてください。
- トレーニングで使用したデバイスを患者に使用しないでください。
- 本製品を滅菌または消毒しないでください。
- 本装置は短期使用を目的とした製品です。24 時間が経過したら取り外してください。
- 保管温度: -34°C ~ +52°C (-30°F ~ +124°F)
- 使用温度: -18°C ~ +43°C (-0°F ~ +109°F)

## 記号

	本医療用具は、医療機器規則 (EU) 2017/745 の一般的な安全および性能に関する要件を遵守しています。
	注意: 米国連邦法により、本装置は医師または適切な免許を持つ開業医による販売、あるいは医師または適切な免許を持つ開業医の指示による販売に限定されます。
	単一患者用再使用しないでください。
	参照注文および番号
	固有デバイス ID
	医療用具
	8 歳以上の小児には使用しないこと。
	保管温度 (最高および最低)
	声門上デバイスのサイズ範囲
	気管チューブのサイズ範囲 (外径)
	天然ゴムラテックスは含まれていません。

## 素材

部品	素材
フォーム	発泡ポリエチレン - PE
ストラップ	発泡ポリウレタン - PU ポリエステルフランネル - PET ポリアミド - PA
マウスピース	ポリプロピレン - PP
その他のパーツ	ポリオキシメチレン - POM

素材には燃焼試験を実施していません。

地域・施設ごとのルールに従って廃棄してください。

トーマスチューブホルダーは、米国特許 # 8,360,063 およびその他の国際特許によって保護されています。Thomas & Laerdal は Laerdal Medical AS が所有する商標です。無断複製・転載を禁じます。

グローバル保証: [www.laerdal.com/jp/](http://www.laerdal.com/jp/)

© 2020 Laerdal Medical AS, All rights reserved.

製造元 (中国製):

Laerdal Medical AS

P.O. Box 377

Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway

(+47) 51 51 17 00

米国内販売代理店:

Laerdal Medical Corporation

167 Myers Corners Road

Wappingers Falls, NY 12590

(877) 523-7325

中国で印刷

C1088 改訂 F

---

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives