

チョーキング チャーリー

取扱説明書



LaerdalTM
helping save lives

目次

推奨事項	2
製品に含まれる品目	2
トレーニングできるスキル	2
使用前の準備	3
取扱説明	4
ケアとメンテナンス	4
保証	4
交換部品・消耗品	6

チョーキング チャーリーは、気道異物によって気道が閉塞し、話すことも呼吸もできなくなった窒息患者をリアルにシミュレートした成人半身マネキンです。ハイムリック法の実践的トレーニングを行うために、特別に設計されています。

適切な取扱とメンテナンスを行えば、長い年月にわたってトレーニングに使用することができます。

推奨事項

チョーキングチャーリーの喉下にしっかりと異物がはまっていることを確認して下さい。これはハイムリック法により、異物が外に飛び出るようになります。

製品に含まれるもの:

チョーキング チャーリー
気道内異物 (4 個入)
タルカムパウダー
タンクトップ
ソフトケース

トレーニングできるスキル:

- ハイムリック法

使用前の準備:

異物の詰め込み:



1. 口腔内に異物を入れる前に、少量のタルカムパウダーを塗布して下さい。
2. 異物を人差し指で喉に入れ、最初の抵抗感を感じてから少し押し進めて下さい。

口腔内に異物を入れたまま放置して保管しないで下さい。

推奨事項:

タルカムパウダーは通常の唾液の様子を再現します。口腔・喉と異物との間の摩擦を減少させるために、頻繁に塗布をして下さい。

異物が喉の中にしっかりと入っている音を確認し、空気漏れがないようにして下さい。

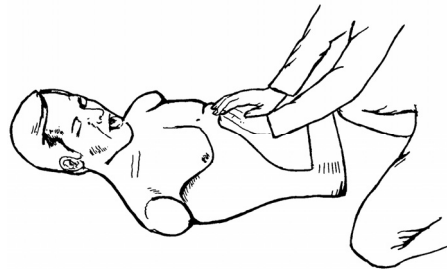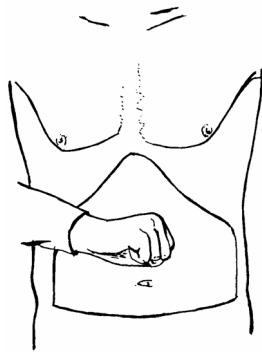

取扱説明:

1. このマネキンは意識のある、又は意識のない傷病者をシミュレートするために使用できます。
2. 異物除去は地域のガイドラインに沿って実施して下さい。

ケアとメンテナンス:

1. 刺激の少ない石鹼と水で洗って下さい。洗浄液や水の中に本製品を浸さないで下さい。
2. マネキンは清潔な場所で使用して下さい。フェルトペンやインクペンでの書き付けをせず、アセトン、ヨード剤その他のシミの原因になる物質が付着しないように気を付け、さらに新聞紙などあらゆるタイプの印刷物の上にマネキンを置くことがないようにして下さい。
3. 長く使用していただくため、マネキンは1回のトレーニング・セッションが終わるたびにクリーニングし、また、定期的に全体の点検を行って下さい。
4. トレーニングに使用しない時は適切に保管して下さい。

保証:

レールダル メディカル社が、製品の購入者に対し、製品の購入から1年間、製品の材料および製作工程に不備がないことを保証します。

万一この指定された保証期間内に、材料または製作工程の不備による欠陥が製品にあることが判明した場合、レールダル メディカル社、認定サービスセンターまたは認定代理店は、以下に提示されている条項に従い、作業手数料及びパーツは無償で、製品または欠陥のあるパーツを修理または(レールダル メディカル社の判断により)交換します。

レールダル メディカル社は、(レールダル メディカル社の判断により)欠陥のある製品のスペアパーツを新品もしくは、修理完了品と交換します。または製品自体を交換します。

条件

1. この保証が認められるのは、納品書の原本または販売領収書(購入日、製品型式、販売店名の記載があるもの)を欠陥のある製品と共に提示された場合に限りです。上記の書類/情報が提示されない場合、または記載されている情報が不完全または判読できない場合には、有償修理となります。
2. この保証は、当製品の本来の開発および製造された国以外のあらゆる国において、該当国または地域の有効

な規約または安全基準に準拠するため、レールダル メディカル社に対する事前の書面による承諾なく、製品の改造及び加工を行った結果生じた損傷や故障は対象となりません。

3. 製品に記載されている型番号または製造番号が変更、削除、除去または判読不可能にされている場合、この保証は適用されません。
4. 以下の事項はこの保証の対象外です。
 - a. 標準的な使用による消耗および破損に起因する修理または交換、および定期保守点検。
 - b. レールダル メディカル社の文書による事前の承諾なく、使用説明書の記載事項に反する取り扱いによって発生した故障および損傷。
 - c. 配送料、訪問サービスに関わる交通費、および直接または間接的な輸送保険料。
 - d. バッテリー、電極、ソフトパック、被服、ヒューズ、一般的な消耗および破損、サビ及び退色などによる製品の性能に支障を与えるまたは退化させる表面上の不具合。
 - e. 以下の事項に起因する損傷：
 1. 以下を含む不正な使用(ただし以下の事項に限定されない)
 - (a) 製品の使用目的、または正しい使用および保守に関する使用説明書に反する使用
 - (b) 製品が使用される国において有効な規約または安全基準に適合しない方法による製品の設置および使用
 - (c) ソフトウェアの不適切なまたは誤ったインストール
 2. 認可されていないサービス機関または販売店、またはお客様自身により行われた修理
 3. 偶発的な事故、落雷、洪水、火災、不適切な空調またはレールダル メディカル社の管理が及ばないあらゆる原因
 4. 当製品を組み込んだシステムの欠陥
5. この保証は、適用される有効な国内法に基づくお客様の法律上の権利、または販売/購入契約に起因する販売店に対するお客様の権利に影響を与えるものではありません。

交換部品:

<u>製品番号:</u>	<u>製品名:</u>
102-00150	気道内異物 (チョーキング チャーリー用) (4 個入り)
100-00650	タンクトップ(チョーキング チャーリー用)
100-00750	ソフトケース

(C) Copyright Laerdal, Medical Japan K.K.
Document #1001650 rev A
Jun, 2022

製造販売業者： レールダル メディカル ジャパン株式会社
住 所： 東京都千代田区三番町6-26 住友不動産三番町ビル
電 話 番 号： 0120-309-060