

TruVent 取扱説明書(学習者用)

1. TruMonitor-TruVent のアプリを立ち上げます。
指導者のアプリとの接続方法は2つあります(※Wi-Fi 接続が必要)。
(①指導者と学習者がアカウントを持っている、②持っていないケース)

①学習者がアカウントをもっているケース

学習者を選びます



指導者が「人工呼吸器」の割り当てをすると学習画面が合われます。




②学習者がアカウントをもっていないケース(リモートセッション ID を使用)

①このアイコンタップします




②リモートセッションに参加を選びます

③指導者からセッションコードを確認し、その番号を入力したら「参加」をタップします。

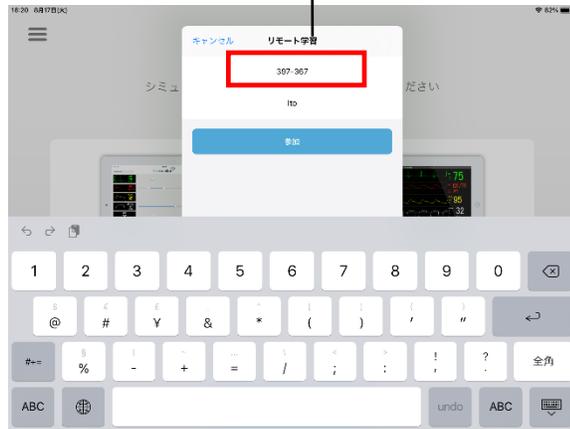

指導者が「人工呼吸器」の割り当てをすると学習画面が現れます。

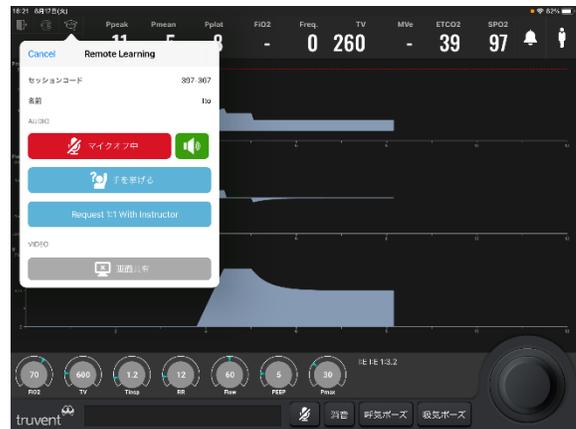

指導者が設定した値に連動し患者状態のパラメーターが変動します。

圧—
時間曲線

フロー—
時間曲線

換気量—
時間曲線



設定変更
設定を変更したい場合はタップしダイヤルを回すと値が変更されます。



ご不明な点はヘルプデスクにお問い合わせください
ヘルプデスク:0120-309-060(2番)