

機械器具(32) 医療用吸引器  
管理医療機器 電動式可搬型吸引器 36616030

## 「レールダル サクシヨユニット LSU 4000」の付属品

吸引カテーターアダプタ、フィルターチューブ、エアロゾルフィルター、  
再使用型キャニスター、吸引バッグ 1000ml 青、吸引チューブ

### 【警告】

- 使用・洗浄・廃棄の際には、感染症に対する適切な注意を払うこと。

### 【禁忌・禁止】

- 「レールダル サクシヨユニット LSU 4000」以外の製品に接続して使用しないこと。
- 吸引バッグ 1000ml 青の再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

本製品は、「レールダル サクシヨユニット LSU 4000」に接続する付属品です。

名称	形状
吸引カテーターアダプタ	
フィルターチューブ(30cm)	
エアロゾルフィルター	
再使用型キャニスター(1000mL)	
吸引バッグ 1000ml 青	
吸引チューブ	

### 【使用目的又は効果】

救急時に口腔咽頭等から固形物や液体を吸引する目的で使用する「レールダル サクシヨユニット LSU 4000」に接続する付属品です。

### 【使用方法等】

詳細については、本体の添付文書及び取扱説明書を参照して下さい。

#### ＜使用前＞

1. 本体の添付文書及び取扱説明書にしたがって、各付属品を接続します。

#### ＜使用后＞

1. 取扱説明書に従い、本体から取り外します。
2. キャニスターの吸引物及び単回使用の付属品を廃棄します。
3. 取扱説明書に従い、キャニスターやチューブ類を個々の部品に分解の上、水ですすぎ洗い、洗浄、消毒を行います。
4. 組立て後は、必ず取扱説明書記載の機能テストを行い、各部品が正確に取り付けられ、作動することを確認して下さい。

### 【使用上の注意】

#### ＜重要な基本的注意＞

1. エアロゾルフィルターは、患者への使用ごと、あるいは少なくともシフトごとに 1 回は交換すること。なお、本製品が患者さんに使用された場合は、交差汚染の問題がない場合でも、少なくとも 1 ヶ月に 1 回はエアロゾルフィルターを交換すること。[感染症防止のため]

#### ＜その他の注意＞

1. 再使用型キャニスター内のフロートボールとエアロゾルフィルターは、必ず取り付けること。
2. エアロゾルフィルターが変色したり湿ったりした場合には、直ちに交換すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### ＜使用条件＞

使用温度 : 0℃～40℃  
使用湿度 : 5%～95%

#### ＜保管条件＞

保管温度 : 0℃～40℃  
保管湿度 : 5%～95%

#### ＜使用の期限＞

包装に記載(設定のある製品のみ)[自己認証(当社データ)による]

### 【保守・点検に係る事項】

取扱説明書に従い、キャニスターやチューブ類を個々の部品に分解の上、水ですすぎ洗い、洗浄、消毒を行って下さい。消毒方法として次の 3 種類の方法が推奨されます。

方法	設定条件	時間	処理後
グルタルアルデヒド	室温中 濃度:2%	60 分	蒸留水で完全に すすぎ洗いの 後、乾燥
次亜塩素酸ナトリウム	室温中 濃度:0.5%	20 分	
オートクレーブ	最高 121℃	60 分	全部品を冷却

組立て後は、必ず取扱説明書記載の機能テストを行い、各部品が正確に取り付けられ、作動することを確認して下さい。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : レールダル メディカル ジャパン株式会社

\* 住 所 : 東京都千代田区三番町6番地26  
住友不動産三番町ビル

電話 番号 : 03-3222-8080

お問い合わせ先 : レールダル・ヘルプデスク

電話 番号 : 0120-309-060 平日 9:00～17:30

\*\* 外国製造業者 : レールダル メディカル(蘇州)社  
(Laerdal Medical (Suzhou) CO., LTD.)  
(中華人民共和国)

本体の取扱説明書を必ずご参照下さい。