



Laerdal[®]

helping save lives



効率的な換気を実現

レールダル・シリコン・レサシテータ

www.laerdal.com

レールダル・シリコン・レサシテータ



レールダル・シリコン・レサシテータは、35年にわたりその品質・性能・有用性について高い評価をいただいております。

現行のシリコン・レサシテータは、シリコンの組成とデザインを改良し、より優れた操作性と耐久性を実現しています。

安全性

- ・組み合わせを間違えることがないようにコネクタは規格サイズでできています。
- ・換気した空気の逆流がありません。
- ・インテーク/リザーババルブにより、酸素供給が途絶えた場合も自動的に大気を利用し有効な換気が維持できます。
- ・再組立後の機能試験が容易にできます。
- ・35cmH₂O圧限定バルブにより、過度換気圧のリスクを軽減します。(小児・新生児用に限りません。)
- ・患者バルブにより、自発呼吸においても抵抗を最小限に抑えた酸素吸入ができます。
- ・すべての構成部品および付属品はラテックスフリーです。
- ・高い透明度のシリコンとポリスルホンを採用し、異物混入時の視認が容易です。

効率性

- ・改良されたシリコンバッグ、インテーク/リザーババルブおよび患者バルブにより、換気バッグは速やかに再膨張し、効率的に換気ができます。
- ・すべての商品群は付属の酸素リザーババッグの使用により高濃度の酸素供給ができます。

経済性

- ・耐久性に優れた材料を採用し、高レベルの消毒・滅菌処理にも強い耐久性が証明されています。
- ・インテーク/リザーババルブと酸素リザーババッグの構成により、効率的に酸素供給ができます。
- ・バッグは容易に折りたたみでき、収納スペースを節約します。
- ・滅菌・消毒の為に分解・再組立が容易にできます。

シリコンマスクに多機能マスクカバーが付きました

- ・ソフトなシリコン素材による優れたフィット感があります。
- ・患者側ポートは15/22mmコネクタに適合します。
- ・多機能マスクカバーがマスクをしっかりサポートします。
- ・多機能マスクカバーはすべての3/4および4/5+のシリコンマスクに標準装備し、必要に応じて容易に取外しできます。
- ・マスクとカバーは高レベルの消毒および滅菌処理ができます。



※多機能マスクカバーはマスクの追加サポートが必要なときや、両手で換気を行う際に患者の顔面にシリコンマスクを保持するときに使用します。オプションとしてヘッドストラップもご用意しています。



新生児用



体重2.5kg未満の患者



小児用



2.5kg～25.0kgの患者



成人用



25.0kg以上の患者



35cmH₂O圧限定バルブは小児用および新生児用の全てのモデルに標準装備しています。

患者バルブ


換気の逆流を防ぎながら最大限の換気効率を実現します。

換気バッグ

あらゆる温度において速やかに再膨張します。患者の肺コンプライアンスを的確に感じとることができます。


回転式コネクタ

様々なポジションでの換気が可能です。

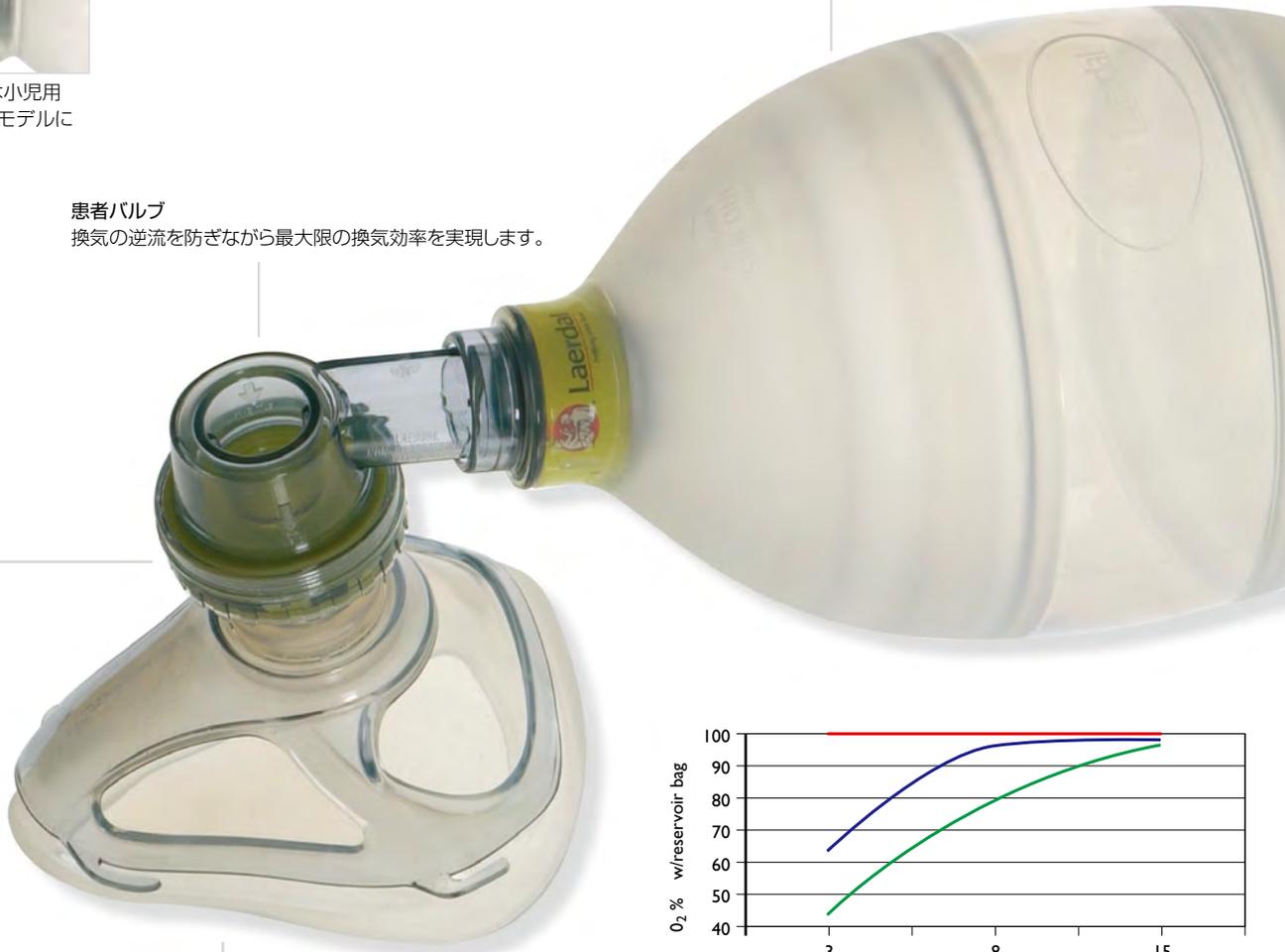

マスク/多機能マスクカバー

透明な材質で口と鼻の状態が容易に目視確認できます。

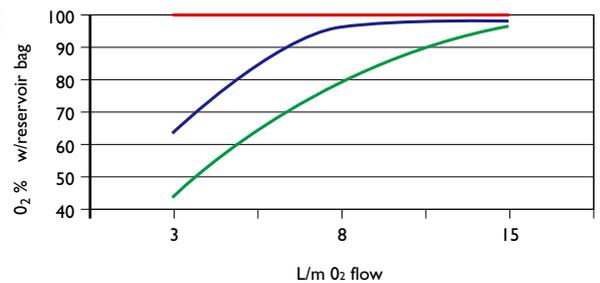


— Pretrm (20mL×60bpm) — Adult (600mL×20bpm)
— Paediatric (300mL×20bpm)

自発呼吸

患者バルブにより、自発呼吸においては抵抗を最少限に抑えて100%濃度の酸素吸入を可能にします。

インテーク/リザーババルブ(3サイズ共通)

デザインを一新し、安全かつ有効な操作を可能にしました。

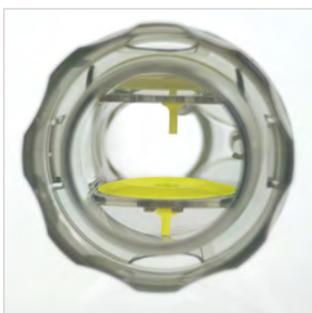

推奨消毒/滅菌方法

次の条件で滅菌・消毒を行ってください。

1. 132～137°Cのスチーム・オートクレーブ
2. フタール
3. 次亜塩素酸ナトリウム

※添付文書の基準に従ってください。



シリコン延長チューブ(オプション)

延長チューブにより、搬送中でも安全・確実に換気操作ができます。換気中もフレキシブルに対応し、気管内チューブなどが外れるリスクを軽減します。

レールダル・シリコン・レサシテータ 構成内容

	成人用	小児用	新生児用		
ベーシック	 マスクは付属しません。	 マスクは付属しません。	 マスクは付属しません。		
	カタログ番号	構成内容	カタログ番号	構成内容	
	87005005 ベーシック マスク無しカートン	86005005 ベーシック マスク無しカートン	85005005 ベーシック マスク無しカートン		
スタンダード	 マスクは付属しません。	 マスクは付属しません。	/		
	カタログ番号	構成内容		カタログ番号	構成内容
	87005205 スタンダード マスク4/5+ カートン	86005205 スタンダード マスク3/4 カートン		86005605 スタンダード マスク0/1 カートン	
コンプリート	 マスクは付属しません。	 マスクは付属しません。	 マスクは付属しません。		
	カタログ番号	構成内容	カタログ番号	構成内容	
	87005105 コンプリート マスク3/4, 4/5+ カートン	86005105 コンプリート マスク0/1, 2, 3/4 カートン	85005105 コンプリート マスク0/0, 0/1 カートン		
	87005305 コンプリートマスク 3/4, 4/5+ コンパクトケース	86005305 コンプリートマスク 0/1, 2, 3/4 コンパクトケース	85005305 コンプリートマスク 0/0, 0/1 コンパクトケース		
87005505 コンプリートマスク 3/4, 4/5+ ディスプレイケース	86005505 コンプリートマスク 0/1, 2, 3/4 ディスプレイケース	85005505 コンプリートマスク 0/0, 0/1 ディスプレイケース			


ディスプレイケース 成人 87060005
小児 86030005
新生児 85070005



コンパクトケース 成人 86042005
小児・新生児 86041005


カートンケース

レールダル・シリコン・レサシテータ パーツ図解

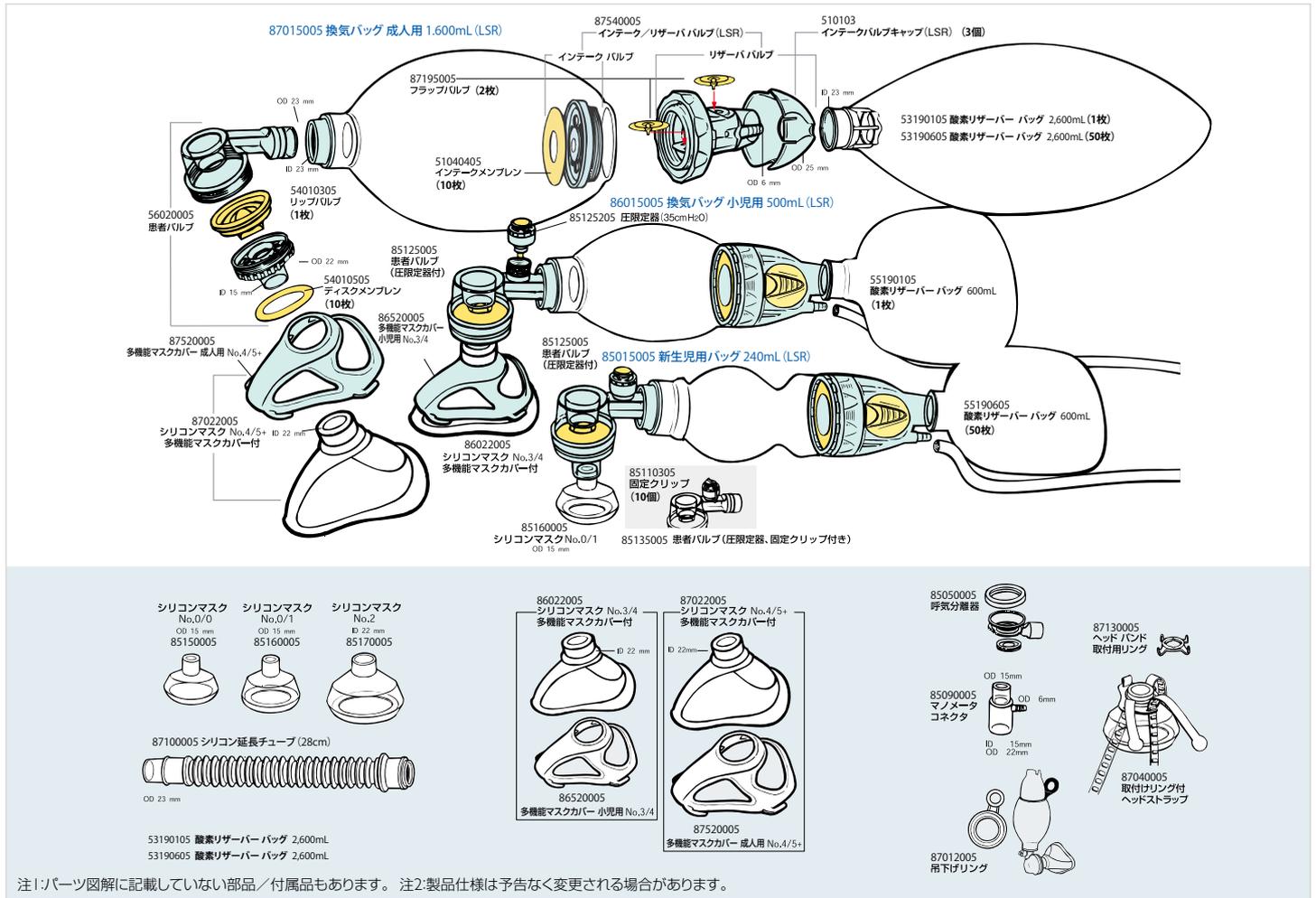

注1: パーツ図解に記載していない部品/付属品もあります。注2: 製品仕様は予告なく変更される場合があります。

シリコンマスク サイズ一覧

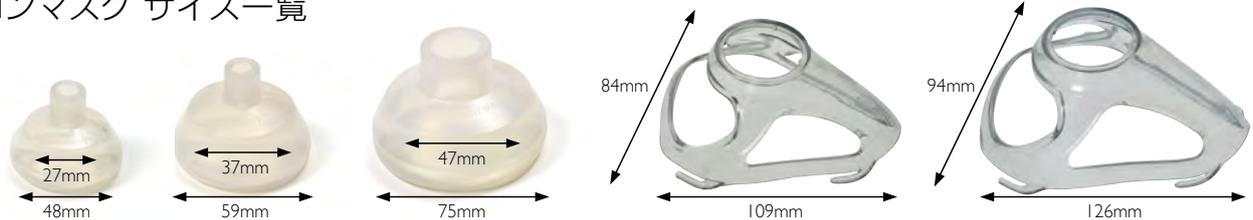

0434

CE規格製品 はEEC 93/42の医療機器の指針に基づき、その規格に拠っております。

高度管理医療機器/特定保守管理医療機器
製造販売承認番号: I5700BZY00944000
JMDNコード: I7591000



Laerdal
helping save lives



製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

〒102-0075東京都千代田区三番町6-26 住友不動産三番町ビル

お問い合わせ先 ☎ 0120-309-060

CustomerService.jp@laerdal.com



Laerdal®
helping save lives

※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
※お問い合わせはカスタマーサービスでお受けいたします。